


39311, 39312 DRAGT

Vejledning til måltagning

elements
body

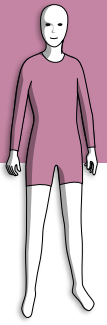

DRAGT med ÆRMER OG BEN

Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds

Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er afslappet og har normal vejrtrækning. Vi anbefaler at man markerer på patienten for korrekt måltagning.

U	Omkreds maven i højde med navlen
C	Omkreds brystkassen i linje med axilla
N	Rundt halsen - fra nedre del af luftrøret (fossa jugularis sternalis) og rundt halsens base
NS	Halsbredde - Ønske om en breddere halsåbning, mål fra halsens base base
ND	Halsdybde - Ønske om en halsåbning som går længere ned end luftrøret (for)
BD	Nedringet i nakken – Ønske om en dybere udringning i nakken (bag)
SU	Fra nedre del af halsrøret til navlen- fra samme punkt som ved mål "N"
AS	Omkreds i højde med ASIS
L/R2	Omkreds arm i højde med axilla, armen skal ligge langs kroppen
L/R3	Omkreds overarm, mellem axillen og albuen
L/R4	Omkreds albue, med armen i extension
L/R5	Omkreds underarm, en tredjedel fra albuen til håndleddet (kun for lang ærmet)
L/R6	Omkreds håndled der hvor man ønsker at ærmet skal slutte (kun for lang ærmet)
L/R7	Fra axilla till albuen
L/R8	Fra albuen til håndleddet, der man ønsker at ærmet skal slutte (kun for lang ærmet)


Specielt for kort ærmet:

AER/L *Fra axilla til den ønskede længde*

39311, 39312 DRAGT

Vejledning til måltagning

elements
body

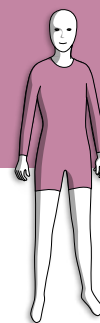

DRAGT med ÆRMER OG BEN

L/R 9	Omkreds lår ved horisontalt gluteal-fold, i en vinkel på 90°
L/R 10	Omkreds midt på låret
L/R 11	Omkreds mid-patella
L/R 12	Omkreds øvre del af læggen ved tuberositas tibia (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 13	Omkreds læggenes bredeste del (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 14	Omkreds øvre kant af mediala malleolen (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 15	Fra skridtet til mid-patella på indersiden af benet
L/R 16	Indersiden af benet fra mid-patella til øvre kant af medial malleolen (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R Instep	Instep Omkreds midt over fodryggen (kun for lange ben)
WW	Talje til talje i højde med navlen (grensmål). Ved anvendelse af ble tages målet på siden af bleen.
SCV	Fra syvende halshvirvel til axilla (placeres en blyant eller en lineal under begge arme så længden ikke bliver for kort)

Specielt til korte og 3/4 ben:

CER/CEL	<i>CER/CE Længden fra skridtet, på indersiden af benet, til der hvor dragten slutter</i>
---------	--

Specielt for kvinder (tage mål med bh på, og med patienten siddende):

B	Omkreds byst i linje med brystvorten
UB	Omkreds under bysten
AUB	Fra axilla til under bysten (UB)

Specielt for gastro (kun for Body):

GU	Mål fra navlen op til hullet
GD	Mål fra navlen ned til hullet
GR	Mål fra navlen til hullet på højre side
GL	Mål fra navlen til hullet på venstre side