


# 39300, 39301 BLUSE 39605, 39306 BODY Vejledning til måltagning

elements  
body

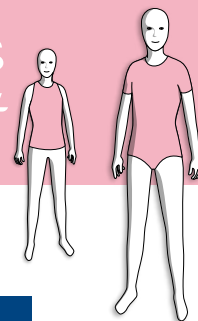

## BLUSE og BODY med ÆRMER

Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds


Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er afslappet og har normal vejrtrækning. Det er en fordel at markere på patienten for korrekt måltagning.

U	Omkreds taljen i højde med navlen
C	Omkreds brystkassen i linje med axillen
E	Omkreds ved afslutningen på stoffet
N	Rundt nakken - fra nedre del af luftrøret (fossa jugularis sternalis) og rundt halsens base
NS	Halsbredde - Ønske om en breddere halsåbning, mål fra halsens base
ND	Halsdybde - Ønske om en halsåbning som går længere ned end luftrøret (for)
BD	Nedringet i nakken – Ønske om en dybere udringning i nakken (bag)
SU	Fra nedre del af halsrøret til navlen- fra samme punkt som ved mål "N"
AS	Omkreds i højde med ASIS
UE	Navlen til der hvor dragten skal slutte, mål på siden
L/R2	Omkreds arm i højde med axillen, armen skal ligge langs siden af kroppen
L/R3	Omkreds overarm, mellem axillen og albuen
L/R4	Omkreds albue, med armen i extension
L/R5	Omkreds underarm, en tredjedel fra albuen til håndled
L/R6	Omkreds håndled, der hvor man ønsker ærmet skal slutte
L/R7	Fra axillen til albuen
L/R8	Fra albuen til håndleddet, der hvor man ønsker at ærmet skal slutte
WW	Talje til talje i højde med navlen. Ved anvendelse af ble tages målet på siden af bleen.
SCV	Fra syvende halshvirvel til axillen (placer en blyant eller en lineal under begge arme så længden ikke bliver for kort)

CampScandinavia, JULI\_2021 ©

**39300, 39301 VEST**  
**39605, 39306 BODY**  
**Vejledning til måltagning**

elements  
body

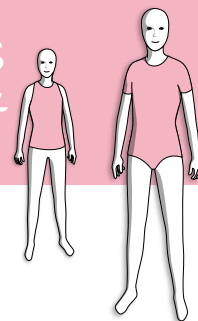

## **BLUSE og BODY med ÆRMER**

### **Specielt for korte ærmer:**

AER/L      *AER/L Fra axilla til der hvor ærmet skal slutte (kun for korte ærmer)*

### **Specielt for kvinder (tag mål med BH på, og med patienten siddende):**

B              Omkreds byst i linje med brystvorten

UB             Omkreds under bysten

AUB            Fra axilla til under bysten (UB)

### **Specielt for gastro (kun for Body):**

GU             Mål fra navlen op til hullet

GD             Mål fra navlen ned til hullet

GR             Mål fra navlen til hullet på højre side

GL             Mål fra navlen til hullet på venstre side