

# **BRUGERVEJLEDNING**

## **SBi COVER**

## SBI COVER

SBI overtrækket beskytter og holder produktet rent.

Overtrækket er designet til anvendelse sammen med produkterne Motus, Motus Smart, SBI Frame og SBI Wheel.

Materialet er semi-elastisk og med lynlås på bagsiden.

Gummisålen giver øget stabilitet ved gang.

Overtrækket er vaskbart.



SBI-overtrækket er vejrbestandigt og lavet med henblik på svære vejrforhold; det er dog ikke beregnet til at anvende i vand/bad.  
Vær ekstra opmærksom på glatte gulvflader og våde underlag.  
Kør ikke bil med SBI Walker, hverken med eller uden overtræk.

## INSTRUKTION

### TRIN 1

Åben lynlåsen bagpå.

### TRIN 2

Tag walkeren på, dernæst overtrækket.

### TRIN 3

Når overtrækket sidder korrekt lynes, lynlåsen hele vejen op.



Trin 1



Trin 2



Trin 3

### MATERIALE

100% Lycra

### RENGØRING

Vask overtrækket med vrangen ud inden brug. Lufttørres.

### GARANTI

Overtrækket har garanti i forhold til produktionsfejl.  
Hvis du opdager et problem med produktet, kontaktes leverandøren snarest.

### NOTE

SBI-overtrækket må ikke anvendes ved bad eller svømning.  
En korrekt montering er afgørende for at opnå optimal funktion.  
Følg de angivende retningslinjer, som du har modtaget af behandleren.



**Optima Molliter S.r.l.**  
Via Breda, 19/21 • 62012 Civitanova Marche (MC)  
T +39 0733 801060 • F +39 0733 801048  
info@optimamolliter.com  
www.optimamolliter.com