

Brugsanvisning



Læs venligst brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne, før du bruger VACOcast.

Formål: Underben- og fodortose designet til at lindre tryk og immobilisere led i den specificerede position. Du finder læsbare brugsanvisninger på vores hjemmeside.

Sikkerhedsinformation

- ⚠ Produktet er kun beregnet til brug for én patient.
- ⚠ VACOcast Diabetic er ikke designet til dynamiske belastninger som hop og hurtig gang. Hvis du falder med VACOcast Diabetic på, skal du straks kontrollere produktet for skader. Hvis det er beskadiget, kan det påvirke din sikkerhed.
- ⚠ Bær aldrig produktet over åbne sår, og brug det kun efter forudgående medicinsk vejledning.
- ⚠ Patienten må kun ændre støvlens position efter samråd med den behandlingsansvarlige læge.
- ⚠ Hvis der opstår overdreven smerte, følelsesløshed eller ændringer i fornemmelse, eller hvis der opleves usædvanlige reaktioner eller ubehag under brug, skal du straks kontakte din læge eller ortopædiske teknikere.
- ⚠ Dette medicinske produkt er udviklet til de angivne indikationer og kan blive beskadiget ved forkert eller uhensigtsmæssig brug, aktiviteter som sport, fald eller andre ulykker samt ved kontakt med væsker, der ikke er kompatible med plast.
- ⚠ Ved brug i kombination med et andet medicinsk produkt skal du kontakte din læge.
- ⚠ Kun reservedele og/eller udskiftningsdele godkendt af OPED GmbH må anvendes.
- ⚠ Bemærk færdselsloven gældende i dit land.
- ⚠ Indeholder ikke naturlig latex.
- ⚠ Kontroller, at sålen sidder sikkert – ellers er der risiko for at glide! Så: Når tåsektionen er fuldt udstrekt, kan gangmønstret blive ændret eller begrænset.
- ⚠ De små kugler i vakuumpuden kan bevæge sig rundt. Vi anbefaler derfor at åbne ventilen hver anden til tredje dag, udglatte eventuelle samlinger af kugler og derefter genoprette vakuummet.
- ⚠ Opbevaring: Ventililåget skal altid være lukket! Ventileringen skal trykkes ned, og ventililåget lukkes (Figur 1 + 2).
- ⚠ Dette produkt er beregnet til brug i højst 6 måneder. Når du bruger ortosen, skal du sikre dig, at skoene på den modsatte side er høje nok, eller at sålen er hævet for at kompensere for eventuel højdeforskel.

Sådan bruges VACOcast Diabetic

Påsætning af VACOcast Diabetic

Træk ventileringen opad (find detaljer i „Ventilfunktioner“) for at lade luft strømme ind (Figur 3). Hvis de små kugler i inderforet (Figur 4) har samlet sig, glat dem ud. Placer din fod i stofindlægget (Figur 4) og positioner det med stofindlægget helt tilbage i den nederste skal (Figur 5). Luk derefter stofindlægget. Træk indlægget let opad (Figur 6). Monter den øverste skal (Figur 7) (øverst: yderside mod nederste skal; nederst: tapper ind i nederste skal) og luk remmen manuelt og så stramt som smerten tillader (se grafik for rækkefølge) (Figur 8). Sørg for, at ventilen ikke er bøjet, når du monterer den øverste skal. Den øverste skal må ikke placeres mod eller over ventilen.

Justering og fastgørelse af vakuumpuden

Genjusterbar vakuumpude: Inde i indlægget er der en pude med tusindvis af små kugler (Figur 9), der perfekt tilpasser sig anatomi og eventuelle hævelser i din ankel. Trykfølsomme områder og hævelser kan lindres gennem målrettet omfordeling af disse små kugler. For at sikre, at kuglerne ikke bevæger sig rundt inde i puden, fjernes luften via ventilen med en sugepumpe, hvilket skaber et vakuum (Figur 10).

Ventilfunktioner

Åbn ventilen / blødgør vakuumpuden:

Træk ventileringen opad og skub den til siden for at lade luft strømme ind (Figur 3). Skub derefter ventileringen tilbage til sin oprindelige position.

Luk vakuummet / gør vakuumpuden hård:

Tryk ventileringen nedad. Sæt sugepumpen på og tryk den sammen (ca. 7-8 gange), indtil den ikke længere pumper luft ind. Ved at trykke pumpen sammen fjernes luften fra puden, og der skabes et vakuum. Dette fastlåser den tilpassede pasform (Figur 11). Afslut med at lukke ventilkappen (Figur 12).

Lukning af ventilkappen

Tryk ventileringen nedad og luk ventilkappen. Dette sikrer vakuummet (Figur 12).

Udskiftning af pudens indlæg

Bemærk: Det udskiftede indlæg indeholder ikke en pude! Når du skifter indlægget, skal puden fjernes fra det brugte indlæg og indsættes i det nye! Åbn lynlåsen helt bagpå og fjern vakuumpuden fra det brugte indlæg. Åbn ventilen og ryst puden, så kuglerne kan fordele sig (se Ventilfunktioner). Skab vakuum igen (se Ventilfunktioner), placer vakuumpuden i det nye indlæg og træk ventilen gennem knaphullet (Figur 9). Et andet stofindlæg er ikke inkluderet i pakken i alle lande. Hvis pakken ikke indeholder et andet stofindlæg, skal dette bestilles separat fra OPED.

Montering og udskiftning af sålen

Fjernelse af sålen

Tryk begge låseknapper ind samtidig (Figur 13).

Montering af sålen

Placér VACOcast Diabetic lige og centreret på sålen, før du trykker den mod sålen (du vil høre to klik) (Figur 14).

Justering af sållængde

Fjern sålen (se Fjernelse af sålen), og tryk på låseknappen. Træk tåsektionen til den ønskede længde (Figur 15).

Justering af lægomkredsen

Skub spændet ud af den nederste skal (Figur 16). Skub spændet til den ønskede position. Position A = stor lægomkreds, Position B = lille lægomkreds (Figur 17). Skub spændet ind i det nødvendige hul (Figur 18). Gentag processen på den modsatte side.

Patientinformation

Trykpunkter / problemløsning

Tag ortosen af din fod. Træk ventileringen for at lade luft strømme ind i puden. Fordel pudens fyld jævnt ved trykpunktet. Monter ortosen igen (se Sådan bruges). Brug en finger til at kontrollere, om der er nok små kugler i puden mellem trykpunktet og den ydre nederste skal.

Brusebad / vask

Du kan tage brusebad med produktet, hvis din læge har givet dig tilladelse til det. Ortosen, især betrækket, skal beskyttes mod vand (f.eks. med en brusebeskytter).

Søvn

Læg et håndklæde, f.eks. et viskestykke, under støvlen, inden du går i seng, så sengetojet ikke beskadiges.

Produktkarakteristika

Størrelser

Produktet kan bæres på både venstre og højre fod. Anbefaling: Ved størrelses- og vergange mellem Small/Medium og Medium/Large versioner, vælg om muligt den mindre VACOcast Diabetic-størrelse.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	39 – 43	43 – 49
UK	2 ½ – 5 ½	5 ½ – 8 ½	8 ½ – 13 ½
US (M)	3 ½ – 6 ½	6 ½ – 9 ½	9 ½ – 14 ½
US (F)	4 ½ – 7 ½	7 ½ – 10 ½	10 ½ – 15 ½

Indikationer

- Sår på foden
- Diabetiske fodsår
- Postoperativ behandling efter amputation af tæer og forfod
- Diabetisk neuro-osteoartropati (DNOAP) eller Charcot-fod

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Pleje / rengøring / desinfektion / sterilisering

- Du modtager dette medicinske produkt i en hygiejnisk perfekt tilstand.
- Nederste skal: Opvaskemaskine ved 60°C
 - Rem: Vaskemaskine ved 40°C
 - Velourbetræk: Vaskemaskine ved 60°C, vask med lignende farver. Fjern vakuum-pu den inden vask. Luk lynlåse og velcrolukninger igen.
 - Tørring: Lufttørres, må ikke tørretumbles.
 - Vakuumpude: Overfladesinfektion
 - Sterilisering: Dette medicinske produkt er ikke egnet til sterilisering.



Tilbehør

- For at understøtte behandlingen kan følgende tilbehør, hvis ikke inkluderet i leveringen, bestilles fra OPED GmbH:
- Remlås (VERS-16–4-41): Bruges til at låse ortosen og sikre, at den ikke kan fjernes. Den låses og låses op med en speciel nøgle og kan låses og låses op gentagne gange.
 - Låsenøgle (VERS-11–3): Bruges til at forhindre utilsigtet fjernelse af ortosen.

Tekniske data / parametre

Anvendte materialer:
Hårde nederste skaller: PP (polypropylen), Indlæg: Bomuld/PA-velour/PU-skum, Pudebetræk: PVC, Fyldemateriale: EPS-kugler, Rem: PP-stof, Sål: EVA (ethylenvinyl-acetat), Øverste skal: PP/PU (polyurethan). Alle dele og komponenter er latexfri.

Transportforhold / opbevaringsforhold / bortskaffelse

- Opbevaring: Opbevares tørt og hygiejnisk og beskyttes mod direkte sollys.
- Tyskland: Dette medicinske produkt er et lejeprodukt og skal returneres til OPED.
- Schweiz: Dette medicinske produkt kan returneres gratis til OPED.



Andre lande: Bortskaf det medicinske produkt som restaffald eller husholdningsaffald.



Garanti

Garantien gives i henhold til lovbestemmelserne. Ud over disse gælder OPED GmbH's forretningsbetingelser, hvor det er tilladt.

Databeskyttelse

- Tyskland: Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes her: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.
- Schweiz: Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes her: <https://oped.de/datenschutz>.

I tilfælde af klager vedrørende produktet, såsom skader eller problemer med pas-formen, skal du kontakte producenten direkte. Kun alvorlige hændelser, der kan føre til en væsentlig forringelse af helbredet eller død, bør rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder i det pågældende medlemsland. Alvorlige hændelser defineres i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Dit OPED-team

