


Brugsanvisning

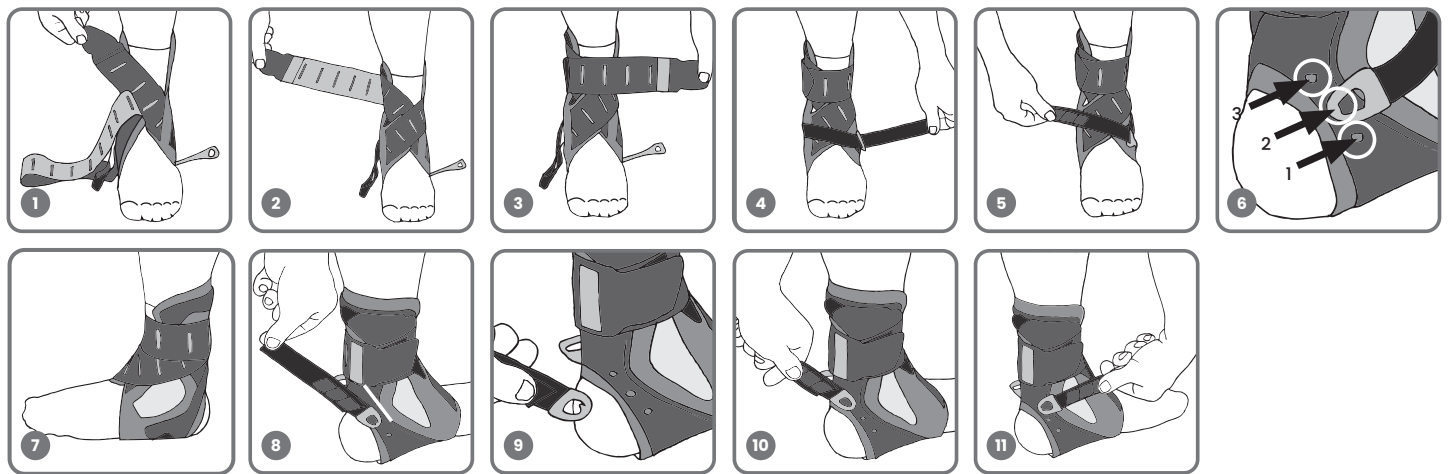

Læs venligst brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne, før du bruger VACOTALUS. Du kan finde læsbare brugsanvisninger på vores OPED-hjemmeside.

Formål/funktion

Ankelortose til stabilisering på ét niveau, justerbar. Anvendes hvor bevægelser i leddet på supinations- og pronationsniveau skal forhindres, og talarforskydning skal begrænses.

Sikkerhedsinformation

- ⚠ Produktet er kun beregnet til brug af en enkelt patient.
- ⚠ Ortosen bør kun monteres hvor anvendelsen forklæres af uddannet personale.
- ⚠ Anvend aldrig produktet på åbne sår, og brug det kun efter forudgående medicinsk vejledning.
- ⚠ Patienten må kun justere ortosen i samråd med den behandlende læge.
- ⚠ Hvis du oplever overdreven smerte, hævelse, følelsesløshed eller ændringer i følsomhed, usædvanlige reaktioner eller en ubehagelig følelse under brug, skal du straks kontakte din læge eller ortopædiske tekniker.
- ⚠ Dette medicinske produkt er udviklet til de angivne indikationer og kan beskadiges ved utilsigtet eller uhensigtsmæssig brug, ved aktiviteter som sport, fald eller andre ulykker, samt ved kontakt med væsker, der ikke er kompatible med plast.
- ⚠ Rådfør dig med din behandlende læge, før produktet bruges sammen med et andet medicinsk udstyr.
- ⚠ Overhold færdselsloven, der gælder i dit land.
- ⚠ Undgå at spænde ortosen for stramt i starten.
- ⚠ Bemærk: VACOTALUS er ikke fremstillet af naturlig latex.
- ⚠ Kun reserve dele godkendt af OPED GmbH må anvendes.

Produktbeskrivelse

Takket være dens anatomisk udformede ydre ramme tilbyder VACOTALUS ankelortosen en høj grad af stivhed og effektiv stabilisering for at forhindre vridning af anklen. Inversions- og eversionsbevægelser begrænses, mens plantar-/dorsalbevægelser forbliver mulige, hvilket betyder, at fodens normale gangfunktion ikke påvirkes.

Særlige egenskaber: En VACO12-pude fyldt med kugler sikrer, at produktet tilpasser sig særligt godt til konturerne af din ankel. VACOTALUS-ortosen hjælper også med at reducere hævelse. Derudover kan talarforskydning begrænses ved hjælp af Talustrap'en (= stabil rem over fodryggen/buen, se Figur 5) med fire mulige indstillinger.

Indikationer

- Akutte ledbåndsskader i anklen
- Efterbehandling af frakturer i ankelledet
- Forebyggelse af ledbåndsskader i ankelledet
- Kompensation af ankelledsinstabilitet

Kontraindikation

Ustabile frakturer

Anvendelse (Instruktionsvideo kan findes på app.oped.de)

Brugsanvisning:

VACOTALUS bør bæres over en strømpe. VACOTALUS skal bæres under en lukket sko. Produktet fås til enten venstre eller højre fod, hvilket angives indvendigt på produktet. Først åbnes alle velcrostropper. Placer ortosen omkring foden bagfra, og luk stropperne i følgende rækkefølge:

Figur:

1. Luk den korte, øverste diagonale strop (Fig. 1).
2. Tag den elastiske strop på fodens inderside. Træk den diagonalt over fodryggen (fodens bue), vikl den baglæns rundt om dit ben og fastgør den (Fig. 2 + 3).
3. Luk Talustrap'en (Fig. 4 + 5).

For at påføre den lange, elastiske strop:

- For mere stabilitet, start med at spænde den stramt, og vikl den derefter løst bag om benet.
- Ved hævelse eller smerte, start med at trække den løst over fodryggen og vikl den derefter fast bag om benet.
- For større lægømkreds vikles stroppen direkte over anklen rundt om benet.

Hvordan Talustrap'en fungerer

For at begrænse talarforskydning kan Talustrap'en, afhængigt af graden af hævelse, fastgøres på indersiden af ortosen i tre forskellige positioner eller fjernes helt.

Position 1: maksimal stabilitet

Position 2: høj stabilitet

Position 3: gennemsnitlig stabilitet (Fig. 6)

Talustrap'en kan fjernes, hvis der kun er behov for en lav grad af stabilisering (Fig. 7). Hvis nødvendigt, kan Talustrap'en forkortes til den ønskede længde med en saks.

Ændring af positionen på Talustrap'en:

Åbn Talustrap'en helt.

Drej Talustrap'en opad med 90°. Stroppen skal nu være på linje med de tre kroge-åbninger. Først nu vil det være muligt at hægte Talustrap'en af. (Fig. 8).

Løft Talustrap'en og fjern den fra ortosen (Fig. 9).

Hægt Talustrap'en i den ønskede position og drej den fremad med 90° for at fastgøre stroppen til ortosen (Fig. 10). Luk Talustrap'en (Fig. 11).

Produkttegenskaber:

Produktet er tilgængeligt til både venstre og højre fod.

	X-Small	Small	Standard
EUR	≤37	37 – 40	≥40
UK	≤4	4 – 6,5	≥6,5
US (M)	≤5	5 – 7,5	≥7,5
US (F)	≤6	6 – 8,5	≥8,5

Information om pleje / rengøring / desinfektion / sterilisering

Du modtager dette medicinske produkt i hygiejnisk perfekt stand. Vask ved 30° C med almindeligt tilgængeligt vaskemiddel. Tørring: Lufttørres, må ikke tørretumbles. Desinfektion / sterilisering: Dette medicinske produkt er ikke egnet til desinfektion eller sterilisering.



Tekniske data/parametre

Materialer anvendt: Hård skal: PA (polyamid), Klips: PA, Stropkobling: TPE (termoplastisk elastomer), Indvendigt materiale: PES (polyester)/EVA/PU, Polstring: PES/EPS/PA, Talarstrop: PA/PES, Elastiske stropper: PU/PA/PES/silikone

Garanti

Garantien er i overensstemmelse med lovgivningen. Forretningsbetingelserne for OPED GmbH gælder også, hvor det er tilladt.

Patientinformation

Undgå at spænde ortosen for stramt. Hvis du føler tryk, skal du løse stropperne.

Opbevaringsforhold / bortskaffelse

Opbevaring: Opbevares tørt og hygiejnisk og beskyttes mod direkte sollys.

Bortskaffelse: Bortskaffes som restaffald eller husholdningsaffald.



Databeskyttelse

Tyskland: Information om behandlingen af dine personoplysninger findes her: <http://oped.de/support/ihre-daten/>. Schweiz: Information om behandlingen af dine personoplysninger findes her: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Ved klager over produktet, såsom skader eller problemer med pasformen, skal du kontakte producenten direkte. Kun alvorlige hændelser, der kan føre til en væsentlig forringelse af helbredet eller død, bør rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder i medlemsstaten. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 (65) i forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Dit OPED-team