


Bruksanvisning

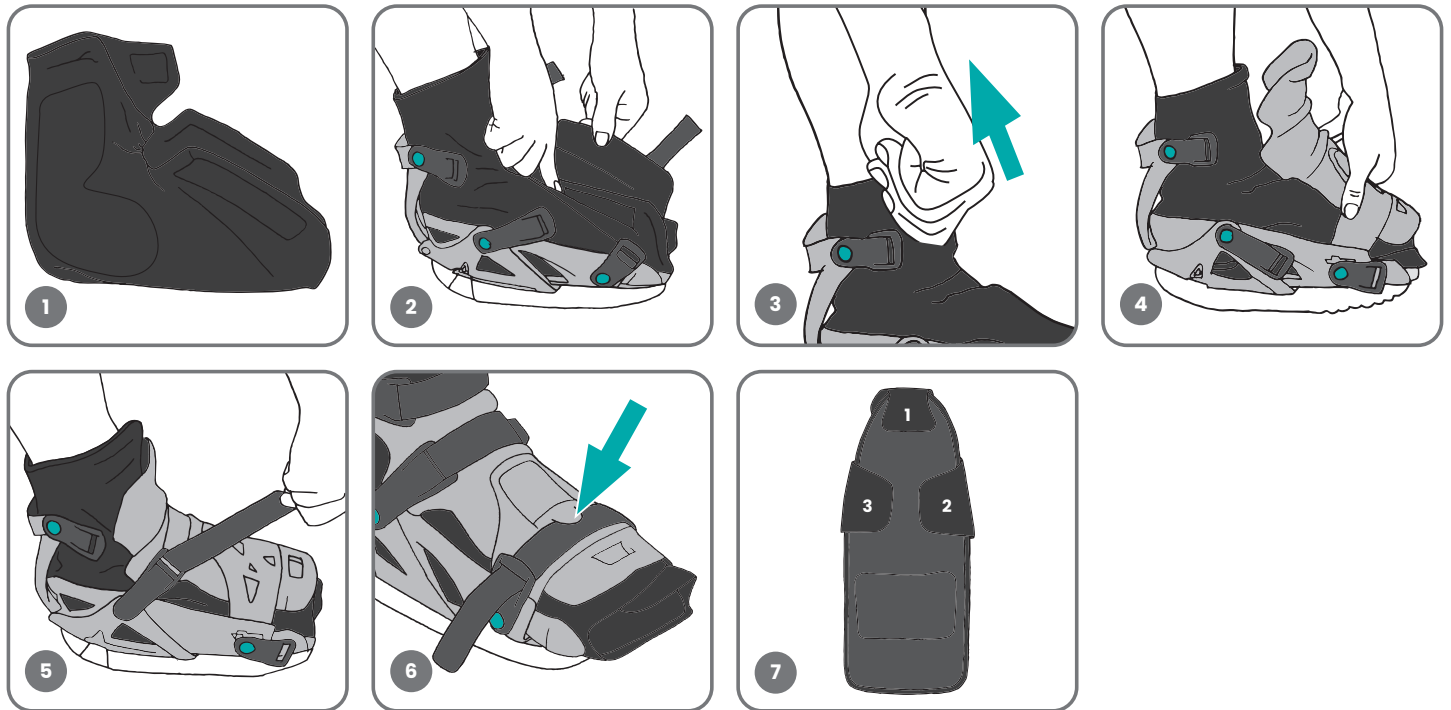

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsrådene, før du bruger VACOpedes.
Du kan finde læsbare brugsanvisninger på vores OPED-hjemmeside.

Formål: Ortose designet til at immobilisere led i den angivne position og give funktionel behandling af mellemfods- og forfodsskader.

VACOpedes kræver professionel og individuel tilpasning til patienten af kvalificeret personale, der er autoriseret til at tilpasse og give instruktion vedrørende ortoser i overensstemmelse med gældende statsbestemmelser. Det er den eneste måde at sikre ortosens fulde ydeevne og maksimal bærekomfort.

Sikkerhedsoplysninger

- ⚠ Produktet er kun beregnet til brug på en enkelt patient.
- ⚠ VACOpedes er ikke designet til dynamiske belastninger såsom hop og hurtig gang. Hvis du falder med VACOpedes på, skal du straks tjekke dine VACOpedes for skader. Hvis VACOpedes'en er beskadiget, kan det påvirke din sikkerhed.
- ⚠ Bær aldrig produktet over åbne sår, og brug det kun efter forudgående medicinsk instruktion.
- ⚠ Hvis der opstår voldsomme smerter, følelsesløshed, eller hvis du oplever usædvanlige reaktioner eller en ubehagelig følelse, mens du bruger enheden, skal du straks kontakte din læge eller ortopædtekniker.
- ⚠ Denne medicinske enhed er designet til de angivne indikationer og kan blive beskadiget ved forkert brug, f.eks. under sportsaktiviteter, uforudsete uheld (f.eks. fald) eller kontakt med væsker, der er uforenelige med plast.
- ⚠ Tal med din læge, hvis du bruger det i kombination med et andet medicinsk produkt.
- ⚠ Der må kun anvendes reservedele og/eller udskiftningsdele, der er godkendt af OPED GmbH.
- ⚠ Vær opmærksom på gældende færdselslov i dit land.
- ⚠ Ikke lavet af naturgummilatex. 
- ⚠ Tjek, at sålen sidder sikkert – ellers er der risiko for at snuble!
Sål: Når tådelen er helt udstrakt, kan gangen blive ændret eller begrænset.
- ⚠ Indlæggets fyld kan forskydes. Derfor anbefales det at løse fyldet hver anden til tredje dag og derefter glatte det ud.
- ⚠ Dette produkt er beregnet til ikke at blive brugt i mere end 4 måneder.
- ⚠ Når du har ortosen på, skal du sørge for, at skoene er høje nok på den modsatte side, eller at sålen er hævet for at kompensere for højdeforskellen.

Sådan tager du ortosen på (instruktionsvideo kan findes på [app.oped.de](https://www.oped.de))

Inden ortosen tages på

Tag understrømpen på: Åbn strømpen på vid gab foroven, så du nemt kan tage strømpen på. Træk derefter strømpen opad.

Åbn stropperne, og fjern den indvendige sko fra skallen. Åbn den indvendige sko. Inden du tager den på, skal du ælte den indvendige sko i sål- og ankelområdet, så fyldet løsner sig, og derefter glattes ud for at sikre en jævn fordeling (fig. 1). Placer foden helt bagerst i den indvendige sko, og luk velcrolukningerne (fig. 2).

Placering af velcroen:

Velcroen fastgøres til hele den ydre overflade af den indvendige sko. Sæt foden med den indvendige sko ind i skallen, og træk den en gang kort opad (fig. 3). Placer foden med den indvendige sko helt bagerst i skallen. Sæt frontstykket på (fig. 4) (forfra: tappe i den nederste skal), og luk stroppen med hånden, som smerten tillader det (fig. 5). Sørg for, at stroppen er hægtet under klappen på frontstykket i tåområdet for at forhindre glidning (fig. 6). Det tager lidt tid for fyldet i inderskoen at tilpasse sig anatomen perfekt. Stram om nødvendigt stropperne igen.

Montering og udskiftning af sål

Fjernelse af sålen

Tryk på begge oplåsningsknapper samtidigt (fig. 7).

Montering af sål

Placer VACOpedes'en lige og centreret på sålen, før du skubber den mod sålen (du vil høre hørbare klik) (fig. 8). Tjek, at sålen sidder godt fast.

Justering af sålens længde

Fjern sålen (se Montering af sålen), og tryk på oplåsningsknappen. Træk tådelen til den ønskede længde (fig. 7). Flyt tåstykket til den ønskede position.

Patientoplysninger

Trykpunkter/problemløsning

Ælt den indvendige sko i sål- og ankelområdet, så fyldet løsner sig, og derefter glattes ud for at sikre en jævn fordeling.

Hvis velcrolukningerne på undersiden af inderdelen har løsnet sig, og begge dele skal samles igen: (fig. 9)

- Luk først den bagerste midterste velcrolukning (se 1).
- Luk sidevelcrolukningerne (se 2 og 3).

Sørg for, at velcrolukningerne ikke er skæve, og at de er placeret som vist på billedet.

Brusebad/vask

Vi anbefaler at bruge en brusebeskytter, når du bader. Hvis ortosen eller dens overstykke bliver våd, skal de tørres.

Søvn

Før du går i seng, skal du placere et håndklæde under enheden, så sengetøjet ikke bliver beskadiget.

Produkttegenskaber

Størrelser

Produktet kan bæres på venstre eller højre side.
Anbefaling Ved størrelsesoverlap mellem Small/Medium- og Medium/Large-versionerne skal du levere den mindre VACOpedes-størrelse, hvis det er muligt.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	40 – 44	45 – 49
UK	2 ½ – 6	6 ½ – 10	10 ½ – 14
US (M)	3 ½ – 6 ½	7 ½ – 10 ½	11 ½ – 14 ½
US (W)	4 ½ – 7 ½	8 ½ – 11 ½	12 ½ – 15 ½

Indikationer

- Metatarsale frakturer I – IV
- Hallux valgus/rigidus
- Artrodese af metatarsalledene
- Hammer- og klotæer
- Lapidusoperation

Kontraindikationer



Ingen kendte

Information vedrørende pleje/rengøring/desinfektion/sterilisering

Du modtager dette medicinske produkt i en hygiejnisk perfekt stand.

Rengøringsvejledning til patienter:

- Nedre skal: Opvaskemaskine ved 60 °C
- Stropper: Vaskemaskine ved 40 °C
- Indvendig sko: Vaskemaskine, 40 °C. Vaskes separat med et mildt vaskemiddel og i en lukket vaskepose.
- Understrømpe: Vaskemaskine, 30 °C.
- Desinfektion: Tørres af med plastkompatibelt desinfektionsmiddel.
- Tørring: Lufttørres, må ikke tørres i en tørretumbler.
- Sterilisering: Dette medicinske produkt er ikke egnet til sterilisering.

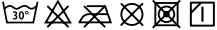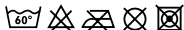

Tilbehør

Hvis tilbehøret ikke medfølger, kan det bestilles hos OPED GmbH.

- Forsegling
- Klik-disk

Tekniske data/parametre

Anvendte materialer:

Hårde skaller (PP); strop (PP-stof); ydersål (EVA); frontstykke (EVA/PP); spænde på frontstykke (POM).
Indvendigt: Polyester (PES), polyamid (PA), polyurethan (PU), ethylenvinylacetat (EVA), EPS

Transportforhold/opbevaringsforhold/bortskaffelse

Opbevaring: Opbevares på et tørt og hygiejnisk sted og beskyttes mod direkte sollys.



Tyskland: Den medicinske enhed er et udlejningsprodukt og skal returneres til OPED.

Schweiz: Det medicinske udstyr kan returneres til OPED.

Andre lande: Bortskaf den medicinske enhed som restaffald eller husholdningsaffald.



Garanti

Garantien ydes i overensstemmelse med lovmæssige bestemmelser. OPED's forretningsbetingelser gælder også, hvor det er tilladt.

I tilfælde af reklamationer vedrørende produktet, såsom skader eller problemer med pasformen, bedes du kontakte producenten direkte. Kun alvorlige hændelser, der kan føre til en væsentlig forringelse af helbred eller død, bør rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder i medlemsstaten. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Dit OPED-team