

# 51602 - Jura Håndfladebeskytter

## Produktbeskrivelse

Designet til at tillade fuld bevægelse i fingrene samtidigt med den reducerer kontrakturer og skader/nedbrydning af huden i håndfladen.

## Brugsvejledning (se billeder)

1. Åben velcrobåndet og monter håndfladebeskytteren med patientens tommelfinger gennem tommelfingerhullet som vist. (Billede 1)  
Jura-etiketten skal være synlig på ydersiden.
2. Fæst velcrobåndet over håndryggen mod den hårde velcro. Klip længden af båndet hvis det er nødvendigt. (Billede 2)
3. For at strække fingrene yderligere og hjælpe med at frigøre et stramt greb, indsæt et cylindrisk skum eller andet materiale i åbningen mellem håndfladen og polstringen.
4. Bemærk: Sørg for, at den hårde velcro ikke er i kontakt med huden. Kontroller at det er den rigtige ortose til korrekt side (venstre/højre).

## Størrelser og Side

Størrelse: Omkreds Håndled

Venstre: Universal

Højre: Universal

## Indikationer for anvendelse

Håndfladebeskytteren kan give lindring for krumme fingre, fingerkontrakturer og krampes. Håndfladebeskytteren har en god støddabsorbering som fingrene kan folde sig omkring, og den forhindrer fingre og negle i at grave sig ind i håndfladen, samtidig med at fingrene får støtte.

## Kontraindikationer

- Må ikke bruges over åbne sår.
- Alle kendte allergier og/eller overfølsomhed over for materiale er angivet i produktsammensætningen.
- Udfør regelmæssige tjek af hud og cirkulation.
- Forsigtighed bør udvises hos patienter med diabetes, vaskulære problemer og neuropati.

## Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler, at den første afprøvning udføres af en passende kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive om anvendelsestiden.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler før anvendelse.
- Følg alle instruktioner for at sikre korrekt anvendelse.
- Må ikke anvendes hvis kutane opløsninger, salver, geler, cremer eller andre emner er blevet anvendt på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient. Der er risiko for krydsinfektioner og det kan kompromittere produktets integritet.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationstjek, især for patienter med diabetes, vaskulære sygdomme og neurologiske skader.
- Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at anvende ortosen og kontakte din læge eller leverandør af dette produkt.
- Ortosen holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. skarpe genstande eller skader på velcrobåndet. For at forhindre dette skal velcrobåndet altid holdes lukket, når enheden ikke er i brug, eller når den vaskes.

## Vask og pleje

1. Luk velcrobåndet.
2. Håndvask i koldt vand med mildt rengøringsmiddel.
3. Skyl og lad ortosen lufttørre.
4. Må ikke centrifugeres eller tørretumbles.
5. Anvend ikke skyllemiddel.
6. Kontroller om der er skader på produktet, som kan påvirke anvendelsen.
7. Kontroller jævnligt at velcrobåndet fungerer korrekt.

## Produktsammensætning

Polyester, nylon.

## Opbevarings- og transportforhold

Opbevares i original emballage på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

## Genbrug og bortskaffelse

Emballage og komponenter bør genanvendes eller bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

## Alvorlig hændelse

Anmeld eventuelle alvorlige hændelser til producenten og den kompetente myndighed i EU's medlemsstat eller det land, hvor du bor.

