
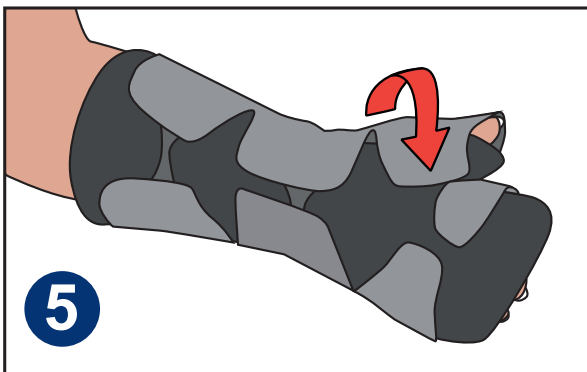
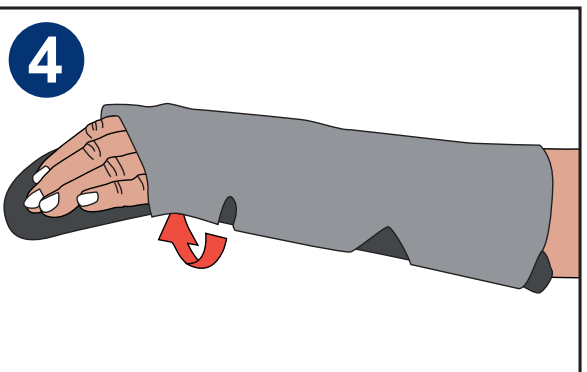
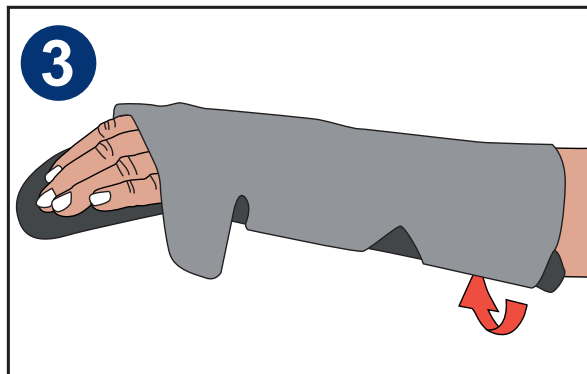
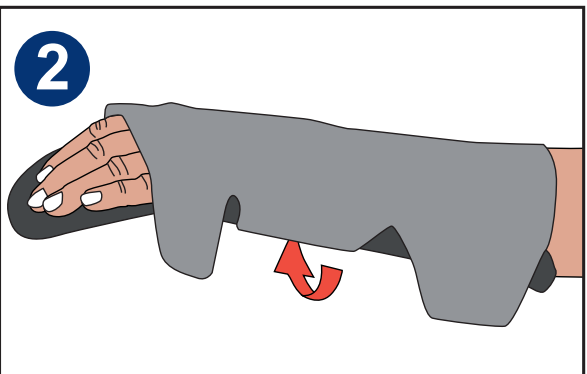
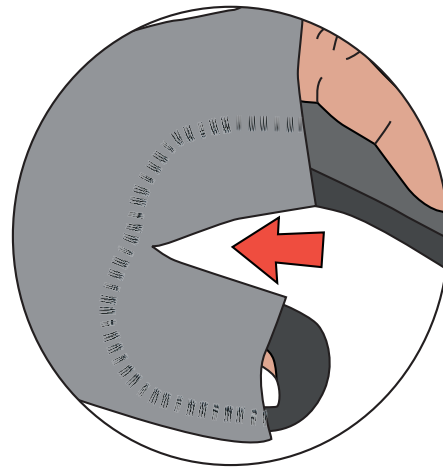
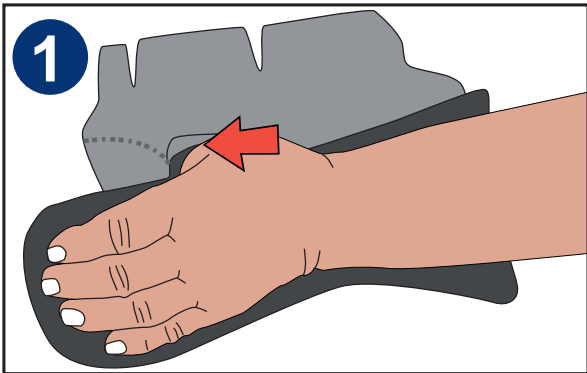


Patientvejledning






S.O.T Håndortose

PÅTAGNING AF ORTOSEN

For at ortosen skal fungere optimalt er det vigtigt at betrækket er justeret så det sidder godt i tommelbøjningen (se billedet til højre). Fæst derefter betrækket successivt, begynd med båndet ved håndledet og sørg for at det bliver jævnt og behageligt. Hvis håndledet er hævet kan et større betræk behøves.

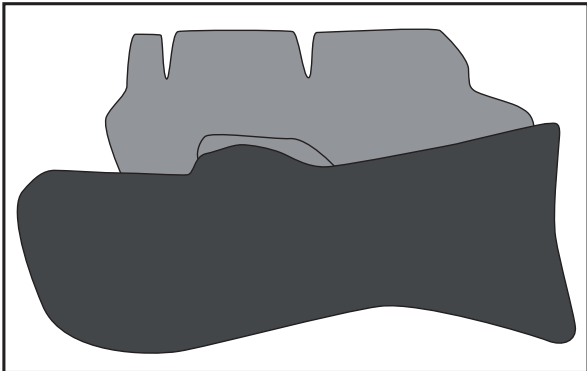

AFTAGNING AF ORTOSEN

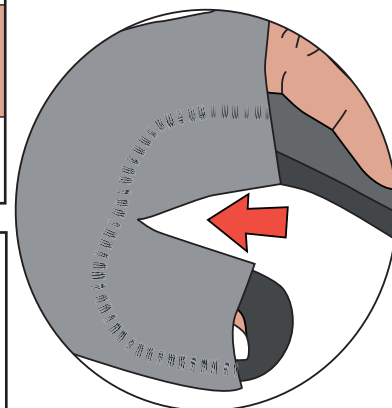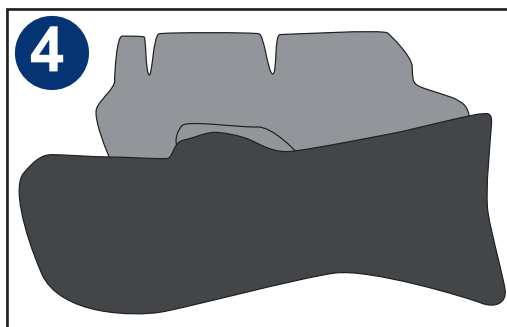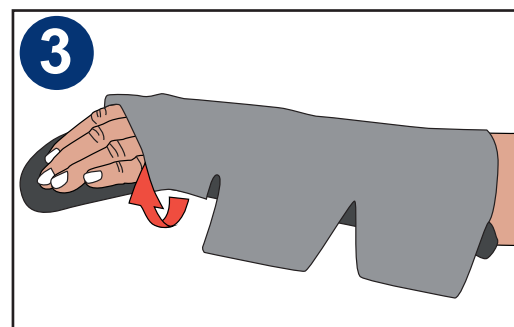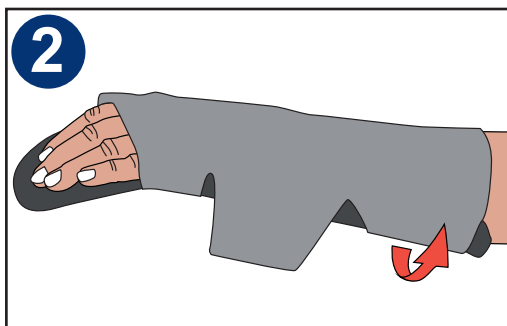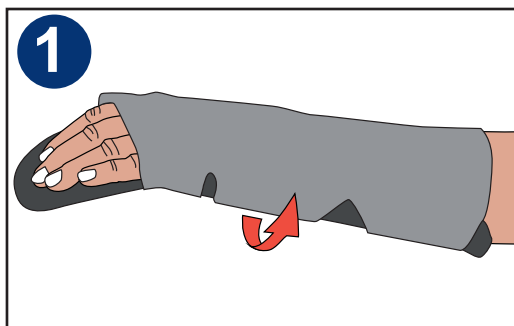

Løsne betrækket på lillefingersiden i den rækkefølge som billederne viser.
Lad betrækket sidde på tommelsiden og mellem tommel og pegefinger.
Det bliver enklere at tage ortosen på hvis båndet langs tommelsiden og tommelgrebet
bliver siddende på.

Anvendelse af ortosen:

Godt at huske på:

VASKERÅD: Vask den komplette monterede ortose i en vaskepose på skåneprogram 40°C. Skal ligge ned under tørring. Kan ikke tørretumbles eller Kemi vask.

Hvis der opstår problemer så kontakt venligst:

Navn _____

Telefon: _____