



PRODUKTKATALOG

2022

camp.dk



Support for Better Life!

INDHOLD


	Elements Body	5 - 8
	Hånd- og håndledsortoser	9 - 50
	Arm- og skulderortoser	51 - 60
	Funktionel Elektrisk Stimulation	61 - 64
	Fod- og fodledsortoser	65 - 138
	Knæortoser	139 - 166
	Hofteortoser	167 - 182
	Brystproteser	183 - 184
	Nakkeortoser	185 - 188
	Rygortoser/Korsetter	189 - 224
	Stomiprodukter	225 - 236
	Ortosekomponenter	237 - 260
	Plast og materiale	261 - 294
	Værktøj og tilbehør	295 - 298
	Test, træning og behandling	299 - 306
	Salgsbetingelser	307
	Personale	308



Elements Body

www.camp.dk

elements *body*

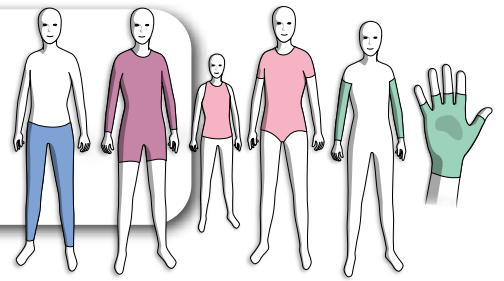

Elements Body

Element Body er en ortose lavet af lycra-syntetiske fibre som er sammensat i forskellige paneler. Den er syet således at ortosen giver konstant proprioceptiv feedback i form af tryk og modstand mod mave og extremiteter. Ortosens funktion består i at den sidder tæt mod kroppen og giver tryk mod mave og extremiteter og der igennem øges holdning og stabilitet. Ved at øge dybdesensibiliteten, også kaldet proprioceptionen- (individets evne til at bestemme over sine egen kropsdels position), kan også finmotorik samt funktionelle præstationer forbedres. Gennem forskellige forstærkninger kan man kontrollere fleksion, ekstension, pronation og supination.

Anvendelsesområde: Cerebral parese, erhvervet hjerneskade, erhvervet rygmarvsskade, Cerebral ataxi, Atetos, Spina bifida, Slagtilfælde, MS, vedvarende lav tonus, Ehlers Danlos Syndrom, hypermobilitet.

Øvrigt: Ortosen bestilles og fremstilles efter individuelle mål. Ortosen kan udformes som heldragt, med korte eller lange ærmer og ben, armstrømper med eller uden handsker. Forstærkninger og lynlås kan sys på efter behov af støtte og funktion. Udformningen bestemmes af bandagist i samråd med læge og fysioterapeut. Det er bandagisten som udfører måltagning efter gennemgået uddannelse. Bedste resultat opnås hvis ortosen anvendes i mindst seks timer om dagen. Ortosen skal i første omgang anvendes i kortere tider og gradvist stige til målet på de seks timer pr. dag. Den bør ikke anvendes mere end 8 - 10 timer pr. dag. OBS! Elements Body ortoser skal ikke anvendes om natten. For at bestille målblanketter, artikler og kliniske studier kontakt kundesupport på Camp Scandinavia.



Du kan også bestille Elements Body digitalt via Allard Configurator på vores hjemmeside. Kontakt kundesupport ved behov af licens.

Art. nr.	Model
39300	EB bluse uden ærmer
39301	EB bluse med korte ærmer
39301	EB bluse med lange ærmer
39305	EB body uden ærmer
39306	EB body med korte ærmer
39306	EB body med lange ærmer
39310	EB dragt uden ærmer/korte ben
39310	EB dragt uden ærmer/¾ ben
39310	EB dragt uden ærmer/lange ben
39311	EB dragt med korte ærmer/korte ben
39311	EB dragt med korte ærmer/¾ ben
39311	EB dragt med korte ærmer/lange ben
39312	EB dragt med lange ærmer/korte ben
39312	EB dragt med lange ærmer/¾ ben
39312	EB dragt med lange ærmer/lange ben
39320	EB bukser med korte ben
39320	EB bukser med ¾ ben
39320	EB bukser med lange ben
39325	EB strømpe
39330	EB kort handske uden fingre
39331	EB kort handske med fingre
39335	EB lang handske uden fingre
39336	EB lang handske med fingre
39340	EB løse ærmer

← NYHED!

← NYHED!

← NYHED!

← NYHED!



Hymo

HYMO-Ortosen er en tekstil ortose i form af en body og/eller bukser med korte eller lange ærmer og ben. Ortosen er beregnet til patienter med Ehlers Danlos Syndrom. HYMO-ortosen sidder mod kroppen og kan forbedre kropsholdning og give øget ledstabilitet, f.eks. kan hoften eller skulderen stabiliseres gennem den støtte som ortosen giver. Ortosen er skræddersyet med fokus på stabilisering og begrænse bevægelsesområder i leddene. Ortosen anvendes gradvist indtil den ønskede anvendelsestid på 8 – 10 timer pr. dag er opnået. Materialerne i HYMO-Ortosen er nøje udvalgte, produceret samt certificeret i henhold til Oeko-Tex standard 100, klasse II.

Anvendelsesområde:

Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikationer:

Ødem, luxerede led (ikke reponerbare).

Øvrigt: HYMOen bestilles til hver enkelt bruger. Målblanketter, bestillingsformular samt vejledning til måltagning kan downloades på Camp's hjemmeside.

Art. nr.	Model	Type	Farve
39400	Body med korte ærmer	Dame	Sort
39401	Body med korte ærmer	Herre	Sort
39402	Body med lange ærmer	Dame	Sort
39403	Body med lange ærmer	Herre	Sort
39408	Body med 3/4 lange ærmer	Dame	Sort
39409	Body med 3/4 lange ærmer	Herre	Sort
39404	Bukser med korte ben	Dame	Sort
39405	Bukser med korte ben	Herre	Sort
39406	Bukser med lange ben	Dame	Sort
39407	Bukser med lange ben	Herre	Sort
39410	Bukser med 3/4 lange ben	Dame	Sort
39411	Bukser med 3/4 lange ben	Herre	Sort



Du kan også bestille Hymo digitalt via Allard Configurator på vores hjemmeside. Kontakt kundesupport ved behov af licens.



Hånd- og håndledsortoser

www.camp.dk



Mål: Omkreds håndled.

Vission fingerskinne

Fingerskinne til immobilisering af finger efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges ved konservativ fingerterapi og ved Dupuytren syndrom samt tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.

Anvendelsesområde: Immobilisering af finger efter skade eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 27 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46020	Vission Fingerskinne	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskinne	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskinne	Large	> 19 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled

Vission multifinger ortose

Denne ortose er til immobilisering af fingrene efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges til konservativ fingerterapi samt behandling af Dupuytren syndrom. Tilstande der kræver midlertidig immobilisering af fingrene. Ortosen kan også bruges i forbindelse med behandling ved frakturer af metacarpalknoglerne III-V og dens tilknyttede falanger.

Anvendelsesområde: Immobilisering, Dupuytren syndrom, ved frakturer.

Kontraindikationer: Ingen kendte

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 30 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Small	< 16 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Medium	16 - 19 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Large	> 19 cm	Ve/Hø

SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem. Det korte design tillader fuld bevægelighed i MCP-leddene.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51405	Hvid	X-Small	3,8 cm
51405	Hvid	Small	4,4 cm
51405	Hvid	Medium	5,1 cm
51405	Hvid	Large	5,7 cm
51405	Hvid	X-Large	7 cm



Mål: Volart mellem MCP-leddet og DIP-leddet.

SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51400	Hvid	X-Small	5,1 cm
51400	Hvid	Small	6,4 cm
51400	Hvid	Medium	7,6 cm
51400	Hvid	Large	8,9 cm
51400	Hvid	X-Large	10,2 cm
51401	Sort	X-Small	5,1 cm
51401	Sort	Small	6,4 cm
51401	Sort	Medium	7,6 cm
51401	Sort	Large	8,9 cm
51401	Sort	X-Large	10,2 cm



Mål: Volart mellem distale palmarled og DIP-leddet



Mål: Volart mellem distale palmarled og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensionsskinne (Capener) der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Spiralfjedrene er placeret på begge sider af PIP-leddet for at yde samme modstand i alle positioner. De kan løsnes eller strammes til ønsket modstand. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet. Egnede til kontrakturer op til 45°.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51410	Hvid	Small	6,4 cm
51410	Hvid	Medium	7 cm
51410	Hvid	Large	7,6 cm
51410	Hvid	X-Large	8,3 cm



Mallet fingerskinne

Immobiliserer DIP-leddet i ekstension og giver samtidig fuld bevægelighed i PIP-leddet. Anvendes normalt uden polstring og fikseres mod midterste falang med selvhæftende bånd (medfølger ikke).

Art. nr.	Størrelse	Farve	Længde	Diameter	Pakke
51422	1	Beige	5,28 cm	1,52 cm	10 Stk.
51422	2	Beige	5,18 cm	1,67 cm	10 Stk.
51422	3	Beige	5,84 cm	1,87 cm	10 Stk.
51422	4	Beige	6,28 cm	1,91 cm	10 Stk.
51422	5	Beige	5,87 cm	1,91 cm	10 Stk.
51422	5,5	Beige	6,09 cm	2,29 cm	10 Stk.
51422	6	Beige	6,43 cm	2,29 cm	10 Stk.
51422	7	Beige	6,27 cm	2,54 cm	10 Stk.



Buddy strap

Tvillingebånd der holder to fingre fast sammen. Velcrobåndet kan let klippes til ønsket størrelse.

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Længde	Pakke
51430	One Size	1,3 cm	12,7 cm	5 Stk.

ELEMENTS tommel

ELEMENTS tommel er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte, betændelse og slidskader. Støttebandagen begrænser bevægeligheden i tommelens grundled og lidt i håndleddet. Støttebandagen holder tommelleddet varmt.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte, betændelse og slidskader.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem (væskesamling) eller kraftig hævelse.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 12 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34105	Beige/Sort	Small	< 17 cm	Ve/Hø
34105	Beige/Sort	Large	> 17 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled.

Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminiumsskinner; centralt, dorsalt og palmar. Ortosen giver en stabil støtte til tommelfingeren. Fremstillet af perforeret luftig ruskindsimulation med åndbart foer.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28560	Sort	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Sort	Small	9-10 cm	Bilat.
28560	Sort	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Sort	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Sort	X-Large	>13 cm	Bilat.



Mål: Længde fra håndled til tommelens IP-led

CMC-X Lacer tommelortose

CMC-X Lacer™ tommelortose giver smertelindring ved osteoartrit i tommelens CMC-led samtidig med at den tillader bevægelse. Lukkesystemet med snøre kan let justeres og placere tommelbasen i ønsket abduktionsgrad for at hjælpe til med at stabilisere CMC-leddet og tillade tommelfingeren en funktionel mobilitet. Den justerbare polstrede aluminiumsskinne fungerer sammen med snøresystemet og giver et let tryk med yderligere stabilisering af CMC-leddet. CMC-X Lacer tommelortose er fremstillet af hypoallergen CoolFlex™ materiale for komfort og kompression. CMC-X Lacer indeholder ikke latex eller neopren.

Anvendelsesområde: Osteoartrit i tommelens CMC-led, medial subluxation af tommelens CMC led.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28562	Sort	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Sort	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Sort	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Sort	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Sort	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled





Mål: Omkreds håndled

CMC tommelortose

Denne tommelortose er beregnet til at give støtte til CMC-leddet ved instabilitet og slidskader. Den polstrede indre skinne i kombination med det ydre elastiske bånd giver kompression af tommelbasen og hjælper dermed til at stabilisere CMC-leddet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
2856I	Sort	X-Small	<14 cm	Ve/Hø
2856I	Sort	Small	14-15,5 cm	Ve/Hø
2856I	Sort	Medium	15,5-17,5 cm	Ve/Hø
2856I	Sort	Large	17,5-19,5 cm	Ve/Hø
2856I	Sort	X-Large	>19,5 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP-leddet

CMCcare tommelortose

Tommelortose som støtter tommelens CMC-led og holder metakarpalleddet i en funktionel position og bibeholder gribefunktionen. Ortosen har en integreret formbar aluminium-skinne og et justerbar velcrolukning. Det anatomiske design med sin affasede kanter giver en perfekt pasform og bedste komfort. Håndleddet og øvrige dele af hånden kan bevæge sig frit uden at blive hindret af ortosen.

Anvendelsesområde: Osteoartrit i tommelens led, instabilitet i tommelen, postoperativt efter artroplastik i CMC-I leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Ve/Hø

Vission NEO tommelortose kort

Blød, elastisk tommelortose i neopren som beskytter og aflaster tommelen samt giver varme. Findes i to længder. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelen og håndled.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Small	13 - 16 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Medium	15 - 18 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds Håndled

Vission NEO tommelortose lang

Blød, elastisk tommelortose i neopren som beskytter og aflaster tommelen samt giver varme. Findes i to længder. Denne model, som er længere, giver en let støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelen og håndled

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 12,5 cm. Ortosen er fremstillet i Nylon og SBR (Latexfri neopren).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
46026	Lang	Sort	One Size



Mål: Omkreds Håndled

Tommelortose kort

Blød elastisk tommelortose i neopren, der beskytter, aflaster og giver varme. Findes i to længder. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning og hypermobilitet i tommelen.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28548	Kort	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28548	Kort	Beige	Large	>17cm	Ve/Hø
28558	Kort	Blå	Small	<17 cm	Ve/Hø
28558	Kort	Blå	Large	>17 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled.



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndledsflade mål

Tommelortose lang

Blød elastisk tommeortose i neopren, der beskytter, aflaster og giver varme.

Findes i to længder. Den lange model giver let støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning og hypermobilitet i tommelen.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialsider er 12,5 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28559	Lang	Blå	One Size	Ve/Hø

SELECTION® tommeortose Børn

Blød og behagelig tommeortose til børn. SELECTION® materialet er tyndt, smidigt og tillader huden at ånde. Ortosen er tænkt til at guide hånd og håndled til en funktionel position i forhold til at lindre smerte ved inflammation og reumatiske tilstande. Ortosen kan også anvendes til at reducere spasticitet ved neurologiske tilstande i hånd og håndled. Tommeortose er justerbart og kanterne kan trimmes ved behov.

Anvendelsesområde: Positionering af hånden efter Brachial Plexus Neuropatier (BPN), spastisk hånd ved Cerebral Parese. Arthrogyrosis. Reumatiske sygdomme.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på tommelens radialsider er 9 cm (størrelse M).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35300	Sort	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Ve/Hø
35300	Sort	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø

SELECTION® tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose der aflaster tommelens led og giver en let støtte. SELECTION® tommelortose Soft er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale, der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralløje uden at belaste muskler og senebæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelens led, mild CMC-I artrose.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet omkring tommelen. Giver aflastning til tommelens led og en stabil støtte. Giver desuden støtte og beskyttelse til tommelens MCP-led. SELECTION® tommelortose rigid er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralløje uden af belaste muskler og senebæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelens led, mild til moderat CMC-I artrose.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Medium	15-17cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

SOT Tommelortose

SOT Tommelortose er en anatomisk formet hvileortose til tommel og håndflade. Ortosen positionerer tommelfingeren i en optimal hvileposition. Den er udformet til at begrænse bevægelserne i tommelens CMC -og MCP-led, give støtte til håndfladen samt positionere tommelens led og muskler i en behagelig hvileposition. SOT har en kerne af aluminium, som gør, at ortosen kan tilpasses og formes til individuel pasform. Ortosen kan justeres såfremt kontrakturen forandres. Det smidige design gør den til et godt alternativ til specialfremstillede hvileortoser. Læs mere om tilpasning og justeringer i brochuren Tips & Tricks.

I tilfælde hvor der behøves ekstra støtte til håndleddet kan SOT Tommelortose bruges sammen med en håndledsortose. Vision Håndledsortose 46029 og Selection Open Wrist 35207 er optimale ortoser i forhold til at kombinere med SOT Tommelortose.

Anvendelsesområde: SOT Tommelortose er beregnet til brug ved slidgigt, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Øvrigt: SOT Tommelortose kan vaskes i 40 grader.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra betræk	Small	Ve/Hø		
28721	Ekstra betræk	Medium	Ve/Hø		
28721	Ekstra betræk	Large	Ve/Hø		

Vission tommelortose kort med skinne

En tommelortose med plastskinne som giver støtte til tommelen og omkringliggende strukturer. Opbygningen af det underliggende materiale gør, at skinnen ikke trykker mod led eller muskulatur. Materialet er et stabilt og slidstærkt elastisk materiale, som har en blød og behagelig inderside. Åbent justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Instabilitet i tommelens led (CMC -eller MCP-leddet), inflammationer, slidskader, belastningsrelaterede problemer samt ved reumatiske forandringer

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialsiden er 13 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds Håndled

Vission tommelortose lang med skinne

En smidig, elastisk tommelortose i lang model. Ortosen har en udtagbar metalskinne som giver støtte til tommelen og omkringliggende strukturer samt en let støtte til håndleddet. Ortosen er beregnet til at begrænse bevægelse i CMC og MCP I leddet samt positionere tommelen i en funktionel position. Den er fremstillet i et stabilt og slidstærkt materiale med en blød og behagelig inderside. Åbent justerbart tommelgreb. Den todelte lukning gør, at ortosen er let at åbne og lukke med en hånd.

Anvendelsesområde: Osteoartrose og/eller instabilitet i CMC og MCP I, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialsiden er 16 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

Vission tommelortose formbar

Tommelortose beregnet til at begrænse bevægelsen i CMC og MCPJ leddet og til at positionere tommelen i en funktionel position gennem en individuelt formet tommelstøtte. Termoplastskinnen, som er performeret, er placeret i en lomme. Den varmes op og formes lettest ved at dyppe hele ortosen i vandbad ved vandtemperatur på 70-72°. Ortosen formes på patienten i forhold til en perfekt anatomisk pasform.

Anvendelsesområde: Let til moderat instabilitet i CMC og MCPJ, ligamentskader, Morbus de Quervain, degenerative sygdomme og traumer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Basic tommelortose, kort og lang

Ortose med plastskinne der giver støtte til tommelfingeren og omkringliggende strukturer. Materialet er klippet på skrå i forhold til optimal pasform og elasticitet. Åben justerbar tommelstrop. Den lange model er 2 cm længere og giver støtte til håndleddet. Kan kombineres med håndledsbånd 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Basic tommelortose kort - ortosens længde på radialsiden er 12,5 cm
Basic tommelortose lang - ortosens længde på radialsiden er 15 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Tommelortose Rigid Airmed

Tommelbasortose er beregnet til posttraumatisk immobilisering af tommelens MCP-led. Ortosen giver støtte og aflaster trapezio-metakarpalleddet. Hjælper patienten til at begrænse bevægelser, som kan årsage skade eller smerte. Ortosen har indsyet metalskiner, som kan formes efter behov. Ortosen er blød og behagelig at have på og forsynet med et ventilationshul.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk immobilisering af tommel MCP-led, karpaltunnelsyndrom og tendinit.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat.
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled.

Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose fremstillet af plast til immobilisering af tommelfingeren i funktionsstilling. Påsyet velcrobånd giver justerbar lukning. Stockinette i high-tech fiber opsuger fugt og giver en blød polstringseffekt.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt og ved instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28545	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Large	>19 cm	Ve/Hø
28547	Ekstra Inderhandske	Small		Bilat.
28547	Ekstra Inderhandske	Medium		Bilat.
28547	Ekstra Inderhandske	Large		Bilat.



Mål: Omkreds håndled

Let håndledsortose

Håndledsortose i neopren, der giver varme og støtte til håndleddet. Holdes på plads ved at fastgøres om tommelfingeren. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28230	Blå	One Size	Bilat.





Mål: Omkreds håndled.

ELEMENTS håndled

ELEMENTS håndled er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer som f.eks smerte, betændelse og slidskader. Støttebandagen begrænser bevægeligheden i håndleddet ved hjælp af den indbyggede aluminiumsskinne. Støtteortosen holder også håndleddet varmt.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks smerte, betændelse og slidskader.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem eller kraftig hævelse.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 17 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34103	Beige/Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
34103	Beige/Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
34103	Beige/Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
34103	Beige/Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled.

ELEMENTS Broma håndled

ELEMENTS broma håndled har til opgave at hindre dorsalekstension i håndleddet for at mindske smerter ved bl.a. tennisalbue. Bløde plastskinner på håndryggen.

Anvendelsesområde: Hindre dorsalekstension af håndleddet for at mindske smerter ved bl.a. tennisalbue.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34107	Beige/Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
34107	Beige/Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
34107	Beige/Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
34107	Beige/Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

Bromsa håndledsortose

Håndledsortose med to fleksible plastskinner dorsalt, der sammen med det kraftige elastiske bånd begrænser dorsalfleksion af håndleddet. Modstanden justeres let ved at anvende en eller to plastskinner; og ved at placere båndet mere proximalt eller distalt. Ingen skinner volart der påvirker hånden's øvrige funktioner.

Anvendelsesområde: Aflastning af ekstensorsenerne i forbindelse med lateral epicondylit.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28240	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® Bromsa Håndled

Selection bromsa håndled er beregnet til at begrænse bevægelsen i håndleddet i forhold til at aflaste håndextensorerne, støtte håndleddet og reducere smerte ved bl. a. tennis albue. Ortosen har bløde plastskinner på håndryggen, justerbar strop til tommelfingeren og SELECTION snøresystem. Støtten kan tilpasses ved at bruge en eller to plastskinner. Snøresystemet giver ortosen en bedre lukning omkring hånden og en bedre pasform.

Anvendelsesområde: Lateral epicondylit, hypermobilitet, reumatiske sygdomme, uspecifiseret smerte.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Small	11-14 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® håndled kort sort

Smidig, elastisk håndledsortose uden skinne, lavet i et moderne og behageligt material som er åndbart og føles behageligt mod huden. Ortosen, som er kortere end Selection Håndledsortose Soft og Rigid, giver støtte til håndleddet uden at hindre bevægeligheden, men giver en let kompression. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb. Gennem materialets konstruktion er det muligt at justere formen lidt med saks i forhold til optimal pasform. Separat ekstra bånd kan bestilles.

Anvendelsesområde: Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, ved kronisk smerte, slidtage i led eller overbelastning. Efter ganglion-operationer, ved behov af kompression. Hypermobile led ved Ehlers Danlos Syndrom. Ortosen kan også anvendes forebyggende ved tunge eller monotone bevægeligheder.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndled kort beige

Smidig, elastisk håndledsortose uden skinne, lavet i et moderne og behageligt materiale som er åndbart og føles behageligt mod huden. Ortosen, som er kortere end Selection Håndledsortose Soft og Rigid, giver støtte til håndleddet uden at hindre bevægeligheden, men giver en let kompression. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb. Gennem materialets konstruktion er det muligt at justere formen lidt med saks i forhold til optimal pasform. Seperat ekstra bånd kan bestilles.

Anvendelsesområde: Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, ved kronisk smerte, slidtage i led eller overbelastning. Efter ganglion-operationer, ved behov for kompression. Hypermobilitet ved Ehlers Danlos Syndrom. Ortosen kan også anvendes forebyggende ved tunge eller monotone bevægeligheder.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på volarsiden er 13 cm.



Mål: Omkreds håndled

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds Håndled

Vission håndledsortose kort

En kortere håndledsortose, fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform i håndfladen, over håndryggen og rundt om tommelens muskulatur. Denne model er uden skinne volart. Åben justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, afgipsning, hypermobilitet, reumatiske problemer, ved kronisk smertetilstand, slidskader eller overbelastningsbesvær. Kan også anvendes forebyggende ved tunge og monotone bevægeligheder.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Gripa håndledsortose

Ortosen giver effektiv støtte til håndleddet ved tunge eller monotome arbejdsopgaver. Et kraftigt elastisk bånd støtter håndleddet. "Tuff Grip" i håndfladen sikrer et godt greb om værktøj. Udviklet i samarbejde med montører indenfor værkstedsindustrien.

Anvendelsesområde: Aflastning af håndfladen og håndleddet og præventivt ved f.eks. monteringsarbejde.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28210	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndled Børn

Blød og behagelig håndledsortose til børn. Denne stabile ortose har en udtagbar aluminiumskinne på volarsiden og to bånd til enkel lukning. Skinne er udtagelig.

SELECTION® materialet er tyndt, smidigt og tillader huden at ånde.

Tommelbåndene er justerbare og kanterne er bløde. Farvedetaljerne er valgt for at tiltale børn.

Anvendelsesområde: Reumatiske problemer. Neurologiske skader hvor håndleddet trænger støtte og/ eller korrigerende. Efter afsluttet gipsbehandling. Betændelser.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35305	Sort	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Ve/Hø
35305	Sort	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndflade mål

Mål 3: Ortosens længde på volarsiden

SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil og enkel håndledsortose i det behagelige SELECTION® materiale.

Ortosen har en formet aluminiumskinne på volarsiden. Den har to tommelbånd, et som fæster rundt om tommelen og et som fæster på håndryggen for at holde tommelen på plads, så den ikke falder ind i hånden. Selection Open Wrist Barn er beregnet til at immobilisere af CMC-leddet ved smerte, vejlede håndleddet til en neutral position samt ved behov for at støtte til håndleddet efter traume/operation.

Anvendelsesområde: Reumatoid arthritis, CP, efter traume/operation.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndflade mål

Mål 3: Ortosens længde på volarsiden



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® Open Wrist

En stabil og enkel håndledsortose i det behagelige SELECTION® materiale.

Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden og en smal plastskinne dorsalt.

Ortosen har et stabiliserende rundgående håndledsbånd og tages enkelt på med en hånd. SELECTION Open Wrist kan anvendes, når håndleddet trænger til aflastning.

Anvendelsesområde: Inflammation, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35207	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35207	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

SELECTION® Ulnar Deviationsortose

SELECTION® Ulnar Deviationsortose er beregnet til at forbedre fingrenes position for at give en bedre håndfunktion og opnå et mere funktionelt greb.

Ortosen lindrer strukturerne på samme tid som den har en smertestillende effekt.

Den understøtter MCP- og PIP-leddene, samtidig med at den forbedrer fingernes trækretning. Ortosen er designet så materialet går langt ud på ulnarsiden over 5. MCP for at støtte bedst muligt, modvirke trækretningen og fordele trykket.

Hook hæfter overalt på ortosen, så der er ingen begrænsninger for placering af stropperne for at opnå den optimale trækretning. Eftersom ortosen er så tynd og fin i kvaliteten kan den enkelt kombineres med en håndledsbandage, hvis der er behov for yderligere støtte. Specialdesignede forstærkninger af Lav temperaturplast (non-coated) hæfter direkte på ortosen.

Anvendelsesområde: Til patienter med gigt. Ulnar deviation kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sygdomme, såsom RA. SELECTION® Ulnar deviationsortose kan også bruges til hypermobile led og til svage muskler med det formål at ydemere støtte. Skal ikke anvendes i forbindelse med fikserede kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35218	Sort	X-Small	14-17 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Small	17-20 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Medium	20-23 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Large	23-27 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP 2-5

NYHED!

SELECTION® Radialis Tommeldel

Tekstil tommeldel, som kombineres med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209. Tommeldelen kan med fordel kombineres med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til anvendelse ved Radialisparese (drophånd, som er forårsaget af skade på radialisnerven) for at muliggøre en funktionel gribeevne, mens nerven opheler.

Anvendelsesområde: Radialisparese

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Sort	Small	3 - 4 cm	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Sort	Large	5 - 6 cm	Ve/Hø



Mål: Længde på leddets midte
MCPI – leddets på midte IPI.

SELECTION® Radialis Fingerdel

Tekstil Fingerdel, som kombineres med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209. Fingerdelen kan med fordel kombineres med SELECTION® Radialis Tommeldel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til anvendelse ved Radialisparese (drophånd, som er forårsaget af skade på radialisnerven) for at muliggøre en funktionel gribeevne, mens nerven opheler.

Anvendelsesområde: Radialisparese.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Small	17 - 20 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Medium	20 - 23 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Large	23 - 27 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP 2-5



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Underarmsmål

SELECTION® håndledsortose Soft

Smidig, elastisk håndledsortose fremstillet af et moderne smidigt materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. SELECTION® Soft har en formet plasticskinne på volarsiden og en blødere lige plasticskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til en optimal pasform.

Anvendelsesområde: Når håndleddet har brug for aflastning fx. ved inflammationer; arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på volarsiden er 18 cm. Plus-størrelserne har ekstra bredde i underarmsdelen.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen er en medium-stabil håndledsortose med dobbelt lukkefunktion. Den kan åbnes helt og derefter løst lukkes med velcro og strammes til med snører. Brugeren kan selv vælge, om den skal åbnes helt hver gang ortosen skal tages på/af eller om det blot er snørefunktionen, der skal anvendes. Den har et lavt snit i håndfladen for at følge håndens naturlige bøjefurer og udskæringen rundt om tommelen tillader thenarmusklen at arbejde frit. Den todele snørelukning i kombination med velcrolukningen muliggør tilpasning ved en bredere underarm. Eftersom snøren kommer fra ulnarsiden mindskes risikoen for, at tommelen positioneres fejlagtigt. Regulerbart tommelbånd fra volarsiden. I kraft af materialets konstruktion er det muligt at justere formen med saks i forhold til optimal pasform.

Fremstillet i det luftige og behagelige SELECTION®-materialet med alle de funktioner, som dette indebærer. Ortosen er 22 cm lang, dvs 4 cm længere end en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumsskinne på volarsiden som er udtagelig.

Anvendelsesområde: Efter ophelet radiusfraktur, bløddelsskader, inflammationer, overbelastningsskader, arbejdsrelateret overanstrengelse samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved ikke-helet fraktur.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

Vission håndledsortose med skinne

En håndledsortose i standardmodel fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform inde i hånden, over håndryggen og omkring tommelens muskulatur. Den giver en stabilt støtte og har en formbar plastskinne volart. Åbent justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Basic håndledsortose, kort og lang

Enkel håndledsortose i kort og lang model med velcrolukning der giver god støtte og kompression. Åbne modeller der er lette at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrop giver fleksibilitet ved valg af størrelse. Kort model kan kombineres med ekstrabånd 27448 i forhold til ekstra stabilitet. Den lange model har et monteret elastisk bånd omkring håndleddet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Basic håndledsortose kort - Ortosens længde på volarsiden er 18 cm. Basic håndledsortose lang - Ortosens længde på volarsiden er 21 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Basic håndledsortose

Håndledsortose med integreret bånd, der giver ekstra god støtte til håndledet. Det brede proximale bånd med bred lukning giver fleksibilitet ved valg af størrelse og letter på- og afgang. Åben model der er let at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskinne volart. Højt skåret ved lillefingersiden i forhold til ulnar støtte.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Bisca® håndledsortose

Model som specielt er velegnet til reumatologiske patienter. Ortosen er forét med bomulds materiale, der er behageligt mod huden. Det integrerede bånd i kombination med den udtagelige formbare aluminiumsskinne giver god støtte.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 19 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28042	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28042	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28042	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Elcross® Carpus Flexi håndledsortose

En af de mest populære ortoser til reumatologiske patienter. Forét med bomuld, der er behageligt mod huden. Snøresystemet letter ved lukning og justering. Velegnet til patienter med svag håndfunktion. Pasformen er fleksibel og passer både en bred og smal underarm. Udtagelig formbar aluminiumsskinne.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28149	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28149	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28149	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28149	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds omkring håndled

Wrist Lacer™ II håndledsortose, kort

Meget stabil håndledsortose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart som er udtagelige. En pude på indersiden af ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøre. Fremstillet i slidstærkt mockaimitation med foer som er åndbart. Lukkesystem med et unik design som giver en jævn kompression ved alle fire bånd. Kompressionen kan enkelt justeres af patienter med udsædvanlig form på underarm og håndled. Snøren er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 21 cm. Modellen fås i beige; Wrist Lacer kort art.nr. 28570. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Pediatric	<12 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø

Wrist Lacer™ håndledsortose, kort

Meget stabil håndledsortose med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Ortosen giver desuden ulnar støtte. Fremstillet i slidstærk ruskinsimitation med åndbart foer. Justerbar tommelstrop. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd. Volar polstring ved skinnen i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 21 cm. Modellen fås i sort; Wrist Lacer II kort art.nr. 28578. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Wrist Lacer™ II håndledsortose, lang

Meget stabil håndledsortose i lang model med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Skinnerne kan tages ud og formes. En pude på indersiden af ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøre. Fremstillet i slidstærkt mockaimitation med åndbart foer. Lukkesystem med et unik design som giver en jævn kompression ved alle fire bånd. Kompressionen kan enkelt justeres af patienter med atypisk form på underarm og håndled. Snøren er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbar tommelstrop.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 26 cm. Modellen fås i beige; Wrist Lacer lang art.nr. 28572. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

Wrist Lacer™ håndledsortose, lang

Meget stabil håndledsortose med formbare aluminiumsskiner dorsalt og volart. Ortosen giver desuden ulnar støtte. Fremstillet i slidstærk ruskindsimulation med åndbart foer. Justerbar tommelstrop. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd. Volar polstring ved skinnen i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Denne model er 26 cm lang. Modellen fås i sort; Wrist Lacer II lang art. nr. 28579. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Tripod™ Wrist Lacer håndledsortose, kort

En meget stabil håndledsortose med samme gode komfort og funktionelle egenskaber som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumsskiner, som er placeret ulnar, palmar og dorsalt. Disse skinner virker sammen for at hindre radial-ulnar deviation og minimere fleksion-ekstension af håndleddet. Den ulnare skinne sammen med det dobbelte snøresystem modvirker radial-ulnar deviation. Præcis som Wrist Lacer tillader Tripod en fuld bevægelighed af tommelen. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviation, carpal tunnel syndrom, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø

V-Strap™ håndledsortose kort

V-Strap har samme egenskaber som WristLacer. Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	XX-Small	< 12 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

V-Strap™ håndledsortose lang

V-Strap har samme egenskaber som Wrist Lacer. Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 26 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål 1: Omkreds håndflade

Mål 2: Omkreds underarm



Mål 1: Omkreds håndflade

Mål 2: Omkreds underarm

CTS Vission

Vission CTS er en natskinne designet til at lindre og/eller forhindre natlig følelsesløshed i hænderne, som opstår som følge af karpaltunnelsyndrom.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom

Øvrigt: Ekstra bånd kan købes separat

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø
46051	Ekstra båndset				

CTS håndledsortose

Natortose af tynd, perforeret Krydexplast, der immobiliserer håndleddet. Beregnet til patienter med Karpaltunnelsyndrom med natlige problemer i form af hævelse, følelsesløshed og smerter.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom.

Øvrigt: Ekstra bånd kan købes separat. Båndet findes i kapitel Plast og Materiale, art. nr. 25030.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndledsortose Rigid

Smidig, elastisk håndledsortose med tommeldel, fremstillet i et moderne smidigt, let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Tommeldelen giver ved sit mere stabile materiale en god støtte og holder tommelen i neutralleje. SELECTION® Rigid har en formet plasticskinne på volarsiden og en blødere lige plasticskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til en optimal pasform.

Anvendelsesområde: Når håndleddet og tommelen har brug for aflastning fx. ved inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Denne model er 17 cm lang. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia. Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.



Mål: Omkreds håndled

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Vission håndledsortose med tommeldel

Smidig, elastisk håndledsortose med tommeldel lavet i et stabilt og slidstærkt materiale med en blød og behagelige inderside. Ortosen er beregnet til at begrænse bevægelsen i CMC og MCP I leddet og til at positionere tommelen i en funktionel position samt begrænse fleksion i håndleddet. Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd, som yderligere kan justeres i tommelgrebet.

Anvendelsesområde: Let til moderat instabilitet i CMC og MCP I, ligamentskader, betændelse, degenerative sygdomme, traume.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
4603 I	Med tommel	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Basic håndledsortose med tommel

Unik designet håndledsbandage, der støtter tommelfingeren. Tommelfingerdelen er delvis fritstående for at følge thenarmuskulaturen og sikre en god pasform. Tommelfingeren holdes i neutralløje ved hvile. Udtagelig og formbar aluminiumsskinne volart. Tommelfingerskinnen i fleksibel plast følger hele bandagens længde for at give ekstra stabilitet. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrop giver fleksibilitet ved valg af størrelse.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Ryno Lacer® II håndledsortose

Meget stabil håndleds- og tommelortose med formbare aluminiumsskinner dorsalt, volart og radiale. Den radiale tommelskinne følger hele ortosens længde og immobiliserer tommelen effektivt. Fremstillet i slidstærk ruskindsimulation med åndbart foer. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd. Ryno Lacer II er en opdateret og forbedret Ryno Lacer med bedre polstring i håndfladen, mere polstring over tommelen og opdatering af velcro på ortosens underside.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 22 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28576	Sort	X-Small	<14 cm	Ve/Hø
28576	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28576	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28576	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28576	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø




Mål: Omkreds håndled

Thermoskin artrosehandske

Handske der giver varme til smertelindring. Ydermateriale af "nonslip" giver et sikkert greb. Det patenterede Trioxon® materiale stimulerer huden til at producere varme, transporterer fugt bort fra huden og tillader huden at ånde. Det er klinisk påvist, at handsken øger temperaturen på hudoverfladen og subkutan med ca. 2°, hvilket forbedrer elasticiteten i muskler, sener og ligamenter. Sælges parvis.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53234	Sort	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Sort	Small	18-20 cm	1 par
53234	Sort	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Sort	Large	24-26 cm	1 par
53234	Sort	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Sort	XX-Large	>30 cm	1 par

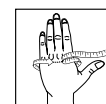

Mål: Omkreds omkring MCP-leddene



CS-Skinne

CS-skinne er en blå volar skinne, fremstillet i Polypropylen. Skinnen er anatomisk præformet i håndens hvilestilling, ud fra antropometrisk data, så den passer majoriteten af voksne. Kan omformes ved opvarming med en varmepistol. Skinnen er opbygget af et tyndere, kraftigt parti. Den kraftigste støtte ligger i hånddelen, for siden hen at tyndes ud og afsluttes i skinnens lettere afbøjede ender for ikke at give tryk. Dette giver en dynamisk støtte med en god stabilisering, hvis det ønskes.

En blød, hvid dorsal plastskinne, som er lige i formen. Skinnen har en let støttende funktion.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Pakke	Ve/Hø
35210	Volar skinne	Blå	One size	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsal skinne	Hvid	One size	11x148 mm	10	Bilat.



Ekstra håndledsbånd

Ekstra stabiliserende bånd til vores forskellige håndledsortoser. Passer til forskellige versioner af håndledsortoser.

Art. nr.	Model	Farve
27448	Basic ekstra håndledsbånd	Blå
35212	Selection ekstra håndledsbånd	Sort
35213	Selection ekstra håndledsbånd	Beige
46032	Vission & Selection ekstra håndledsbånd	Sort



Fingerkontrakturpude

Blød fingerseparator med polyesterfyld der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Beklædt med frottémateriale der opsuger fugt.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke	Ve/Hø
51616	Blå	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 stk.	Bilat.
51616	Blå	Large	10 x 12,7 cm	3 stk.	Bilat.

Håndfladebeskytter

Blød ortose der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Ønskes yderligere ekstension, kan en rulle let sættes ind mellem håndfladen og fingrene.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
51600	Håndfladebeskytter 1 stk.	Hvid/Beige	One size	Ve/Hø
51601	Håndfladebeskytter 3 stk.	Hvid/Beige	One size	Ve/Hø



Håndfladebeskytter med fingerdeler

Blød bandage der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Materialet mellem fingrene giver en let abduktion. Kan åbnes helt for let påtagning.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
51605	Hvid/Beige	One Size	Ve/Hø




Carve-It™ håndpositioneringsortose

Ortose der hjælper med til at holde hånden, ved mild til moderat fingerspasticitet, i en funktionel position. Ortosen har udtagelig polstring. Inde i hånden findes en anatomisk formet skumdel, der bevarer håndfladens runding. En flad underside gør den let at positionere mod underlaget eks. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal anvendelse til både venstre og højre hånd.


Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

Øvrigt: Aftageligt betræk der kan håndvaskes og lufttørres.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51650	Hvid	Small/Medium	<7,6 cm	Bilat.
51650	Hvid	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilat.

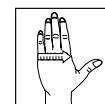

Mål: 2-5 MCP-led

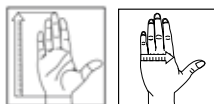

Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

SOT Tommelortose

SOT Tommelortose er en anatomisk formet hvileortose til tommel og håndflade. Ortosen positionerer tommelfingeren i en optimal hvileposition. Den er udformet til at begrænse bevægelserne i tommelens CMC -og MCP-led, give støtte til håndfladen samt positionere tommelens led og muskler i en behagelig hvileposition. SOT har en kerne af aluminium, som gør, at ortosen kan tilpasses og formes til individuel pasform. Ortosen kan justeres såfremt kontrakturen forandres. Det smidige design gør den til et godt alternativ til specialfremstillede hvileortoser. Læs mere om tilpasning og justeringer i brochuren Tips & Tricks.

I tilfælde hvor der behøves ekstra støtte til håndleddet kan SOT Tommelortose bruges sammen med en håndledsortose. Vision Håndledsortose 46029 og Selection Open Wrist 35207 er optimale ortoser i forhold til at kombinere med SOT Tommelortose.

Anvendelsesområde: SOT Tommelortose er beregnet til brug ved slidgigt, reumatoid arthritis, adduktionskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Øvrigt: SOT Tommelortose kan vaskes i 40 grader.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra betræk	Small	Ve/Hø		
28721	Ekstra betræk	Medium	Ve/Hø		
28721	Ekstra betræk	Large	Ve/Hø		

SOT hvileortose

SOT Hvileortose er lavet til hænder, som behøver støtte af en ortose ved hvile eller til udspænding, for at bibeholde eller øge håndens bevægelighed. Den meget gennemtænkte biomekaniske positionering af leddene stimulerer den spatisk hånd til afslapning og kan også bidrage til mindre smerte. Ortosen kan også anvendes til at positionere håndleddet i neutral stilling. Betrækket fordeler trykket på volar- og dorsalsiden af hånden samt armen og kan derved forhindre eller eliminere hævelse. Ortosen leveres i en grundposition i hvilestilling. Den kan enkelt omformes til POSI (Position of Safe Immobilization) ved anvendelse efter trauma og håndkirurgi. SOT er en smidig og let ortose med et moderne design. Kernen er aluminium, hvilket gør, at ortosen enkelt kan finjusteres til ønsket position. Aluminiumkernen er dækket af polyetenscum som er et behageligt materiale. Betrækkets glatte yderside og ortosens lave profil gør at den har plads under tøj. Til ortosen findes en del ekstra tilbehør. Det ikke elastiske håndledsbånd kan anvendes til at give et mere fast tryk over håndleddet, f.eks. ved spasticitet og der forefindes fingerdeler og kiler i flere forskellige størrelser.


Anvendelsesområde: Stroke, cerebral parese, reumatoid arthritis, plexus- og muskelsvind, radialis-parese. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) ved trauma frakturer, brandskader, ligamentskader og efter kirurgi.

Øvrigt: Udover det ekstra håndledsbånd, findes der to andre tilbehør: en fingerdeler og en kile i tre forskellige størrelser



Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

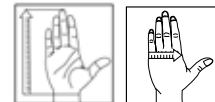

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28711	MCP KIL	Sort	XX-Small	Bredde 65 mm	Højde 10 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Sort	Small	Bredde 75 mm	Højde 15 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Sort	Large	Bredde 90 mm	Højde 20 mm	Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Børn			Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Medium			Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Large			Bilat.
28713	Ekstra bånd	Sort	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	Ekstra bånd	Sort	Small-Large			Bilat.
28714	Ekstra betræk	Sort	XXX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	XX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	X-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Medium			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Large			Ve/Hø



Mål 1: Fra håndled til midten af langfinger.

Mål 2: Total længde. (fra midten på underarmen til toppen af langfinger)



Comfy håndledsortose

En hvileortose som hjælper med at bibeholde/forbedre ekstension i håndled, MP-, PIP og DIP leddet. Den forebygger også yderligere deformiteter, forbedre ROM og understøtter en god hygiejne af involveret extremitet. Ortosen kan justeres til ønsket

ekstension/fleksion af håndled og finger. Betrækket er en polyester/ bomuldsblanding,

som tillader cirkulation af luft og mindsker risikoen for skader på huden

Anvendelsesområde: Positionere og støtter hånden ved håndleds- MP-PIP eller DIP bøjningsmønstre; ulnar deviation, drophånd, deformiteter relateret til neuromuskulær svækkelse

Kontraindikationer: Cirkulationsproblem, trykpunkter eller hudirritationer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
51645	Comfy håndledsortose	Blå	Small	15-18 cm	28 cm	Bilat.
51645	Comfy håndledsortose	Blå	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled

Kwik-Form™ progressiv håndledsortose

Ortose med fast skinne og aftagelig polstring. Skinnen kan justeres uden værktøj. Støtter hånd og håndled. Tre håndruller i forskellige størrelser medfølger til progressiv behandling af fleksionskontrakturer i hånden.

Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af fremskredne kontrakturer og ændret tonus.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51630	Klar Blå	Small/Medium	<18 cm	Bilat.
51630	Klar Blå	Medium/Large	>18 cm	Bilat.

Kwik-Form™ hvileortose

Ortose der kan justeres til ønsket position uden værktøj. Velcrobåndene hæfter direkte mod ortosens bløde betræk. Støtter tommelfinger, hånd og håndled.

Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51638	Klar Blå	Small/Medium	<18 cm	Ve/Hø
51638	Klar Blå	Medium/Large	>18 cm	Ve/Hø




Mål: Omkreds håndled

Præformet hvileortose

Ortose der holder hånd og håndled i hvilestilling. Skinnen er fremstillet af lavtemperaturplast, 3,2 mm Polyform, der kan formes til individuel tilpasning. Selvklæbende bånd, der med fordel kan påsættes med varmepistol, medfølger.

Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus, reumatologiske sygdomme, hvileskinne.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
53223	Beige	Small	<8,9 cm	Ve/Hø
53223	Beige	Medium	9-10,2 cm	Ve/Hø
53223	Beige	Large	>10,2 cm	Ve/Hø

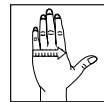

Mål: 2-5 MCP-led

Hånd- og håndledsortoser

Art.nr.	Beskrivelse	Farve	Størrelse	Venstre/ Højre	Stabilitet *	Skinne Dorsalt
28210	Gripa Håndled	Mørkblå	S - XL	●	0	
34103	Elements Håndled	Beige/Sort	S - XL	●	I	
34107	Elements Bromsa Håndled	Beige/Sort	S - XL	●	2	●
28230	Let Håndled	Mørkblå	One size	Bilat.	0	
27441	Basic Kort	Mørkblå	XS - XL	●	I	
27442	Basic Håndled/Tommel	Mørkblå	XS - XL	●	I	
27445	Basic Lang	Mørkblå	XS - XL	●	I	
27446	Basic Åben	Mørkblå	XS - XL	●	I	
28042	Bisca Håndled	Mørkblå	S - L	●	2	
28149	Elcross Carpus Flexi	Mørkblå	S - XL	●	2	
28240	Bromsa Håndled	Mørkblå	S - XL	●	2	●
43030	Vission Håndled kort	Sort	XXS - XXL	●	I	
46029	Vission Håndled med skinne	Sort	XXS - XL	●	2	
46031	Vission Håndled med tommel	Sort	XXS - XL	●	2	
35208	Selection Bromsa Håndled	Sort	XS - XL	●	2	●
35204	Selection Håndled Soft	Sort	XS - XXL	●	2	●
35205	Selection Håndled Soft	Beige	XS - XXL	●	2	●
35206	Selection Håndled Rigid/Tommel	Sort	XS - XXL	●	2	●
35209	Selection Multiopen	Sort	XS - XXL	●	2	
35207	Selection Open Wrist	Sort	XS - XL	●	2	●
35306	Selection Open Wrist Børn	Sort	S - L	●	2	●
35222	Selection Handled Kort	Sort	XS - XL	●	I	
35223	Selection Handled Kort	Beige	XS - XL	●	I	
35305	Selection Håndled Børn	Sort	XXS - L	●	2	
46050	Vission CTS	Grå	S & L	●	3	
28542	CTS Håndled	Lyseblå	S & L	●	3	●
28578	Wrist Lacer II	Sort	XXS - XXL	●	3	●
28579	Wrist Lacer II lang	Sort	S - XL	●	3	●
28570	Wrist Lacer kort	Beige	XS - XL	●	3	●
28572	Wrist Lacer lang	Beige	S - XL	●	3	●
28574	V-Strap kort	Sort	XXS - XXL	●	3	●
28575	V-Strap lang	Sort	S - XL	●	3	●
28576	Ryno Lacer II / Tommel	Sort	XS - XL	●	3	●
28577	Tripod Wrist Lacer	Sort	XS - XL	●	3	●

*Stabilitet: 0= Lav, I = Medium, 2= Medium Plus, 3= Høj

Skinne Volart	Skinne Radial/ Ulnar	Tommel	Justerbar tommelstrop	Snøre	Velcrobånd	Modvirker dorsalekstension	Total længde
					●	-	18 cm
●					●	Mindre grad	17 cm
					●	Høj grad	15 cm
					●	-	-
●			●		●	Mindre grad	18 cm
●		●	●		●	Mindre grad	18 cm
●			●		●	Vis grad	21 cm
●			●		●	Mindre grad	18 cm
●					●	Vis grad	19 cm
●			●	●		Mindre grad	18 cm
					●	Høj grad	15 cm
			●		●	Mindre grad	13,5 cm
●			●		●	Vis grad	18,5 cm
●		●	●		●	Vis grad	18,5 cm
					●	Høj grad	15 cm
●			●	●		Vis grad	18 cm
●			●	●		Vis grad	18 cm
●		●	●	●		Vis grad	18 cm
●			●	●	●	Høj grad	22 cm
●					●	Vis grad	18 cm
●					●	Vis grad	16 cm
			●	●	●	Mindre grad	13 cm
			●	●	●	Mindre grad	13 cm
●			●	●		Vis grad	11 - 17,5 cm
●						Meget høj grad	20 cm
●			●		●	Meget høj grad	21 cm
●			●	●	●	Høj grad	21 cm
●			●	●	●	Høj grad	21 cm
●			●	●		Høj grad	21 cm
●			●	●		Høj grad	26 cm
●			●		●	Høj grad	20 cm
●			●		●	Høj grad	26 cm
●	●	●	●	●		Høj grad	21 cm
●	●		●		●	Høj grad	20 cm

Egne notater

[illegible]



Arm- og skulderortoser

www.camp.dk



Mål: Rundt albueleddet



Mål: Omkring albueleddet når dette er bøjet.



Mål: Omkredsen 5 cm nedenfor albuen.

Albue-/hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykafastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53600	Gul	Small	15-20 cm	Par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	Par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	Par

ELEMENTS albue

ELEMENTS Albue er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte og betændelse. Støttebandagen giver en let kompression og holder leddet varmt.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte og betændelse.

Kontraindikationer: Ødem eller kraftig hævelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34101	Beige/Sort	Small	23 - 25 cm	Bilat.
34101	Beige/Sort	Medium	25 - 27 cm	Bilat.
34101	Beige/Sort	Large	27 - 30 cm	Bilat.
34101	Beige/Sort	X-Large	30 - 33 cm	Bilat.

ELEMENTS Epi

ELEMENTS Epi er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer f.eks. tennis-/golfalbue. Epi-bandagen kan i enkelte tilfælde kombineres med en støttebandage til håndleddet. Ortosen aflaster senefæstet ved hjælp af et let tryk på underarmsmuskulaturen. Den bedste funktion opnås ved brug af de medfølgende indlægsputer.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer f.eks. tennis-/golfalbue.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem eller kraftig hævelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34104	Sort	Small/Medium	20 - 28 cm	Bilat.
34104	Sort	Large/X-Large	28 - 36 cm	Bilat.

EpiGel epicondylit

Behagelig epicondylit-ortose med to flytbare gelépuder der aflaster ved kompression over ekstensor- og fleksormusklerne, uden at give kompression omkring underarmen. De bløde gelépuder er stødaflastende. Ortosen har lav profil. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

Anvendelsesområde: Lateral og/eller medial epicondylit (feks. tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28166	Sort	One Size	20-35 cm	Bilat.



Mål: Omkreds 5 cm under albuen

EpiFoam epicondylit

Epicondylit-ortose med en foampude der placeres enten over ekstensor-musklen for at give aflastning ved lateral epicondylit eller over fleksormusklen for at give aflastning ved medial epicondylit. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

Anvendelsesområde: Lateral og/eller medial epicondylit (f.eks. tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28165	Sort	One Size	20-35 cm	Bilat.



Mål: Omkreds 5 cm under albuen

Elcross epicondylit

Ortose der giver tryk for aflastning af muskulatur, sener og senetilhæftninger. Mindsker smerte ved epicondylit. Blød pude på indersiden kombineret med en plastbrik som øger trykket under båndet på ortosen.

Anvendelsesområde: Lateral eller medial epicondylit (tennis- eller golfalbue).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
28162	Blå	Small	20-25 cm
28162	Blå	Medium	25-30 cm
28162	Blå	Large	30-35 cm
28162	Blå	X-Large	35-40 cm



Mål: Omkreds 5 cm under albuen



Mål: Omfang bryst i niveau med armhulen.

HemiSafe

Blød og behagelig skulderortose som er anvendes ved hemiplegi efter blodprop for at mindske smerten i skulderleddet samt reducere risiko for sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk pasform. Den giver støtte til skulderleddet men tillader bevægelighed ved daglig aktivitet. HemiSafe er fremstillet i et åndbart materiale og har justerbare, brede, bløde bånd omkring kroppen.. Hvis man ønsker øget abduktion anvendes den medfølgende pude som placeres i armhulen. Ortosen kan tages på og af med en hånd.

Anvendelsesområde: Mindske smerte i skulderled efter blodprop. Reducere risiko for sublaxation i skulderleddet.

Øvrigt: Latexfri

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Ve/Hø
28157	Hvid	Small	80-100 cm	Ve/Hø
28157	Hvid	Medium	100-120 cm	Ve/Hø
28157	Hvid	Large	120-140 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds brystkurven
Mål 2: Længde overarm

Vission skulderortose IMMO

Vission Skulderortose er beregnet til at immobilisere og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er specielt egnet til skulder og brystmuskelskader. Ortosen er vendbar og kan anvendes både til venstre og højre skulder.

Anvendelsesområde: Skulder-, arm-, albueskader og skader i skulderleddet (fraktur, dislokation og forstuvning). Efter skulder- og brystmuskul-kirurgi. Plexus brachialis-parese.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm

Armslynge på rulle

Denne enkle variant af armslynge (Collar'n Cuff), mitella, leveres på 12 meters rulle. Emballagen indeholder to ruller, en i dispenserbox og 10 stk Y-velcrofæste for at kunne skabe en fiksering af armen. Materialet er blødt og smidigt samtidigt at det holder formen også under belastning. Den mørkeblå farve gør at slyngen holder sig frisk længe.

Anvendelsesområde: Anbefales ved traume på håndledet, albue og skulder. Kan også bruges i kombination med gips.

Art. nr.	Model	Farve	Bredde	Længde	Pakke
42212	Armslynge på rulle	Sort	5 cm	2 x 12 meter	Rulle




NYHED!

Armslynge FOAM

Armslynge med ekstra bånd til fiksering. Frottémateriale på indersiden. Justerbart skulderbånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
2003 I	Grå	Small	28-36 cm	Bilat.
2003 I	Grå	Medium	35-42 cm	Bilat.
2003 I	Grå	Large	41-49 cm	Bilat.
2003 I	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilat.

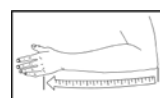


Mål: Albue til MCP

Armslynge BOMULD


Enkel armslynge af bomuld der har trinløst skulderbånd. Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både med eller uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
4710 I	Grå	Small	25-28 cm	Bilat.
4710 I	Grå	Medium	27-30 cm	Bilat.
4710 I	Grå	Large	29-32 cm	Bilat.
4710 I	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilat.

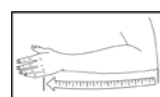

Mål: Albue til MCP

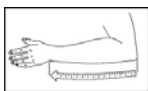

Mål: Albue til MCP

Armslynge NET

Luftig armslynge med trinkløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både med eller uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mål 1: Slynge Højde og Bredde

Mål 2: Omslag Højde og Længde

Armslynge WRAP

Traditionel armslynge i to dele der kan justeres uafhængigt af hinanden. Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Armdelen har et plastspænde på ryggen der holder de to bånd sammen for at forhindre disse i at glide ud over skuldrene. Omslaget justeres trinkløst med velcrobånd.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.



Mål 1: Slynge Højde og Bredde

Mål 2: Omslag Højde og Længde

Armslynge todelt, blå

Armslynge i foam med bredt aftageligt bånd til fiksering. To bærende bånd der fordeler vægten over begge skuldre. Kryds på ryggen holder båndene på plads. Justerbare bånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

Anvendelsesområde: Aflastning posttraumatisk og postoperativt.


Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
20045	Blå	Small/Medium	24 cm, 32 cm	10 cm, 100 cm	Bilat.
20045	Blå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 135 cm	Bilat.

Armslynge "8"

Let og luftig armslynge til aflastning af skulder, arm og hånd. To brede regulerbare bånd fordeler vægten over begge skuldre og samles i en metalring på ryggen. Kan tages på og af med én hånd. Velegnet ved neurologiske sygdomme.

Anvendelsesområde: Neurologiske sygdomme, aflastning, posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
53200	Beige	Small/Medium	< 34,5 cm	Bilat.
53200	Beige	Large/X-Large	30 - 38 cm	Bilat.

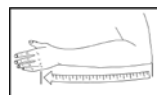

Mål: Længde underarm albue-MCP.

Skulderlås

En universel armslynge med lavprofil som er let at tage på. Den leveres komplet inklusiv et taljebånd hvor overarmen fæstes for effektivt immobilisere af skulderen. Håndledsdelen fæstes foran ved taljebåndet med hjælp af et klikspænde. Der er også et ekstra tommelfingerbånd for at holde hånden i korrekt vinkel og undgå en drophånd. Skulderremmen er justerbar for at få en behagelig pasform og passer både til venstre og højre side. Der er en stor komfortpude der fordeler trykket over skulderen/kravebenet. Skulderlåsen er let at montere og enkel at anvende. Længden på taljebåndet er 120 cm.

Anvendelsesområde: Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
42213	Skulderlås	Sort	Onesize



NYHED!



Mål: Omkreds overarm proximalt.

Humerux Humerusortose

Denne humerusortose er baseret på de velkendte principper til en "Sarmiento-ortose", en glat cirkulær bløddelskompression. De tre cirkulære stropper strammes uafhængigt af hinanden. Ortosens forankring over skulderpartiet gør, at den passer godt uden at glide ned. Båndet, der går under den modsatte arm, har en flytbar polstring, som giver ekstra komfort. Dette giver en behagelig ortose, der er let at anvende og let for patienten at acceptere. Materialet er ventilerende, giver huden mulighed for at ånde og reducerer risikoen for irritation. Ortosen har to termoplastiske plader, der kan justeres ved opvarmning, hvis det er nødvendigt. Formen kan justeres med en saks. I de fleste tilfælde er dette dog ikke nødvendigt. Ortosen giver fri bevægelighed til albueleddet. Tekstilmaterialerne er testet i overensstemmelse med Øko-tex standard 100 og indeholder ikke latex.

Anvendelsesområde: Diaphyseal humerusfrakturer (skaftfrakturer)

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde	Omkreds
62105	Sort	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Sort	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Sort	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Sort	X-Large	34 cm	42 - 50 cm



ROM albue-ortose

Postoperativ albue-ortose designet til at låse eller kontrollere albuens bevægelser ved behandling af ligamentskader eller stabile frakturer. Tillader kontrol fra 0° til 90° i ekstension og fra 0° til 120° i fleksion. Bevægelsen ændres enkelt i 10° interval. Ortosens længde og omfang justeres fra 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderer en armslynge.

Anvendelsesområde: Frakturer, postoperativt, tilstand hvor kontrol af fleksion og ekstension kræves.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø
62150	One Size	Ve/Hø
62149	Ekstra polstring	Ve/Hø

ROM albue-ortose UniBor

Postoperativ albue-ortose med den seneste generations teknologi. Bevægelsen ændres enkelt i fleksion-extension i 10° interval med 120° ROM. Leddet kan låses i ønsket position. Ortosens længde og omfang kan justeres. Til Ortosen kan der bestilles en teleskopisk håndstøtte, som kan justeres og tages af og på, for kontrol af pronation-supination. ROM Albue-ortose UniBor stabiliserer armen og tilbyder en behagelig og effektiv behandling.

Anvendelsesområde: Kontrol af fleksion-ekstension af albuen og pronation-supination efter traume.

Øvrigt: Længden på den daglige behandling og behandlingstid skal ordineres af lægen.

Art. nr.	Model	Ve/Hø
62151	Albue-ortose UniBor	Bilat.
62152	Ekstra bånd	Bilat.
62153	Hånddel	Bilat.
62154	Ekstra polstring	Bilat.



Egne notater

[illegible]



FES - Funktionel Elektrisk Stimulation

www.camp.dk

a

ALFESS™

Fremtidens FUNKTIONEL ELEKTRISK STIMULERINGS SYSTEM



FUNKTIONER & FORDELE

- Kan appliceres med en hånd
- Letvægt
- Diskret under tøj
- Enkel at programmere på enheden, håndkontrol eller i mobilapp
- Integrerede elektroder (behøver ikke bestille ekstra)
- En enhed - one size - enkelt at bestille
- Muligt at gå barfodet
- Vandtæt (kort tid)
- To aktivitetsindstillinger: Gang og Træning
- Oplader til integreret batteri



*Indstillinger laves på:
Enheden, fjernbetjening
eller i mobilapp*

ALFESS™ - Funktionelt Elektrisk Stimulations System

ALFESS™ er den nye innovative løsning til dropfod. Denne type enhed kan også kaldes Digital Dropfodsorthose, FES eller Neurostimulator. Enheden hjælper med at løfte foden for at give et bedre gangmønster. En algoritme samler oplysninger fra sensorer, der registrerer hastighed og vinkler benet. Alfess-enheden sender elektriske impulser til nerven, så foden eleveres. Enheden er placeret på benet under knæet. Efter den første test af en ortopædisk ingeniør, kan graden af stimulering justeres af brugeren via enheden, fjernbetjeningen eller via en mobilapp (kan downloades, hvor apps er placeret). Enhedens form giver en jævn og fleksibel pasform. Det magnetiske spænde gør det nemt at tage af og på og håndtere med én hånd. Enheden kan indstilles til gangtilstand eller i træningstilstand, der giver brugeren mulighed for at udføre rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller alene efter givne instruktioner. Enheden er nem at oplade og bruge og er ikke

Anvendelsesområde: Centrale nerveskader som; Multipel sklerose (MS), Slagtilfælde, Cerebral parese (CP), ufuldstændige rygmærksskader, traumatiske hjerneskader.

Kontraindikationer: Anvendes ikke sammen med elektronisk overvågningsudstyr, defibrillator og højfrekvent medicinsk udstyr. FES-behandling bør ikke anvendes til patienter med pacemakere. Må ikke bruges, hvis du har en historie med autonom dysreflexi. Brug ikke FES efter nylig kirurgi, hvor muskelsammentrækning kan forstyrre helingsprocessen. Du kan finde flere oplysninger vejledningen, der følger med produktet.



Art. nr.	Modell	Størrelse
28270	ALFESS™ Komplet	One size
28271	Forlængelses-bånd	One size
28272	Stikkontakt EU	One size
28273	Stikkontakt UK	One size
28274	Ekstra kabel fjernbetjening	One size
28275	Ekstra opladningsledning til ALFESS	One size
28277	Fjernbetjening	
28279	Ekstra D-ring med magnet	One size
28283	Connect Gel	500 ml

Egne notater

[illegible]



Fod- og fodledsortoser

www.camp.dk



Mål: Omkreds ankel.



Mål: Omkreds ankel.



Mål: Mål tages omkring foden over fodryggens højeste punkt.

Albue- og hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykaflastende, udtagelig gelplade der beskytter huden og forebygger tryksår.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53600	Gul	Small	15-20 cm	1 par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	1 par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	1 par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	1 par

ELCROSS® ankel

Smidig blød fodledsstøtte i bomuld og lycra, formet som en strømpe, hvilket giver en jævn kompression. Det integrerede elastiske bånd løfter fodens lateralside for at mindske risikoen for forstuvning. Let at tage på.

Anvendelsesområde: Lettere fodledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28181	Blå	Small	20-25 cm	Ve/Hø
28181	Blå	Large	25-30 cm	Ve/Hø

ELEMENTS ankel

ELEMENTS ankel er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte, forstuvninger og forvridninger (inad eller udad). Støttebandagen kan anvendes med eller uden de elastiske bånd. Støttebandagen giver let kompression og holder leddet varmt. Ledets bevægelsesomfang begrænses af de elastiske trækbånd.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte, forstuvninger og forvridninger.

Kontraindikationer: Kontraindikationer: Kraftigt ødem (væskesamling), kraftig hævelse, neuropati, fodproblemer pga. diabetes eller bensår.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34100	Beige/Sort	Small	20 - 23 cm	Bilat.
34100	Beige/Sort	Medium	23 - 26 cm	Bilat.
34100	Beige/Sort	Large	26 - 29 cm	Bilat.

ASO® fodledsortose

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner taping og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillesenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28188	Uden skinner	Sort	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	XXX-Large	>40 cm	Bilat.




Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen

ASO® fodledsortose med skinner

Stabil fodledsortose med lav profil og udtagelige plastskinner både medialt- og lateralt og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner taping og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillesenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28186	Med skinner	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

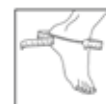

Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen

ASO®EVO™

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner taping og hindrer foden i at supinere/pronere. På ASO EVO giver nylonbåndene omkring calcaneus en større modstand mod inversion/eversion af calcaneus, end standard ASO. Den øverste del er forstærket med en plastmanchet og derved forbedres beskyttelsen mod høje forstuvninger i fodleddet. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillesenen.

Anvendelsesområde: Akut- eller langvarig fodledsinstabilitet, præventivt ved idrætsudøvelse, høje forstuvninger i fodleddet og subtalarleds-instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28189	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28189	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28189	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28189	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28189	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28189	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen

ASO®EVO™ Quatro

Stabil ankelstøtte med endnu lavere profil end ASO EVO. Materialet rundt om mellemfoden er reduceret for ikke at begrænse plantarflexionen. De stumme nylonbånds placering efterligner taping og hindrer foden at supinere/pronere. På EVA Quatro giver nylonbåndet rundt calcaneus en større modstand mod inversion/eversion af calcaneus end standard ASO. Den øvre del er forstærket med en plastmanchet og derved forbedres beskyttelsen mod høje fodledsforstuvninger. Manchetten er polstret med CoolFlex polstring for en bedre komfort og Skinloc materialet for at undgå glidning.

Anvendelsesområde: Inversion eller eversion ankelforstuvning, høje ankelforstuvninger, medial eller lateral ankel instabilitet, subtalar ledinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28192	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28192	Sort	Small	27,7-30 cm	Bilat.
28192	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28192	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28192	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28192	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS stretch up er beregnet til at anvende om aftenen/natten ved behandling af Plantar Fasciit. Strømpen anvendes om natten eller ved hvile på andre tider af døgnet. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse af én person. Størrelser : Small, Medium og Large. Passer både til højre og venstre fod.

Anvendelsesområde: Anvendes om aftenen/natten ved behandling af Plantar Fasciit.

Kontraindikationer: Cirkulationsproblemer, Åbne sår på ben eller fod, diabetes, ødem, hammertå, hudproblemer, og/eller under graviditet. Strømpen skal ikke anvendes af personer der for nylig har gennemgået operationer i fod og/eller ben.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34108	Sort	Small	< 20 cm	Bilat.
34108	Sort	Medium	20 - 40 cm	Bilat.
34108	Sort	Large	> 40 cm	Bilat.



Mål: Omkreds læg

Gel Ankelortose

Ankelortose for immobilisering, køle og kompression for at reducere hævelse efter akut skade i anklen. De anatomisk formede plastdele har puder, der er opdelt i to, en med luft og en med gel. Disse kan fjernes og bruges til kølebehandling. Bredden under foden justeres med velcrobånd. Plastdelen er 25 cm lange. To cirkulære velcrobånd låser ortosen mod benet.

Anvendelsesområde: Akut ankelskader, forstuvninger og langvarig fodledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28179	Hvid	Onesize	25 cm	Bilat.



Ankelortose Stabil Soft

Stabil fodledsortose med enkle cirkulære bånd. Sidestøtter af Polypropylene er anatomisk formede. Indermateriale af T-foam/skumplast der former sig og følger underbenets kontur. Ortosen skal anvendes sammen med en stabil sko.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28184	Sort	One Size	Bilat.





PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) er udviklet for at aflaste hæl og hælsår ved sengeleje og ved kortere forflytning. Ortosen holder foden i neutralleje ved sengeleje og bibeholder dorsal- og plantarfleksion ved forflytning. Justerbar skinne modvirker inad- og udadrotation ved sengeleje. Regulerbar fod-, tå- og lægdel.

Anvendelsesområde: Velegnet ved fx. diabetessår og tryksår.

Øvrigt: Let at tage polstringen ud ved vask.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
71100	PRAFO Standard	Sort	One Size	Bilat.
71110	Ekstra polstring og bånd	Sort	One Size	

Boston Soft AFO

Ankel- og fodortose i rigid plast forét med en blød foam. Beregnet til at forbedre positionering af fod og fodled samt reducere spasticitet. Ortozen har en indbygget hælbeskytter for at lette healing af hælår. Boston Soft AFO findes i to udførelser med eller uden antirotationsskiner (stabilizer). Den er let at rengøre og kan trimmes med en saks.

Anvendelsesområde: Rygmarvsbrok, muskeldystrofi, CP, traume og hælår.

Øvrigt: Stabiliseringsskinne kan bestilles i samme størrelser som Boston Soft AFO.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
71151	Uden stabilizer	Barn 1	Bilat.	19-20
71151	Uden stabilizer	Barn 2	Bilat.	21-22
71151	Uden stabilizer	Barn 3	Bilat.	23-24
71151	Uden stabilizer	Barn 4	Bilat.	25-26
71151	Uden stabilizer	Barn 5	Bilat.	27-29
71151	Uden stabilizer	Barn 6	Bilat.	30-31
71151	Uden stabilizer	Voksen A	Bilat.	32-34
71151	Uden stabilizer	Voksen B	Bilat.	35-36
71151	Uden stabilizer	Voksen C	Bilat.	37-39
71151	Uden stabilizer	Voksen D	Bilat.	40-41
71151	Uden stabilizer	Voksen E	Bilat.	42-44
71151	Uden stabilizer	Voksen F	Bilat.	45-46
71152	Beregnet til 71151	Stabiliseringsskinne		



Bebax forfodsortose

Bebax er en innovativ pediatrik fodortose designet for at opnå en progressiv og dynamisk korrektion af en Congenital forfodsfejlstilling. Ortosen er et medicinsk accepteret alternativ til gips. Bebax eliminerer almindelige hudproblemer, der kan opstå under gipsen. På undersiden mellem forfoden og hælen er der et led, der gør det muligt at justere vinklen på alle niveauer. Den er lavet af økologisk kunstlæder i overensstemmelse med Øko-Tex Standard 100, fri for krom og latex. Den har lav vægt, en blød polstring og er let at håndtere ved af/på tagning. Størrelser fra str. 10 1/2 har et ankelbånd for at holde hælen på plads. Ortosen er ikke beregnet til at gå med, dette gælder alle størrelser.

Anvendelsesområde: Congenital forfodsfejltilninger.

Øvrigt: Størrelse = indersålens længde

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28637	Hvid	7,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	8 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	8,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	9,0 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	9,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	10 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	10,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	11,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	12,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	13,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	14,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	15,5	Ve/Hø
28637	Hvid	16,5 cm	Ve/Hø

Surestep™ - Løsninger ved tågang

Indy 2 Stage - Solid

Indikationer:

- Stramme/spastiske plantarflexorer
- Manglende evne til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Pronation eller hyperekstension når hælen befinder sig i gulvet.



Indy 2 Stage - Leddet, PLS, Dorsalflexions Assist

Indikationer:

- Stramme/spastiske plantarflexorer
- I stand til til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Barnet kan få foden ned uden overdreven pronation eller hyperekstension.



Tågang SMO

Indikationer:

- Vedvarende tågang
- I stand til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Tågang i mere end 50% af tiden (uforandret med sko)
- Vægtforskydning fremad og mangel på lateral tyngdeforskydning
- Sensorisk reduktion.



SMO

Indikationer:

- Kortvarig tågang
- I stand til få foden i 90 grader vinkel med knæet strækt.
- Overdrevet pronation
- Tågang i mere end 50% af tiden (forbedring med sko)
- Vægtforskydning fremad og mangel på lateral tyngdeforskydning
- Sensorisk reduktion.



Vigtige overvejelser

- Alder
- Range of motion
- Primære reduktioner
- Grovmotorisk funktionsniveau
- Tågangens andel i % af tiden
- Brug anamnese-historik
- Postural kontrol





SureStep SMO

SureStep er en dynamisk fodortose beregnet til børn. Ortosen kontrollerer fodens og fodleddets pronation hos børn med lav tonus. Koordination og balance forbedres. Kan anvendes med almindelige sko. SureStep er fremstillet af meget let og tynd plast. Fremstilles efter individuelle mål.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodleddet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande: lav tonus, slappe ligamenter, forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå.

Kontraindikationer: Kontrakturer- Foden skal nå neutralleje (90°) ved passiv manipulation, forhøjet tonus, spasticitet

Øvrigt: SureStep fremstilles i USA efter mål, hvis I har spørgsmål til måltagningen kontakt jeres bandagist eller kundesupport hos Camp Scandinavia A/S.

Art. nr.	Model	Type	Pakke	Vægt
28633	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Par	op til 36 kg
28634	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Stk.	op til 36 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Valgfri	Stk.	
28733	Toe Walking Extension	Valgfri	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28635	Måletaske			
93300	Måletaske til udlån			

SureStep BigShot SMO

Selvom mange børn overgår fra SureStep til en mindre ortose, har en del børn fortsat behov for maksimal støtte og stabilitet. Til disse børn har vi udviklet BigShot. Denne ortose har samme fleksibilitet som SureStep og kan anvendes af de børn som er vokset ud af SureStep eller som nærmer sig vægtgrænsen på 36 kg. Det bløde silikone lignende inderhylster gør ortosen behagelig og den ydre fleksible ramme af plast giver en fleksibel støtte.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodledet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande: lav tonus, slappe ligamenter, forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå, >36 kg

Kontraindikationer: Kontrakturer- Foden skal nå neutralstilling (90°) ved passiv manipulation, forhøjet muskeltonus, spasticitet

Øvrigt: SureStep BigShot fremstilles i USA efter mål, hvis I har spørgsmål til måltagningen kontakt jeres bandagist eller kundesupport hos Camp Scandinavia A/S. Undtagelsesvis kan en gipsafstøbing være nødvendig. I så fald vil Camp kontakte jer.



Art. nr.	Model	Type	Pakke	Vægt
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Par	Over 36 kg
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Stk.	Over 36 kg
28736	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Par	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Stk.	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Valgfri	Stk.	
28733	Toe Walking Extension	Valgfri	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Valgfri	Stk.	



SureStep Advance

Advance er en SureStep som strækker sig op på benets bagside for at hjælpe til med at reducere sagital instabilitet, modvirke dorsifleksion/plantarfleksion, forenkle selvstændig stående og forbedre proprioception sammenlignet med en traditionelle ortose. For øvrigt har ortosen SureSteps alle fordele. Dette unikke system opmuntre barnet til at gå fra assisteret stående til selvstændig stående ved at stabilisere fødderne og anklerne uden at immobilisere dem. Når barnet starter med at flytte sig og opnår behov for øget bevægelighed og lavere profil på ortosen, kan SureStep Advance nemt ændres ud med en SureStep SMO.

Anvendelsesområde: Pronation, lav tonus, instabilitet i tre plan ved belastning, ingen evne til at opretholde et selvstændig stående, mild tågange.

Kontraindikationer: Forhøjet muskeltonus, spasticitet, graverende tågang.

Art. nr.	Model	Pakke
28639	Gips & mål	Par
28639	Gips & mål	Stk.

SureStep Indy 2 Stage

En ortose med et unikt design, udviklet så børn kan opnå sin bevægelsesevne fra flere forskellige niveauer. Ortosen findes i to udførelsesformer; Solid, som er uden led, leddet. Denne unikke tottrinsortose (en ortose inde i en anden ortose) gør det muligt at bruge Surestep uafhængig af AFO'en. Den tillader barnet at flytte sig på flere forskellige måder uden at hæmme den normale muskelfunktion. Når begge ortoser benyttes samtidig, låser SMO'en sig sikkert inde i AFO'en og omdanner derved den dynamiske SMO'en til en AFO som giver stabilitet i tre plan uden at begrænse den normale brug af fodens indre muskulatur. Indy 2 Stage Solid er ideel for børn som trænger proksimal støtte af en AFO, for at opnå et uafhængigt stående, men som forsat har glæde af en SMO for at kunne kravle og tage sig op til stående aktiviteter på korrekt vis. I løbet af tiden som disse børn udvikles og starter med at tage selvstændige trin med sin AFO, kan du forsætte at arbejde med at forbedre bevægelsesmønstre og muskelstyrke med SMO'en for at opnå en smidigere overgang til mindre brug af ortosen. Børn med funktionshindre som leder til at de bliver trættede over dagen, kan starte med at bruge SMO på morgenen for at opretholde sine funktionelle muskelgrupper. Senere på dagen kan AFO-delen tillægges for at opretholde et stabilt og funktionelt gangmønster.

Anvendelsesområde: Hyperton fod og ankel. Hypoton fod og ankel. Barn som trænger hjælp til at flytte sig. Vanskelighed med at opnå et stabilt stående. Sagital og frontal instabilitet/svagthed. Lav proprioceptiv bevidsthed.

Kontraindikationer: Ankelkontrakturer som begrænser passiv dorsalfleksion >90 gradersvær spasticitet



Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28631	Solid, Gips & mål		Par
28631	Solid, Gips & mål		Stk.
28260	Ledd, Gips & mål	<18 kg	Stk.
28260	Ledd, Gips & mål	18-40 KG	Stk.

Besøg
ALLARDAFO.com

og læs mere om:

- Historien og baggrunden om hvordan ToeOFF fødes, hvordan alle produkterne er kommet frem igennem årene. Hver produkt har sin egen unikke historie.
- **40 REASONS** hvorfor Allard AFO er markedsledende.
- Hver produkt repræsenterer sine respektive egenskaber:
- Siden findes på Svensk og Engelsk.



allard|AFO
Support for Better Life!

ATX Foot Lifter dropfodsortose

ATX Foot Lifter er en tekstil dropfodsortose som anvendes til personer der har en lettere dropfod som behøver en enkel ortoseløsning som hjælper med at holde foden oppe ved gang ude og inde. Ortosen består af en tekstil ankeldel som skal sidde over anklerne. I tekstildelens bagside er der en geleplade for at mindske trykket mod akillessenen. En plade med krog placeres under snøringen på skoen (mellem snøringen og pløsen). Det elastiske funktionsbånd sættes i krogen og fæstes på hver side på den tekstile ankeldel. Spændingen reguleres af placeringen af krogen samt hvor velcrobånd-pladerne fæstes mod teksten. Hvis ATX Foot Lifter skal anvendes uden sko findes der en separat tekstil foddell som tilbehør.



Anvendelsesområde: Hjælper til med dorsal fleksion til en slap fod og bidrage til push-off ved gang. Beregnet til anvendelse ved lettere tilfælde af dropfod.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm	Bilateral	Bilat.
28169	ATX Foddell	Small		17-21 cm	Ve/Hø
28169	ATX Foddell	Medium		21-25 cm	Ve/Hø
28169	ATX Foddell	Large		25-29 cm	Ve/Hø
28170	ATX skostøtte	One Size		Bilateral	Bilat.
28171	ATX elastiskt bånd	Small		Bilateral	Bilat.
28171	ATX elastiskt bånd	Medium		Bilateral	Bilat.
28171	ATX elastiskt bånd	Large		Bilateral	Bilat.
28172	Ekstra kroge 2 stk.	One Size		Bilateral	Bilat.

Mål 1: Mål tages omkring anklen, over malleolen.

Mål 2: Mål tages omkring foden over fodryggens højeste punkt



Mål: Plastdelens længde.



NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ er en ortose der er udviklet for at hjælpe personer med mild dropfod til bedre dorsalfleksion. Den polstrede ortose-plastdel sidder behageligt mod benets forside og har en aftagelig vaskbar polstring. Graden af dorsalfleksion justeres ved krogens placering i snøringen samt ved justering af den øvre del af båndet. Det smidige design gør den usynlig under lange bukser. NAVIGAIT findes i tre størrelser. Plastdelen kan ved behov trimmes en del i over- og underkant. Anvend NAVIGAIT 4-Foot sammen med NAVIGAIT i de tilfælde hvor brugeren ikke benytter sko. Produktet kan også anvendes i sandaler, hvor der ikke er andet at fæste i. NAVIGAIT 4-Foot skal sidde på forfoden. Kombination af elastiske og rigide materialer med siliconerand på indersiden sikrer at den sidder korrekt.

Anvendelsesområde: NAVIGAIT er beregnet til at støtte en fod når muligheden for aktiv dorsalfleksion er reduceret som følge af neurologiske tilstande så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom.

Kontraindikationer: NAVIGAIT skal ikke anvendes af personer der udviser spasticitet eller har kraftige ødemer.

Øvrigt: NAVIGAIT kompenserer ikke fejlstillinger i foden og deformiteter; disse skal behandles af sko og/eller indlæg efter behov. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	X-Small		Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	Small/Medium		Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	Large/X-Large		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	X-Small		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	Small/Medium		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	Large/X-Large		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	X-Small		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	Small/Medium		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	Large/X-Large		Bilat.

ALLARD AFO MUSKELFUNKTIONS GUIDE

Denne guide er baseret på udvikling og respons fra testpersoner samt feedback fra patienter.

Muskelfunktion:

Ingen eller begrænset

Moderat

Normal funktion

Mere **DISTAL** svaghed



YPSILON[®]flow^{1/2}



Bevægelsesomfang	●●●●○
A/P	●●○○○
M/L	●●○○○
Assisterende Dorsalflexion	●●○○○
Spasticitetskontrol	●●○○○



ToeOFF[®]flow^{2 1/2}



Bevægelsesomfang	●●●○○
A/P	●●●○○
M/L	●●●○○
Assisterende Dorsalflexion	●●●○○
Spasticitetskontrol	●●●○○

Mere **PROXIMAL** svaghed



ToeOFF[®]2 1/2



Bevægelsesomfang	●●○○○
A/P	●●○○○
M/L	●●○○○
Assisterende Dorsalflexion	●●●○○
Spasticitetskontrol	●●●○○



BLUEROCKER[®]2 1/2



Bevægelsesomfang	●○○○○
A/P	●●●●●
M/L	●●●●●
Assisterende Dorsalflexion	●●●●●
Spasticitetskontrol	●●●●●

ALLARD CUSTOM AFO

I tilfælde med individuelle behov hvor scanning, afstøbning eller hvor målene falder udenfor ovenstående parametre, tilbyder CAMP Scandinavia tilpasning til de individuelle behov på baggrund af scanning eller afstøbning. Kontakt kundesupport for yderlig information eller besøg camp.dk



Ypsilon® Flow^{1/2}

Ypsilon® Flow^{1/2} er en dropfodsortose til den aktive patient som har dropfod og/eller behøver mindre støtte i ståfasen. Ypsilon® Flow^{1/2} har en hælhøjde som er ca 7 mm i alle størrelser. Den er udviklet for at tillade optimal bevægelsesomfang og giver en dynamisk "Toe-OFF" funktion samtidigt som det er muligt for muskler at arbejde mere aktivt. Fodbladet følger fodens form og med hjælp af gulvreaktionskraften kan anvenderen udnytte "toe-off" effekten med mindre styrke. Det Y-formede fæstpunkt ligger på hver side omkring tibiakammen og mindsker risikoen for tryk mod prominenser samt tibiakammen. Derfor er dette en ortose til den aktive brugere som stiller høje krav på funktion og bevægelighed.

Anvendelsesområde: Dropfod med stabil ankel i kombination med ingen til mild spasticitet, patienter som behøver mere flexibilitet og mindre støtte.

Kontraindikationer: Kraftig ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet

Øvrigt: Yderligere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction. Ypsilon® Flow leveres med komplet båndsat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø	35-38
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø	38-42
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø	42-45
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Ve/Hø	>45
28884	Polstring	S/M/L			Bilat.	
28884	Polstring	X-Large			Bilat.	
28885	Bånd	One Size			Bilat.	

ToeOFF® Flow2½

Ved at kombinere vores lange erfaring og udviklingen i fremstillingsteknikken af de anmodninger vi har modtaget gennem årene, har vi nu udviklet en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow2½. ToeOFF® har siden introduktionen i 1997 været ledende med sin unikke funktion og dynamiske egenskaber. ToeOFF® Flow2½ har nye unikke egenskaber, nye funktioner og fordele; lavere hælhøjde, ca. 7 mm i alle størrelser, mere ROM i A-P plan og glattere ydre under fodbladet.

ToeOFF® Flow2½ har alle Mikrofixdelene monteret ved levering for lettere montering af SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Båndene er de samme som for ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF® Flow2½ bliver det en bedre pasform i de moderne sko med lavere hæle, og patienten vil også få en skinne med en lavere profil i sålen som også er mere dynamisk i A/P planet.



Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til mild spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. Alle Allard AFO leveres med komplet båndsat. Denne model findes også i et flertal af andre varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2 1/2

Dropfodsortosen ToeOFF® 2 1/2 har samme dynamiske funktion og stabilitet, som en ToeOFF® 2,0, men med en hælhøjde på 7 mm, så den passer bedre i moderne sko med lavere hælhøjde. Den har også mindre tåløft, som giver mere plads i tåboxen i skoen. Allard AFO har siden starten i 1997 været førende med sine unikke funktioner og dynamiske egenskaber.

ToeOFF® 2 1/2 har alle MicroFIX-delene monteret på indersiden ved levering i forhold til hurtig og nem montering af polstringen. Båndløsningen er den samme som 2,0, fremstillet i et holdbart materiale og kan leveres med eller uden en D-ring. Båndene kan monteres, så de tilsluttes enten indvendig eller udvendig på ortosen. Det er altid vigtigt at justere alle Allard AFO til hælhøjden af skoen. Læs mere om dette i Allard AFO professional instruktion.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen til middel spasticitet og i visse tilfælde nedsat knækontrol. Kan anvendes ved tåamputationer.

Kontraindikationer: Svær ødem, diabetes med bensår og meget nedsat følsomhed og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. BlueROCKER® leveres med komplet båndsat. Denne model er også tilgængelig i flere andre varianter, hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering -kontakt kundesupport for mere information om disse modeller. “Posen, der leveres til produktet, er fremstillet af genbrugs PET-flasker.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28980	ToeOFF® 2 1/2	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28980	ToeOFF® 2 1/2	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28980	ToeOFF® 2 1/2	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2 1/2	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2 1/2	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28982	ToeOFF® 2 1/2 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28982	ToeOFF® 2 1/2 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28982	ToeOFF® 2 1/2 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28982	ToeOFF® 2 1/2 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28982	ToeOFF® 2 1/2 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF® 2½ Addition er dybest set samme produkt som ToeOFF® 2½, men har fået en overflade af et farvet materiale for at give produktet et andet udseende. Addition fås i tre farvekombinationer; Beige, Sort og camouflage (Camo). Overfladen Addition gør at tøjet lettere glider mod materialet, samtidigt at hele produktet får en anden farve hele vejen ned til bunden af skinnen. Addition fås kun med D-ring bånd. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ Addition i beige og camouflage har et mønstret ydre. Hver ortose får derfor et unikt mønster, som variere lidt mellem de forskellige ortoser.



Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til moderat spasticitet, i nogle tilfælde selv i tilfælde ved nedsat knækontrol og tåamputationer.

Kontraindikationer: Svært ødem, diabetes med bensår, meget nedsat følsomhed og kraftig spasticitet.

Øvrigt: For mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse, se Allard AFO Professional instruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28954	Sort m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28954	Sort m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28954	Sort m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28954	Sort m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28954	Sort m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28955	Camo m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/hø	32-35
28955	Camo m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28955	Camo m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28955	Camo m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28955	Camo m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28956	Beige m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28956	Beige m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28956	Beige m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28956	Beige m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28956	Beige m D-ring	X-Large	28,5 cm	43 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2.0

Ved at kombinere vores lange erfaringhed og udvikling i fremstillingsteknik med de ønskemål som vi har modtaget gennem årene har vi nu udviklet ToeOFF® 2.0. ToeOFF® har siden introduktionen i 1997 været førende med sin unike funktion og sine dynamiske egenskaber. ToeOFF® 2.0 har samme egenskaber og funktioner som den originale ToeOFF®, og yderligere udviklet af både form og funktion. Formen på 2.0 er blevet ændret for at give en smidigere pasform, bedre geometri og jævnere overflade. Derudover er alle Mikrofix dele monteret ved levering for en hurtigere og enklere montering af SoftKIT og ComfortKIT. Båndet har en ny løsning og er lavet i et nyt slidstærkt materiale. Derudover findes der bånd med eller uden D-ring. Båndet kan monteres på venstre eller højre side afhængig af patientens funktionsbehov. Yderligere en nyhed med 2.0 er at størrelse X-large er 2 cm højere og derved passer bedre til et længere underben. De dynamiske egenskaber er ikke ændret uden den graderede dynamiske funktionen og stabiliteten mellem de forskellige størrelser er som tidligere. ToeOFF® 2.0 har en hælhøjde som er imellem 12 – 15 mm afhængig af størrelsen.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til mild spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. Alle ToeOFF® leveres med komplet båndsat. På ToeOFF® med Velcro er det hårde velcrobåndet limet på ortosen. Denne model findes også i et flertal af andre varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28920	ToeOFF 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28920	ToeOFF 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28920	ToeOFF 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28920	ToeOFF 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28920	ToeOFF 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® Short

ToeOFF® kort er en specialmodel der har kortere tibiadel, bredere fodplade over metatarsalledene, lavere tåspring og lavere hælhøjde end ToeOFF® originalortose. Skal anvendes med polstring. ToeOFF® kort har en hælhøjde som er ca 7 mm i alle størrelser.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen eller middel spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28990	ToeOFF Kort Sort	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28990	ToeOFF Kort Sort	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28990	ToeOFF Kort Sort	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42





BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® er den mest rigide og stabile dropfodsortose. Den har nu fået et opdateret udseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosen form er forandret til en bedre geometri og en jævnere yderside. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Også båndene har fået nyt design og findes både i og uden D-ring. Båndet kan enkelt monteres på den ønskede side afhængig af patientens funktionsbehov. Yderligere en forandring på 2.0 er at størrelsen X-large er 2 cm højere end Large dvs. 45 cm høj. BlueROCKER® har en hælhøjde som er imellem 12 – 15 mm afhængig af størrelsen.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen eller op til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionssvigt i benmuskulatur, nedsat balance, bilaterale patienter og delfodsamputation.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår og meget nedsat sensibilitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® 2.0 leveres med komplet bånd sæt. Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

BlueROCKER® 2½

Dropfodsortosen BlueROCKER® 2 1/2 har samme dynamiske funktion og stabilitet, som en BlueROCKER® 2,0, men med en hælhøjde på 7 mm, så den passer bedre i moderne sko med lavere hælhøjde. Den har også mindre tåløft, som giver mere plads i tåboxen i skoene. Allard AFO har siden starten i 1997 været førende med sine unikke funktioner og dynamiske egenskaber.

BlueROCKER® 2 1/2 har alle MicroFIX-delene monteret på indersiden ved levering i forhold til en hurtig og nem montering af polstringen. Båndløsningen er den samme som 2,0, fremstillet i et holdbart materiale og kan leveres med eller uden en D-ring. Båndene kan monteres, så de tilsluttes enten indvendig eller udvendig på ortosen. Det er altid vigtigt at justere alle Allard AFO til hælhøjden af skoene. Læs mere om dette i Allard AFO professional instruktion.



Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionsfejl i benets muskelgrupper, nedsat balance, bilateral funktionsreduktion og delfodsamputation.

Kontraindikationer: Svær ødem, diabetes med bensår og meget nedsat følsomhed.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. BlueROCKER® leveres med komplet bånd sæt. Denne model er også tilgængelig i flere andre varianter, hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering -kontakt kundesupport for mere information om disse modeller. “Posen, der leveres til produktet, er fremstillet af genbrugs PET-flasker.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28970	BlueROCKER® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28970	BlueROCKER® 2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28970	BlueROCKER® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28970	BlueROCKER® 2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28970	BlueROCKER® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm	VE/Hø	35-38
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm		42-45
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® Short

SHORT er specialmodeller, som er udviklet til at passe personer, som har kortere tibia og en bredere fod over metatarsalledene. Polstring skal altid anvendes i forhold til god patientkomfort.

SHORT har en hælhøjde på 7 mm i alle størrelser.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med svage plantarflexorer; i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol. Kan også anvendes ved bilaterale problemer og ved delfodsamputationer (mest proximale niveau er Chopart).

Kontraindikationer: Kraftig ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Yderligere information om afprøvning, indikationer, tilretning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko- størrelse
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

I tilfælde, hvor ToeOFF® og BlueROCKER® ikke opfylder din patients behov, er det muligt at bestille en individuel tilpasset Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®. Dette bliver dog ikke et CE-mærket produkt. Ordren kan foretages på flere forskellige måder, scanning, positiv gips, negativ gips (plastgips eller STS-sok) eller efter mål. Baseret på specifikationer fremstilles en ortose, der følger standarden for ToeOFF® / BlueROCKER® i forhold til former og egenskaber. Ved bestilling findes der en række forskellige valg, der kan foretages i forhold til hælhøjde, stabilitet, og aflastning. Der udfyldes en særlig blanket ved bestilling. Den kan downloades under dokumenter på produktet på hjemmesiden.

Øvrigt:

Kontakt kundesupport for at få flere oplysninger om blanketter og procedurer til bestilling af en individuelt fremstillet Custom ToeOFF® eller BlueROCKER®.

Art.nr.	Model
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



*Du kan også bestille Custom digitalt via Allard Configurator på vores hjemmeside.
Kontakt kundesupport ved behov af licens.*

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Når du bestiller en Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®, er der nogle ting der du skal tage stilling til. Nedenfor har vi samlet de forskellige valgmuligheder og hvordan det påvirker den samlede pris. Der er en særlig bestillingsformular for disse produkter. Formularen kan downloades fra Camps hjemmeside blandt de produktoplysninger, der er tilgængelige på respektive produkt samt i Download Center under Allard AFO.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®					
Custom ToeOFF® Art.nr.	Custom BlueROCKER® Art.nr.	Beskrivelse		Tillægsomkostninger	
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, venstre	Fodpladen 190,195 - 310 mm	Grundpris	
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, højre	Fodpladen 190,195 - 310 mm	Grundpris	
28463 0001	28483 0001	Fodpladens bredde	+ 5 mm	Nej	
28463 0002	28483 0002	Fodpladens bredde	- 5 mm	Nej	
28464 0005	28484 0005	Hælhøjde	5 mm	Nej	
28464 0007	28484 0007	Hælhøjde	7 mm	Nej	
28464 0010	28484 0010	Hælhøjde	10 mm	Nej	
28464 0012	28484 0012	Hælhøjde	12,5 mm	Nej	
28464 0015	28484 0015	Hælhøjde	15 mm	Nej	
28464 0020	28484 0020	Hælhøjde	20 mm	Nej	
28464 0025	28484 0025	Hælhøjde	25 mm	Nej	
28464 0030	28484 0030	Individuel hælhøjde	højre end 25 mm	Ja	
28465 0000	28485 0000	Aflastning	Tibiakammen	Nej	
28465 0003	28485 0003	Aflastning 3 mm	Tibiakammen	Nej	
28465 0005	28485 0005	Aflastning 5 mm	Tibiakammen	Nej	
28466 0000	28486 0000	Individuel aflastning		Ja	
28468 0001	28488 0001	Fleksibilitet A/P	+ 1 lager fiber	Ja	
28468 0002	28488 0002	Fleksibilitet A/P	+ 2 lager fiber	Ja	
28468 0003	28488 0003	Standart forfod/mere stiv hæl	+ 1 lager fiber	Ja	
28468 0004	28488 0004	Standard forfod/fleksibilitet hæl	+ 1 lager fiber	Ja	
28469 0001	28489 0001	Stivhed A/P	- 1 lager fiber	Ja	
28469 0002	28489 0002	Stivhed A/P	- 2 lager fiber	Ja	
28469 0003	28489 0003	Standart forfod/mindre stiv hæl	- 1 lager fiber	Ja	
28469 0004	28489 0004	Standart hæl/mindre stiv forfod	- 1 lager fiber	Ja	
28470 0001	28490 0001	Stabilitet M/L	+ 1 lager fiber	Ja	
28470 0002	28490 0002	Stabilitet M/L	+ 2 lager fiber	Ja	
28471 0001	28491 0001	Stabilitet M/L	- 1 lager fiber	Ja	
28471 0002	28491 0002	Stabilitet M/L	- 2 lager fiber	Ja	
28473 0000	28493 0000	Aflastning fodryg	Høj vrist	Nej	

Custom ToeOFF®

Det er muligt at bestille en Custom ToeOFF® til patienter, der har behov for en anden form på grund af atrofi/hypertrofi, unik underbensform, anden stivhed, osv. Bestillingen kan foretages på forskellige måder: Scanning, negativ gips (plastgips eller STS-sok), positiv gips eller efter mål. Ved bestilling findes en række forskellige valg som f.eks. hælhøjde, stabilitet, aflastning mm. En speciel blanket skal udfyldes ved bestilling. Blanketten kan downloades under produktet.

Øvrigt: Kontakt kundesupport for yderligere information om blanketten og fremgangsmåde for bestilling af en individuelt fremstillet Custom ToeOFF® AFO.

Art. nr.	Model
28460	Custom ToeOFF®



Custom BlueROCKER®

Det er muligt at bestille en Custom BlueROCKER® til patienter, der har behov for en anden form på grund af atrofi/hypertrofi, unik underbensform, anden stivhed, osv. Bestillingen kan foretages på forskellige måder: Scanning, negativ gips (plastgips eller STS-sok), positiv gips eller efter mål. Ved bestilling findes en række forskellige valg som f.eks. hælhøjde, stabilitet, aflastning mm. En speciel blanket skal udfyldes ved bestilling. Blanketten kan downloades under produktet.

Øvrigt: Kontakt kundesupport for yderligere information om blanketten og fremgangsmåde for bestilling af en individuelt fremstillet Custom BlueROCKER® AFO.

Art. nr.	Model
28480	Custom BlueROCKER®



COMBO



Smidig og unik ortoseløsning ved hyperekstension i kombination med dropfod. ToeOFF® har i mange år bevist sit værd både i rehabiliteringsprocessen men også i det daglige liv og har hjulpet mange brugere med dropfod til en bedre gang og øget livskvalitet. ToeOFF® er sommetider blevet kombineret med knæortoser for at modvirke overstrækning i knæleddet. Nu findes en ortoseløsning til dette, der kombineres direkte med ToeOFF® eller BlueRocker®.

Combo-ortosen tilpasses individuelt til hver patient. De forskellige komponenter kan kombineres afhængig af patientens størrelse og længde.

- Valg af størrelse på lårdelen er afhængig af hvor højt oppe på låret denne placeres. Den kan dog ikke placeres lavere end ca. 10 cm over Tibia plateauet.
- Valg af størrelse for koblingsdelen er afhængig af hvilken størrelse ToeOFF® eller BlueRocker der anvendes
- Valg af størrelse på hyperekstensjonskrydset bestemmes af knæbredden.
- Samtlige 5 artikler skal bestilles for at få en komplet ortose.
- Combo er ikke beregnet til patienter med vægt >150 kg, højde >2 m.



ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinnen og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m.

Kontraindikationer: Totalt bortfald af ligament i knæet. Totalt Quadricepsbortfald. Patientlængde over 2 meter. Patientvægt over 150 kg. Kraftigt reduceret kognitive evner. OBS: Når afprøvning er udført må der ikke være mere end 10° hyperekstension tilbage i ortosen.



Knæmål 1: Mål M-L midt-patella

Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella

Knæmål 3: Mål M-L 20 cm over patella.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 2	Knæmål 3	Knæmål 1
28780	Knæled m. skinner	One Size				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 stk)	Small				
28783	Softkit (2 stk)	Medium				
28783	Softkit (2 stk)	Large				
28783	Softkit (2 stk)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				



Prim dropfodsorthose

En lidt blødere dropfodsorthose lavet af polypropylen beregnet til at blive brugt ved lette problemer med dropfod forbundet med forskellige neurologiske diagnoser. Skinnen har en "kryds"-konstruktion på bagsiden med åbent hælparti samt åbning over læggen.

Ortosen har en bred polstring på den øverste kant, der lukkes med velcro. Der medfølger et ekstra velcrobånd, der hjælper med at holde foden på plads i ortosen.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Fodbladet på ortosen kan enkelt klippes til korrekt pasform efter brugerens fodstørrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde	Højde	Ve/Hø
71296	Hvid	Small	23 cm	29 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	Medium	24,5 cm	31 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	Large	26 cm	33 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	X-Large	27,5 cm	35 cm	Ve/Hø



Swedish dropfodsorthose

En lidt blødere dropfodsorthose lavet af polypropylen beregnet til at blive brugt ved lette problemer med dropfod forbundet med forskellige neurologiske diagnoser. Skinnen har en "kryds"-konstruktion på bagsiden med åbent hælparti samt åbning over læggen.

Ortosen har en bred polstring på den øverste kant, der lukkes med velcro. Der medfølger et ekstra velcrobånd, der hjælper med at holde foden på plads i ortosen.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Fodbladet på ortosen kan enkelt klippes til korrekt pasform efter brugerens fodstørrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde	Højde	Ve/Hø
71298	Hvid	Small	24 cm	26 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	Medium	27 cm	29 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	Large	28 cm	34 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	X-Large	30 cm	38 cm	Ve/Hø

Ekstra bånd Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Separate bånd med eller uden D-ring til Allard AFO modellerne 2.0 og 2½. Båndet kan monteres med åbning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Pakke
28760	Enkle bånd	Sort	X-Small	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Small	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Medium	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Large	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	X-Large	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	X-Small	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	Small	1 sæt
2876	Bånd med D-ring	Sort	Medium	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	Large	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	X-Large	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Small	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Small	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Medium	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Large	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Large	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Small	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Medium	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Large	1 sæt



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD er en polstring beregnet til Ypsilon® Flow. Den vigtigste egenskab hos ComfortPAD er at mindske friktionen imellem ortosen og benet, især i forbindelse med forskellige aktiviteter, som f.eks. løb, cykling eller gåture. Et ekstra lag af tekstilmateriale mellem ortosen og benet gør at bevægelsen sker lettere imellem de 2 tekstile materialer. Tests har vist, at når to materialer glider mod hinanden reducerer friktion mod huden med omkring 25%. ComfortPAD er One Size og kan tages på og af med en hånd. Det brede bånd er behageligt og medfører mindre tryk på bagsiden af benet. En praktisk løsning for dem, der har et følsomt underben eller hud og ønsker at være aktive.

Anvendelsesområde: Passer kun til Ypsilon® Flow 1/2.

Art. nr.	Beskrivelse	Størrelse
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD	One Size





CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™ 2.0 er en helt ny smart polstring fra Allard AFO. CoverKIT passer til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Enkelt at tage på og af. Giver en glat overflade, der går hele vejen ned til slutningen af skinnen. Indersiden er som en SoftKIT™ og hvis eventuelt ekstra aflastning behøves indgår der også to lodrette neoprenstave for at oprette en trykfri kanal for tibia. Ortosens standard bånd kan bruges sammen med CoverKIT™.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Omkreds læg
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	X-Small	31 - 34 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Small	34 - 37 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Medium	37 - 41 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Large	41 - 46 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	X-Large	46 - 51 cm

SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 er en behagelig og smidig til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Tibiakammen kan eventuelt aflastes ved at anvende neoprenstaverne mellem ortosen og polstringen. Hver pakke indeholder to polstringer og to neoprenstænger.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28750	SoftKIT 2.0	Sort	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Small
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Large
28750	SoftKIT 2.0	Sort	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	X-Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Medium/Large/X-Large
28753	Neoprenstave 2.0	Sort	Small
28753	Neoprenstave 2.0	Sort	Large
28754	Mikrofix vinger 2.0	Sort	



SoftKIT™ Short

SoftKIT™ er en behagelig og smidig polstring beregnet til ToeOFF®. Tibiakammen kan let aflastes ved at anvende de medfølgende neoprenstave mellem ortose og polstring. Hver pakning indeholder to polstringer, to neoprenstave og selvhæftende Mikrofix.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Small
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Large
28356	Mikrofix dropper	Sort	Small
28356	Mikrofix dropper	Sort	Medium
28356	Mikrofix dropper	Sort	Large
28357	Mikrofix vinger	Sort	One Size





ComfortKIT™ 2.0

En blød polstring til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0 som er specielt udvalgt til følsom hud og til patienter med et meget højt aktivitetsniveau. ComfortKIT™ 2.0 har en indre kerne af såkaldt “memory foam” der bevirker at det naturligt tilpasser sig benets form ved anvendelse. Når materialet hviler genvinder det sin oprindelige form.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	X-Small
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Small
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Medium
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Large
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	X-Large
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	X-Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Medium/Large



T-Strap

T-Strap trækkes over talocrural/subtalar-leddet lateralt, for at få på ret position tilbage under tibia. Den distale del af T-Strap hæftes på undersiden af ortosens fodplade og den proximale del rundt om anklen og mod ortosens laterale skinne. Produktet er let at justere i længden og inderkernen af plastazote kan enkelt varmes op med varmepistol ved behov af at justere pasformen. Ydermaterialet er blødt, ventilerende men samtidigt støttende.

Anvendelsesområde: Pes valgus kontrol.

Kontraindikationer: Ødem, dårlig blodcirkulation, hud opblødning eller andre tilstande som yderligere kan forværres af kompression.

Øvrigt: T-Strap er kun beregnet til at anvende sammen med produkter fra Allard AFO og altid sammen med et individuelt tilpasset sål/indlæg for en korrekt positionering af foden. Hvis T-Strap anvendes uden sål/indlæg øges stressen på produktens laterale skinne og derved øges risiko for delaminering.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28777	Sort	One Size	Ve/Hø


Nyhet!

kiddieflow™


Vi har udvidet vores pædiatriske AFO-sortiment med en ny model; KiddieFLOW™. Dette er efter anmodninger fra klinikkere om en ortose med mere fleksibilitet i fodpladen og som giver et alternativ til vores nuværende serie af Kiddie-modeller. KiddieFLOW™ vil bygge bro mellem indersåler/SMO og vores nuværende AFO til børn. Ortosen giver bedre kontrol over fodpositionering i den sene svingfase, hvilket igen letter stabiliteten i standfasen. Den yder desuden hjælp i dorsalfleksion i svingfasen samtidig med, at der gives mulighed for et større bevægelsesomfang i standfasen.

Ved en kombination af øget A/P- og M/L-styring kan KiddieFLOW™, ud over vores andre Kiddie-modeller, også kombineres med indlæg eller SMO.

Opgaven med at vælge den rigtige ortosekombination til din patient bør altid være baseret på evalueringværktøjer, f.eks. ganganalyse, leddets bevægelsesomfang, manuel muskeltest eller andre anerkendte målemetoder. Vores diagrammer og teorier, der er beskrevet nedenfor, kan også hjælpe dig med at vælge den bedst egnede løsning til din patient.

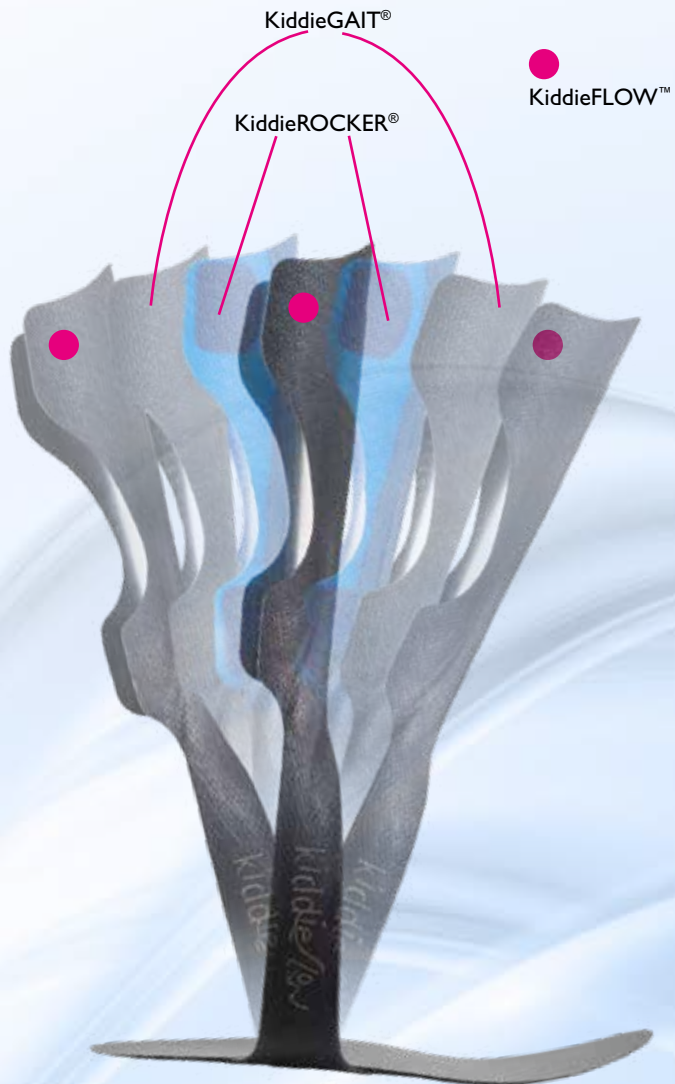

- ✓ Ved at analysere hvilken gangafvigelse som eksisterer, vil du få en mere omfattende analyse i forhold til et passende valg af ortosekombination. Dette vil give de bedste kliniske resultater for din patient.
- ✓ M/L-styring, hvis behov i tilfælde af overdreven pronation eller supination, kan opnås med indlæg eller SMO.
- ✓ Når behovet for A / P kontrol øges, behøves en gradvist stivere AFO. Vores ortoser KiddieFLOW™, KiddieGAIT® og KiddieROCKER®, i kombination med indlægssåler eller SMO, giver tilstrækkelig kompensation til de fleste patienter.
- ✓ Det er nødvendigt, at foretage gentagen evaluering, som omfatter en ganganalyse, mens patienten er iført den valgte ortosekombination til at fastlægge forbedring i funktionen.
- ✓ Til de mere omfattende funktionshindringer, som inkludere en øget grad af spasticitet og mere komplekse gangafvigelser, bør en stivere AFO overvejes.

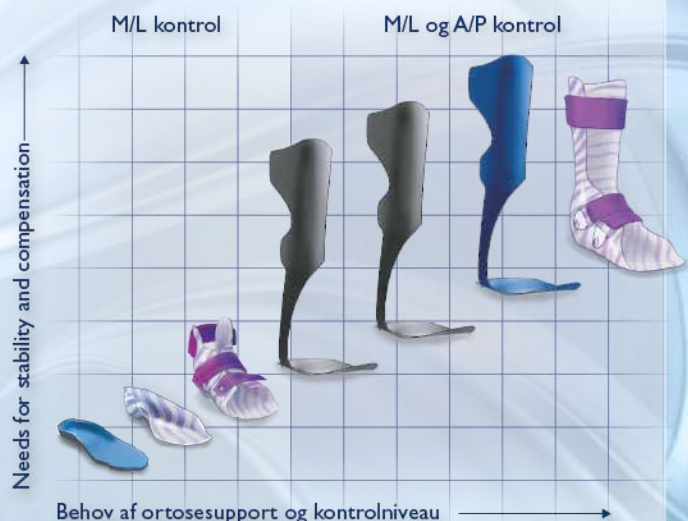

kiddieflow™
kiddieGAIT®
kiddieROCKER®



Børn der rammes af neurologiske handicap og milde former for udviklingsforstyrrelser er i mange tilfælde afhængig af ortoseløsninger til de nedre ekstremiteter.

Start med den rigtige fod – lad barnet prøve en ortose der hjælper dets små fødder til et jævner og mere naturligt biomekanisk gangmønster.

- Alle vore AFO modeller er fremstillet i kulfiberkomposit. Fodbladet giver støtte og dynamik til foden samt med sin åbne hæl er den let at få ned i sko.
- Skinnen støtter forsiden af underbenet og hjælper til med at strække knæ og hofte ved f.eks "Crouch"-gang.
- Tre modeller - tre forskellige niveauer af stabilitet- for at kunne tilbyde barnet en individuel løsning.

INDIKATIONER

Dropfod, KiddieFLOW™, KiddieGAIT® og KiddieROCKER® (alle modeller) er beregnet som støtte ved dropfod, gangafvigelser eller proprioceptiv forstyrrelse, ustabil gang eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodkollaps, Spina Bifida, Cerebral Parese og Muskeldystrofi.

KONTRAINDIKATIONER

Begrænset dorsalfleksionsevne (behøver mindst +5 grader dorsalfleksion ved passiv bevægelse) bevægelighed i ankelleddet (mindst 5° dorsalfleksion ved passiv bevægelse), alt for rigid fodstruktur. Spatisk Quadricepsmuskel. Overdrevent genu valgum eller genu varum-fejlstilling. Fikseret/ikke korregerbar pes valgus eller pes varus-fejlstilling.

BEGRÆNSNINGER

Hyperekstension i knæet på trods af behandling.
KiddieFLOW™ skal ikke anvendes ved "Crouch"-gang".

KiddieGAIT®, KiddieROCKER® og KiddieFLOW™ skal altid kombineres med en eller anden form for individuel fodtilpasning, for at kontrollere fodens position (Se også info på næste side). Det er vigtigt at foden har en så funktionel position som muligt ved belastning. De mest almindelige fejlstillinger i foden som pronation, supination, pes varus, pes valgus skal korrigeres med et indlæg. Almindeligvis skal et sådant indlæg have en dyb hæl kop for at stimulere hæl-til-tågang.



KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ er i modsætning til KiddieGAIT® mere fleksibel i fodpladens hæl- og tåbox og giver et større bevægelseomfang. KiddieFLOW™ er baseret på samme principper som vores voksne FLOW-modeller og bevarer den samme geometri som KiddieGAIT® og KiddieROCKER®. Ortozen støtter fodens dorsalfleksion i svingfasen, giver en bedre kontrol i fodpositionering i den sene svingfase og forbedre stabiliteten i støttefasen.

Samtidigt giver det blødere fodblad en lettere afvikling i slutningen af støttefasen. Ved en kombination af øget A/P og M/L kontrol kan KiddieFLOW™ som tillæg til vores andre børnemodeller også kombineres med individuelle indlæg eller SMO.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieFLOW™ er beregnet til at støtte ved en dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse, ustabil gang eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid strukturer i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejlstilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ D-lenkillä	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® tilbyder en tidlig dynamisk ortosebehandling som kan hjælpe barnet til et jævner og et mere naturligt biomekanisk gangmønster. Ortozen hjælper barnet igennem svingfasen og kontrollerer fodens bevægelighed i flere niveauer igennem stødfasen. Skinnens placering på forsiden af tibia er til hjælp ved andre proximale problemer, som fx. hyperextension i knæet eller "Crouch"-gang. KiddieGAIT® er beregnet i kombination med en individuel fodpasning for at kontrollere fodens position. KiddieGAIT® Baby findes i tre størrelser og passer til børn fra ca 9 måneders alderen.

Anvendelsesområde: Dropfod. Forandring i gangmønster som følge af proprioceptive forstyrrelser, tågænger med intakt mellemfod. Crouch-gang som følge af lav tonus (fleksion i hofte/knæ/ankel. Spina Bifida, Cerebral Parese. Muskeldystrofi og MMC.

Kontraindikationer: Begrænset bevægelighed i ankelledet (mindst 5 grader dorsalfleksion ved passiv bevægelse) alt for rigid fodstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturelle fejlstillinger i knæ og/eller fodled.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø





KiddieGAIT®

KiddieGAIT® yder en tidlig ortosebehandling i og med at de fås i Baby modeller fra ca 1 års alderen. Ankel Fod Ortosen (AFO) hjælper barnet med at få et jævner og mere naturlig gangmønster. Ortosen hjælper barnet gennem svingfasen og kontrollere fodens bevægelse i flere plan gennem støttefasen. Skinnens placering på forsiden af tibia hjælper også til i forhold til andre proksimale problemer, såsom hyperextension i knæet eller "Crouch" gang. KiddieGAIT® er beregnet til anvendelse i kombination med en individuel fodtilpasning for at kontrollere fodens position.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieGAIT® er beregnet til at støtte ved dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse, ustabil gangart eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, Crouch gang med lav tonus ved tilstand som spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksion (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastiske quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerelig pes valgus- eller pes varus-fejlposition.

Øvrigt: Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundesupport for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Small	160 mm	220 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Medium	180 mm	257 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Large	200 mm	295 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	X-Large	210 mm	315 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Small	160 mm	220 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Medium	180 mm	257 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Large	200 mm	295 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	X-Large	210 mm	315 mm	Ve/Hø

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® er udviklet for at imødekomme behovet for børn med mere omfattende problem end blot dropfod. Barnet kan have bilateral svaghed og ønsker mere stabilitet i støtrefasen. Ligesom andre børnemodeller er KiddieROCKER dynamisk graderet mellem størrelser. Modellen giver også stabilitet i M/L-plan og i A/P-plan.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieROCKER® er beregnet til at støtte ved dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, crouch gang med lav tonus ved tilstand som spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksion (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastiske quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerelig pes valgus- eller pes varus-fejlposition.

Øvrigt: Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundesupport for mere information om disse modeller.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Small	16 mm	22 mm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Medium	18 mm	25,7 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

Extra bånd KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®

Separate bånd med eller uden D-ring til KiddieFLOW™, KiddieGAIT® og KiddieROCKER®.

Båndet kan monteres medialt eller lateralt.

Art. nr.	Modell	Farve	Størrelse	Pakke
28373	Band KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Small	1 sæt
28373	Band KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Medium	1 sæt
28373	Band KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Large	1 sæt
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 sæt
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 sæt
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large/X-Large	1 sæt
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 sæt
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 sæt
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large/X-Large	1 sæt





KiddieGAIT® softKIT™

KiddieGAIT® SoftKIT™ er en behagelig og smidig polstring beregnet til anvendelse sammen med KiddieGAIT®. Hver pakning indeholder to polstringer og selvhæftende MikroFix.

Art. nr.	Model	Størrelse
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Small
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Medium
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Small
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Medium
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	X-Large
28379	Microfix Drop	Small
28379	Microfix Drop	Medium
28379	Microfix Drop	Large/X-Large



KiddieGAIT® comfortKIT™

En ny blød polstring til KiddieGAIT® og KiddieROCKER® der er specielt velegnet til patienter med prominent tibia, følsom hud men også til personer med højt aktivitetsniveau. ComfortKit™ har en indre kerne af såkaldt "memory foam" der bevirker at det naturligt tilpasser sig benets form ved anvendelse. Når materialet hviler genvinder det sin oprindelige form.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Small
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Medium
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Large
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	X-Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

SoftSHELL™ Baby er en polstring til KiddieGAIT® Baby. Disse størrelser i KiddieGAIT® SoftSHELL™ skal kompletteres med en SoftKIT™ (28397) i samme. SoftSHELL™ har en yderside af glat mønstret lycra-materiale der ændrer udseendet og gør at ortosen glider lettere mod tøjet. På denne model er båndet integreret i selve produktet.

Øvrigt: Mønster kan forandres med tiden.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28388	Dyr	Blå	Baby Small
28388	Dyr	Blå	Baby Medium
28388	Dyr	Blå	Baby Large
28389	Stjerner	Rosa	Baby Small
28389	Stjerner	Rosa	Baby Medium
28389	Stjerner	Rosa	Baby Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™

SoftSHELL™ er en polstring til KiddieGAIT® der beklæder hele ortosen. Indersiden er fremstillet af samme materiale som SoftKIT™. Ydersiden består af et glat mønstret lycra-materiale der giver et andet udseende og bevirker at bukser lettere kan glide mod ortosen. KiddieGAIT® SoftSHELL™ leveres komplett med postring og bånd.

Øvrigt: Mønster kan forandres med tiden.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28358	Hjerter	Rosa	Small
28358	Hjerter	Rosa	Medium
28358	Hjerter	Rosa	Large
28358	Hjerter	Rosa	X-Large
28359	Piratmønster	Grå	Small
28359	Piratmønster	Grå	Medium
28359	Piratmønster	Grå	Large
28359	Piratmønster	Grå	X-Large



Non Slip material

Et skridsikkert materiale, der ved friktion er perfekt til overflader hvor man ønsker at undgå skrid. Materialet er specielt udviklet til anvendelse på KiddieGAIT® fodplade, for at forhindre at f.eks. en SureStep ortose glider mod den blanke fodplade. OBS! Dette materiale skal ikke anvendes direkte mod huden.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
28411	Sort	14 cm	1m





Ypsilon® Flow^{1/2} afprøvningsortose

Ypsilon® Flow afprøvningsortose er en Ypsilon® Flow med teksten "Not-For-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af individuel ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Ve/Hø

ToeOFF® Flow2½ afprøvningsortose

ToeOFF® Flow afprøvningsortose er en ToeOFF® Flow med teksten "Ikke til videresalg" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler første test foretages med støtte eller i en gangbare. Hvis patienten føler ubehag eller smerter bør afprøvningen afbrydes. Ortosen skal bruges sammen med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2.0 afprøvningsortose

ToeOFF® 2.0 afprøvningsortose er en ToeOFF 2.0® med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Skostørrelse
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45

ToeOFF® 2½ afprøvningsortose

ToeOFF® 2½ afprøvningsortose er en ToeOFF 2½ med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® Short afprøvningsortose

ToeOFF® Short afprøvningsortose er en ToeOFF® Short med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Fodplade længde	Højde	Skostørrelse
2899I	ToeOFF® Short NFR	Small	Ve/Hø	21,5 cm	29,5 cm	32-35
2899I	ToeOFF® Short NFR	Medium	Ve/Hø	23,5 cm	32 cm	35-38
2899I	ToeOFF® Short NFR	Large	Ve/Hø	25,5 cm	34 cm	38-42



BlueROCKER® afprøvningsortose

BlueROCKER® 2.0 afprøvningsortose er en BlueROCKER® 2.0 med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® 2½ afprøvningsortose

BlueROCKER® 2½ afprøvningsortose er en BlueROCKER® 2½ med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	<45

BlueROCKER® Short afprøvningsortose

BlueROCKER® Short afprøvningsortose er en BlueROCKER® Short med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42



Ypsilon® Flow½ afprøvningsæt

Ypsilon® Flow afprøvningssæt indeholder 6 polstrede Ypsilon® Flow afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28882	Ypsilon Flow½	6 Stk.



ToeOFF® Flow2½ afprøvningsæt

ToeOFF® Flow afprøvningsæt indgår 6 polstrede ToeOFF® Flow afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venster og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28964	ToeOFF Flow 2½	6 stk.
28965	ToeOFF Flow 2½ m/D-ring	6 stk.





ToeOFF® 2.0 afprøvningssæt

I ToeOFF® 2.0 afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® 2.0 afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28930	ToeOFF 2.0	6 stk.
28931	ToeOFF 2.0 m D-ring	6 stk.



ToeOFF® 2½ afprøvningssæt

I ToeOFF® 2½ afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® 2½ afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28984	ToeOFF 2½	6 stk.
28985	ToeOFF 2½ m D-ring	6 stk.



ToeOFF® Short afprøvningssæt

I ToeOFF® Short afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® Short afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28992	ToeOFF Short	6 stk.

BlueROCKER® 2.0 afprøvningssæt

I BlueROCKER® 2.0 afprøvningssæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® 2.0 afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28944	BlueROCKER 2.0	6 stk.
28945	BlueROCKER 2.0 m D-ring	6 stk.



BlueROCKER® 2½ afprøvningssæt

I BlueROCKER® 2½ afprøvningssæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® 2½ afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28974	BlueROCKER 2½	6 stk.
28975	BlueROCKER 2½ m D-ring	6 stk.



BlueROCKER® Short afprøvningssæt

I BlueROCKER® Short afprøvningssæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® Short afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28998	BlueROCKER® Short	6 st.





KiddieFLOW™ afprøvningsortose

KiddieFLOW™ afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Den er udelukkende beregnet til at være et hjælpemiddel ved afprøvning inden valg af ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø



KiddieGAIT® afprøvningsortose

KiddieGAIT® afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Den er udelukkende beregnet til at være et hjælpemiddel ved afprøvning inden valg af ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT afprøvningsortose	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT afprøvningsortose	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT afprøvningsortose	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieROCKER® afprøvningsortose

KiddieROCKER® afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-resale". Den er beregnet til at være en hjælp ved afprøvning inden valg af ortoløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieFLOW™ afprøvningssæt

KiddieFLOW™ afprøvningssæt indgår 6 polstrede KiddieFLOW afprøvningsortoser med teksten "Not-for-resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28896	KiddieFLOW™ afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28897	KiddieFLOW™ m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.





KiddieGAIT® afprøvningssæt

I KiddieGAIT® afprøvningssæt indgår 6 polstrede KiddieGait® afprøvningsortoser med teksten "Not-for-resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28381	KiddieGAIT Baby afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28907	KiddieGAIT m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28905	KiddieGAIT afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.



KiddieROCKER® afprøvningssæt

KiddieROCKER® afprøvningssæt består af 6 polstrede KiddieGAIT® afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i Camp-sportstaske og består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28909	KiddieROCKER afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28911	KiddieROCKER m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.

LAD OS

PRÆSENTERE

kiddieflow™

En mere **FLEKSIBEL MODEL**
med samme unikke egenskaber som
KiddieGAIT® & KiddieROCKER®!

Vi har udvidet vores pædiatriske AFO-sortiment med en ny model; KiddieFLOW™. Dette er efter anmodninger fra klinikkere om en ortose med mere fleksibilitet i fodpladen og som giver et alternativ til vores nuværende serie af Kiddie-modeller. KiddieFLOW™ vil bygge bro mellem indersåler/SMO og vores nuværende AFO til børn. Ortosen giver bedre kontrol over fodpositionering i den sene svingfase, hvilket igen letter stabiliteten i standfasen. Den yder desuden hjælp i dorsalfleksion i svingfasen samtidig med, at der gives mulighed for et større bevægelsesomfang i standfasen.





Walker Protect Fixed, lav

Immobiliserende walker i høj model, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægt, holdbart og stabilt design. Walkeren har to faste sidestøtter, der giver god stabilitet til fod og ankel, to rigide stive buer, en fortil og en bagtil, samt en polstring over anklen for at styrke immobiliseringen. Walkerens indre polstrede tekstil er foret med blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, som beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Leveres med to ekstra kondylpuder til at lindre trykket og give ekstra komfort. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Kilesystem kan anvendes. Røntgen gennemtrængelig. Let at montere.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer, akut fodledsdistorsion, akillesseneruptur, bløddelsskader og postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Høj 27 cm

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47609	Protect Fixed lav	Small	25 cm
47609	Protect Fixed lav	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed lav	Large	32 cm
47612	Ekstra bånd sæt	One size	
47616	Ekstra polstring	Small	
47616	Ekstra polstring	Medium	
47616	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	

Walker Protect Fixed, høj

Immobiliserende walker i høj model, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægt, holdbart og stabilt design. Walkeren har to faste sidestøtter, der giver god stabilitet til fod og ankel, to rigide stive buer, en fortil og en bagtil, samt en polstring over anklen for at styrke immobiliseringen. Walkerens indre polstrede tekstil er foret med blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, som beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Leveres med to ekstra kondylpuder til at lindre trykket og give ekstra komfort. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Kilesystem kan anvendes. Røntgen gennemtrængelig. Let at montere.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer, akut fodledsdistorsion, akillesseneruptur, bløddelsskader og postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Høj 42 cm

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47608	Protect fixed høj	Small	25 cm
47608	Protect fixed høj	Medium	29 cm
47608	Protect fixed høj	Large	32 cm
47611	Ekstra båndsat	One size	
47615	Ekstra polstring	Small	
47615	Ekstra polstring	Medium	
47615	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	



NYHED!



Static Walker

Uleddet walker til immobilisering af fodleddet. Walkeren er indstillet i neutral vinkel (90°), har sideskinner af plast, dækket hælparti og rullensål for en mere naturlig gang. Ekstra hælbredder for øget stabilitet. Walkeren har åndbart polstring der transporterer fugt bort fra huden, samt sømløs fodpolstring som kan klippes af. Alle bånd har D-ring og båndene på tibiadelen kan placeres valgfrit for optimal trækretning.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer; akut fodledsdistorsion, hæleneruptur, bløddelskader og postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Vægtbegrænsning X-Small, Small - 90 kg, Medium, Large, X-Large - 110 kg

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Længde indersål
47601	Walker, Sort	Small	Bilateral	25,1 cm
47601	Walker, Sort	Medium	Bilateral	27,9 cm
47601	Walker, Sort	Large	Bilateral	29,7 cm
47601	Walker, Sort	X-Large	Bilateral	31,6 cm
47602	Ekstra polstring inkl bånd sæt	Small		
47602	Ekstra polstring inkl bånd sæt	Medium		
47602	Ekstra polstring inkl bånd sæt	Large		
47602	Ekstra polstring inkl bånd sæt	X-Large		

ROM Walker

Rom Walker med stilbar fodledsvinkel. Leddet kan låses i fikseret position, indstilling af bevægelsesomfang i et begrænset interval eller give helt fri bevægelighed. Bevægeligheden kan justeres i mellem 45° plantarfleksion og 45° dorsalfleksion med 7,5° intervaller. Walkeren har lukket hælparti, aluminiumskinner, udskiftbar polstring og en rullerul med antiglidbelægning for sikker og blød gang. Polstringen kan også anvendes som tåkappe.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer; akut fodledsdistorsion, hæleneruptur, bløddelsskader, postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Fodpladens længde
47630	ROM Walker, Sort	Small	Bilat.	25,1 cm
47630	ROM Walker, Sort	Medium	Bilat.	27,9 cm
47630	ROM Walker, Sort	Large	Bilat.	29,7 cm
47630	ROM Walker, Sort	X-Large	Bilat.	31,6 cm
47631	Ekstra polstring inkl. båndsat	Small		
47631	Ekstra polstring inkl. båndsat	Medium		
47631	Ekstra polstring inkl. båndsat	Large		
47631	Ekstra polstring inkl. båndsat	X-Large		

NYHED!



Walker AIR høj

Immobiliserende walker, lavet af formsprøjtet polypropylen, i et letvægt, holdbart og stabilt design. Med et integreret luftsystem kan du gradvist øge/mindske immobilisering efter behov. Ortosen har to faste metalstøtter, som stabiliserer fod og ankel. Polstringen er foret med et blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, der beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Ekstra polstring, bånd-sæt og tåbeskyttere kan bestilles. Kilesystem kan anvendes. Let at montere.

Øvrigt: Høj Small 35 cm. Høj Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47607	Walker Air høj	Small	23 cm
47607	Walker Air høj	Medium	27 cm
47607	Walker Air høj	Large	30 cm
47610	Ekstra båndset	Small	
47610	Ekstra båndset	Medium/Large	
47614	Ekstra polstring	Small	
47614	Ekstra polstring	Medium	
47614	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	



Walker hækile

Kilsystem sæt med 6 stk. hver giver en vinkel fra ca. 4°. I alt op til 20°. Fås i tre størrelser.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
47617	Hækil sæt	Small	6 Stk.
47617	Hækil sæt	Medium	6 Stk.
47617	Hækil sæt	Large	6 Stk.

Optima Diab

Optima Diab er en knæhøje støvle der primært er beregnet til den diabetiske fod mhb forfoden og mellemfoden. Støvlen har en stabil høj hæl, der kan ændres med varmepistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et sæt modulerbarer pussel indlægssåler medfølger "Optima indlæg 3x3 pr.sæt", for målrettet aflastning af det plantare fodsår. Indlægssålerne giver en vægtaflastning ved hjælp af de 3-lag samt 3 fastheds niveauer (stiv, medium, blød). Velcro bånd samt et fikseringsbånd sikrer at produktet ikke kan fjernes. "Optima indlæg ved amputation" passer i Optima Diab og kan bestilles separat.

Anvendelsesområde: Diabetiske fodsår og fodsår i forfoden og mellemfoden, rehabilitering efter mindre amputationer (undtagelse - Chopart amputation), rehabilitering efter operation af foden, behandling af Charcot fod i overgangsfasen fra akut til kronisk.

Øvrigt: Instruktion video tilgængelig på Youtube / Camp Scandinavia / Molliter Optima / Optima diab.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79000	Optima Diab	Small	Bilat.	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilat.	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilat.	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilat.	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Medium	Bilat.	37 - 39
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Large	Bilat.	40 - 42
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	X-Large	Bilat.	43 - 45
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Clheel

Optima Clheel er en knæhøje aflastende støvle der primært er beregnet til diabetiske fodsår og skader på hælen. Støvlen har åben i hælen med en høj stabil bagkappe, der kan ændres med varmpistol. Polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et sæt modulerbare pussel indlægssåler medfølger "OptimaClheel indlæg 3x3 pr.sæt", for målrettet aflastning af det plantare fodsår. Indlægssålerne giver en vægtaflastning ved hjælp af de 3-lag samt 3 fastheds niveauer (stiv, medium, blød). Velcro bånd samt et fikseringsbånd sikrer at produktet ikke kan fjernes.

Anvendelsesområde: Diabetes- plantar sår eller skader på hælen, ledbåndsskader, tryksår.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79002	Optima Clheel	Small	Bilat.	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilat.	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilat.	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilat.	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Medium	Bilat.	37 - 39
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Large	Bilat.	40 - 42
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	X-Large	Bilat.	43 - 45
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Postop

Optima Postop er en lav, aflastende støvle der primært er beregnet til behandling af iskemiske sår. Støvlen har en høj rigid bagkappe, der kan ændres med varmpistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. Både "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" og "Optima indlægssål ved amputation" passer i Optima Postop støvlen.

Anvendelsesområde: I behandling af iskemiske sår (før og efter revaskularisering), Metatarsalfrakturer, rehabilitering efter tåamputation, før stabiliseringsoperationer, tåfrakturer.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79001	Optima Postop	Small	Bilat.	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilat.	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilat.	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilat.	43 - 45

Optima Europa

Optima Europa er en sko beregnet til behandling af fodrehabilitering. Skoen har en rigid bagkappe, der kan ændres med varmpistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, en plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. Både "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" og "Optima indlægs ved amputation" passer i Optima Europa.

Anvendelsesområde: Behandling af sår mellem tæerne, rehabilitering efter hallux valgus operationer, rehabilitering efter hammertås operation, rehabilitering efter operation af Mortons neurom, rehabilitering efter fjernelse af negl.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79003	Optima Europa	Small	Bilat.	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilat.	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilat.	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilat.	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Free

Optima Free er en støvle beregnet til behandling af fodrehabilitering. Støvlen har en rigid bagkappe, der kan ændres med varmpistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, en plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" passer i Optima Free.

Anvendelsesområde: Dorsale skader af foden, rehabilitering efter hallux valgus operationer.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79004	Optima Free	Small	Bilat.	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilat.	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilat.	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilat.	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilat.	46 - 48





Optima indlæg 3x3 pr.sæt

Optima indlæg 3x3 pr.sæt er beregnet for målrettet aflastning af plantare fodsår. Indlægget har tre lag og 3 forskellige fastheder ; Regid, (Blå, 40Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Blød (Rød, 20 Sh) som kan kombineres og tilpasses til fodsår. Optima indlæg 3X3 pr.sæt indgår som standard i Optima Diab men passer også til Optima Postop, Europa og Free, kan også bestilles separat.

Øvrigt: OBS! Optima Indlæg 3x3 pr.sæt skal tilpasses udelukkende af medicinsk personale. Anvend aldrig indlæggene i en almindelig sko eller andre ortopædiske sko. Hele sættet skal altid anvendes med alle komponenter komplet sammen til hinanden inden i Optima støvlen. Anvend Optima brugervejledningen for tilpasningen. Instruktionsfilm findes på Youtube / Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Medium	Bilat.	37-39
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Large	Bilat.	40-42
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	X-Large	Bilat.	43-45
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	XX-Large	Bilat.	46-48



Optima indlæg ved amputation

Optima indlæg ved amputation er en indersål af EVA-materiale lavet til at anvende i OptimaDiab, Postop og Europa efter transmetatarsal amputation.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79007	Optima indlæg ved amputation	Small	Bilat.	34-36
79007	Optima indlæg ved amputation	Medium	Bilat.	37-39
79007	Optima indlæg ved amputation	Large	Bilat.	40-42
79007	Optima indlæg ved amputation	X-Large	Bilat.	43-45
79007	Optima indlæg ved amputation	XX-Large	Bilat.	46-48

Body Armor Pro Term

En amputationsortose for midlertidig behandling efter Chopart eller Lisfranc amputationer. Et alternativ til den første lægningsperiode. Sålens form både på inder- og ydresiden holder hælen i dorsalekstension og derved sikre at belastningen ligger på hælen. Den stabile konstruktion holder stumpen godt på plads og hjælper med til at bibeholde formen. Inderstrømpen har en indbygget pumpefunktion som hjælper med at holde formen igennem let kompression. Findes i to størrelser afhængig af stumpens længde. 16 respektiv 19 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilat.
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilat.



Mål: Stumpens længde



SBI Motus Diabetes Walker

SBI Motus Diabetes Walker er beregnet til aflastning af diabetes fodsår på mellemfoden og fremfoden. Ortosen har en r-stabil plastramme som beskytter tibia og en aftagelig polstring der kan ændres med varmepistol. Den aftagelige ydersål; Total rullensål er beregnet for behandling af plantarskader ved fodsår. Som tilbehør findes der også en aftagelig ” Stabil rullensål” som hjælper til med at gå fra akut til kronisk behandling. Ortosen har et flytbar fikseringsbånd, som sikre at Ortosen ikke kan tages af. Justerbare SBI indlæg 3x3 pr.sæt er indlægs såler forbeholdt for målrettet aflastning af plantare fodsår. Indlægget har 3 lag og 3 forskellige fastheder (rigid, medium og blød) som kan kombineres og tilpasses til fodsåret. SBI indlæg 3x3 pr.sæt indgår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

Anvendelsesområde: Sårpleje og behandling af fremfod- og mellemfods fodsår ved diabetes. Som stabilisering for en Charcot fod. Ved rehabilitering efter operation.

Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilat.	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilat.	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilat.	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilat.	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilat.	46 - 48

SBI Frame Post-op Walker

Prefabrikerede og justerbar trauma-Walker. Med lav vægt og høj komfort, for funktionel rehabilitering. Stabil plast ramme som beskytter tibia og en inder strømpe som kan fjernes samt kan formes med en varmepistol. Flytbar placering af velcrostrømpe. Aftagelig Stabil Rulle og et enkelt SBI indlæg ingår.

Anvendelsesområde: Stabil fod- og ankelfraktur, svære ankel forstuvninger, post-operativ behandling.

Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilat.	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilat.	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilat.	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilat.	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilat.	46-48





SBI Wheel Walker

SBI Wheel Walker er udviklet for funktionel rehabilitering og hælaflastning ved behandling af sår på hælen. Ortosen har lav vægt og høj komfort, er åben i hælen for aflastning af sår. Den åbne hæl bidrager også med lufttilgang af sår samt såret kan tilses ved behov. Ortosen er justerbar med en plastramme som beskytter tibia og en aftagelig polstring der kan ændres med varmepistol. Aftagelige Total rullerul er beregnet for behandling af plantarskader ved fodsår samt justerbare indlægssåler 3x3 pr.sæt som indgår i produktet. Ortosen har flytbare velcrostropper.

Anvendelsesområde: Behandling af sår på hælen.

Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Small	Bilat.	34-36
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Medium	Bilat.	37-39
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Large	Bilat.	40-42
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	X-Large	Bilat.	43-45
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	XX-Large	Bilat.	46-48

SBI Beskyttelsesbetræk

SBI Beskyttelsesbetræk er vandafvisende og holder SBI Walkeren ren. Den er designet til SBI Motus, SBI Frame og SBI Wheel. Materialet er semi-elastisk med en lynlås bagpå. En gummisål der giver bedre stabilitet under gang. Beskyttelsesbetrækket kan vaskes.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Small	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Medium	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Large	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	X-Large	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	XX-Large	Bilateral



SBI Walker- ramme med lukket hæl

Udskiftningsbar ramme med lukket hæl til SBI Motus Diabetes Walker og SBI Frame Post- op Walker.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Small	Bilat.	34 - 36
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Medium	Bilat.	37 - 39
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Large	Bilat.	40 - 42
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	XX-Large	Bilat.	46 - 48





SBI Walker- ramme åben hæl

Udskiftningsbar ramme med åben hæl til SBI Wheel Walker med åben hæl.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Small	Bilat.	34 - 36
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Medium	Bilat.	37 - 39
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Large	Bilat.	40 - 42
79019	SBI Walker-ram åben hæl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79019	SBI Walker-ram åben hæl	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI komplet inderdel til SBI Walker

Flytbar komplet inderdel til SBI Walker i Multidensity blød EVA som kan formes.

Inderdelen er formet efter fodens og benets anatomi. Tibiadeskyttelsen har en aftagelig extra skinnebensforstærkning.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Small	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Medium	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Large	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	X-Large	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	XX-Large	Bilat.

SBI Spænde og Bånd til Walker.

Flytbar komplet sæt til SBI ortosen med 8 spænder og 4 bånd.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
79021	SBI Spænder og Bånd til Walker	Small/Medium	8 spænder, 4 bånd
79021	SBI Spænder og Bånd til Walker	Large/X-Large/ XX-Large	8 spænder, 4 bånd



SBI Stabil Rullesål

Sålerne på SBI ortosen kan hurtigt og enkelt sættes på, løsnes og fjerne fra hovedproduktet. En Stabil Rullesål har mindre afrulning end den Totale Rullesål og anvendes når behandlingen overgår fra akut fasen til den kroniske fase. Den Stabile Rullesål indgår ikke med produktet, men kan købes separat.

Øvrigt: OBS! Anvend aldrig SBI ortosen uden sål. Læs omhyggeligt brugervejledningen angående udbytning af såler.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79022	SBI Stabil Rullesål	Grå	Small	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullesål	Grå	Medium	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullesål	Grå	Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullesål	Grå	X-Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullesål	Grå	XX-Large	Bilat.





SBI Total Rullesål

Sålerne på SBI ortosen kan hurtigt og enkelt sættes på, løsnes og fjernes fra hovedproduktet. SBI Total Rullesål indgår i SBI ortosen ved leveringen. Den er beregnet til at anvende under den akutte fase ved behandling af plantare fodsår. Den har mere afrulning end SBI Stabil Rullesål.

Øvrigt: OBS! Anvend aldrig SBI ortosen uden sål. Læs omhyggeligt i SBI brugervejledningen angående udbytning af såler.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Small	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Medium	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	X-Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	XX-Large	Bilat.



SBI indlæg 3x3 pr.sæt

Modulsystemet SBI indlæg 3x3 pr.sæt er beregnet for målrettet at fordele trykket på fodsålen og håndterer sår på fremfod, mellemfod og hæl. Sættet består af ni dele som er koblet til hinanden som puslespils system som danner 3 forskellige plantarsåler. De tre har tre forskellige fastheder ; Regid, (Blå, 40Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Blød (Rød, 20 Sh) som kan kombineres vertikalt og horisontalt. Trykket på fodsålen kan enkelt omfordes ved at man kombinerer de forskellige dele. Indlæggene er beregnet til at anvende i SBI Motus (medfølger), SBI Wheel (indgår), SBI Frame (tilvalg)

Øvrigt: OBS! SBI Indlæg 3x3 pr.sæt skal tilpasses udelukkende af medicinsk personale. Anvend aldrig indlæggene i en almindelig sko eller andre ortopædiske sko. Hele sættet skal altid anvendes med alle komponenter komplet sammen til hinanden inden i SBI ortosen. Anvend SBI brugervejledningen for tilpasningen. Instruktionsfilm findes på Youtube / Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Small	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Medium	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Large	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	X-Large	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	XX-Large	Bilat.

SBI Indlæg ved amputation

SBI Indlæg ved amputation er beregnet for anvendelse af postoperativt efter amputation af tå eller ved transmetatarsal amputation. Indlægget er beregnet til at anvende i en SBI Motus (tilvalg), SBI Wheel (tilvalg), SBI Frame (tilvalg).

Øvrigt: SBI Indlæg ved amputation kan kun ordineres af medicinsk personale. Anvend aldrig indlægget i almindelige sko eller i andre ortopædiske sko. Anvend SBI Brugervejledningen for tilpasning.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79025	SBI Indlæg ved amputation	Small	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	Medium	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	Large	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	X-Large	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	XX-Large	Bilat.



SBI Indlæg enkel

En kraftig single indlægssål som indgår i SBI Frame Post- op Walker Art.nr. 79016, kan også købes separat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79026	SBI Indlæg enkel	Small	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	Medium	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	Large	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	X-Large	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	XX-Large	Bilat.




SBI Tube strømpe uden søm

Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger alle SBI produkterne ved levering.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79027	SBI Tube strømpe uden søm	Blå	One Size	Bilat.



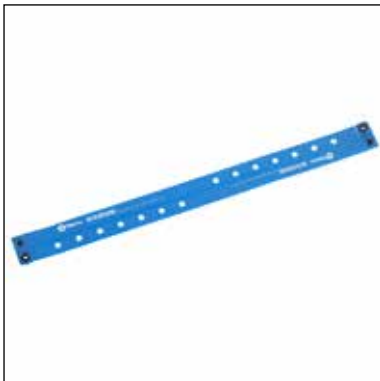

SBI Fikseringsbånd til Walkers

Fikseringsbåndet er beregnet som sikring for at Ortosen ikke kan tages af.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
79028	SBI Låsband til Walker	One Size	2 stk.



Knæortoser

www.camp.dk



Mål: Omkring knæet under patella.



Mål: Mål tages over knæet.

Patellavator

Patellavator knæortose giver ved kompression mod patellasenen lindring af smerter i knæet ved patella tendinitis. Ortosen er fremstillet af et CoolFlex materiale som tillader huden at ånde for komfort ved daglig anvendelse og træning. Den vatterede kerne giver et jævnt fokuseret tryk over patellasenen i forhold til at reducere smerter og ømhed. For en mere effektiv kompression har Patellavator et unikt snøredesign, der øger spændingen fra båndet. Desuden er der interlock-lukning der er designet til at tåle aggressiv anvendelse uden at åbne sig og ikke påvirke det modsatte ben under løb etc. Knæbåndet er også designet, så det hindrer stase omkring benet og undgår at irritere poplitealområdet på bagsiden af knæet.

Anvendelsesområde: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sygdom og Chondromalacia patella.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28674	Sort	Small	28-33 cm	Bilat.
28674	Sort	Medium	33-39 cm	Bilat.
28674	Sort	Large	39-44 cm	Bilat.
28674	Sort	X-Large	> 44 cm	Bilat.

ELEMENTS knæ

ELEMENTS knæ er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer f.eks. smerte og betændelse. Knæstøtten giver let kompression og holder leddet varmt.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks. smerte og betændelse.

Kontraindikationer: Ødem, ledbåndsskader, bensår eller kraftig hævelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34106	Beige/Sort	X-Small	30 - 33 cm	Bilat.
34106	Beige/Sort	Small	33 - 36 cm	Bilat.
34106	Beige/Sort	Medium	36 - 39 cm	Bilat.
34106	Beige/Sort	Large	39 - 42 cm	Bilat.
34106	Beige/Sort	X-Large	42 - 47 cm	Bilat.

PatellaCamp

Patella Camp er en knæortose beregnet til at give stabilitet til patella. Ortosen er en slå-om-model og er åben i knæhasen. Pelotten placeres mod den instabile side af patella og de to elastiske bånd strammes til ønsket støtte opnås.

Anvendelsesområde: Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Kontraindikationer: Kraftige ødem når kompression kan påvirke cirkulationen.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28679	Marineblå	Medium	<40 cm	Bilat.
28679	Marineblå	Large	>40 cm	Bilat.



Mål: Knæmål midt-patella

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Slå-om-model med kraftig pelotte til stabilisering af patella. Patellastøtten kan applikeres lateralt eller medialt. Pelotten justeres let med de to små bånd. Ortosen har integrerede bånd og er åben i knæhasen. Fremstillet i åndbart materiale.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, efter lukseret patella og sublukseret patella.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28677	Sort	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28677	Sort	Small	30-35 cm	Bilat.
28677	Sort	Medium	35-40 cm	Bilat.
28677	Sort	Large	40-45 cm	Bilat.
28677	Sort	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28677	Sort	XX-Large	50-55 cm	Bilat.



Mål: Knæmål midt-patella



Mål: Knæmål midt-patella cirkulært

Active X™ Patella

Denne åbne model er lavet for at stabilisere patella primært i M-L plan. Ortosen har en indbygget special-lavet pelotte, som gennem sin konstruktion lægger sig fast på siden af patella, griber fat og holder patella på plads. For ekstra støtte har ortosen en aftagelig halvmånedformet plastskinne. Materialet er det innovativa ventilerende ActiveX-materiale, som er behageligt følsomt.

Anvendelsesområde: PFSS (Patellafemoralt Smerte Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28055	Sort	XX-Small	24-29 cm	Bilat.
28055	Sort	X-Small	28-33 cm	Bilat
28055	Sort	Small	32-37 cm	Bilat
28055	Sort	Medium	36-41 cm	Bilat
28055	Sort	Large	40-45 cm	Bilat



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella er en knæortose, som har direkte fokus på patella problemer. Den hesteskoformede pelotte kan enkelt tages ud og placeres på den side af patella, såfremt der er brug for støtte. Pelotten har elastiske bånd, der hæfter i det bløde velourmateriale omkring knæet. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere ortosen. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Patella luxation, patellofemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, smerter omkring knæleddet.

Øvrigt: Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35704	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35704	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35704	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35704	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35704	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.

SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor anvendes ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Modellen er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Patellaåbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres i forhold til at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæsmerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35700	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35700	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35700	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35700	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35700	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35700	Sort	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Minor Wrap

SELECTION® Minor anvendes ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Det åbne design gør ortosen let at tage på og af. Patellaåbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres for at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæ smerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformationen i tabellen. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35701	Sort	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35701	Sort	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35701	Sort	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Sort	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Sort	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Sort	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Sort	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Sort	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Sort	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Sort	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Sort	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

SELECTION® Knæ Optima

SELECTION® Optima anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse. Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperekstensjonskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Denne model er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning i forhold til optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperekstension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval i ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35702	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35702	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35702	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35702	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35702	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35702	Sort	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse.

Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led.

Hyperekstensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer.

Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning for optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperekstension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformation i tabellen. Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35703	Sort	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35703	Sort	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35703	Sort	Small Plus	28-31 cm	33-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Sort	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Sort	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Sort	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Sort	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Sort	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Sort	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Sort	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Sort	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

CROSS™ semi-rigid knæortose til hyperekstension

CROSS™ er en semi-rigid knæortose, som anvendes ved overstrækning i knæleddet. CROSS er udviklet specielt til at passe sammen med en ALLARD AFO (Ankel-Fod-Ortose/Dropfodsortose).

Der er intet bånd eller spænde, der kommer i konflikt med kompositskinnen.

Båndkrydset på bagsiden stabiliserer overstrækningen.

Den unikke konstruktion gør ortosen let at tage på og af med én hånd. Ortosen har en ultrablød inderside uden søm. Den bløde inderside gør at ortosen glider let mod huden og derfor er let at trække op på benet. For at hindre migration har ortosen silikonebånd strategisk placeret på indersiden.

Den unikke forstærkning i overkanten gør, at CROSS™ altid forbliver åben, hvilket er en forudsætning for at kunne tage ortosen på med én hånd. Ta-på hornet hjælper personer med nedsat balance og rækkevidde til at styre ortosen over foden og trække den op på benet.

Cross™ -ortosen har led med indstilling for fleksion og ekstension.

Bevægelsesinterval i ROM leddet er fleksion: 45, 60, 75, 90 grader og ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Ortosen leveres med leddene indstillet i 10 grader fleksion.

Anvendelsesområde: Cross™ er lavet i forhold til mild til moderat hyperekstension i knæleddet, som følge af neuromuskulære sygdomme eller andre skader. Ortosen kan anvendes sammen med Allard AFOs, når hyperekstension i knæleddet forekommer i kombination med dropfod.

Øvrigt: CROSS™ kan vaskes i 40 grader. For mere information om anvendelse og på- og aftagning af CROSS™, henviser vi til YouTube, hvor der findes afprøvningsvideo. I emballagen er der også en tydelig grafisk instruktion om, hvordan man let tager ortosen på og af.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28715	CROSS™ knæortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ knæortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ knæortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ knæortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ Ta-på-hornet	One Size			



Active X™ Short

En knæortose til forskellige typer knæsmarter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksion/ekstensionstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Leveres med leddet indstillet på 10° fleksion. Sæt med stoppere er inkluderet.

Anvendelsesområde: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 32 cm.

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28050	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Slå-om-model	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksion/ Ekstension stop					

Active X™ Long

En knæortose til forskellige typer knæsmarter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksion/ekstensionstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Cirkulerende bånd med D-ring (to oppe og to nede) som kan løsnes. Leveres med leddet indstillet på 10° fleksion. Sæt med fleksion/ekstension stop er inkluderet.

Anvendelsesområde: Mindre mediale eller laterale meniskskader. Mild gonartrose, bursit og ledbesvær.

Kontraindikationer: Alvorlige knæskader som ACL/PCL rupturer. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 40 cm.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28052	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksion/ Ekstension stop					



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Active X Sleeve

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smertetilstanden i knæet. Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella-åbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Omkring patella åbningen ligger en blød polstring i forhold til øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på lårets forside samt på læggens bagside. Active X Sleeve har en spiralskinne på hver side.

Anvendelsesområde: Knæsmerte ved belastning, lette ligamentskader, overanstrengelse, mild knæinstabilitet.

Kontraindikationer: Svære knæskader så som ACL/PCL-rupturer, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på problem ved hævelse og/ eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Ortosens længde er 32 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28056	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Active X Sleeve PLUS

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smerten i knæet. Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella åbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Omkring patella-åbningen ligger der en blød polstring for øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på låret foran samt bagpå læggen. Active X Sleeve PLUS har to spiralskiner på hver side samt to stabiliserende cirkulære bånd. PLUS er derfor noget mere stabil end Active X Sleeve. I øvrigt har ortoserne samme design og egenskaber.

Anvendelsesområde: Knæsmerte ved belastning, lettere ligamentsskader, overanstrengelse, mindre knæinstabilitet

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL ruptur, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på hævelse og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Ortosens længde er 32 cm.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Active X™ Double Axis

En knæortose til forskellige typer knæ smerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har dobbeltledet skinner og er indstillet på 10 graders fleksion. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Påtrækningsmodellen har en blød polstring rundt om patella i forhold til øget stabilisering.

Anvendelsesområde: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28058	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

Elcross slå-om

Slå-om-model med åbning til patella og i knæhasen. Modellen har integreret støttebånd med velcrolukning, der går helt rundt og gør den let at tage på og af. Ortosen har enkeltledet skinner: Elcross-materialet har blød bomuld på indersiden og polyester på ydersiden.

Anvendelsesområde: Generel knæledsinstabilitet og smerte i knæleddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28124	Beige	Small	31-37 cm	Bilat.
28124	Beige	Medium	37-43 cm	Bilat.
28124	Beige	Large	43-49 cm	Bilat.
28124	Beige	X-Large	49-55 cm	Bilat.



Mål: Knæmål midt-patella

Gripper™ hinged knee

Slå-om-model med patellaåbning og åbning i knæhasen. Modellen har integreret bånd, der går helt rundt samt metalskiner i forstærkede lommer. Enkel at tage på og af. Ortosen er fremstillet af åndbart materiale. For at hindre ortosen i at glide ned er den forsynet med et antiglidmateriale på indersiden.

Anvendelsesområde: Mild knæledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28128	Sort	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28128	Sort	Small	30-35 cm	Bilat.
28128	Sort	Medium	35-40 cm	Bilat.
28128	Sort	Large	40-45 cm	Bilat.
28128	Sort	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28128	Sort	XX-Large	50-55 cm	Bilat.
28128	Sort	XXX-Large	>55 cm	Bilat.



Mål: Knæmål midt-patella

KNEE immobilizer

Immobiliseringsortose af polyester-velour med indbyggede skinner til stabilisering. Ortosen er opbygget i paneler for enkelt at give mulighed for at justere omfanget. Velcrolukning gennem D-ringe. Enkel at justere til korrekt størrelse. Åbning til patella. Findes i voksen og børne størrelser

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling, muskel- og ledbandskader, efter gipsing og ved simpel standtræning.

Art. nr.	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Længde	Ve/Hø
28655	Børn	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilat.
28655	Voksen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm over midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella



Mål 1: Længde ortose

Mål 2: Omkreds lår

Mål 3: Omkreds læg

Kneimmobiliseringsskinne

Immobiliseringsskinne beregnet til midlertidig immobilisering af knæleddet. Kan desuden anvendes som støtte ved let standtræning. Skinnen findes i to forskellige længder. For at justere omkredsen kan de to sidestykker flyttes fremad/bagud med det formål at tilpasse størrelsen optimalt. De dorsale skinner kan bukkes forsigtigt til ønsket grad af fleksion.

Anvendelsesområde: Ved midlertidig immobilisering af knæleddet og ved let standtræning, posttraumatisk og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
47500	Lysegrå	Small/Medium	51 cm	39-60 cm	30-45 cm
47500	Lysegrå	Large/X-Large	60 cm	47-73 cm	34-47 cm



OACTIVE®2

Unilateral knæ ortose til behandling af slidgigt i knæet. Smidig og enkel konstruktion med lav vægt. Fremstillet i aluminium. Ortosen har smarte innovative spænder for at gøre det lettere at tage ortosen af og på.

Det unikke Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition, med knæet bøjet i 90°, og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. OACTIVE®2 kan også indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop ved fleksion og ekstension. OACTIVE®2 findes i én størrelse, venstre eller højre.

Anvendelsesområde: Let til svær slidgigt i knæet. Medialt eller lateralt.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Øvrigt: OACTIVE®2 har en maksimal vægtgrænse på 135 kg.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
55000	OACTIVE 2	One Size	Ve/Hø
55012	Ekstra Båndsat (uden spænde)	One Size	Ve/Hø
55013	Ekstra Polstring	One Size	Ve/Hø
55014	Suspension Wrap	61 cm	
55014	Suspension Wrap	81 cm	

Catalyst Propel™ OA

Denne fire-punkts-knæ ortose er beregnet til behandling af let til svær slidgigt i knæet i kombination med knæ instabilitet eller efter skade for at reducere belastningen i leddet. Ortosen har den unikke Active Thigh Cuff™ (ATC) løsning på forsiden af låret. Dette er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet der muliggør den ultimative affjedring. Giver beskyttelse og komfort ved at bevæge sig med musklerne gennem hele bevægelsen. Stærk, lavprofil aluminiumsramme af højeste kvalitet giver god beskyttelse.

Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition, med knæet bøjet i 90°, og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop ved fleksion og ekstension. Catalyst Propel™ OA kan også indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Let til svær enksidig slidgigt i knæet i kombination med knæ instabilitet. Efter skade for at reducere belastningen af leddet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Medium	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsæt	Small				
55010	Ekstra Båndsæt	Medium				
55010	Ekstra Båndsæt	Large				
55010	Ekstra Båndsæt	X-Large				
55010	Ekstra Båndsæt	XX-Large				
5501I	PCL Bånd	35 cm				
5501I	PCL Bånd	43 cm				
5501I	PCL Bånd	50 cm				



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

FreeFlex™ OA

Denne tekstile OA-ortose er beregnet til anvendelse ved let til moderat enkeltsidig slidgigt i knæet. Det er en hel åbent Wrapmodel med led på den ene side. Samme ortose fungerer til medial eller lateral side. Medial højre bliver en lateral venstre. Det unikke Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition med knæet bøjet i 90° og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop i fleksion og ekstension.

FreeFlex™ OA kan også indstilles til at begrænse bevægelseomfanget for ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Let til moderat enkeltsidig slidgigt i knæet i kombination med knæinstabilitet. Efter skade for at reducere belastningen i leddet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Øvrigt: Ortose til venstre = Venstre medial/højre lateral. Ortose til højre = Højre medial/venstre lateral.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	XS/S	>29-33 cm	>29-33 cm	>37-43 cm	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	M/L	33-42 cm	33-43 cm	43-57 cm	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	XL/XXL	42-56 cm	43-56 cm	57-76 cm	Ve/Hø

Catalyst Propel™ ATC

Denne fire-punkts ligamentortose har alle de ønskede funktioner til den aktive bruger. Den patenterede Active Thigh Cuff (ATC) er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet, som giver den ultimative affjedring. Stærk og behagelig og lader musklerne følge med i hele bevægelsen. Ortosen er lavet af lavprofil aluminium af højeste kvalitet. Skinnerne kan tilrettes til optimal pasform. Catalyst Propel ATC har en bøjle foran på skinnebenet.

Catalyst Propel™ ATC kan indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Stabilisering af ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombineret ligamentinstabilitet, som sikkerhed efter operation. Konservativ behandling af ligamentskader. Forebyggelse i forbindelse med høj aktivitet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.



Mål 1: Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsæt	Small				
55010	Ekstra Båndsæt	Medium				
55010	Ekstra Båndsæt	Large				
55010	Ekstra Båndsæt	X-Large				
55010	Ekstra Båndsæt	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				



Mål: Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Propel™ Rigid Top

Denne fire-punkts ligamentortose har alle de ønskede funktioner til den aktive bruger. Ortosen er lavet af lavprofil aluminium af højeste kvalitet. Skinnerne kan tilpasses til optimal pasform. Catalyst Propel™ Rigid Top har en bøjle foran på låret og på skinnebenet.

Catalyst Propel™ Rigid Top kan indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Stabilisering af ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling i kombineret ligamentinstabilitet, som sikkerhed efter operation. Konservativ behandling af ligamentskader. Forebyggelse i forbindelse med høj aktivitet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsæt	Small				
55010	Ekstra Båndsæt	Medium				
55010	Ekstra Båndsæt	Large				
55010	Ekstra Båndsæt	X-Large				
55010	Ekstra Båndsæt	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Catalyst Elite™ ATC

Denne fire-punkts ligamentortose har alle de ønskede funktioner til for den aktive bruger. Den patenterede Aktive Tigh Cuff (ATX) er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet, som giver den ultimative affjedring. Stærk og behagelig og lader musklerne følge med i hele bevægelsen.

Ortosen er lavet af lavprofil aluminium af højeste kvalitet. Skinnerne kan tilpasses til optimal pasform. Catalyst Elite™ ATC har bøjle på læggen.

Catalyst Elite™ ATC kan indstilles til at begrænse bevægelsesomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Stabilisering af ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombineret ligamentinstabilitet, som sikkerhed efter operation. Konservativ behandling af ligamentskader. Forebyggelse i forbindelse med høj aktivitet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsæt	Small				
55010	Ekstra Båndsæt	Medium				
55010	Ekstra Båndsæt	Large				
55010	Ekstra Båndsæt	X-Large				
55010	Ekstra Båndsæt	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Elite™ Rigid Top

Denne fire-punkts ligamentortose har alle de ønskede funktioner til den aktive bruger. Ortosen er lavet af lavprofil aluminium af højeste kvalitet. Skinnerne kan tilpasses til optimal pasform. Catalyst Elite™ Rigid Top har bøjle på lårets forside og på læggen.

Catalyst Elite™ Rigid Top kan indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Stabilisering af ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombineret ligamentinstabilitet, som sikkerhed efter operation. Konservativ behandling af ledbåndsskader. Forebyggelse i forbindelse med høj aktivitet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33	37-43 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndset	Small				
55010	Ekstra Båndset	Medium				
55010	Ekstra Båndset	Large				
55010	Ekstra Båndset	X-Large				
55010	Ekstra Båndset	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Catalyst Propel™ R.O.M.ATC

Catalyst Propel™ R.O.M.ATC er fremstillet, så den også kan fungere som en postoperativ ortose. Udover leddets indstillingsmuligheder har den samme egenskaber og funktioner som ligamentortosen Catalyst Propel R.O.M. Ortosen har den patenterede Actie Thigh Cuff (ATC), som er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet, som giver den optimale pasform. Stærk og behagelig og lader musklerne følge i hele bevægelsen. Ortosen er fremstillet i lavprofil aluminium af højeste kvalitet. Skinnerne kan tilrettes for optimal pasform. Catalyst Propel R.O.M.ATC har en bøjle på underbenets forside.

Catalyst Propel™ ROMATC kan låses i en fast position ved 0°, 15°, 30°, 60°, eller 90° eller indstilles i bevægelsesomfanget mellem 0°, 15°, 30°, 60° og 90°.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling. Stabilisering af ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombineret ligamentindstabilitet. Konservativ behandling af ligamentskader.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra polstring	Small				Ve/Hø
55008	Ekstra polstring	Medium				Ve/Hø
55008	Ekstra polstring	Large				Ve/Hø
55008	Ekstra polstring	X-Large				Ve/Hø
55008	Ekstra polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra bånd	Small				
55010	Ekstra bånd	Medium				
55010	Ekstra bånd	Large				
55010	Ekstra bånd	X-Large				
55010	Ekstra bånd	XX-Large				



Mål: Knæmål midt-patella



Mål: Knæbredde M-L midt patella

Swedish Knee

Ortose til hyperekstension eller instabilitet i knæleddet. Fremstillet af aluminium med bånd i bomulds lærred. Enkel konstruktion med justerbar pelotte samt formbare skinner. Intet mekanisk knæled.

Anvendelsesområde: Hyperekstension i knæleddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28668	Hvid	Small/Medium	28 - 38 cm	Bilat.
28668	Hvid	Medium/Large	38 - 53 cm	Bilat.
28669	Extra bånd/skrue-sæt.	Small/Medium		Bilat.
28669	Extra bånd/skrue-sæt.	Medium/Large		Bilat.

CHECK™ stainless steel

Bekvem knæortose fremstillet af rustfri stål. Beregnet til at modvirke hyperekstension og samt støtte ved instabilitet i knæleddet. Ortosens længde bevirker, at trykket mod femur og tibia bliver mindre og ortosen bliver mere behagelig. Den smidige konstruktion gør, at ortosen kan bæres under tøjet. Polstringen er fremstillet af kunstlæder. D-ringene, der medfølger, kan sættes på den side, der passer patienten bedst. Ortosen har kondylpuder.

Anvendelsesområde: Check Stainless formål er at modvirke hyperekstension i knæleddet og at støtte knæinstabilitet. Indikationer for at bruge Check Stainless er: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, neurologiske skader/sygdomme som medføre svaghed i M Quadriceps.

Kontraindikationer: Ikke beregnet til idrætsudøvelse.

Art. nr.	Farve	Mål	Længde	Ve/Hø
28652	Sort	9-13 cm	45 cm	Bilat.
28651	Ekstra båndset			
28653	Ekstra D-ringe 4 stk.			

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperextension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinnen og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperextension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m.

Kontraindikationer: Totalt bortfald af ligament i knæet. Totalt Quadricepsbortfald. Patientlængde over 2 meter. Patientvægt over 150 kg. Kraftigt reduceret kognitive evner. OBS: Når afprøvning er udført må der ikke være mere end 10° hyperextension tilbage i ortosen.



Mål: Knæmål 1: Mål M-L midt-patella
Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella
Knæmål 3: Mål M-L 20 cm over patella.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 2	Knæmål 3	Knæmål 1
28780	Knæled m. skinner	One Size				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 stk)	Small				
28783	Softkit (2 stk)	Medium				
28783	Softkit (2 stk)	Large				
28783	Softkit (2 stk)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				



Ascender® post-op knæortose

Ascender® er en teleskopisk postoperativ knæortose med mulig indstilling mellem - 10° (hyperekstension) og 70°. Fleksions begrænsning kan indstilles mellem -10° og 120°. Indstillingen justeres enkelt ved at løfte og fjerne stropperne i leddet. Ledet kan også låses i fem forskellige positioner; -10° (hyperekstension), 0° (neutral), 10°, 20°, 30° fleksion. Ledet kan yderligt sikres ved at sætte en "Anti-tamper låsning" over selve stoppet. Det skal derefter klippes af med saks for at kunne åbne indstillingen.

Hver skinne kan justeres til ønsket individuel længde. På hver skinne findes et låg, som kan åbnes. Skinnen har tydelige markeringer for at sikre, at der er samme længde på den laterale og den mediale skinne.

Den bløde og behagelige polstring har anti-glid materiale på indersiden. Båndet låses med ekstra låsetap, så det holdes under afprøvningen. Ortosen lukkes med kraftige spænder, som fæstes. Båndets længde kan let justeres ved at løsne Y-tappen og klippe båndet til den ønskede længde. Polstringen og båndet kan vaskes i hånden med mild sæbe. Universalmodel som passer både til venstre og højre ben. One Size.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde	Ve/Hø
47540	Ascender post-op knæortose	One Size	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Komplet polstring og båndsat	One Size		Bilat.
47542	Ekstra polstringssæt	One Size		Bilat.
47543	Ekstra båndsat	One Size		Bilat.



E-SENSE ROM Postoperativ knæortose

Denne helt unikke postoperative knæortose har teleskop skinner, som kan justeres op eller ned i ønsket længde imellem 46 cm og 69 cm. Leddene kan indstilles i ønsket bevægelsesomfang. Fleksion fra 0°-120° med 10° interval og ekstension fra 0°-90° med 10° interval. Leddene kan også låses i 0°, 15° og 30° med en enkelt trykknop. Polstringen er udviklet i et "non-slip" materiale, som er åndbart. Materialets konstruktion hjælper til med at polstringen ikke glider ned på benet. En' størrelse som passer til både venstre og højre side. Der skal ikke anvendes værktøj for at justerer instillingerne. Båndet har dobbeltlåsning - både plastkrog og velcroløsning.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47522	E-SENSE ROM Postoperativ knæortose	One Size	46 - 69 cm	Bilat.
47523	Separat polstring	One Size		Bilat.

ROM Postoperativknæortose

Postoperativ knæortose i universelstørrelse med polstring som kan klippes uden at trevle. Skinner af metal der kan formes til den bedste pasform. Den behagelig og luftige polstring holdes på plads af de cirkulære bånd. Det indkapslede polycentriske led er let at justere med pinde som er fastgjort til leddet med et lille plastbånd for at forhindre at pindene falder væk. Leddet låses fast med en skrue for at forhindre det i at det ændrer sig. Leddet kan indstilles i ønsket grad af fleksion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) og ekstension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen fås i en kort og en lang version.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling og posttraumatisk behandling for immobilisering af knæleddet til kontrol af fleksion/ekstension.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Længde
28308	Knæortose, kort	Mørkeblå	Onesize	40 cm
28309	Knæortose, lang	Mørkeblå	Onesize	60 cm
28311	Ekstra Båndsat 28308 kort	Mørkeblå	Onesize	
28312	Ekstra Båndsat 28309 lang	Mørkeblå	Onesize	
28313	Ekstra Polstring 28308 kort	Mørkeblå	Onesize	
28314	Ekstra Polstring 28309 lang	Mørkeblå	Onesize	



NYHED!

Egne notater

[illegible]



Hofteortoser

www.camp.dk



NewCamp hofteortose

Rigid hofteortose med stålskiner. Består af en hofte- og lårdel, der kan sammensættes med et indstilleligt led i fleksion/ekstension og i abduktion. Ortosens fleksible hoftedel gør det muligt at anvende samme ortose til både kvinder og mænd. Aftagelig polstring, der fæstnes med velcrobånd.

Anvendelsesområde: Præ- eller postoperativt. For at undgå dislokation i hoftedet efter primær eller revideret alloplastik.

Øvrigt: For at få en komplet ortose skal både hoftedel og lårdel bestilles.

Art. nr.	Model	Størrelse	Taljemål	Ve/Hø	Lårmål
28686	Hoftedel m led	Small	60-90 cm	Bilat.	
28686	Hoftedel m led	Large	80-110 cm	Bilat.	
28684	Lårdel	Small		Bilat.	40-50 cm
28684	Lårdel	Large		Bilat.	50-60 cm
28687	Ekstra polstring hofte	Small		Bilat.	
28687	Ekstra polstring hofte	Large		Bilat.	
28688	Ekstra polstring hofte	Small		Bilat.	
28688	Ekstra polstring hofte	Large		Bilat.	
28685	Reservedelskit til hofte- og lårdel	Small		Bånd og skruer	
28685	Reservedelskit til hofte- og lårdel	Large		Bånd og skruer	

Lerman Haro hofteortose

Hofteortose med flere indstillingsmuligheder: Rotationsindstilling i transversalplan, kontrol og indstilling i både fleksion/ekstension og abduktion/adduktion. Plastkonstruktion med stål/aluminium led. Passer både kvinder og mænd.

Anvendelsesområde: Postoperativt.

Øvrigt: Ekstra polstring kan købes separat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Taljemål	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Small	70-80 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Medium	85-90 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Large	100-110 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	X-Large	115-125 cm	Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Small		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Medium		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Large		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	X-Large		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Small		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Medium		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Large/X-Large		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	X-Large		Ve/Hø





Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD er beregnet til personer med Multiple Sklerose (MS), som har generel svaghed i benet. HFAD er beregnet til at øge styrken i det ben, hvor HFAD anvendes, forbedre gangpræstationen og øge det daglige aktivitetsniveau. Ortosen består af et behageligt hoftebånd og to elastiske gummibånd der hæftes i skoene. Båndene assisterer ved hofte-, knæ- og dorsalfleksion i anklen. Niveaueet på assistansen kan let indstilles efter brugerens behov. HFAD kan anvendes over almindeligt tøj eller under løstsiddende tøj.

Anvendelsesområde: HFAD kan være fordelagtig for patienter med MS, som har; svaghed i hofte-, knæ- og fodledsfleksion, begrænset udholdenhed og evt. udmatning ved gang, svært ved at løfte ben eller fod. Til dem der anvender kompensatoriske bevægelser, såsom bækkenkip, circumduktion og/eller tyngdeoverføring til modsat side og de der har forsøgt at anvende en AFO for at kompensere for dropfod, men har stadig vanskeligt ved at gå på grund af svaghed i hofte og knæfleksorer. Med hjælp fra ortosen får man lettere ved at slappe af og dermed forbedret gangfunktion.

Øvrigt: Størrelse Small og Large er bestillingsvare.

Art. nr.	Model	Størrelse	Taljemål	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Small	61-82 cm	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Medium	83-102 cm	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Large	103-122 cm	Ve/Hø
62783	Dobbel HFAD	Small	61-82 cm	Bilateral
62783	Dobbel HFAD	Medium	83-102 cm	Bilateral
62783	Dobbel HFAD	Large	103-122 cm	Bilateral



Slynge til rotationskontrol

Bækkenbælte med slynge der anvendes til at korrigere og modvirke kraftig rotation i de nedre ekstremiteter. Ortosen hjælper til at normalisere gangmønstret gennem en langvarig stretch fra ankel til hofte. Slingen følger benet og fastgøres omkring foden.

Anvendelsesområde: Neurologiske skader og svaghed i de nedre ekstremiteter.


Art. nr.	Model	Størrelse	Bredde	Funktion
53305	B	Barn B	5,1 cm	Udadrotation højre ben/inadrotation venstre ben
53305	A	Barn A	5,1 cm	Udadrotation venstre ben/inadrotation højre ben
53305	D	Voksen D	7,6 cm	Udadrotation højre ben/inadrotation venstre ben
53305	C	Voksen C	7,6 cm	Udadrotation venstre ben/inadrotation højre ben

S.W.A.S.H.®


Korrekt positionering i stående, gående og siddende stilling.



Når hofteleddet flekteres til siddende stilling skabes en triangulær siddebase der øger stabiliteten og giver barnet en mere oprejst holdning. Dette øger forudsætningerne for en bedre holdning og giver en mere funktionel siddeposition, der bevirker at barnet i større grad kan bruge hænderne aktivt.

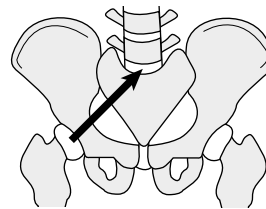

Med SWASH

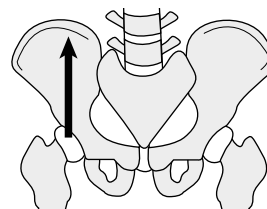

Uden SWASH

Primære funktionsmål ved anvendelse af SWASH-ortosen:

1. Øget abduction og stræk af hofteadduktorerne for at forbedre hofteledsplaceringen.
2. At forhindre overdrevent adduktion ved siddende stilling, stående og gående.
3. At forbedre holdningen i siddende stilling og stående position.
4. Samme ortose gøre det muligt at forflytte fra neutral (gå og stå) til abduction (siddende) med punkt 1, 2 og 3 opretholdt

SWASH-ortosen er en "team"-indsats. Det er vigtigt at hele teamet er involveret i afprøvning og sætter rimelige mål for behandlingen.

SWASH ortosens unikke konstruktion medvirker til en bedre hofteledsplacering. Ortosen giver tilstrækkelig med abduction til at forhindre saksning og medial femurrotation, både stående og ved gang.

S.W.A.S.H.®

Korrekt positionering i stående, gående og siddende stilling.




Vælg abduktionsvinkel

Til SWASH-ortosen er det muligt at vælge mellem to forskellige abduktionsvinkler - en der giver en bredere siddebase og en der giver en smallere siddebase.



Mindsket abduktion - benstænger 115°

- Hvis barnet anvender en smal kørestol
- Ved meget stramme adduktorer

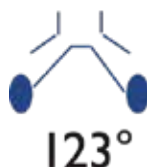

Øget abduktion - benstænger 123°

- Giver større mulighed for udspænding af musklerne ved siddende stilling
- Giver en mere oprejst holdning

Anvendelsesområde

- Spastisk Hemiplegi
- Spastisk Diplegi
- Spastisk Quadriplegi
- Risiko for hofteledsforskydning
- I kombination med Botox-behandling
- Postoperativt
- Natskinne

Kontraindikationer

- Hvis hoften er luxeret
- Hofteledskontrakturer > 20°

Mere omkring afprøvning og tilpasning kan læses i SWASH Steady & Go Fitting Manual

Kontakt kundesupport for yderligere information.

SWASH® STEADY Taljedel

SWASH® STEADY, som erstatter SWASH® Classic, er en videreudvikling med forbedringer og et nyt friskt look. Målet med SWASH er, at forhindre overdreven hofteadduktion i siddende, stående og ved gang, som er almindeligt ved Cerebral parese. Ortosen er et godt alternativ ved "sakse" gang. Den tillader bevægelse i alle tre bevægelsesplan. I siddende position bredder basen for støtte som hjælper barnet til at få en opret afbalanceret holdning og samtidig stretcher adduktorerne.

Hoftesektion bestående af polyethylene dækker over L2/L3 til den distale del ved halebenet og giver maksimal støtte i hofte og mave. Patienter med svag mavemuskelatur og/eller meget begrænset truncusstabilitet kan drage fordel af den øgede posteriore og laterale støtte, som ortosen giver. STEADY har et blødt attraktivt og slidstærkt materiale og klikspænde for nemmere og hurtigere af- og påtagning. Størrelserne 2-4 har ledhus med lav profil. Benstangen er 6 mm i diameter ved størrelse 1. Ved størrelserne 2,3 og 4 er benstangen 8 mm i diameter. Benstagen findes i vinklerne 115 ° og 123 °.

For at få et komplet produkt kræves også lårdel og benstang.

Anvendelsesområde: Cerebral parese med "sakse" gang eller instabilitet i siddende position på grund af overdreven abduktion, hofte subluxation. Når den maksimale truncuskontrol er nødvendig, f.eks. patienter som mangler muskelstyrke eller mangel for at kunne sidde oprejst selv. Når patienten primært er immobiliseret.

Kontraindikationer: Luxerede hofter. Hoftefleksionskontrakturer større end 20 grader (dynamiske eller fikserede). Når adduktorerne er for stærke til ortosen. Når adduktorerne er for korte til at anvende SWASH® i siddende position.

Art. nr.	Model	Størrelse	Omkreds
28852	STEADY Taljedel	1	40-46,5 cm
28852	STEADY Taljedel	2	46-55 cm
28852	STEADY Taljedel	3	54-63 cm
28852	STEADY Taljedel	4	62-72 cm



Mål: For mere detaljerede information og mål henvises til SWASH® Fitting Manual.



Mål: For mere detaljeret information om mål henvises til SWASH® Fitting Manual.

SWASH® GO Taljedel

SWASH® GO, som erstatter SWASH® Low profil, er videreudviklet med betydelige forbedringer samt et nyt friskt look. Målet med SWASH er, at forhindre overdreven hofteadduktion i siddende, stående og ved gang, udfald/symptomer som er almindelige efter Cerebral Parese. Ortosen er et godt alternativ ved "sakse" gang. Den tillader bevægelse i alle tre bevægelsesplan. I siddende position giver ortosen en bredere base, hvilket hjælper barnet til at få en opret afbalanceret holdning og samtidig få stræk på adduktorerne.

SWASH® GO har en lavere støttende hofteprofil med bøjelige iliacastrang. Den anbefales til patienter med bedre truncusstabilitet og som er mere aktive, f.eks. gående. Ortosen har et blødt, attraktivt og slidstærkt materiale og klikspænder til nemmere og hurtigere af- og påtagning. Benstangen har 8 mm i diameter i alle seks størrelser. Benstangen findes i vinklerne 115 ° og 123 °. For at få et komplet produkt kræves også lårdel og benstag.

Anvendelsesområde: Cerebral parese med "sakse" gang eller instabilitet i siddende position på grund af overdreven abduktion, hofteuxation. SWASH® GO er lavet til patienter med bedre rygkontrol og som er mere aktive.

Kontraindikationer: Luxerede hofter. Hofteflexionskontrakturer større end 20 grader (dynamiske eller fikserede). Når adduktorerne er for stærke til ortosen. Når adduktorerne er for korte ved anvendelse af SWASH® i siddende position.

Art. nr.	Model	Størrelse	Omkreds
28853	GO Taljedel	1	40-46,5 cm
28853	GO Taljedel	2	46-55 cm
28853	GO Taljedel	3	54-63 cm
28853	GO Taljedel	4	62-72 cm
28853	GO Taljedel	5	71-81 cm
28853	GO Taljedel	6	80-90 cm

SWASH® STEADY og GO Lårdel

For at have et komplet SWASH® STEADY eller GO produkt kræves taljedel, lårdel og benstang. Taljedelen og lårdelen har et blødt, attraktivt og slidstærkt materiale samt klikspænde for nemmere af- og påtagning.

Da benstangen har samme diameter i alle størrelser (undtagen størrelse 1), kan man enkelt kombinere forskellige størrelser på taljedelen med anden størrelse på lårdelen. Benstangen er 6mm i diameter ved størrelse 1. Ved størrelsen af 2,3 og 4. er benstangen 8 mm i diameter. Benstangen findes i vinklerne 15 ° og 123 °.



Art. nr.	Model	Størrelse	Omkreds
28854	STEADY lårdel	1	21-25 cm
28854	GO lårdel	1	21-25 cm
28854	STEADY & GO lårdel	2	25-29 cm
28854	STEADY & GO lårdel	3	29-33 cm
28854	STEADY & GO lårdel	4	33-38 cm
28854	STEADY & GO lårdel	5	38-44 cm
28854	STEADY & GO lårdel	6	44-50 cm



SWASH® STEADY og GO Benstang

For at få en komplet SWASH® STEADY eller GO produkt kræves taljedel, lårdel og benstang.


Da benstangen har samme diameter i alle størrelser (undtagen størrelse 1), kan man enkelt kombinere forskellige størrelser på taljedelen med anden størrelse på lårdelen. Benstangen er 6 mm i diameter ved størrelse 1. Ved størrelsen 2, 3 og 4 er benstangen 8 mm i diameter. Benstangen findes i vinklerne 115 ° og 123 °.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde	Diameter
28855	STEADY benstang sæt 115 °	1	31 cm	6 mm
28855	GO benstang sæt 115 °	1	31 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	2	37,5 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	3	44 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	4	48 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	5	54 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	6	60 cm	8 mm
28856	STEADY benstang sæt 123 °	1	31 cm	6 mm
28856	GO benstang sæt 123 °	1	31 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstang sæt 123 °	2	37,5 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstang sæt 123 °	3	44 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstang sæt 123 °	4	48 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstang sæt 123 °	5	54 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstang sæt 123 °	6	60 cm	8 mm

SWASH® tilbehør


Til SWASH® STEADY og GO findes der forskelligt tilbehør og varianter, f.eks. stof taljebælte som findes tilgængelig for STEADY og GO. Stof lårdele er identisk til STEADY og GO. Mavepladen fås også i en fælles udgave til STEADY og GO. Desuden kan der bestilles forskelligt tilbehør

Øvrigt: Flere detaljer om SWASH® tilbehør; venligst se komponentlisten i SWASH Fitting Manual.

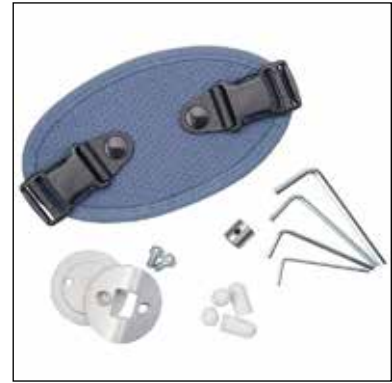

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28857	STEADY tekstil taljebælte	1	1 sæt
28857	STEADY tekstil taljebælte	2	1 sæt
28857	STEADY tekstil taljebælte	3	1 sæt
28857	STEADY tekstil taljebælte	4	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	1	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	2	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	3	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	4	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	5	1 sæt
28858	GO tekstil taljebælte	6	1 sæt
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	1	1 par
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	2	1 par
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	3	1 par
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	4	1 par
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	5	1 par
28859	STEADY & GO tekstil lårdele	6	1 par
28860	STEADY & GO maveplade	1	1 stk.
28860	STEADY & GO maveplade	2	1 stk.
28860	STEADY & GO maveplade	3	1 stk.
28860	STEADY & GO maveplade	4	1 stk.
28860	STEADY & GO maveplade	5	1 stk.
28860	STEADY & GO maveplade	6	1 stk.
28861	STEADY skruesæt 6 mm	1	1 sæt
28861	STEADY & GO skruesæt 8 mm	1-6	1 sæt
28862	STEADY låsering sæt 6 mm	1	1 sæt
28862	STEADY & GO låsering sæt 8 mm	1-6	2 stk.
28863	STEADY Plastdæksel til led	1	2 stk.
28864	STEADY Gummiknop til benstang 6 mm	1	2 stk.
28864	STEADY & GO Gummiknop til benstang 8 mm	1-6	10 stk.
28865	STEADY mæssingsbøsninger	1	10 stk.
28866	STEADY hofteledsæt 6 mm	1	2 stk.
28866	STEADY hofteledsæt 8 mm	2-4	2 stk.
28867	GO hofteledsæt 8 mm	1-6	2 stk.
28868	STEADY & GO sekskantnøgle	1-6	sæt af 4
28869	STEADY & GO spænde 25 mm	1-3	2 stk.
28869	STEADY & GO spænde 38 mm	4-6	2 stk.

STEADY & GO STØRRELSESGUIDE

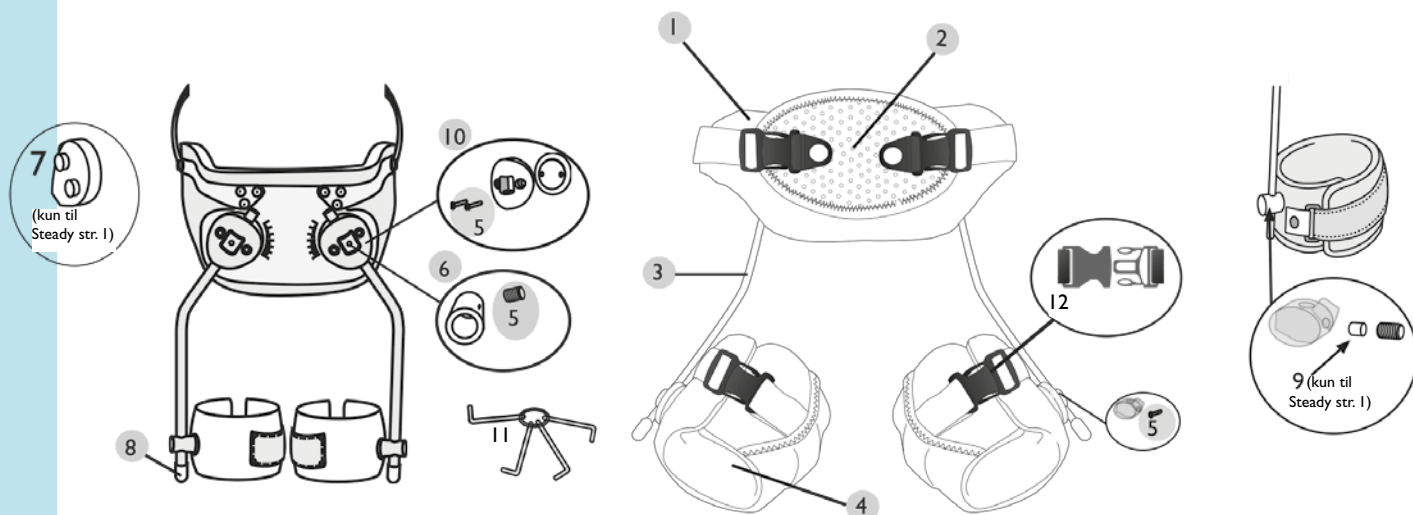

Nr.	Beskrivelse	Enhed	STEADY	GO
1	Tekstil taljedel inkl. maveplade	1 sæt	28857	28858
2	Maveplade	1 stk.	28860	28860
3	Benstænger 6mm 15°, størrelse 1	Par	28855-06	
3	Benstænger 8mm 15°	Par	28855-08	28855-08
3	Benstænger 6mm 23°, størrelse 1	Par	28856-06	
3	Benstænger 8mm 23°	Par	28856-08	28856-08
4	Tekstil lårdel	Par	28859	28859
5	Skruesæt, størrelse 1		28861-06	
5	Skruesæt, størrelse 2-6		28861-08	28861-08
6	Låsering, størrelse 1	2 stk.	28862-06	
6	Låsering, størrelse 2-6	2 stk.	28862-08	28862-08
7	Plastdæksel til led, størrelse 1	2 stk.	28863-06	
8	Gummiknop til benstænger, størrelse 1	2 stk.	28864-06	
8	Gummiknop til benstænger, størrelse 2-6	10 stk.	28864-08	28864-08
9	Messingbøsninger, størrelse 1	10 stk.	28865	
10	Hofteledsæt, størrelse 1	2 stk.	28866-06	
10	Hofteledsæt, størrelse 2-6	2 stk.	28866-08	28867-08
11	Sekskantnøgle	1 sæt	28868	28868
12	Plastspænde 25 mm, størrelse 1 - 3	2 stk.	28869-25	28869-25
12	Plastspænde 38 mm, størrelse 4 - 6	2 stk.	28869-38	28869-38

Abduktionsortose C29

Abduktionsortose i plast med polstrede kanter. Rustfri stålskinner mellem benene for og bag. Rygplade med bånd om brystkassen giver sidestabilitet. Luftig og hygiejnisk. Kan anvendes til børn, der bruger ble.

Anvendelsesområde: Kongenitale hofteledsluxationer.

Art. nr.	Størrelse	Mål
20290	X-Small	14-17 cm
20290	Small	18-23 cm
20290	Medium	25-30 cm
20290	Large	33-38 cm



Mål: Afstand mellem knæleddene i abduktion

Abduktionsskinne justerbar

Støtter hofteudvikling ved hofte dysplasi og bruges efter reponering af hofte luxation hos spædbørn. Lårbenene er placeret på en måde, der sikrer lårbenshovedet i Acetabulum for at forhindre uønskede bevægelser og risiko for hofte/subluxation. Ortozen fikserer hofteledet i en 90° fleksions- og 60° abduktionsvinkel.

Anvendelsesområde: Hofte dysplasi, hofteledsluxation eller subluxation

Art. nr.	Størrelse
20291	One Size



Hofteabduktionsortose

Præfabrikeret ortose til børn, anvendes ved behandling af Perthes sygdom samt ved andre hofterelaterede lidelser. Ekstension og fleksion kan indstilles med 20° interval. Formpresset plast med stålskinner. Lav vægt. Udtagelig polstring.

Anvendelsesområde: Perthes sygdom og andre hofterelaterede sygdomme.

Øvrigt: Ekstra polstring kan købes separat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Bækkensvidde M-L
28600	Hofteabduktionsortose	Small	<21 cm
28600	Hofteabduktionsortose	Large	>21 cm
28601	Ekstra polstring	Small	
28601	Ekstra polstring	Large	





Maple Leaf hofteortose

Ortose der bibeholder musklernes længde, for at forhindre tilbagefald efter bløddelsoperationer relaterede til hoften. Leddet gør det muligt at positionere hofteledet nær den anatomiske linie. Justerbar i længde og bredde. Mulighed for at indstille i intervaller 20° fleksion/ekstension, 9° abduktion/adduktion samt rotation i transversalplan. Størrelse X-Small er forudindstillet med en abduktionsvinkel på 15°, som er muligt at øge eller mindske ved justering. X-Small kan ikke rotere i transversalplanet. Formpresset plast med stålskiner. Udtagelig polstring.

Anvendelsesområde: Ved CP og postoperativt.

Øvrigt: Ekstra polstring kan købes separat.

Art. nr.	Størrelse	Bækkensvidde M-L
62786	X-Small	15 - 19 cm
62786	Small	20 - 24 cm
62786	Medium	25 - 29,5 cm
62786	Large	30 - 34,5 cm

Maple Leaf DE

Maple Leaf findes også med en distal forlængelse til læggen til patienter, der har behov for yderligere rotationskontrol af hoften. Knæleddet kan låses og indstilles i intervaller 20° fleksion/ekstension, 9° abduktion/adduktion. I øvrigt har ortosen samme egenskaber og indstillinger som Maple Leaf art. nr 62786. Formpresset plast med stålskiner. Hofte-, lår og lægdel har udtagelig polstring.

Anvendelsesområde: Cerebral Parese og postoperativt. Ved behov for yderligere rotationskontrol af hoften.

Øvrigt: Ekstra polstring kan købes separat



Art. nr.	Model	Størrelse	Bækkenvidde M-L
62787	Komplet Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
62787	Komplet Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
62793	Ekstra polstring lægdel	Small	
62793	Ekstra polstring lægdel	Large	
62794	Ekstra bånd til lægdel	Small	
62794	Ekstra bånd til lægdel	Large	
62796	Ekstra polstring hoftedel	Small	
62796	Ekstra polstring hoftedel	Large	
62797	Ekstra polstring lårdel	Small	
62797	Ekstra polstring lårdel	Large	
62798	Ekstra bånd til hoftedel	Small	
62798	Ekstra bånd til hoftedel	Large	
62799	Ekstra bånd til lårdel	Small	
62799	Ekstra bånd til lårdel	Large	

Egne notater

[illegible]



Brystproteser

www.camp.dk



Diamond Classic



MassageForm Air



Massage BH



Embrace BH

Brystproteser

Camps brystproteser er tilpasset tidens operationsmetoder og til den moderne kvindes forventninger. Vælg mellem modeller i traditionel silikone eller letvægtssilikone. Fælles for alle modeller er en mat yderfilm og en varm naturlig farvetone. Uanset om du vælger traditionel silikone eller letvægtssilikone er proteserne af højeste kvalitet og føles bløde og naturlige, samtidig med at de følger kroppens bevægelser.

I sortimentet findes blandt andet Camps unikke Massageprotese som er blevet en enorm succes. Massageprotesen har kanaler på bagsiden der giver en blid massage mod brystkassen og samtidig tillader luften at cirkulere så huden føles kølig og kan ånde. Massageprotesen er specielt fordelagtig for kvinder med lymfødeme. Massageform Attach er en massageprotese med en selvhæftende bagside.

Samtlige ABC-brystproteser af silikone leveres i en praktisk taske. Her opbevares protesen og formen bibeholdes. Betrak til protesen medfølger ikke, men kan bestilles separat.

Kontakt kundesupport for yderligere information.



Nakkeortoser

www.camp.dk



Halskrave lige model

Blød halskrave i lige model der giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Kan lukkes foran eller bagpå. Tekstilet består hovedsagligt af bomuld. Materialet er 100% fri for Latex.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af nakken ved f.eks. hold i nakken, stivhed, overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Halskrave formet model

Blød halskrave i anatomisk formet model der giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Følger hagen og brystets konturer for at give en behagelig pasform. Tekstilet består hovedsagligt af bomuld. Materialet er 100% fri for Latex.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af nakken ved f.eks. hold i nakken, stivhed, overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Vission Halskrave

Blød halskrave i anatomisk formet model som giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Følger hagen og brystets konturer for at give en behagelig pasform. Betrækket af Lycra giver et moderne udseende samt en kølig og behagelig følelse mod huden. Materialet er 100% fri for Latex

Anvendelsesområde: Midlertidig aflastning af nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art. nr.	Størrelse	Højde	Omkreds
47014	X-small	6 cm	32-48 cm
47014	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Large	12 cm	32-48 cm

Ortho Prim halskrave

Delbar halskrave af polyethylene til stabilisering af nakke. Udskåret under hagen for at give en god pasform og med bløde polstrede kanter. Justerbar højde og bredde med enkel velcrolukning. Plasteren er perforeret for øget ventilation.

Anvendelsesområde: Aflastning af nakke, overbelastet muskelatur og reumatiske sygdomme.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
20560	Hvid	X-Small	7,5-9 cm	32-37 cm
20560	Hvid	Small	8-9,5 cm	36-41 cm
20560	Hvid	Medium	8,5-10 cm	40-45 cm
20560	Hvid	Large	9-10,5 cm	44-49 cm
20560	Hvid	X-Large	9-10,5 cm	48-53 cm



Eclipse® halskrave

Eclipse halskrave er en moderne designet halskrave med høj pasform og funktion. Eclipse er let at justere og har en semirigid rammestruktur med "quick-fit" funktioner til nem afprøvning og tilpasning af størrelsen. Eclipse er lavet for at begrænse fleksion, ekstension og rotation for at fremme patientens ophealing. Den åbne rammekonstruktion gør den luftig og behagelig og giver en passende trachea-åbning. One Size, der dækker det meste i omfang og højde. Polstringen er udskiftelig og kan bestilles separat. Højden kan indstilles mellem 7,5 cm op til 18,75 cm.

Anvendelsesområde: Stabilisere rygraden for at begrænse fleksion, ekstension og rotation efter en skade eller lidelse i halshvirvelsøjlen.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
20628	Eclipse halskrave	Lysegrå	One Size
20629	Ekstra polstring	Grå	One Size





Trachea halskrave

Todelt halskrave i plastazote med tracheostomiåbning. Halskraven er anatomisk formet for at give god pasform, og er forstærket med plast i nakken og under hagen. Fikses med velcrobånd på begge sider.

Anvendelsesområde: Instabilitet, smerter og postoperativt.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Pacific halskrave

Todelt halskrave af polyethylene, der fikses med velcrobånd på begge sider. Den stabile skal følger hagens form og hviler på brystbenet. Kraven er lavere i siderne, for ikke at gnave mod skuldre eller ører. Højden på kraven kan justeres ved hjælp af to plastskruer. En blød og luftig polstring uden sømme medfølger. Polstringen kan tages ud og vaskes eller udskiftes.

Anvendelsesområde: Instabilitet, smerter og postoperativt.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde
20625	Hvid/sort	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Hvid/sort	Medium/Large	8-13 cm
20626	Ekstra polstring, sort	Small/Medium	
20626	Ekstra polstring, sort	Medium/Large	



Stomiprodukter

www.camp.dk


StomaCare™

StomaCare er et elastisk stomibælte, der giver støtte og fiksatoren til stomiposen, kompression af underkroppen ved svækket bugmuskulatur samt forebygger og lindrer prolaps/brok i ar- og stomiområdet.

Bæltet passer til både en lige og taljeret figurtype. Det er fremstillet af et bredt dacronbånd, der syes sammen med elastisk for at give en optimal pasform. Området ved stomiåbningen er af et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag findes en smidig forstærkningsplade af plast. Bæltet er forsynet med et beskyttelsesbånd over åbningen.

En nyhed i sortimentet er modellen StomaCare EasyOpener, der har integreret lukning under stomiposen for at gøre udskiftning af stomiposen mere enkel.

StomaCare findes i tre højder; 10 cm, 15 cm og 22,5 cm samt med to forskellige diametre til stomiåbningen; 60 mm og 72 mm, hvilket letter tilpasningen af forskellige størrelser stomiposer.

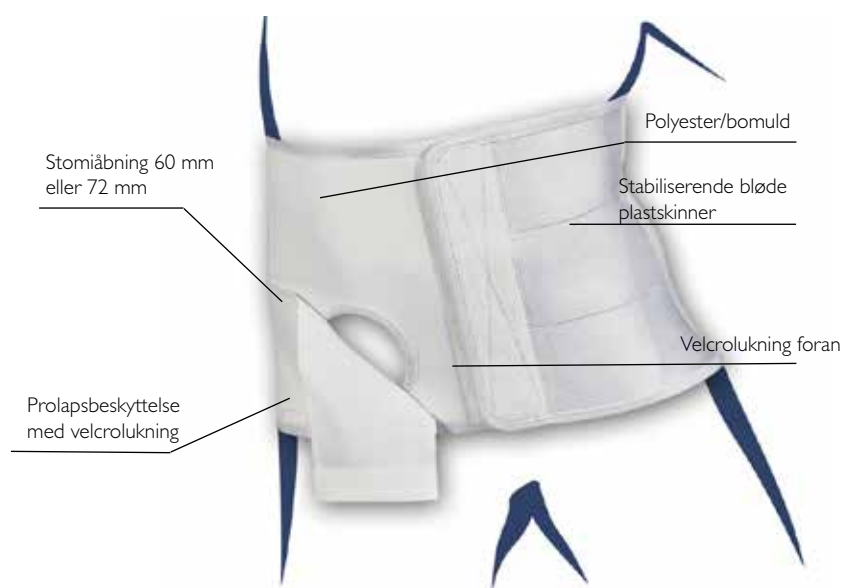

Størrelsestabel

Størrelse	Taljemål
S	70 - 79 cm
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Målet skal tages når patienten ligger ned.

Stomacare EasyCut PLUS

EasyCut Plus er fremstillet af åndbart Coolmax materiale, der sikrer maksimal fugtjernelse. Fugten spreder sig og fordampes 4 gange hurtigere end bomuld. Dette holder kroppen komfortabelt tør - selv under fysisk aktivitet. Den kølige grå farve er knap synlig, selv under lyst tøj. Velegnet til både lige og taljeret figurtype. EasyCut-bæltet er let at tage på og justere stomiåbningen på bæltet når patienten er tilsted. Det er specielt hurtigt og behageligt for patienter, som plejes i hjemmet. Tilpasset efter individuelt behov kan stomi-åbningens position, form og diameter appliceres med en saks. Et måleskema med forskellige former og størrelser er inkluderet. Materialet frynser ikke, og det er stabilt for optimal støtte. EasyCut Plus fås i størrelser fra 70 - 140 cm og i højder 10cm, 15cm, 19cm og 23 cm.

Anvendelsesområde: Som støtte og fiksering af posen. I tilfælde af svækkede mavemuskler. Forhindrer og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Højde	Ve/Hø
23322	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	10 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	15 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	19 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	23 cm	Bilateral



Mål: Mål tages, når patienten ligger ned.



StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integreret lukning under stomi-åbningen hvilket giver ekstra komfort ved udskiftning af stomiposen. Bæltet behøver derfor ikke tages af. Denne model egner sig ikke til patienter med et meget højt abdominalt tryk, baseret på en muligt høj belastning på stomiåbningens lukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og fiksering af stomipåsen. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 15 cm.


Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Ve/Hø

StomaCare lav

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomien eller der maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 10 cm.

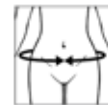

Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23308	Hvid	Small	70 - 79 cm	60 cm	Bilat.
23308	Hvid	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23308	Hvid	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23308	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23308	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23308	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23308	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23309	Hvid	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23309	Hvid	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23309	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23309	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23309	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23309	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.



StomaCare mellem sort

StomaCare er fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 15 cm.


Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23306	Sort	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Sort	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Sort	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Sort	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

StomaCare mellem hvid

StomaCare er fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 15 cm.

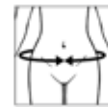

Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23306	Hvid	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Hvid	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Hvid	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Hvid	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.



StomaCare mellem beige

StomaCare er fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 15 cm.


Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23306	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

StomaCare høj

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Bæltets højde foran og bagtil er 22,5 cm.

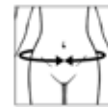

Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Diameter stomiåbning	Ve/Hø
23302	Hvid	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvid	Large	90 - 100 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	Large	90 - 100 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvid	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Ve/Hø



StomaCare halvfabrikat

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Leveres komplet med elastisk kantbånd og med beskyttelsesbånd til færdigfremstilling. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Tag mål rundt om maven over stomi eller hvor maveomfanget er størst. Mål tages, når patienten ligger ned. Angiv i hvilken side stomien sidder.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Taljemål	Ve/Hø	Højde bag og for
23305	Hvid	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23305	Hvid	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23305	Hvid	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23305	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23305	Hvid	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23305	Hvid	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23301	Hvid	Medium	80 - 89 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23301	Hvid	Large	90 - 99 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23301	Hvid	X-Large	100 - 109 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23301	Hvid	XX-Large	110 - 120 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23301	Hvid	XXX-Large	121 - 130 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23301	Hvid	XXXX-Large	131 - 140 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23321	Sort	Small	70 - 79 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23321	Sort	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23319	Sort	Small	70 - 79 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	Medium	80 - 89 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	Large	90 - 99 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	X-Large	100 - 109 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	XX-Large	110 - 120 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	XXX-Large	121 - 130 cm	Ve/Hø	22,5 cm
23319	Sort	XXXX-Large	131 - 140 cm	Ve/Hø	22,5 cm

StomaCare Protector

Protector er fremstillet i højtemperaturplast. Anvendes for at beskytte stomien mod tryk og traume under aktivitet. Passer til alle StomaCares modeller. Fastgøres mod bæltets materiale med velcrobåndet på Protector's bagside.

Art. nr.	Farve	Størrelse
23300	Lysegrå	One Size
23299	Sort	One Size



Stomacare ProtectorMax

ProtectorMax er et beskyttelseskjold designet til at tage imod stød og uønskede påvirkninger mod stomien i daglige situationer og ved aktiviteter. Skjoldet mindsker risikoen for at stomiposen kommer i klemme, f.eks. når man sover, ved intime situationer eller at den hæfter sig eller klemmes af bukser eller bælte. Den beskytter helt enkelt stomiområdet i de fleste situationer. Anatomisk formet og lavet af et blødt formpresset gummilignende materiale med bløde kanter. Indersiden har en blød polstring, som er behagelig mod huden. Helt latexfri og uden andre skadelige stoffer. Det elastiske taljebånd er føjeligt og tilpasser sig kroppens bevægelser.

ProtectorMax leveres i et beskyttende etui som egner sig både til opbevaring eller som et rejseetui.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Taljemål
23296	ProtectorMax	Lysgrå	One Size	70 - 140 cm
23297	Ekstra taljebånd	Lysgrå	One Size	



Egne notater

[illegible]



Korsetter

www.camp.dk

Camps Korsetsortiment

Fra 1908 og frem til i dag har vi lyttet til patienter, kunder og deres behov. Vi har altid lagt stor vægt på innovation, god pasform, høj kvalitet og design. Vi kan med rette sige, at vi har god erfaring inden for korsetområdet og er stolte over i dag at kunne præsentere vores brede sortiment på de følgende sider.

Ved valg af korset er det vigtigt at overveje indikation og anatomi, men også at tage hensyn til patientens figur, livsstil og accept. For at lette valget har vi inddelt vores korsetter i kataloget efter nedenstående system.


Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Stabilitet

Korset	Elastisk tekstilmateriale
Korset	Stof, forstærket med skinner
Rigide	Plast, metal

Højde

SIO	Sacroiliacal
LSO	Lumbo-sacral
TO	Thoracal
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal

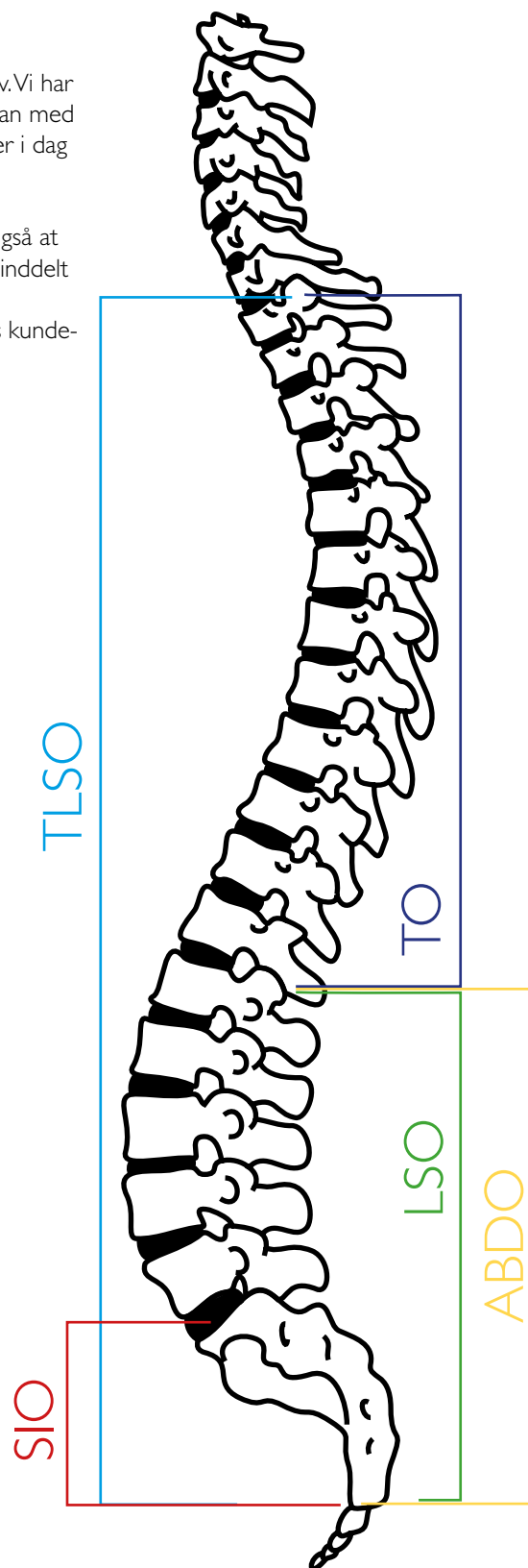

Trocanterbælte Tro-Camp

SIO - Stabilt korset til Sacroiliacaleddet, der passer til både lige og taljeret figur.
Dobbelt trykknaplukning tillader udvidelse af størrelsen under graviditet. Snøren midt bag trækkes sammen for at mindske belastningen på sacroiliacaleddet.
Aftagelige lyskeband medfølger. Bæltet lukkes med hægtelukning midt for.

Anvendelsesområde: Bækkeninsufficiens og symfysiolyseproblemer.

Øvrigt: Størrelse = hoftemåling

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde bag	Højde for
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobælte

SIO - Korset til Sacroiliacaleddet med en elastisk indre del mod huden og en ydre rigid del til aflastning og stabilisering. Korsettet passer til både lige og taljeret figur.
Forsynet med antiglidpads, der forhindrer bæltet i at glide mod huden eller tøjet.
Aftagelig pelotte i sacrum giver optimal aflastning.

Anvendelsesområde: Bækkeninsufficiens og symfysiolyseproblemer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
21030	Sort	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm





Graviditetsbælte MAMMY

Anatomisk graviditetsbælte som kan tilpasses til de forskellige stadier i graviditeten. Bæltet løfter maven op for at mindske følelsen af tyngden i bækkenområdet. Skinner i ryggen støtter og forbedre holdningen, hvilket mindsker rygsmerterne. I siderne findes ekstra trækbånd for at justere støtten ved behov. Fremstilles i et moderne og ekstra blødt materiale i forhold til komfort og lav vægt.

Anvendelsesområde: Graviditsrelateret rygsmerter og/eller bækkenmerter.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
22149	Grå	One Size	90-130cm	13 cm	7 cm

Elcross® LUX lav

SIO - Denne lave model er designet til at give en sacroiliacal støtte, men kan også anvendes til en mere lumbosacral støtte. ELCROSS®LUX er en serie af mellem-stabile korsetter lavet af det innovative "Resistex® Carbon" -materiale, der holder kroppen kølig og behagelig. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaber, transporterer fugt væk fra kroppen og er Øko-Tex 100 certificeret. De ekstra trækbånd kan placeres efter ønske. Trækbåndet har lommer i kanten, så man nemt kan få fat i disse, når båndet skal åbnes. Passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skiner på bagsiden og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke trækbånd. Velcrolukning foran. I ryggen er der to åbne kanaler til ekstra formbare stabile skinner, som er inkluderet. Materialet i ELCROSS®LUX er fri for latex.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og rygsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm

ELEMENTS ryg

ELEMENTS Ryg er beregnet til behandling af lette og tilfældige problemer som f.eks smerte, almen svaghedsfølelse i ryggen eller lignende. Rygbæltet giver en vis stabilitet af lænderyggen ved hjælp af den kompression, der opstår, når man tager det på. Rygbæltet holder også lænderyggen varm.

Anvendelsesområde: Lette og tilfældige problemer som f.eks smerte, almen svaghedsfølelse i ryggen eller lignende.

Kontraindikationer: Rygproblemer med neurologisk oprindelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål
34102	Beige/Sort	Small	82 - 95 cm
34102	Beige/Sort	Medium	92 - 105 cm
34102	Beige/Sort	Large	102 - 115 cm
34102	Beige/Sort	X-Large	112 - 125 cm
34102	Beige/Sort	XX-Large	122 - 135 cm



SELECTION® ryg lav

SIO - Elastisk smidig korset lavet i det skønne SELECTION® materiale som er kendetegnet ved sin ventilerende egenskab, let vægt og optimal pasform. Modellen passer til lige og taljeret figur og har ekstra stabiliserende trækbånd, som krydses i ryggen. Trækbåndet glider ekstra smidigt i de specialdesignede D-ringe. Forstærkningen i ryggen har en ny udformning, som fordeler trykket over et større område imens rygraden går helt fri. På forsiden findes der ekstra hjælp til at lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den anden side. Materialet på forsiden er en ny konstruktion, som giver en smidig låsning uden hårde og pladskrævende velcrobånd. Materialet i Selection Ryg er af højeste kvalitet og funktion, hvilket har været i fokus under udviklingsfasen.



Anvendelsesområde: Rygsmerter og Rygsufficiens.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
35400	Sort	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Sort	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Sort	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Sort	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Sort	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Sort	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® ryg regular

LSO - Elastisk smidig korset lavet i det skønne SELECTION® materiale, som er kendetegnet ved sin ventilerende egenskab, let vægt og optimal pasform. Modellen passer til lige og taljeret figur og har ekstra stabiliserende trækbånd, som krydses i ryggen. Trækbåndet glider ekstra smidigt i de specialdesignede D-ringe. Forstærkningen i ryggen har en ny udformning, som fordeler trykket over et større område imens rygraden går helt fri. På forsiden findes der ekstra hjælp til at lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den anden side. Materialet på forsiden er en ny konstruktion, som giver en smidig låsning uden hårde og pladskrævende velcrobånd. Materialet i Selection Ryg er af højeste kvalitet og funktion, hvilket har været i fokus under udviklingsfasen.


Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Til dette produkt findes der en instruktionsvideo på Camp Scandinavia YouTube-Kanal. Gå ind på www.youtube.com og søg efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
3540I	Sort	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
3540I	Sort	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® ryg wide

ABDO - Elastisk smidig korset lavet i det skønne SELECTION® materiale, som er kendetegnet ved sin ventilerende egenskab, let vægt og optimal pasform. Modellen er specielt velegnet til personer med et kraftigt maveparti, som behøver løft og støtte. Lukningen foran er delt i to og derved let at tage på samt let at justere i højden foran. Ortosen har ekstra stabiliserende trækbånd, som krydses i ryggen. Forstærkning i ryggen har en ny udformning som fordeler trykket over et større område imens ryggraden går helt fri. På forsiden findes der ekstra hjælp til at lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den anden side. Materialet på forsiden er en ny konstruktion, som giver en smidig låsning uden hårde og pladskrævende velcrobånd. Materialet i Selection Ryg er af højeste kvalitet og funktion, hvilket har været i fokus under udviklingsfasen.

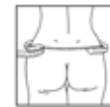

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens hos personer med kraftigt maveparti.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
35402	Sort	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Sort	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Sort	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Sort	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Sort	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Sort	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm

NAVY X™



23552

**Navy-X i findes i 3 forskellige højder; lav, mellem og høj.
I 3 forskellige farver, marineblå, beige og grå.**

Fælles for alle modellerne er:

- det slidstærke og luftige materiale
- de ekstra stabiliserende bånd
- den gode pasform



23550

Den høje model har delt lukning foran og åbne kanaler i ryggen, så der kan isættes mere stabile skinner, hvis dette ønskes.

Samtlige modeller findes i størrelserne X-Small op til XX-Large, hvilket dækker et hoftemål fra 75 cm. til 135 cm.



23555



23549



23554

Højde i cm:

	For	Bag
23549 Blå	12	18,5
23554 Grå	12	18,5
23550 Blå	16	22
23555 Grå	16	22
23560 Beige	16	22
23552 Blå	25	31



23560

Navy X™ lav

SIO - Elastisk luftigt korset i ekstra stabilt og slidstærkt materiale, der passer både til en lige og taljeret figurtype. Stærke bånd der giver ekstra stabilitet sammen med plastskinnerne bagpå og i siderne. Velcrolukning midt for. Korsettet er velegnet til arbejdsrelaterede miljøer. Korsettet er beregnet til sacroiliacal støtte men kan også passe som lumbosacral støtte til en kort patient.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23549	Mørkeblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm





Navy X™ ryg regular

LSO - Luftigt korset i ekstra stabilt og slidstærkt elastisk materiale, der passer til både lige og taljeret figurtype. Stærke bånd giver ekstra stabilitet sammen med skinner i plast bagpå og i siderne. Velcrolukning midt for. Korsettet er velegnet til arbejdsrelaterede miljøer.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23550	Marineblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy X™ høj

LSO - Elastisk luftig korset i extra stabilt og slidstærkt materiale. Modellen er ekstra høj og har delt lukning foran og ekstra stabiliserende bånd. Det har åbne kanaler bagpå til ekstra skinner, hvis der er behov for dette.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23552	Marineblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Marineblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Marineblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Marineblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Marineblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Marineblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Aluminiumskinner (2 stk)	2 cm x 26 cm			





Elcross® LUX mellem

LSO – En mellemhøj model, som giver en stabil lumbosacral støtte.

ELCROSS® LUX er en serie mellem-stabile korsetter lavet af det innovative ”Resistex® Carbon”-materiale, der holder kroppen kølig og behagelig. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaber, transporterer fugt væk fra kroppen og er Øko-Tex 100 certificeret. De ekstra trækbånd kan placeres efter ønske. Trækbåndet har lommer i kanten, så man nemt kan få fat i disse, når båndet skal åbnes. Passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skinner på bagsiden og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke trækbånd. Velcrolukning foran. I ryggen er der to åbne kanaler til ekstra formbare, stabile skinner, som er inkluderet. Materialet i ELCROSS® LUX er fri for latex. Fås i beige eller grå model.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm

Elcross® Light mellem

LSO - korset lavet i et meget elastisk materiale som giver 50% mere kompression end almindelige korsetter. Ortosens to lycra-lag er tyndere og luftigere end det traditionelle Elcross-materiale. Korsettet passer både til lige og taljeret figurtype. Fjedre og skinner bagpå samt i siderne giver stabilitet sammen med de ekstra stabiliserende bånd på hver side.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.



Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22159	Sort	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Sort	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Sort	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Sort	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Sort	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm



Elcross® LUX høj

LSO – Denne noget højere model egner sig godt til den lidt højere person og giver lumbosacral støtte, men også støtte til den nedre del af brystet. ELCROSS®LUX er en serie mellem-stabile korsetter lavet af det innovative "Resistex® Carbon"-materiale, der holder kroppen kølig og behagelig. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaber, transporterer fugt væk fra kroppen og er Øko-Tex 100 certificeret. De ekstra trækbånd kan placeres efter ønske. Trækbåndet har lommer i kanten, så man nemt kan få fat i disse, når båndet skal åbnes. Passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skinner på bagsiden og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke trækbånd. Velcrolukning foran. I ryggen er der to åbne kanaler til ekstra formbare stabile skinner, som er inkluderet. Materialet i ELCROSS®LUX er fri for latex. Fås i beige eller grå model.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm

Elcross® Light høj

LSO - korset lavet i et meget elastisk materiale som giver 50% mere kompression end almindelige korsetter. Ortosens to lycra-lag er tyndere og luftigere end det traditionelle Elcross-materialet. Korsettet passer både til lige og taljeret figurtype. Fjedre og skinner bagpå samt i siderne giver stabilitet sammen med de ekstra stabiliserende bånd på hver side.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og rygsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
22160	Sort	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Sort	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Sort	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Sort	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Sort	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm



Camp MAX korset mellem

LSO - Elastisk stofkorset som er ekstra smidigt og føjeligt. Den er semi-rigid og giver et lumbosacraelt støtte. Lavet i et blødt ventilerende materiale. De patenterede ekstra stabiliserende bånd former sig rundt om kroppen og giver fuld støtte. Åbne kanaler i ryggen til formbare skinner og en frontside med en blød velcrolukning. Camp Max har en let vægt og er meget behagelig at have på.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og rygsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
22140	Grå	Small	80-95 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Medium	90-105 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Large	100-115 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	X-Large	110-125 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	XX-Large	120-135 cm	28 cm	20 cm





Camp MAX korset høj

LSO - Elastisk stofkorset som er ekstra smidigt og føjeligt. Den er semi-rigid og giver et lumbosacraelt støtte. Lavet i et blødt ventilerende materiale. De patenterede ekstra stabiliserende bånd former sig rundt om kroppen og giver fuld støtte. Åbne kanaler i ryggen til formbare skinner og en frontside med en blød velcrolukning. Camp Max har en let vægt og er meget behageligt at have på.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22141	Grå	Small	80-95 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Medium	90-105 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Large	100-115 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	X-Large	110-125 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	XX-Large	120-135 cm	33 cm	20 cm



Camp MAX korset ekstra Høj

LSO - Elastisk stofkorset som er ekstra smidigt og føjeligt. Den er semi-rigid og giver et lumbosacraelt støtte. Lavet i et blødt ventilerende materiale. De patenterede ekstra stabiliserende bånd former sig rundt om kroppen og giver fuld støtte. Åbne kanaler i ryggen til formbare skinner og en frontside med en blød velcrolukning. Camp Max har en let vægt og er meget behageligt at have på.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22142	Grå	Small	80-95 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Medium	90-105 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Large	100-115 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	X-Large	110-125 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	XX-Large	120-135 cm	35 cm	23 cm

SpinAir rygortose

SpinAir er beregnet til patienter med osteoporose og patienter med kyfose. Ortosen giver en effektiv og behagelig behandling i disse tilfælde. Ortosen fremmer og forbedrer holdningen i skulderen. Lumbale forstærkninger giver øget stabilitet og en bedre lumbal pasform. SpinAir er diskret, har lav vægt og er let at afprøve på patienten. Fleksible skulderstropper giver en anatomisk pasform af ortosen over skuldrene. En blød polstring giver ekstra komfort til patienten. Skulderstropperne kan justeres efter behov og gradvis forbedring. De kan også klippes til den ønskede længde.

Anvendelsesområde: Osteoporose kyfose, spinal artrose

Art. nr.	Model	Størrelse	Hoftemål	Højde bag
22146	SpinAir	Small I	78-93 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium I	90-105 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium2	90-105 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large2	103-120 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large3	103-120 cm	68-75 cm
22147	SpinAir Forlængningsbånd	One Size		



Mål: Målet "Højde bag" tages fra Th2 til SI.

Elcross® LUX skulder

TO – Blød elastisk holdningsortose lavet af det innovative "Resistex® Carbon"-materiale, der holder kroppen kølig og behagelig. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaber, transporterer fugt væk fra kroppen og er Øko-Tex 100 certificeret. Til patienter, der har behov for støtte over bryst og ryg ved f.eks holdningsændring. Polsterede skulderstropper bevirker, at ortosen ikke gnaver. Velcrolukning foran. Materialet i ELCROSS®LUX er fri for latex.

Anvendelsesområde: Ryginsufficiens, kyfose og holdningsproblemer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mål: Rundt brystkassen under bysten.



Elcross® LUX mave

ABDO – Denne model er specielt velegnet til patienter med et kraftigt maveparti. Den giver en stabil støtte over lænden samtidigt at den løfter og støtter maven. Forstykket har en bred velcroåbning på den ene side, som gør det muligt at variere bredden og give optimalt løft og støtte. Kan også bruges af gravide i takt med at maven vokser. Båndet kan placeres foran eller under maven. ELCROSS®LUX er en serie mellem-stabile korsetter lavet af det innovative "Resistex® Carbon"-materiale, der holder kroppen kølig og behagelig. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaber, transporterer fugt væk fra kroppen og er Øko-Tex 100 certificeret. De ekstra trækbånd kan placeres efter ønske. Trækbåndet har lommer i kanten, så man nemt kan få fat i disse, når båndet skal åbnes. Passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skiner på bagsiden og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke trækbånd. Velcrolukning foran. I ryggen er der to åbne kanaler til ekstra formbare stabile skinner, som er inkluderet. Materialet i ELCROSS®LUX er fri for latex.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens. Som støtte ved slappe mavemuskel, ved mindre brok.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm



Rygplade

Hjerteformet rygplade i Campolite beklædt med frotté, Pladen fæstnes med velcro på korsettet. Udskæring til ryggraden for at hindre tryk.

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Tykkelse	Højde
22135	One Size	18 cm	1 cm	16 cm

Camp® ONE Lav

LSO - Camp® ONE en en serie stabile stofkorsetter i forskellige højder lavet i et stabilt materiale med bomuld som base (60% bomuld og derudover polyamid, elastan og polyester). Disse materialer giver sammen en stabil og slidstærk kombination. Den lave model giver støtte til den nedre del af lænden og over sacrum. Let at tage på og tilpasse til den ønskede kompression og stabilitet. Velcrolukning foran. Modellerne har sløjfer på siderne, hvor trækbåndet smidigt løber. Modellerne har dobbelt trækbånd, som giver en stabil pasform og følsomhed. Der er indsyet plastfjedre omkring korsettet og der udover åbne kanaler til 2 ekstra stabile formbare skinner i ryggen (inkluderet i emballagen). Materialets fleksibilitet giver stor følsomhed, hvilket bevirker, at modellerne passer til både lige og taljeret figur. Materialet i Camp®ONE er fri for latex latex.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.



Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22178	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm

Camp® ONE mellem

LSO - Camp® ONE er en serie stabile stofkorsetter i forskellige højder lavet i et stabilt materiale med bomuld som base (60% bomuld og derudover polyamid, elastan og polyester). Disse materialer giver sammen en stabil og slidstærk kombination. Den mellem høje model giver en stabil støtte til lænden. Let at tage på og tilpasse den ønskede kompression og stabilitet. Velcrolukning foran. Modellerne har sløjfer på siderne, hvor trækbåndet smidigt løber. Modellerne har dobbelt trækbånd, som giver en stabil pasform og følsomhed. Der er indsyet plastfjedre omkring korsettet og derudover åbne kanaler til 2 ekstra stabile formbare skinner i ryggen (inkluderet i emballagen). Materialets fleksibilitet giver stor følsomhed, hvilket bevirker, at modellerne passer til både lige og taljeret figur. Materialet i Camp®ONE er fri for latex latex.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22179	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm





Camp® ONE høj

LSO - Camp® ONE en en serie stabile stofkorsetter i forskellige højder lavet i et stabilt materiale med bomuld som base (60% bomuld og derudover polyamid, elastan og polyester). Disse materialer giver sammen en stabil og slidstærk kombination. Den noget højere model giver en stabil støtte till lænden og nedre del af brystet. Egner sig også til personer med længere ryg. Let at tage på og tilpasse den ønskede kompression og stabilitet. Velcrolukning foran. Modellerne har sløjfer på siderne, hvor trækbåndet smidigt løber. Modellerne har dobbelt trækbånd, som giver en stabil pasform og følsomhed. Der er indsyet plastfjedre omkring korsettet og der udover åbne kanaler til 2 ekstra stabile formbare skinner i ryggen (inkluderet i emballagen). Materialets fleksibilitet giver stor følsomhed, hvilket gør at modellerne passer til både lige og taljeret figur. Materialet i Camp®ONE er fri for latex latex.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
22180	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Camp® ONE tilbehør

For komplettering med ekstra skinnelomme, når ekstra stabilitet ønskes, der findes to bredder af skinnelommer samt tilhørende kantstropper at bestille.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde
22183	Kantstropper grå		125 m
22184	Materiale til skinnelomme grå	25 mm	30 m
22184	Materiale til skinnelomme grå	34 mm	30 m

Camp® XXI mellem

LSO - Stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde, der giver let elasticitet. Passer til både lige og taljeret figurtype. Dobbelt Camp-snøre i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes til patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres gennem snøren og de faste bånd. Åbne fjedergange i ryggen, 2 skinner medfølger. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm



Camp® XXI høj

LSO - Stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde, der giver let elasticitet. Passer til både lige og taljeret figurtype. Dobbelt Camp-snøre i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes til at patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres gennem snøren og de faste bånd. Åbne fjedergange i ryggen, 2 skinner medfølger. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Denne model kan opleves noget lille i størrelsen. Hvis målet er i øvre interval, vælg da en større størrelse.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm





Camp® XXITLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde der giver let elasticitet. Dobbelt Camp-snøre i begge sider med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres med snøren i kombination med de faste bånd. Polstrede skulderbånd bevirker, at korsettet ikke gnaver i armhulen. Båndene krydses bagpå og fæstnes foran. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Osteoporose og kyfose.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm



Camp® XXI mave

ABDO - Lumbo-sacral stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde der giver let elasticitet. Denne model er specielt velegnet til patienter med et kraftigt maveparti. Dobbelt Camp-snøren i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom snøren er meget let at regulere. Todelt velcrolukning i siden giver god justeringsmulighed og letter påtagning.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens hos personer med et kraftigt maveparti.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm

Lumbo 267

LSO - Stofkorset i bomuld der passer en middelstor, lige figurtype. Korsettet har tredobbelt Camp-snøre i hver side og elastikkiler oppe og nede fortil. Åbne fjedergange i ryggen. Lukkes med lynlås midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Dette helfabrikat har 4 åbne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Skinner medfølger ikke.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22672	74	74 cm	39 cm	26 cm
22672	78	78 cm	39 cm	26 cm
22672	82	82 cm	39 cm	26 cm
22672	86	86 cm	39 cm	26 cm
22672	90	90 cm	39 cm	26 cm
22672	94	94 cm	39 cm	26 cm
22672	98	98 cm	39 cm	26 cm
22672	102	102 cm	39 cm	26 cm
22672	106	106 cm	39 cm	26 cm
22672	110	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 439

LSO - Stofkorset i bomuld der passer både en lige og taljeret figurtype. Korsettet har gennemgående elastikkiler i hver side fortil og åbne fjedergange i ryggen. Fire åbne sømme i siderne og åben søm i ryggen giver mange tilpasningsmuligheder. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom det lukkes med velcrobånd gennem D-ring kryssende fra venstre/højre.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Dette halvfabrikat har 4 åbne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Skinner medfølger ikke.

Art. nr.	Størrelse	Taljemål	Højde bag	Højde for
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm





Lumbo 591

LSO - Stofkorset der passer en lige figurtype. Korsettet har elastikkiler i hver side nederst fortil og åbne fjedergange i ryggen. Fire åbne sømme i siderne og åben søm i ryggen giver mange tilpasningsmuligheder. Lukkes med regulerbare bånd krydsende fra venstre/højre.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Dette halvfabrikat har 4 åbne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Skinner medfølger ikke

Art. nr.	Størrelse	Hofte mål	Højde bag	Højde for
27591	82	82 cm	42 cm	30 cm
27591	86	86 cm	42 cm	30 cm
27591	90	90 cm	42 cm	30 cm
27591	94	94 cm	42 cm	30 cm
27591	98	98 cm	42 cm	30 cm
27591	102	102 cm	42 cm	30 cm
27591	106	106 cm	42 cm	30 cm



Lumbo 073

LSO stofkorset der passer en taljeret figurtype. Korsettet har dobbelt Camp-snøre i hver side, elastikkiler oppe og nede fortil. Åbne fjedergange i ryggen. Lukkes med hægter i sidesømmen.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Dette helfabrikat har 2 åbne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Skinner medfølger ikke. Størrelse = hofte måling

Art. nr.	Farve	Størrelse	Højde bag	Højde for
29073	Beige	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	110 cm	30 cm	20,5 cm



Kantebånd elastisk

Et elastisk kantebånd til tekstile korsetter.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25010	Hvid	20 mm	175 m	Rulle
25010	Beige	20 mm	175 m	Rulle

Bånd

Fast bånd af nylongjord. Materialet er stabilt og den glatte overflade bevirker ,at en D-ring let glider på båndet. Den afklippede kant afsluttes ved at smelte enden.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
29715	Hvid	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Korsetbånd

Korsetbånd i bomuld til færdiggørelse af korsetter. Anvendes som skinnelomme.

Art. nr.	Farve	Bredde	Pakke
25006	Beige	21 mm	50 mm





Navy™ Xtra

Navy™ Xtra er et korset som tilpasses afhængig af behandlingsmålet. Ortosen kan anvendes som stabilisering efter operation men også som et let støtte under rehabilitering. Ved den individuelt formede rygplade og korsettets forstærkede forside stabiliseres ryggen og bidrager til smetelindring. Rygpladen er fremstillet af 3D-LITE™ materiale. Denne lavtemperaturplast ånder, har lav vægt og er enkel at bearbejde, også til de mest krævende patienter. Forstærkningerne på ortosens forside er enkle at tage ud. Det sorte stof er af samme stabile og ventilerende materiale, som anvendes i vores serie med rygortoser under varemærket NavyX™.

Anvendelsesområde: Frakturer, Postoperativ stabilisering, Postoperativt efter diskusprolaps, Degenerative tilstande i ryggen, Diskusprolaps, Spondylitis, Spondylose, Facetledssyndrom, Spinalstenose.

Kontraindikationer: Instabil rygsøjle

Øvrigt: Dette produkt skal tilpasses af en medicinsk uddannet person. Rygdelen af 3D-LITE materiale kan varmes i ovn eller med varmepistol ved ca 80°C.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm

Hyperekstensjonsstøtte C35+

Justerbart trepunktskorset af aluminium og kunstlæder til postoperativ behandling. Det begrænser fleksion og lateralfleksion til siden i ryggen. Korsettet er justerbart i højde og brystvidde og har en brystplade, der kan vinkles med gradering, der gør det enkelt at indstille vinklen. Den nedre bøjle kan stilles i bevægeligt eller fast leje. Justerbar rygplade.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale, stabile frakturer forårsaget af traume, stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose, luxationer, osteoartrit.



Art. nr.	Model	Størrelse	Højde	Hoftemål
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Ekstra brystplade	One Size		
20352	Ekstra rygplade	Small/Medium		
20352	Ekstra rygplade	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spænde	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spænde	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøjle foran			



Hyperekstensionsstøtte C37

Justerbart trepunktskorset af aluminium og kunstlæder. Det begrænser fleksion og bevægelighed til siden i ryggen. Korsettet er justerbart i højde og vidde, har en hofteplade, der kan vinkles og justerbar rygplade. Den nedre bøjle er justerbar i vinkelen.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale; stabile frakturer forårsaget af traume, stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Model	Størrelse	Højde	Hoftemål
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Ekstra brystplade	One Size		
20352	Ekstra rygplade	Small/Medium		
20352	Ekstra rygplade	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spænde	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spænde	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøjle foran			



Mål: Højde: Mål fra brystben til pubis.

C35 Hydro

Et hyperekstensionskorset som er lavet i et vandtæt materiale og kan benyttes til bassin træning. Korsettet er justerbart i højde og brystvidde og har en brystplade som kan vinkles. Bækkenbuen kan låses i valgfri position. Lukkes med hurtigspænde. Polstringen kan skiftes.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale ; stabile frakturer forårsaget af traume, stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose, luxationer, osteoartrit. Kan anvendes ved badetræning.

Art. nr.	Model	Størrelse	Højde	Hoftemål
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Ekstra polstring	Small		
20359	Ekstra polstring	Medium		
20359	Ekstra polstring	Large		
20359	Ekstra polstring	X-Large		
20360	Ekstra bånd med spænde	One size		

Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom er et korset-system fremstillet i 3D-LITE materiale, som består af et præfabrikeret for- og bagpanel med monterede stropper. Det formes let direkte på patienten til et individuelt tilpasset, stabilt korset. Korsetterne findes i en LSO og TLSO model for at imødekomme ordinationer og forskellig patient anatomi. Find den rette størrelse ved at måle patienten og sammenhold med måleskemaet. Vælg et for- og bagpanel.

Anvendelsesområde: Post-operativt, kompressionsfrakturer og immobilisering af rygraden.

Art. nr.	Model	Størrelse	Tykkelse	Højde	Omkreds
64919	For	XS / S	5 mm	19,5 cm	60 - 75 cm
64919	For	S / M	5 mm	19,5 cm	70 - 90 cm
64919	For	M / L	7 mm	21,5 cm	85 - 105 cm
64919	For	L / XL	7 mm	24,5 cm	95 - 120 cm
64919	For	XL / XXL	7 mm	27 cm	115 - 140 cm
64921	Bag	XS / S	5 mm	30 cm	60 - 75 cm
64921	Bag	S / M	5 mm	31,5 cm	70 - 90 cm
64921	Bag	M / L	7 mm	33,5 cm	85 - 105 cm
64921	Bag	L / XL	7 mm	35 cm	95 - 120 cm
64921	Bag	XL / XXL	7 mm	36,5 cm	115 - 140 cm



Mål: Størrelsen bestemmes af taljemål. Tag målet stramt. Mål også højden for og bag i henhold til anvisningerne. Vælg størrelse fra tabellen.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom er et korset-system fremstillet i 3D-LITE materiale, som består af et præfabrikeret for- og bagpanel med monterede stropper. Det formes let direkte på patienten til et individuelt tilpasset, stabilt korset. Korsetterne findes i en LSO og TLSO model for at imødekomme ordinationer og forskellig patient anatomi. Find den rette størrelse ved at måle patienten og sammenhold med måleskemaet. Vælg et for- og bagpanel.

Anvendelsesområde: Post-operativt, kompressionsfrakturer og immobilisering af rygraden.


Art. nr.	Model	Størrelse	Tykkelse	Højde	Omkreds
64922	For	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	For	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	For	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	For	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bag	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bag	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bag	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bag	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mål: Størrelsen bestemmes af taljemål. Tag målet stramt. Mål også højden for og bag i henhold til anvisningerne. Vælg størrelse fra tabellen.

MÅLTAGNINGSSINSTRUKTIONER

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

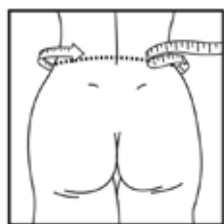

Størrelse

Størrelsen bestemmes af taljemål.
Tag målet stramt. Mål også højden
for og bag i henhold til anvisningerne.
Vælg størrelse fra tabellen.

	Beskrivelse	Omkreds i cm		Total højde for i cm	Total højde bag i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO front



LSO bak





TLSO front



TLSO bak

Illustrationerne viser omtrentlig højde for de forskellige modeller LSO eller TLSO.

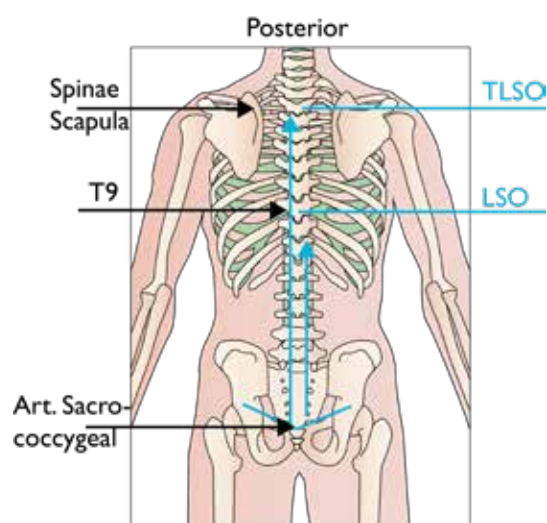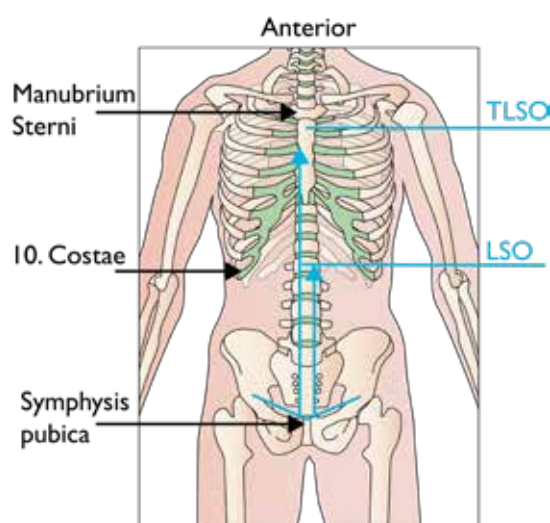

BOSTON Overlap Brace

Præfabrikeret korset specielt udviklet til behandling af kroniske eller tilfældige lænderygsmerte. Korsettet findes i 20 standardstørrelser og i flere forskellige materialetykkelser og lordosegrader. Kan desuden bestilles efter mål eller gipsafstøbning. Vælg mellem polstret eller upolstret. Modulet er fremstillet af polyeten. Skal anvendes sammen med undertrøje. Bånd og D-ring er inkl. til hver enkelt korset

Anvendelsesområde: Lænderygsmerte, spondylolistese, spondylt, osteoporose, præ- og postoperativ behandling, spinalstenose og frakturer

Øvrigt: Korsettet kan kun bestilles i hvid polyeten. Brug størrelsestabel til standardstørrelser. Til korsetter efter mål udfyld bestillingsformular. Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos Kundesupport.

Art. nr.	Model	Tykkelse
29690	Standardmodul 15°	1,5 mm
29694	Standardmodul 30°	3 mm
29695	Standardmodul 15°	3 mm
29697	Målbestilt polstret	3 mm
29698	Standardmodul polstret 15°	3 mm
29696	Rygfjedre 20 cm	
29696-1	Rygfjedre 25,5 cm	
29696-2	Rygfjedre 30,5 cm	
29696-3	Rygfjedre 35,5 cm	





BOSTON LITE™

Boston LITE™ er en videreudvikling af "Soft Brace", som har været på markedet i mange år. Nye teknikker har gjort det muligt at skabe et korset, som er både tyndere og mere ventilerende men med samme stabilitet. Boston LITE har fået en del nye funktioner idet forstærkningsmaterialet "bages" ind i plasten og gør det muligt at lave hull mellem de forskellige forstærkningssegmenter. Korsettet leveres med en separat inderde, l som er lavet i en "3D-Spacer" - væv. Denne absorberer fugt og varme, så huden holdes kølig og tørrere, samtidig med at den fungerer som polstring og fordeler trykket mod kroppen. Inderdelen anvendes istedet for en undertrøje. For et mere kosmetisk design er der udviklet lavprofil spænder, som giver et mere smidigt udseende.

Anvendelsesområde: Neuromuskulære Scolioser, holdningskontrol og postoperativ støtte.

Øvrigt: Dette korset kan bestilles i samme farver som Boston Soft Body Jacket. Boston LITE findes kun med åbning i ryggen* Størrelserne for Boston LITE liner dækker 2 størrelser af modulet (J1 / J2 = størrelse 1, J3 / J4 = størrelse 2) "Boston LITE Målbestilt (29726 og 29728) kan kun bestilles i samme størrelsesomkreds som standardstørrelserne J1 – Y4F, med 15 graders lordose og åbning bag." Der er inkluderet 1 liner til hver enkelt korset. Yderligere liner kan bestilles separat. Et specielt båndløsning med spænde er inklusiv.

Art. nr.	Model	Beskrivelse	Størrelse	Lordosegrad
29725	Boston LITE Korset	Modul, ikke færdiggjort	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korset	Modul, ikke færdiggjort	Målbestilt	15°
29728	Boston LITE Korset	Færdiggjort	Målbestilt	15°
29729	Boston LITE Korset	Færdiggjort	J1 - Y4F	15°
29730	Separat liner	(se under Mål)	1 - 6	
29731	Ekstra bånd	Sæt af 3 bånd/spænder	One Size	
29732	Plastspænde			

BOSTON Soft Body Jacket

Præfabrikeret korset beregnet til patienter med nedsat muskelstyrke, svag bækkenkontrol eller der af andre årsager ikke tåler en rigid ortose. Modulet er fremstillet af et hårdere polyetenfoam på ydersiden og et blødere polyetenfoam på indersiden. Standard modulet, der findes i 30 størrelser, er hvidt, har 15° lordose, åbning bag samt åbne kanaler. Kan også bestilles i forskellige farver, lordoser, åbne eller lukkede kanaler samt efter mål. Anvendes med undertrøje. Bånd og D-ring indgår til hver enkelt korset.

Anvendelsesområde: Neuromuskulære scolioser, holdningskontrol og postoperativ støtte.

Øvrigt: Dette korset kan bestilles i flere forskellige farver, som fremgår af bestillingsformularen. Kontakt Kundesupport for farveprøver. Den kan også bestilles med en ekstern ramme, som har heldækket mønster fra "Mønsterlisten". Ved bestilling af BSBJ med ekstern ramme er grundmaterialet altid hvidt. Den kan også bestilles med små transfermønstre fra "Bosten Transfer" listen. Kontakt Kundesupport for yderligere information og prøver. Brug størrelsestabel til standardstørrelser. Ved korsetter efter mål udfyld bestillingsformular Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos Kundesupport.

Art. nr.	Model	Type	Lordosegrad
29707	Standardmodul	Åbne kanaler	15°
29708	Målbestilt	Åbne kanaler	
29709	Standardmodul	Lukkede kanaler	15°
29710	Målbestilt	Lukkede kanaler	
29700	Med ramme		
29719	Bånd m. spænde	5 cm x 30,5 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket fremstillet af LDPE (low density polyeten) beregnet til immobilisering af rygraden. Kan bestilles efter mål eller gipsafstøbning. Skal anvendes sammen med undertrøje. Bånd indgår ikke.

Anvendelsesområde: Postoperativt, kompressionsfrakturer og immobilisering af rygraden.

Øvrigt: Korset kan kun bestilles i hvid Polyeten (LDPE). Det kan bestilles med heldækket mønster fra "Mønsterlisten". Den kan også bestilles med små transfermønstre fra "Bosten Transfer listen". Kontakt Kundesupport for yderligere information og prøver. Brug størrelsestabel til standardstørrelser. For korsetter efter mål udfyld bestillingsformular.

Art. nr.	Model
29701	Målbestilt
29699	Tillæg færdiggjort korset





BOSTON Skoliosekorset

Veldokumenteret præfabrikeret korset til behandling af scoliose. Findes i 30 standardstørrelser i 0° eller 15° lordose. Kan også specialbestilles efter mål eller gipsafstøbning. Modul af polypropen og polstring af skumplast i poletylen. Skal anvendes sammen med undertrøje. Bånd og spænde indgår ikke.

Anvendelsesområde: Idiopatiske skolioser.

Øvrigt: Korsettet kan kun bestilles i hvid Polypropen. Den kan bestilles heldækket med mønster fra "Mønsterlisten". Den kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt Kundesupport for yderligere information og prøver. Brug størrelsestabel til standardstørrelser. Ved korsetter efter mål udfyld bestillingsformular. Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos kundesupport.

Art. nr.	Model	Tykkelse	Lordosegrad
29705	Standardmodul	4,5 mm	15°
29706	Standardmodul	4,5 mm	0°
29704	Målbestilt	4 mm	



BOSTON Skoliosis Night Brace

Scoliosekorset beregnet til anvendelse om natten. Korsettet skal anvendes mindst 7 timer pr. nat. Modulet er fremstillet af 3 mm copolymer og findes i to forskellige modeller: En med udtagelig polstring og en med permanent polstring. Korsettet skal anvendes sammen med undertrøje. Bånd og spænde indgår.

Anvendelsesområde: Dette produkt er beregnet til behandling af Idiopatisk Skoliose i henhold til følgende retningslinjer; Lille kurve Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skeletalt umoden (Riser 0-3); Kurve med Apex op til maksimalt Th9; Dobbeltkurver kan behandles, men kræver et højere niveau af ekspertise. Det vigtige element i behandlingen af dobbeltkurver er evnen til at identificere de primære og sekundære kurver. Når man behandler en dobbeltkurve, bør det primære være thoraxkurven. Hvis det er den Lumbale kurve som er det primære, bedes du kontakte os for konsultation.

Øvrigt: Korsettet kan kun bestilles i hvid Copolymer. Den kan bestilles med heldækket mønster fra "Mønsterlisten". Ved bestilling af heldækket mønster er indermaterialet altid hvidt. Kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt Kundesupport for yderligere information og prøver. Brug bestillingsformular ved målbestilling. Fremstillingsmanual kan bestilles hos kundeservice.

Art. nr.	Model	Type
29720	Færdiggjort, med udtagelig polstring	Målbestilt
29721	Ej færdiggjort, med udtagelig polstring	Målbestilt
29722	Færdiggjort, med permanent polstring	Målbestilt
29723	Ej færdiggjort, med permanent polstring	Målbestilt

BOSTON korset tilbehør

Her finder du forskelligt tilbehør til færdiggørelse af Boston Scoliosekorsetter. Der er forstærkningssæt frem og bag, svejsetråd og pelotter.


Art. nr.	Model	Størrelse	Bredde	Længde	Ve/Hø
29711	Forstærkningssæt Anterior	One size			
29711	Forstærkningssæt Posterior	One size			
29713	Svejsetråd plast		3 mm	1,2 m	
29713	Svejsetråd plast		5 mm	1,2 m	
29715	Bånd hvid		25 mm	50 m	
29715	Bånd beige		25 mm	50 m	
29750	Elastisk materiale, hvid		20 cm	1 m	
29753	Lumbar pad	Small			Ve/Hø
29573	Lumbar pad	Large			Ve/Hø
29573	Lumbar pad	Small			
29573	Lumbar pad	Large			
29757	Abdominal pad	Medium			
29757	Abdominal pad	Large			



Boston Brace Mønster og Motiv

Til forskellige Boston korsetter findes der mønster og motiver at vælge i mellem. Disse kan kun vælges til målbestilte korsetter. Ikke til standardmoduler som er på lager. Dette gælder for Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Scolioskorset og Boston Night Brace.

Art. nr.	Model
29716	Løse motiver
29717	Motiv monteret på korset
29718	Helmønstreret korset

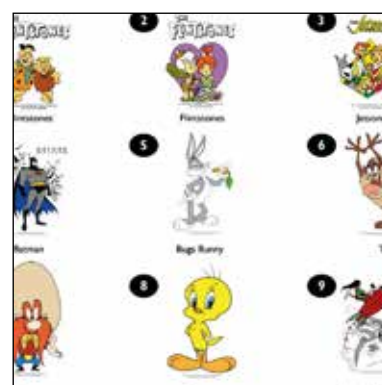

Boston T-Linne Hvid

Denne 2-lags Boston T-Linne har rund hals og er helt sømløs hvilket gør den perfekt til anvendelse under en rigid rygortose. Elasticiteten giver en rynkefri og tæt pasform under korsettet. Den er lavet af CoolMAX® og Elastan, hvilket gør den kølig om sommeren og varm om vinteren. Modellen har dobbelt vinger under armene for at beskytte armhulen. Materialet er fri for sølvpartikler, er latexfri og antistatisk. Fremstillet i overensstemmelse med Øko-Tex Standard 100, Class II.

Art. nr.	Størrelse	Længde	Omkreds	Bredde	Axilstøtte
29764	Small	46 cm	40-61 cm	14 cm	To sider
29764	Medium	52 cm	61-81 cm	20 cm	To sider
29764	Large	65 cm	81-102 cm	25 cm	To sider
29764	X-Large	65 cm	102-122 cm	30,5 cm	To sider



NYHED!



Størrelseskema Bostonkorsetter

Størrelsetabel B.O.B

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
1	71	51	66
1D	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Størrelsetabel Flexaform

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Størrelsetabel Scoliose & Soft Body Jacket

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Størrelsetabel Boston LITE

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
I5J1	54	40	49
I5J2	58	42	51
I5J3	62	45	54
I5J4	64	47	56
I5Y1	67	46	56
I5Y1A	66	51	55
I5Y2	71	47	60
I5Y2A	72	55	62
I5Y3	75	48	63
I5Y3A	78	57	69
I5Y4	79	51	64
I5Y4F	80	57	66



Ortosekomponenter

www.camp.dk



ShearBan®

ShearBan® er et selvhæftende PTFE- materiale, udviklet til at kontrollere friktionspåvirkning i ortose- og protesekonstruktioner. ShearBan bevirker at friktionskoefficienten kan mindskes kraftigt på områder hvor risikoen for hudirritation, sår dannelse o.s.v. er stor. Materialet er designet med en tilpasset facon for placering i sko, indlægssåler, ortoser og protese hylstre. Materialet påføres på produktet og ikke mod huden. ShearBan, de udstansede, er til anvendelse som dækmaterialer over skruer, nitter eller andre områder hvor materiale sammensættes eller ved ujævnheder. De udstansede findes i to størrelser, beige eller sort. Pladerne findes kun i en blå farve. Produktet er testet til specifikke anvendelsesområder.

Anvendelsesområde: ShearBan er designet med en tilpasset facon for placering i sko, indlægssåler, ortoser og protese hylstre.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke
38498	Beige	24 mm	84 stk.
38499	Sort	24 mm	84 stk.
38502	Beige	19 mm	138 stk.
38503	Sort	19 mm	138 stk.
38500	Blå	225 mm x 300 mm	5 stk.
38501	Blå	225 mm x 300 mm	1 stk.



Kid-Dee-Lite™

Markedets mindste, indstillelige ankelled til børn. Leddet vejer 20 gram og er fremstillet af aluminium. Det muliggør tidlig immobilisering specielt hos børn med neuromuskulære skader. Indstilleligt bevægelsesomfang i 20° plantarfleksion til 20° dorsalfleksion. Kan anvendes både med lige eller buede skinner. Leveres komplet med ledpinde og øvrigt tilbehør der behøves ved fremstilling og montering. Leddet er beregnet til børn under 5 år og er begrænset til anvendelse op til en patientvægt på max. 25 kg og en højde på max. 120 cm. Max. belastning er 15 Nm.

Anvendelsesområde: Ved dynamiske behandlinger når et begrænset bevægelsesomfang kræves for at hindre kontrakturer.

Kontraindikationer: Fuldstændig bortfald af følelse.

Øvrigt: Fremstillingsvejledning findes i pakningen.

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Pakke
62200	Poleret aluminium	One Size	1 par

Binky universalled

Et universalled, uden fleksjon/ekstensionstop, er beregnet til at anvende parvis ved ortosefremstilling i termoplast eller sammen med et andet led. Binky kan anvendes både til børn og voksne til håndled, albue eller ankelleddet. Binky findes i to størrelser. Størrelse small anvendes til mindre led og størrelse Large til større. Ansvarlige læge ordinerer ortosen og bestemmer behandlingsforløbet.

Anvendelsesområde: Paralytisk syndrom

Øvrigt: Binky findes i to størrelser og leveres parvis. Størrelse Small skal anvendes til mindre led (vægtbelastning 35 kg).

Art. nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
69688	12 mm	62 mm	2,5 mm	I par
69688	18 mm	76 mm	2,5 mm	I par



Ankelled i Polyuretan

Polyuretaneled til fremstilling af termoplastortoser. Ankelled findes i to forskellige udførelser. Den dorsalflekterede model findes i flere forskellige størrelser og hårdheder. Højere hårdhed giver stærkere dorsalfleksion.

Art. nr.	Model	Hårdhed	Størrelse	Pakke
62775	Flexibel Ankelled		Barn	I par
62775	Flexibel Ankelled		Voksen	I par
62776	Dorsiflex. Ankelled	0,5 kg	Barn Sølv	I par
62776	Dorsiflex. Ankelled	1 kg	Barn Transparent	I par
62776	Dorsiflex. Ankelled	1,5 kg	Barn Guld	I par
62776	Dorsiflex. Ankelled	0,5 kg	Voksen Sølv	I par
62776	Dorsiflex. Ankelled	1 kg	Voksen Transparent	I par
62776	Dorsiflexion Assist	1,5 kg	Voksen Guld	I par





Tamarack

Selvrettende bøjeligt led i to forskellige udførelser; Flexure - lige og Flexure med Dorsifleksion Assist - buet. Fremstillet af polyuretan med en forstærket kerne der mindsker bøjning af materialet. Tamarackledene findes i tre hårdheder; 75, 85 og 95, hvor 95 giver mere løft.

Anvendelsesområde: Ortoseapplikationer som albue, håndled, barn-knæortoser samt ankel-fod-ortoser.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Model	Hårdhed	Størrelse	Pakke
62730	Flexure lige sort		Barn	I par
62730	Flexure lige sort		Medium	I par
62730	Flexure lige sort		Large	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	75	Barn	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	75	Medium	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	75	Large	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	85	Barn	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	85	Medium	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	85	Large	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	95	Barn	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	95	Medium	I par
62732	Flexure med Dorsifleksion assist sort	95	Large	I par
62740	Flexure lige transparent		Barn	I par
62740	Flexure lige transparent		Medium	I par
62740	Flexure lige transparent		Large	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	75	Barn	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	75	Medium	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	75	Large	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	85	Barn	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	85	Medium	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	85	Large	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	95	Barn	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	95	Medium	I par
62742	Flexure med Dorsifleksion assist transparent	95	Large	I par
62741	Dummy		Barn	I par
62741	Dummy		Medium	I par
62741	Dummy		Large	I par
62748	Holder til ekstern montering		Barn	I par
62748	Holder til ekstern montering		Medium	I par
62748	Holder til ekstern montering		Large	I par

Tamarack værktøj

Tamarack Hand Punch: Anvendes til at lave hul i plasten..Tamarack Spanner
Wrench: Parallellværktøj Tamarackled i en allerede eksisterende ortose.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Model	Størrelse
62744	Hand Punch	Barn
62744	Hand Punch	Medium
62744	Hand Punch	Large
62745	Spanner Wrench	Barn
62745	Spanner Wrench	Medium/Large



Camber Axis

Ekstra stærkt led af rustfrit stål til krævende applikationer. Bevægelsesomfanget indstilles enkelt i plantar- eller dorsalfleksion med justeringsplader der er inkluderet. Disse findes i forskellige farver til forskellige funktion.

Sølv = 0° Låst

Rød = 5° Låst i plantar- eller dorsalfleksion

Blå = 10° Låst i plantar- eller dorsalfleksion

Lilla = 15° Låst i plantar- eller dorsalfleksion

Grøn = 0° - 30° Begrænset bevægelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksion

Sort = 5° - 10° Begrænset bevægelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksion

Gul = 7,5° - 10° Begrænset bevægelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksion



Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen. Samtlige justeringsplader indgår i pakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pakke	Vægt
62750	Small	I par	36-45 kg
62750	Medium	I par	Op til 72 kg
62750	Large	I par	Op til 99 kg



Oklahoma

Ankelled i nylon eller polypropen til bevægelseskontrol. Nylonleddet er velegnet til meget aktive patienter.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
62760	Polypropen	Barn	I
62760	Polypropen	Small	I
62760	Polypropen	Medium	I
62760	Polypropen	Large	I
62760	Polypropen	X-Large	I



Ankelled Dobbelt Kompakt

Et ankelled som leveres med en splint i den foreste kanal og en fjeder i den bagerste kanal for at tillade normal gang og initial kontakt såvel som at give maximal kontrol og stabilitet af knæ og hofte. Ankelled Dobbelt Kompakt er lavet til både lettere voksne- og børnepatienter. Der indgår ekstra splint og fjedre.

Øvrigt: Max vægt 75 kilo. 62726/27 passer til skinner 5 x 13 mm.

Art. nr.	Model	Materiale	Størrelse
62724	Ankelled MED proksimal skinne	Rustfrit Stål	One Size
62725	Ankelled MED proksimal skinne	Aluminium	One Size
62726	Ankelledet UDEN proximal skinne	Rustfrit Stål	One Size
62727	Ankelledet UDEN proximal skinne	Aluminium	One Size



Slim Line Double Action ankelled

Ankelled der enkelt kan indstilles i ønsket plantar-dorsal fleksion. Leddet har et lige indfæste til skinnen. Kan med fordel anvendes sammen med "Knæled trinvis låsbar" og "Knæled med bøjlelås" der indgår i modulsystemet for helbensortoser samt til SafetyStride og FullStride. Leddet findes i både rustfrit stål og aluminium.

Art. nr.	Model	Materiale	Størrelse	Passer til skinner
62778	Ankelled Double Action AL	Aluminium	One size	19 mm
62777	Ankelled Double Action RS	Rustfri stål	One size	19 mm
62778	Ankelled Double Action AL	Aluminium	One size	16 mm
62777	Ankelled Double Action RS	Rustfri stål	One size	16 mm

Slim Line Y-bøjle

Y-bøjle til foddelen. Anvendes sammen med Slim Line Double Actions ankelled for at kontrollere foden i plantar- /dorsalfleksion.

Øvrigt: Passer til led/ åbning indvendig mål

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Mål
62772	Rustfrit stål	Voksen	3,2 mm
62773	Rustfrit stål	Barn	2,4 mm



TRIPLE ACTION®

Tilpasning, R.O.M (bevægelsesomfang) og modstand plantart og/eller dorsalt, justeres helt uafhængigt af hinanden, hvilket giver en unik mulighed for at tilgodese kravet til finjustering i gangcyklussens forskellige faser. De kraftige fjedre og den smidige indstilling gør det enklere at hjælpe patientens behov gennem hele rehabiliteringsfasen. Leddene har fjedre, som klarer et højt vridmoment og tre enkle indstillinger sikrer den ønskede funktion. Triple Action-leddene muliggør effektiv behandling ved forskellige biomekaniske funktionsnedsættelser i kombination med neurologiske skader



Adult 2.0 Ankle Joint
(19mm Systems)



Small Adult Ankle Joint
(16mm Systems)



Pediatric Ankle Joint
(13mm Systems)

Triple Action® komponentselektering

Patientvægt	Kg	15	45	55	80	90	100
Ledtype	Leder (Boosters)						
Barn 13 mm	1 (0)						
	2 (0)						
Mellem 16 mm	1 (0)						
	1 (1-2)						
	2 (0)						
	2 (1-4)						
Voksen 19 mm	1 (0)						
	1 (1)						
	2 (0)						
	2 (1-2)						

Triple Action® ankelled til børn

Et ankelled udviklet til Børn. Leddets unike fjedringssystem gør det ekstra holdbart, også til de mest aktive børn. Enkel tilpasning og målrettet direkte til patienten. Juster hvor i gangcyklussen det behøves og til hvilken modstand. Vælg mellem forskellige fjedringsalternativer. Komponenter med høj materialestivhed, optimal funktion gennem hele gangcyklussen og med ekstraordinær ydeevne. Triple Action til børn passer til 13 mm skinner.

Anvendelsesområde: Ved behandling af forskellige funktionsnedsættelser i forbindelse med neurologiske skader: Crouch Gang, Plantarfleksions-kontrakturer, Quadriceps svaghed, Spasticitet og som tillæg ved Botox®-behandling, postoperativ immobilisering ved akillesforlængning eller mobilisering af det spatisk fodled. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikationer: Til ortoser med led med monolateral konstruktion (led kun til lateralsiden) skal TripleAction Pediatric ikke vælges. Ønskes monolateral konstruktion vælg TripleAction Ankelled Mellem.



Art. nr.	Model	Ve/Hø
62707	Ankelled uden booster	Bilateral
62670	Ankelled med en booster	Plantar booster = Venstre medial/højre lateral eller Dorsal booster = Venstre lateral/højre medial
62671	Ankelled med en booster	Dorsal booster = Venstre medial/højre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/højre mediale lateral eller Dorsal booster = Venstre lateral/højre medial
62672	Ankelled med plantar og dorsal booster	Bilateral
62673	Distal skinne lateral	Bilateral
62674	Distal skinne medial	Ve/Hø
62675	Distal Y-skinne lang	Bilateral
62676	Distal lige skinne	Bilateral
62709	Værktøjssæt til fremstilling	
62722	Kombinationsnøgle Barn	



Triple Action® ankelled mellem

Triple Action "Small Adult" er lavet til 16 mm skinner og designet for at give mest mulig aktiv kontrol gennem alle gangcyklussens faser. De kraftfulde fjedre og den smidige indstilling gør det mere enkelt at møde patientens behov i hele rehabiliteringsfasen. Leddet har fjedre som klarer et højt vridmoment og tre enkle indstillinger som sikre den ønskede funktion. Triple Action-leddet enkelgøre effektiv behandling i forskellige biomekaniske funktionsnedsættelser i forbindelse med neurologiske skader. Fremstillet i rustfrit stål for god holdbarhed og sikkerhed.

Anvendelsesområde: Anvendes ved behandling af forskellige biomekaniske handicaps associeret med neurologiske skader: Unilateral MAX 90 kg, Bilateral MAX 100 kg.

Art. nr.	Model	Ve/Hø
62711	Ankelled uden booster	Bilateral
62713	Ankelled med en booster	Plantar booster = Venstre medial/højre lateral eller Dorsal booster = Venstre lateral/højre medial
62714	Ankelled med en booster	Dorsal booster = Venstre medial/højre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/højre medial
62715	Ankelled med plantar og dorsal booster	Bilateral
62677	Distal skinne lateral	Ve/Hø
62678	Distal skinne medial	Ve/Hø
62679	Distal Y-skinne	Bilateral
62680	Distal rak skinne	Bilateral
62699	Camber Axis hængselled	Bilateral
62719	Værktøjssæt til fremstilling	
62721	Kombinationsnøgle Mellem	

Triple Action 2.0 ankelled til voksne

Et led designet til at give en optimal grad af justering og for at rumme de biomekaniske krav. Tilpasning, R.O.M (bevægelsesomfang) og modstand plantart og/eller dorsalt, justeres uafhængigt af hinanden, hvilket giver en unik mulighed for at imødekomme behovet for finjustering af hele gangcyklussens forskellige faser. De kraftfulde fjedre og den smidige indstilling gør det enklere at opfylde patientens behov gennem hele rehabiliteringsfasen. Ledet har fjedre som klarer et højt vridmoment og tre enkle indstillinger som sikrer den ønskede funktion. Triple Action-ledet enkelgøre effektiv behandling ved forskellige biomekaniske handicaps associeret med neurologiske skader. Lavet i rustfrit stål for lang holdbarhed og sikkerhed. Triple Action 2.0 voksen passer til 19 mm skinner.



Anvendelsesområde: Anvendes ved behandling af forskellige biomekaniske handicaps associeret med neurologiske skader. Unilateral MAX 100 kg, Bilateral MAX 110 kg.

Art. nr.	Model	Ve/Hø
62690	Ankelled uden booster	Venster lateral/højre medial
62691	Ankelled utan booster	Højre lateral/venstre medial
62692	Ankelled med plantar booster	Venstre lateral/højre medial
62693	Ankelled med plantar booster	Højre lateral/Venstre medial
62695	Distal skinne lateral	Ve/Hø
62696	Distal skinne medial	Ve/Hø
62697	Distal Y-skinne	Ve/Hø
62698	Distal lige skinne	Bilateral
62699	Camber Axis Hængselled	Bilateral
62694	Værktøjssæt til fremstilling	
62720	Kombinationsnøgle Voksen	

Bevægelsesbegrænser 655

Bevægelsesbegrænser af rustfrit stål og nylon til begrænsning af plantar-/dorsalfleksion i ankelleddet.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pakke
62655	Small	1 sæt
62655	Large	1 sæt
62655	X-Large	1 sæt





Bevægelsesbegrænser 755

Bevægelsesbegrænser af polyuretan til plantarfleksionsstop. Enkel at justere.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pakke
62755	One Size	I sæt



Bevægelsesdæmper 795

Bevægelsesdæmper af rustfrit stål og polyuretan. Giver en variabel plantarfleksion der kan låses i ønsket position.

Øvrigt: Fremstillingsinstruktion findes i pakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pakke
62795	One Size	I sæt



SureStep HEKO knæled

Surestep HEKO er et led til fremstilling af en funktionel hyperextensionsortose til mindre børn. HEKO-leddet modvirker hyperekstension i knæet ved at begrænse bevægeligheden i knæet uden at påvirke knæets normale funktion. Traditionelt er hyperekstension kontrolleret ved at begrænse plantarfleksionsbevægeligheden i ankelen. Dette begrænser den normale gang, mindsker barnets mulighed for normal gangfunktion og aktivitet. HEKO tillader barnet at gå, løbe, sidde på hug og hoppe. Leddet har fuld ROM fra 0° til 135°. Det 4-leddede led giver fuld ROM da det efterligner den anatomiske bevægelse i knæet. Det har en lav vægt, lav profil og kan med fordel anvendes under tøjet. Let at tage på og af.

Anvendelsesområde: Lokal kontrol af hyperekstension, varus og valgus i knæet.

Øvrigt: Leveres med medalt og lateralt led som begge har 8 mm offset.

Maximalvægt for Small - 22 kg maximalvægt for Large - 45 kg

Mål 1: Tykkelse/Bredde

Mål 2: Skinnens længde fra centrum af ledhuset

Mål 3: Ledhusets længde

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
62650	Rustfrit stål	Small	10 x 2 mm	135 mm	35 mm
62650	Rustfrit stål	Large	12 x 3 mm	185 mm	45 mm

Knæled trinvis låsbar

Et trinvist låsbart knæled der hjælper patienten at nå maksimal strækning af knæet og knæstabilitet gennem den trinvise knæfleksion. Disse komponenter fra Becker Orthopedic indgår i et modulsystem beregnet til fremstilling af helbensortoser. Modulerne til knæleddene findes i rustfrit stål og aluminium. De medfølgende skinner er afrundet i overkanten og lige i nederste kant. Den lange vinklede låsebøjle er let at tilpasse efter patientens behov eftersom den kan afkortes og formes individuelt.

Art. nr.	Model	Materiale	Størrelse
62852	Knæled trinvis låsbar	Aluminium	19 mm
62853	Knæled trinvis låsbar	Rustfrit stål	19 mm



Mål: Passer til skinner 19 mm.

Knæled med låsebøjle

Et låseknæ der automatisk aktiveres når leddet når fuldt strakt. Disse komponenter fra Becker Orthopedic indgår i et modulsystem beregnet til fremstilling af helbensortoser. Designet øger fremstillingsmulighederne og letter vedligeholdelsen af ortosen. Den lange vinklede låsebøjle er let at tilpasse efter patientens behov eftersom den kan afkortes og formes individuelt. Modulerne til knæleddene findes i to størrelser samt i rustfrit stål og aluminium. De medfølgende skinner er afrundet i overkanten og lige i nederste kant. Wire medfølger i sættet. Låseknæet leveres med kabel foran der gør det muligt for patienten at låse knæet op.



Øvrigt: Fås i størrelser, der passer til 16 mm og 19 mm skinner, både i aluminium og rustfrit stål

Art. nr.	Model	Materiale	Størrelse
62850	Låseknæ AL	Aluminium	19 mm
62851	Låseknæ RS	Rustfrit stål	19 mm
62850	Låseknæ AL	Aluminium	16 mm
62851	Låseknæ RS	Rustfrit stål	16 mm



SPL2-Swing Phase Lock knæled

SPL ortoserne er udviklet for at hjælpe patienter med partiel eller helt nedsat funktion af M. Quadriceps (knækestensorerne). Ingen anden anvendelse er tilladt. Ledets funktion består af en pendelmekanisme der låser og låser knæleddet op, afhængig af leddets vinkel i sagittalplan. Under gangcyklus låser leddet før hælissætning, for at give støtte under standfasen, og låser op igen når hælen forlader underlaget. Hensigten er at imitere knækestensorernes normale fysiologiske funktion, og give et mere normalt gangmønster, uden cirkumduktion eller hoftegang. SPL2-leddet låser ved fuld knæekstension og har yderligere et sikkerhedsstop der udløses ved 15 graders fleksion når fuld ekstension ikke opnås. Dette indebærer at ortosen låser selv hvis knæet ikke er fuldt eksterenderet. Eftersom SPL2-leddet ikke er afhængig af ankels position og/eller gulvkontakt kan leddet anvendes til forskellige typer af ortoser:- Helbensortoser med eller uden ankelled- Helbensortose evt. med hofteled- Knæortoser

Anvendelsesområde: M. Quadriceps pareser p.g.a.; MS eller lignende sygdomme, stroke, Polio, perifære nerveskader og andre neuromuskulære sygdomme.

Kontraindikationer: Knæfleksion-kontrakturer > 10 og moderat til svær spasticitet.

Øvrigt: Udførlig fremstillingsmanual samt tilpasningsmanual medfølger ved levering. Reservedelsfortegnelse findes i manualen. Desuden findes separat manual til fysioterapeuter. Manualer kan bestilles hos kundeservice. I begge produkter indgår 1 håndbetjening, dummy til indstøbning samt øvrigt tilbehør til montering. SPL2-leddet er beregnet til 20 mm skinner. Skinner medfølger ikke. Art. 62800 indeholder SPL- samt SPC-led Art. 62803 indeholder SPL-led. Patientvægt max. 100 kg.

Art. nr.	Model	Ve/Hø
62800	SPL2	Ve/Hø
62803	SPL2 Monolateral	Ve/Hø
62801	Parallelværktøj	
62802	Dummy	
62805	Renoverings-kit	
93101	Prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/tilpasses.	Bilat.

Load Response knæled

Load Response giver støddæmpning og tillader 18° fleksion i knæet i standfasen. En belastet spiralfjeder bibeholder knæleddets stabilitet ved at stå imod knæfleksion. Load Response findes med skinner af aluminium, rustfrit stål eller titanium.

Anvendelsesområde: Total M. Quadriceps svigt eventuelt i kombination med svaghed i hoftemuskulaturen. Min. vægt 50 kg. Max. vægt 86 kg.

Øvrigt: Load Response leddet er beregnet til 19 mm skinner.

Art. nr.	Model	Materiale	Ve/Hø
62820	Load Response knæled komplet	Aluminium	Ve/Hø
62820	Load Response knæled komplet	Aluminium	
62821	Load Response knæled komplet	Rustfrit stål	Ve/Hø
62821	Load Response knæled komplet	Rustfri stål	
62822	Load Response knæled komplet	Titanium	Ve/Hø
62822	Load Response knæled komplet	Titanium	
62823	Urethane bånd		
62828	Parallelværktøj		
62829	Oplåsningskit	Ve/Hø	
62829	Oplåsningskit		
93220	Prøveortose til udlån		





GX-Knee knæled

GX-Knee er et knæled beregnet til at hjælpe med knæekstension under svingfasen. En gasfjeder anvendes til at hjælpe knæet til fuld ekstension ved hælisætning. Gasfjederen findes i to forskellige hårdheder; 125N som standard, samt 175N for meget aktive patienter.

Anvendelsesområde: Isoleret Quadriceps svaghed, svaghed i Quadriceps i kombination med fod- og ankelproblemer og svaghed i Quadriceps med sideinstabilitet i knæleddet. Patientvægt max. 100 kg.

Kontraindikationer: Svag hoftemusculatur.

Øvrigt: GX-knæleddet er beregnet til 19 mm skinner. Levereres komplet med skinner medalt og lateralt.

Art. nr.	Model	Hårdhed	Materiale	Ve/Hø
62830	GX-Knee ungdom	125N	Aluminium	Ve/Hø
62830	GX-Knee ungdom	175N	Aluminium	Ve/Hø
62831	GX-Knee ungdom	125N	Rustfrit stål	Ve/Hø
62831	GX-Knee ungdom	175N	Rustfrit stål	Ve/Hø
62832	GX-Knee voksen	125N	Aluminium	Ve/Hø
62832	GX-Knee voksen	175N	Aluminium	Ve/Hø
62833	GX-Knee voksen	125N	Rustfrit stål	Ve/Hø
62833	GX-Knee voksen	175N	Rustfrit stål	Ve/Hø

FullStride™ knæled

FullStride knæled giver mekanisk knækontrol via et kabelsystem. Leddet låser ved fuld ekstension, samt låser automatisk op i slutningen af standfasen. FullStride giver maksimal kontrol af varus/valgus instabilitet og hyperekstension i knæleddet. Leddet FullStride kan udskiftes med SafetyStride. Passer sammen med de fleste ankelled. Ved at skifte leddene fra medalt til lateralt og omvendt kan man opnå et låst knæ.

Anvendelsesområde: M. Quadriceps svaghed, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplet rygmarvsskade, inklusionskropsmyositis.

Kontraindikationer: Patientvægt > 100 kg, spasticitet i hofter, knæ eller ankelmuskulatur, betydelig forskel i benlængde hvor den skadede side er kortest, ekstensionskontrakturer i knæleddet.

Øvrigt: Full Stride-leddet er beregnet til 19 mm skinner. Leveres komplet med skinner medalt og lateralt. På fotoet er Slim Line Double Action ankelled samt Slim Line Y-bøjle monteret. Demo-ortose er kun beregnet til fremvisning, ikke til test.



Art. nr.	Model	Materiale	Ve/Hø
62837	FullStride AL	Aluminium	Bilat.
62838	FullStride RS	Rustfrit stål	Bilat.
93240	FullStride demo ortose til udlån	-	Bilat.
93250	PreSTRIDE prøveortose til udlån.	Ortosen kan tilpasses/justeres.	Ve
93251	PreSTRIDE prøveortose til udlån.	Ortosen kan tilpasses/justeres.	Hø



SafetyStride™ knæled

SafetyStride™ knæled giver knæfleksions-kontrol via et mekanisk kabelsystem. Leddet behøver ikke fuld knæekstension for at låse under standfasen, men kan låse i hvilken som helst vinkel. En låsetap aktiveres inde i knæleddet under svingfasen for at sikre stabilitet i knæleddet før hælkontakt, og låser automatisk op i slutningen af stødfasen. SafetyStride kan udskiftes med FullStride. Passer sammen med de fleste ankelled.

Anvendelsesområde: M. Quadriceps svaghed, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplet rygmærvsskade, inklusionskropsmyosit.

Kontraindikationer: Patientvægt > 100 kg, spasticitet i hofte, knæ eller ankelmuskulatur, betydelig forskel i benlængde hvor den skadede side er kortest.

Øvrigt: SafetyStride er beregnet til 19 mm skinner. Leveres komplet med skinner medialt og lateralt. På fotoet er Camber Axis ankelled monteret. Demo-ortose er kun beregnet til fremvisning, ikke til test.

Art. nr.	Model
62835	SafetyStride, Aluminium
62836	SafetyStride, Rustfrit stål
93230	SafetyStride, demoortose til udlån
93231	SafetyStride, demoortose til udlån.
93250	PreStride prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.
93251	PreStride prøveortose til udlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.

MultiMotion korrigerende led

MultiMotion er et dynamisk korrigerende ledssystem som kan bruges når bevægelsen er begrænset som f.eks ved kontrakturer, spastisitet, efter operationer eller i forbindelse med brandskader. Systemet kan bruges til mange af kroppens led, både extension og flexion. Ledets dynamiske funktion giver en sikker og varig behandling helt efter patientens individuelle forudsætninger. Ortozesystemet udføres individuelt af ortopædingeniøren. Systemet er enkelt at manøvrere og indstillingerne er nemme at ændre alt eftersom bevægelsesomfanget forandres. Ved at anvende opfølgningsskemaet kan du enkelt følge udviklingen, og sikkerhedsstille hvilke justeringer og ændringer som gøres.



Anvendelsesområde: Eksempel på diagnoser: Apoplexi, ligamentskader, brandskader, Cerebral Parese, frakturer, medfødte spastiske pareser, MS, Spina Bifida, underbensamputationer og spastiske pareser.

Kontraindikationer: Ankylose, deformiteter af muskler og ben, fibrose, ossifikation.

Øvrigt: Opfølgningsskemaet kan bestilles hos kundesupport eller "hentes" på Camps hjemmeside www.camp.dk under "Downloadcenter".

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål
69100	Korrigerende led	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69110	Korrigerende led (69100) + øvre og nedre lige skinne (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69111	Korrigerende led (69100) + øvre og nedre formet skinne (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69112	Korrigerende led (69100) + T-skinne og lige skinne (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69113	Korrigerende led med monteret T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69121	Korrigerende led med integreret skinner	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69122	Korrigerende led med integreret skinner	Small	Skinnens bredde 12 mm
69123	Korrigerende led med integreret skinner, T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69125	Korrigerende led med integreret skinner, T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69200	Korrigerende led	Small	Skinnens bredde 12 mm
69210	Korrigerende led (69200) + øvre og nedre lige skinne (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69211	Korrigerende led (69200) + øvre og nedre formet skinne (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69212	Korrigerende led (69200) + T-skinne og lige skinne (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69213	Korrigerende led med monteret T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69951	Dummy korrigerende led	Regular	
69952	Dummy korrigerende led	Small	



MultiMotion hængselled

MultiMotion Hængselled placeres på modsatte side af det korrigerende led. Dette for at opnå den ønskede vridningsstivhed i ortosen. Den findes som enkelt led samt som komplet sæt inklusiv øvre og nedre skinner. En special variant for ankel findes også hvor den integrerede T-skinne har 12 mm eller 22 mm offset.

Anvendelsesområde: Se MultiMotion Korrigerende led.

Øvrigt: Fri bevægelighed (+135° til -135°). Opfølgningsskemaet kan bestilles hos kundesupport eller "hentes" på Camps hjemmeside; www.camp.dk, under "Downloadcenter"

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål
69505	Hængselled	Small	Skinnens bredde 12 mm
69128	Hængselled med integreret skinner	Small	Skinnens bredde 12 mm
69500	Hængselled	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69127	Hængselled med integreret skinner	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69518	Hængselled med monteret T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69131	Hængselled med integreret skinner, T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69513	Hængselled med monteret T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69129	Hængselled med integreret skinner, T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69515	Hængselled (69505) + øvre og nedre lige skinne (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69516	Hængselled (69505) + øvre og nedre formet skinne (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69517	Hængselled (69505) + T-skinne og lige skinne (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69510	Hængselled (69500) + øvre og nedre lige skinne (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69511	Hængselled (69500) + øvre og nedre formet skinne (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69512	Hængselled (69500) + T-skinne og lige skinne (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69953	Dummy Hængselled	Regular	
69954	Dummy Hængselled	Small	

MultiMotion ROM-led

MultiMotion R.O.M.-ledet placeres på modsatte side af det korrigerende led. Dette giver den ønskede vridningsstivhed i ortosen.

Anvendelsesområde: Se MultiMotion Korrigerende led.

Øvrigt: Fleksion/ektensionsstop er justerbare: Small i 14° interval, Regular i 12°.


Art. nr.	Model	Størrelse	Mål
69555	ROM led med skinnehæftning	Small	Skinnsens bredde 12 mm
69550	ROM led med skinnehæftning	Regular	Skinnsens bredde 16 mm



MultiMotion skinner

Til MultiMotion systemet findes flere forskellige typer af skinner at vælge i mellem. Skinnerne findes i to bredder 12 og 16 mm. Alle skinnerne leveres med færdige hul for enkel montering.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål
69701	Skinne, lige	Small	200 x 12 x 3 mm
69705	Skinne, formet	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69709	Skinne, T-formet	Small	R/200 x 12 x 3,2 mm, T/150 x 12 x 3,2 mm
69702	Skinne, lige	Regular	200 x 16 x 4 mm
69706	Skinne, formet	Regular	450 x 16 x 4,0 mm
69710	Skinne, T-formet	Regular	R/200 x 16 x 4 mm, T/150 x 16 x 3,2 mm
69722	Aluminiumskinner I par	Small	150 x 12 x 3.2 mm
69723	Aluminiumskinner I par	Regular	150 x 16 x 4.0 mm

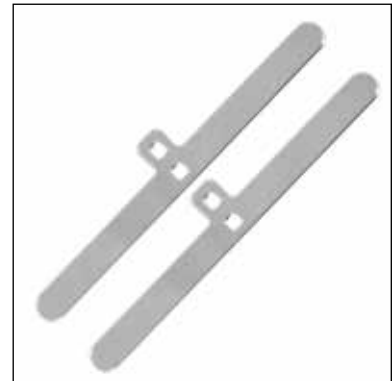



MultiMotion tilbehør

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Antal/pakke
69950	Parallelværktøj			
69900	Skrutetrækker			
69101	Skrue til ledhus	Regular		
69102	Distance brik	Regular		
69103	Ledhus	Regular		
69104	Kraftindikatorskive	Regular		
69105	Fjederspænding	Regular	10,2 Nm	
69106	Flek/Ekst Stop	Regular		2
69107	Skuer	Regular		4
69108	Hængsel Bøsninger	Regular		4
69201	Skrue til ledhus	Small		
69202	Distance brik	Small		
69203	Ledhus	Small		
69204	Kraftindikatorskive	Small		
69205	Fjederspænding	Small	3,4 Nm	
69206	Flek/Ekst Stop	Small		2
69207	Skruer	Small		4
69208	Hængsel Bøsninger	Small		4
69501	Ledbeskyttelse			
69502	Akselsæt			
69503	Skruer til skinnerne			4
69504	Hængsel Bøsninger for skinnerne			4



Mål 1: Maximalt rotationsmoment (leden)

Mål 2: Husets diamenter

Mål 3: Ledets vægt

MultiMotion hofteabduktionsortose

Ledsystemet er beregnet for behandling af korrigerbare kontrakturer i hofteledet hos børn. Systemet består af to komponenter, det korrigerbare led og abduktionsskinne. Komponenterne monteres på en individuelt ortose. Ortozen positionerer barnets ben i en korrekt stilling samt stabiliserer hofteledet. Abduktorerne strækkes ud gennem langsom forlængelse. Leddene kan låses og låses op i ønsket stilling. Justerbart fleksion. og ekstensionsstop: Small 14° interval, Regular 12° interval.

Anvendelsesområde: Spastisk diplegi, spastisk tetraplegi, spastisk triplegi, kongenital subluxation af hofteledet.

Øvrigt: Ledsystemet må kun anvendes på ortoser som er lavet til de nedre extremiteter og må ikke vægtbelastes.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ålder
69721	Abduktionsskinne	Small	< 105 cm			
69720	Abduktionsskinne	Regular	> 105 cm			
69200	Korrigerende Led	Small	3,4 Nm	35 mm	100g	< 4 år
69100	Korrigerende Led	Regular	10,2 Nm	53 mm	245g	> 4 år

MultiStatic behandlingsled

MultiStaticleddet er beregnet til behandling af korrigerbare kontrakturer, både hos voksne og børn. Leddet muliggør hurtig, effektiv og adækvat statisk behandling af kontrakturer. Leddet arbejder efter HLBS-principper (High Load Brief Stretch). Vinklen for leddet indstilles af en excentrisk aksel. MultiStatic-leddet er beregnet til ortoser som ikke er vægtbærende. Vi anbefaler at kombinere MultiStatic-leddet sammen med et hængselled på den modsatte side for at sikre vridstyrken og rotation af ortosen. Kan anvendes både til fleksion og ekstension. Fri indstilling mellem + 120 ° til -120 °. Fungerer Bilateral.



Anvendelsesområde: Behandling af korrigerbare kontrakturer, hos voksne og

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Længde	Højde	Diameter	Vægt
69690	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
69691	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
69692	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g

MultStatic hængselled

Dette frie hængselled anvendes sammen med MultiStatic-Behandlingsled for at sikre sig vridstivheden og dens bedste funktion. Er fremstillet i rustfrit stål.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Højde	Diameter	Vægt
69695	Hængselled	12 mm	400 mm	8 mm	19 mm	78 gram
69696	Hængselled	16 mm	400 mm	8 mm	24 mm	114 gram



Monodos

Monodos er et led af rustfrit stål, der er udviklet til behandling af dynamiske kontrakturer. Leddet giver fri rotation i én retning og blokerer bevægelsen i modsat retning. Beregnet til øvre og nedre ekstremiteter i fleksion og ekstension. Leddet har en enkel åbningsmekanisme.

Anvendelsesområde: Behandling af dynamiske kontrakturer.

Øvrigt: Leddet må ikke anvendes til vægtbærende ortoser. Til str. large indgår "free motion" led samt skinner.

Art. nr.	Størrelse	Pakke	Ve/Hø
62780	Small	1 stk.	Bilat.
62780	Medium	1 stk.	Bilat.
62780	Large	1 par	Bilat.



Egne notater

[illegible]



Plast og materiale

www.camp.dk

X-LITE®

3D-LITE™

På vores fabrik i Belgien fremstiller vi vores plastgipsmateriale, som er ideel til fremstilling af alle typer af gips og ortoser.

Vores produkter er giftfrie og derfor helt ufarlige for patienter og personale. Desuden værner vi om miljøet med et biologisk nedbrydeligt produkt - X-LITE® EcoCast.

Hvorfor X-LITE® eller 3D-LITE™?

- Helt ufarligt materiale, frigiver ingen former for isocyanater og indeholder ingen glasfibre
- Miljøvenlig
- Intet behov for udsugning
- Intet behov for beskyttelseshandsker eller masker
- Afgiver ingen dampe og støver ikke
- Meget lav vægt som er til fordel for patienten
- Luftigt og fordelagtigt for huden og sårheling
- Tåler vand
- Røntgengennemtrængeligt
- Mindre spild da rester og allerede opvarmet materiale kan genbruges



X-LITE®

X-LITE® materialet fremstilles af et 100 % bomuldsvæv, som imprægneres med en giftfri termoplast resin. Dette giver et stærkt og meget holdbart materiale, der samtidigt er luftigt og let. X-LITE® opvarmes i vandbad 70°C og kan let omformes. X-LITE® kan genbruges og genopvarmes et utal antal gange og afklippede stykker kan derfor anvendes som forstærkningsmateriale eller til mindre applikationer. Mindre rettelser på bandagen kan udføres direkte på patienten ved brug af en almindelig hårtørrer. Stabiliteten kan øges ved at anvende flere lag materiale. X-LITE® kommer i tre forskellige kvaliteter CLASSIC, PREMIUM og PLUS. Valg af materiale afhænger af den kliniske indikation og præference.

3D-LITE™

3D-LITE er ligesom X-LITE® en lav termoplastisk plast fremstillet på et tredimensionelt polyester-væv, der imprægneres med resin. Det er velegnet til alle typer skinner og ortoser. Materialet er stærkt, stabilt, let, luftigt og enkelt at anlægge. 3D-LITE™ kommer i tre forskellige tykkelser 3, 5 og 7 mm. Det former sig fint henover konturer og er ikke modtagelig for finger-aftryk. 3D-LITE™ materialet opvarmes ved 80°C i ovn eller med varmluftspistol. Kan let omformes.

Gipsning

X-LITE® fåes i ruller til cirkulær gips og som ark og i en dispenser boks til skinnefremstilling. Eftersom materialet er helt frit for giftstoffer, er det ikke nødvendigt at anvende handsker eller andre former for beskyttelse, når der arbejdes med materialet. En cirkulær gips fjernes let med en gipsesav uden at det støver. Gipsen kan belastes allerede efter 30 minutter. Materialet er røntgengennemtrængeligt ved op til 3 lag.

Ortoser og skinner

X-LITE® og 3D-LITE™ kan anvendes til fremstilling af alle former for skinner og ortoser. Valg af materiale er afhængigt af tilgængeligt udstyr, kropsdel og ønsket stabilitet og formbarhed.



X-LITE® Classic rulle

X-LITE® Classic er det mest stabile alternativ. Den åbne struktur gør materialet luftigt og tillader huden at ånde. X-LITE® Classic er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® Classic ruller har en beskyttelsesfilm imellem lagene som fjernes under cirkuleringen. Vælg imellem tre farver – Hvid, Antracit og Royal Blå.

Anvendelsesområde: Cirkulær gips.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64103	Hvid	50 mm	1,8 m	20 ruller
64133	Hvid	75 mm	1,8 m	20 ruller
64136	Antracit	75 mm	1,8 m	5 ruller
64137	Royal Blå	75 mm	1,8 m	5 ruller
64143	Hvid	100 mm	1,8 m	10 ruller
64146	Antracit	100 mm	1,8 m	5 ruller
64147	Royal Blå	100 mm	1,8 m	5 ruller
64153	Hvid	125 mm	1,8 m	10 ruller
64162	Hvid	150 mm	1,8 m	5 ruller
64163	Hvid	150 mm	1,8 m	10 ruller
64168	Antracit	150 mm	1,8 m	2 ruller
64169	Royal Blå	150 mm	1,8 m	2 ruller





X-LITE® Classic ark og dispenser

X-LITE® Classic er det mest stabile alternativ. Den åbne struktur gør materialet luftigt og tillader huden at ånde. X-LITE® Classic er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® Classic kan bestilles som ark i forudbestemt størrelse eller i en praktisk dispenser boks med 10 meter, hvor man selv klipper den ønskede længde og samtidigt sparer plads i forhold til opbevaring. Vælg imellem tre farver – Hvid, Antracit og Royal Blå.

Anvendelsesområde: Gipsskiner, ortoser samt aftagelige skiner.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke	Ark/Dispenser
64250	Hvid	75 mm	10 m	1	Dispenser
64251	Hvid	100 mm	10 m	1	Dispenser
64252	Hvid	150 mm	10 m	1	Dispenser
64253	Hvid	200 mm	10 m	1	Dispenser
64254	Hvid	125 mm	10 m	1	Dispenser
64255	Antracit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64256	Royal Blå	150 mm	10 m	1	Dispenser
64278	Hvid	25 mm	500 mm	50	Ark
64290	Hvid	200 mm	375 mm	15	Ark
64291	Hvid	200 mm	1,2 m	15	Ark
64292	Hvid	200 mm	900 mm	15	Ark
64293	Hvid	75 mm	375 mm	15	Ark
64294	Hvid	100 mm	375 mm	15	Ark
64295	Hvid	125 mm	375 mm	15	Ark
64296	Hvid	150 mm	375 mm	15	Ark
64297	Hvid	150 mm	900 mm	15	Ark
64298	Hvid	450 mm	500 mm	10	Ark
64299	Hvid	500 mm	500 mm	10	Ark
64302	Antracit	200 mm	375 mm	8	Ark
64303	Antracit	450 mm	500 mm	4	Ark
64304	Royal Blå	200 mm	375 mm	8	Ark
64305	Royal Blå	450 mm	500 mm	4	Ark

X-LITE® PLUS rulle

X-LITE® PLUS har en blød polyester overflade, som giver øget patient komfort og mulighed for en fin farve på bandagen. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® PLUS rullerne har ingen beskyttelsesfilm imellem lagene og rulles nemt og hurtigt på patienten. Vælg imellem fem farver – Hvid, Rød, Blå, Sort og Hot Pink.

Anvendelsesområde: Cirkulær gips.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke/Rulle
64701	Hvid	25 mm	1,8 m	5
64702	Hvid	50 mm	1,8 m	20
64703	Hvid	75 mm	1,8 m	20
64704	Hvid	100 mm	1,8 m	10
64706	Hvid	125 mm	1,8 m	10
64707	Hvid	150 mm	1,8 m	10
64708	Hvid	150 mm	1,8 m	2
64711	Rød	25 mm	1,8 m	5
64712	Rød	50 mm	1,8 m	20
64713	Rød	75 mm	1,8 m	20
64714	Rød	100 mm	1,8 m	10
64716	Rød	125 mm	1,8 m	10
64717	Rød	150 mm	1,8 m	10
64718	Rød	150 mm	1,8 m	2
64721	Blå	25 mm	1,8 m	5
64722	Blå	50 mm	1,8 m	20
64723	Blå	75 mm	1,8 m	20
64724	Blå	100 mm	1,8 m	10
64726	Blå	125 mm	1,8 m	10
64727	Blå	150 mm	1,8 m	10
64728	Blå	150 mm	1,8 m	2
64731	Sort	25 mm	1,8 m	5
64732	Sort	50 mm	1,8 m	20
64733	Sort	75 mm	1,8 m	20
64734	Sort	100 mm	1,8 m	10
64736	Sort	125 mm	1,8 m	10
64737	Sort	150 mm	1,8 m	10
64738	Sort	150 mm	1,8 m	2
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10
64748	Hot Pink	150 mm	1,8 m	2





X-LITE® PLUS ark og dispenser

X-LITE® PLUS har en blød polyester overflade, som giver øget patient komfort og mulighed for en fin farve på bandagen. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® PLUS kan bestilles som ark i forudbestemt størrelse eller i en praktisk dispenser boks med 10 meter, hvor man selv klipper den ønskede længde og samtidigt sparer plads i forhold til opbevaring. Vælg imellem fem farver – Hvid, Rød, Blå, Sort og Hot Pink.

Anvendelsesområde: Alle skinner og ortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64790	Rød	150 mm	10 m	1 Dispenser
64791	Blå	150 mm	10 m	1 Dispenser
64792	Sort	150 mm	10 m	1 Dispenser
64793	Hot Pink	150 mm	10 m	1 Dispenser
64753	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64754	Sort	200 mm	375 mm	8 ark



X-LITE® Premium rulle

X-LITE® Premium er det mest formbare alternativ. Med sin tyndere struktur er det knapt så stabilt som de to andre alternativer, til gengæld kan det formes perfekt over mindre konturer og egner sig godt til bandager for overekstremiteten og børn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® Premium ruller har en beskyttelsesfilm imellem lagene som fjernes under cirkuleringen.

Anvendelsesområde: Cirkulær gips. For øget stabilitet anvendes et ekstra lag.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64205	Hvid	50 mm	1,8 m	5 ruller
64207	Hvid	75 mm	1,8 m	5 ruller
64209	Hvid	100 mm	1,8 m	5 ruller
64210	Hvid	125 mm	1,8 m	5 ruller
64211	Hvid	150 mm	1,8 m	5 ruller

X-LITE® Premium ark og dispenser

X-LITE® Premium er det mest formbare alternativ. Med sin tyndere struktur er det knapt så stabilt som de to andre alternativer; til gengæld kan det formes perfekt over mindre konturer og egner sig godt til bandager for overekstremiteten og børn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips og ligesom alle vores andre materialer, helt fri for isocyanater og glasfibre. X-LITE® Premium kan bestilles som ark i forudbestemt størrelse eller i en praktisk dispenser boks med 10 meter, hvor man selv klipper den ønskede længde og samtidigt sparer plads i forhold til opbevaring.

Anvendelsesområde: Gipsskinner, ortoser samt aftagelige skinner. For øget stabilitet anvendes et ekstra lag.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke	Ark/Dispenser
64215	Beige	75 mm	375 mm	10	Ark
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Ark
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Ark
64220	Beige	200 mm	375 mm	10	Ark
64225	Beige	75 mm	10 m	1	Dispenser
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Dispenser
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Dispenser
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Dispenser



X-LITE® PLUS Kantbånd

X-LITE®PLUS Kantbånd er designet til at sikre en blød kant og en fin finish på skinnen. Kantbåndet er fremstillet af X-LITE®PLUS skinne materiale og tilføjer ekstra stabilitet til skinnen. Det fungerer fint med alle vores materialer inklusiv 3D-LITE. Opvarmes i 70°C varmt vand.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64235	Hvid	25 mm	4 m	Dispenser box
64236	Rød	25 mm	4 m	Dispenser box
64237	Blå	25 mm	4 m	Dispenser box
64238	Sort	25 mm	4 m	Dispenser box
64239	Hot Pink	25 mm	4 m	Dispenser box



X-LITE® termoplastisk kantbånd

X-LITE termoplastisk kantbånd er fremstillet af samme materiale som X-LITE. Båndet varmes i vandbad og hæfter direkte på X-LITE og vores øvrige lavtemperaturplaster. Ortosene får en blød og fin kant.

Øvrigt: Ark à 50 stk. leveres i plastpose.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke	Ark/Dispenser
64185	Hvid	18 mm	7,5 m	1	Dispenser
64180	Hvid	25 mm	7,5 m	1	Dispenser
64190	Hvid	50 mm	7,5 m	1	Dispenser
64183	Hvid	18 mm	500 mm	50	Ark
64187	Hvid	25 mm	500 mm	50	Ark





X-LITE® termoplastisk velcro

X-LITE velcro har en bagside af X-LITE, der ved opvarming hæfter på X-LITE, 3D-LITE og vores øvrige lavtemperaturplaster. Varmes i vandbad eller med varmluftpistol. Blød velcro hæfter efterfølgende.

Øvrigt: Ark à 5 stk. leveres i plastpose.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke	Ark/Dispenser
64195	Hvid	50 mm	50 cm	5	Ark
64196	Hvid	50 mm	5 m	1	Dispenser
64197	Sort	50 mm	50 cm	5	Ark
64198	Sort	50 mm	5 m	1	Dispenser



X-LITE® Stockinette

Rundstrikket stockinette i 100% polypropylen. Blød og behagelig kvalitet med en uovertruffen evne til at transportere fugt væk fra huden. Stockinetten er ribstrikket, hvilket giver en god pasform og ingen folder mod huden.

Art. nr.	Farve	Materiale	Bredde	Længde	Pakke
64400	Beige	Bomuld	21 mm	23 m	1 rulle
64401	Hvid	polypropylen	30 mm	10 m	1 rulle
64411	Hvid	polypropylen	50 mm	10 m	1 rulle
64421	Hvid	polypropylen	70 mm	10 m	1 rulle
64431	Hvid	polypropylen	100 mm	10 m	1 rulle
64441	Hvid	polypropylen	150 mm	10 m	1 rulle
64442	Hvid	Polypropen	200 mm	10 m	1 rulle



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser er en rundstrikket polyester stockinette i en blød og holdbar kvalitet. Stockinetten er ribstrikket, hvilket giver en god pasform og ingen rynker mod huden. Rullerne kommer i en praktisk dispenser box.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64394	Hvid	30 mm	25 m	1 dispenser
64395	Hvid	50 mm	25 m	1 dispenser
64396	Hvid	70 mm	25 m	1 dispenser
64397	Hvid	100 mm	25 m	1 dispenser
64398	Hvid	150 mm	25 m	1 dispenser

Foam-bind

Foam-bind er en skumgummipolstring, der er åndbar og ikke trækker meget vand til sig. Polstringen giver god støddæmping og folder ikke så let som traditionel gipspolstring.

Anvendelsesområde: Som polstring under gipsning med X-LITE.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64480	Hvid	75 mm	2,75 m	20 ruller
64485	Hvid	100 mm	2,75 m	16 ruller
64490	Hvid	125 mm	2,75 m	10 ruller



Color elastisk linda

Som en perfekt afslutning på din X-LITE® bandage tilbyder vi et blødt elastikbind i høj kvalitet og sjove farver. Elastikbindet er særlig velegnet til patienter, som skal anvende bandagen over en længere periode på grund af komforten, kvaliteten og farverne. Det er åndbart og sammen med X-LITE gipsens luftige struktur, giver det en meget åndbar bandage. Color elastisk linda har en blød overflade samt vævede kanter, som føles behagelig mod huden. Den tilpassede elasticitet gør at den former sig fint og derfor kan anvendes til både store og små appliceringer. Den har anti-slip effekt, hvilket betyder, at lagene ikke deler sig så let fra hinanden og man får et holdbart resultat. Elastikbindet kan vaskes ved 60°C og steriliseres.

Art. nr.	Model	Farve	Bredde	Længde	Pakke
64106	Color elastisk linda	Sort	6 cm	5 m	10
64107	Color elastisk linda	Rød	6 cm	5 m	10
64108	Color elastisk linda	Sort	6 cm	5 m	10
64109	Color elastisk linda	Grøn	6 cm	5 m	10
64110	Color elastisk linda	Gul	6 cm	5 m	10
64112	Color elastisk linda	Sort	10 cm	5 m	10
64113	Color elastisk linda	Royal Blue	10 cm	5 m	10





Strava Skinnekar

Strava Skinnekar er det første på markedet, som introducerer UV sterilisering og sanitetsfunktion med høj vandtemperatur. Dette dobbelte rengøringsystem garanterer, at vandet er 99,99% fri for skadelige bakterier og virus. Strava er fremstillet af et Termoset Kompositmateriale, som er kendt for holdbarhed, isolerende- og beskyttede egenskaber, samt et æstetisk udseende. Tømning af vand udføres enkelt og hurtigt grundet et pumpesystem, som tømmer karret på få minutter. Cirkulering af vandet sikrer en ensartet temperatur i hele karret, samtidig med at vandet hurtigt varmes op til den ønskede temperatur for at spare personalet tid.

Touch Screen i farver tillader personalet at vælge imellem forprogrammerede indstillinger til forskellige typer af termoplastiske materialer eller at skabe sine egne favorit programmer, for hurtig og præcis opvarmning. Mulighed for automatisk tænd/sluk samt mange andre nye funktioner.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Højde
64507	Skinnekar 20L	Ydermål: 51,6 cm Kar: 31,6 cm	Ydermål: 59 cm Kar: 48,6 cm	Ydermål: 22,6 cm Kar: 14,7 cm
64508	Afløbsslange			
64509	Varmekar			
64510	EU kabel			
64511	DK adapter			
64512	UV pære			



X-LITE® plade med silikonebelægning

Anvendes som arbejdsbord ved gipsning med X- LITE. Silikonebelægningen forhindrer, at X-LITE hæfter mod underlaget. Den perforerede overflade på pladen bevirker, at overflødigt vand fra X- LITE rullerne kan løbe ned under pladen og opsuges af et underliggende håndklæde.

Art. nr.	Bredde	Længde
64811	325 mm	530 mm

Postoperativ sko

Behandlingssko fremstillet af slidstærk lamineret nylon. Overdelen er formsyet med kraftig overlappning for at kunne passe til såvel mindre fødder som gips. Polstringen i hælparket giver god bekvemmelighed og beskytter mod gnavsår. Bagkappen er forstærket for at holde foden på plads. Sålen er fast og lige uden rulning. Ved enkle mellemfodsoperationer kan gips udelades og skoen kan anvendes direkte.

Anvendelsesområde: Behandlingssko ved mellemfodsoperationer, tåfrakturer, hallux valgus-operationer eller som gipssko.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
43205	Herre	Small	26 cm
43205	Herre	Medium	27,5 cm
43205	Herre	Large	30 cm
43205	Herre	X-Large	31 cm
43206	Dame	Small	23,5 cm
43206	Dame	Medium	24,5 cm
43206	Dame	Large	26 cm



3D-LITE™

3D-LITE er en lavtemperaturplast, der er fremstillet af et tredimensionelt polyestervævder, imprægneres med termoplast. Materialet er stabilt, let og luftigt. Materialet har en smidig overflade og fingertryk efterlades ikke i materialet ved bearbejdning. Materialet har stretch i én retning. Opvarmes i vandbad ved 70°C eller ovn ved 80°C.

Anvendelsesområde: Ortoseproduktion. 3 mm anbefales til små ortoser og mindre kropsdele. 5 mm anbefales til halvstore ortoser som for eksempel frakturortoser. 7 mm anbefales til større ortoser som for eksempel korsetter.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
64896	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 ark
64897	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 ark
64898	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 ark
64899	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 ark
64900	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 ark
64901	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 ark
64905	3D-LITE Beige	650 mm	1200 mm	5 mm	1 ark





3D-Safe

3D-Safe er et kantbånd af polyeteneskumplast. Båndet er selvklæbende og lidt elastisk. Enkelt og hurtigt at applicere. For øget stretch og klæbeevne bør man varme kantbåndet med varmluftpistol inden applicering.

Anvendelsesområde: Som kantbånd eller polstring på ortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
64200	Hvid	40 mm	10 m	3 mm	1 rulle

Lavtemperaturplast

Forskellige anvendelser, der fremstilles i lavtemperaturplast, stiller forskellige krav. Camp tilbyder derfor et bredt udvalg af lavtemperaturplaster, der gør det muligt at finde den rette egenskab i forhold til patientens behov.

De fleste af vores lavtemperaturplaster kommer fra Rolyan, der har mere end 30 års erfaring indenfor området. Rolyan arbejder hele tiden på at bevare og forbedre sin høje kvalitet og samtidig prioriteres forskning og udvikling af nye produkter. Samtlige plasttyper er ufarlige at bearbejde og ingen skadelige stoffer afgives ved bearbejdning.

Plasterne og de færdige ortosers egenskaber afhænger af en række forskellige faktorer.

- Hukommelse - Evne til at genvinde sin oprindelige form.
- Smidighed - Evne til at tilpasse sig til underlaget i opvarmet tilstand.
- Stretchmodstand - Evne til at give efter for stræk og tryk i opvarmet tilstand.
- Hæfteevne - Evne til at hæfte til sig selv i opvarmet tilstand.
- Opvarmnings- og bearbejdningstid.




Forskellige perforeringer for lavere vægt og større ventilation.

- Perforeret 1% - Meget spredt siddende, store huller (2,5 cm mellem hullerne).
- Perforeret 2,5% - Spredt siddende, store huller (1 cm mellem hullerne).
- Optiperforeret 19% - Tætsiddende, små huller.
- Ultraperforeret 13% - Tætsiddende, meget små huller.
- Superperforeret 42% - Meget tætsiddende, små huller.

Procentdelen angiver hvor meget af materialet, der er fjernet. Ex. "Superperforeret 42%" angiver at 42% af materialet er fjernet ved perforeringen.

VI ANBEFALER MØRK OG TØR OPBEVARING.

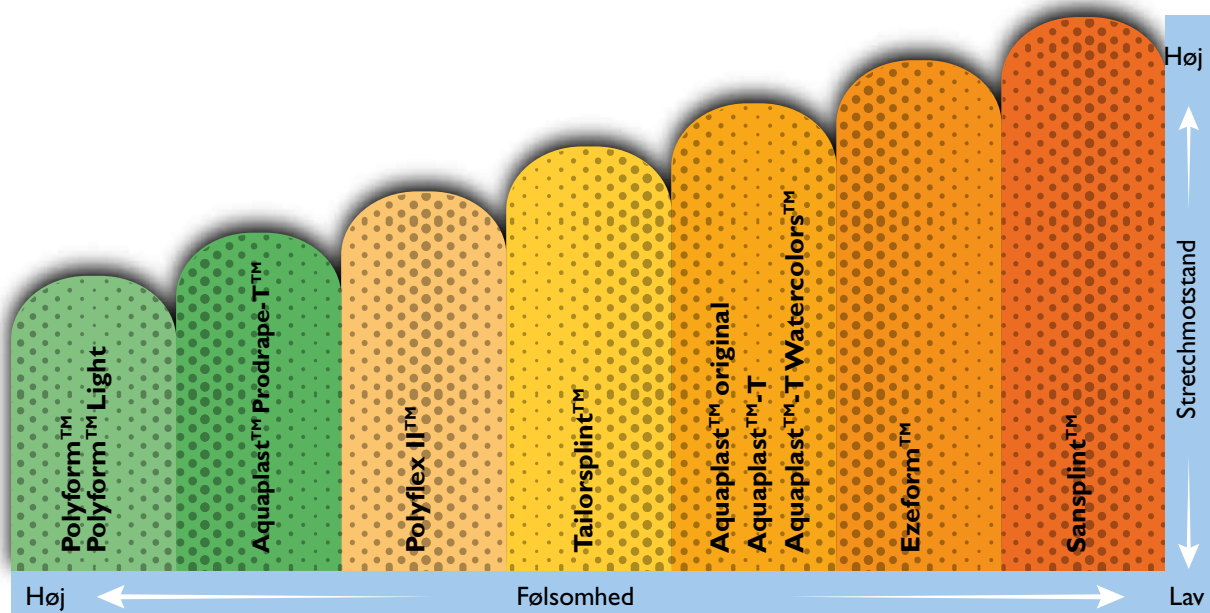

Minimalt modstand til strech


- God følsomhed
- Meget formbar
- Let at håndtere

Moderat modstand til strech

- Former sig let
- Højere kontrol

Maksimal modstand til strech

- Stabilt materiale
- Høj holdbarhed
- Rigiditet ved slutprodukt

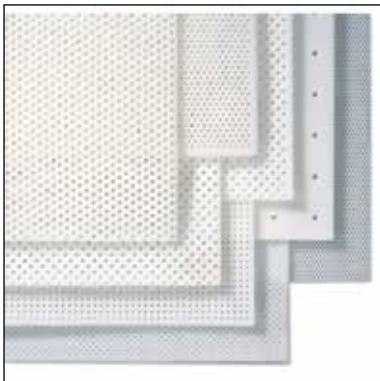

Aquaplast™

Aquaplast™ sortimentet består af et bredt udvalg af materialer med flere fælles, men også unikke egenskaber, for at tilgodese forskellige behov. Aquaplast er en plast, der er let at bearbejde. Sortimentet består af plasttyper med følgende egenskaber:

Aquaplast™ Original - Hæfter til sig selv

Aquaplast-T™ - har Non-sticky overflade.

Aquaplast Prodrap-T™ - har Non-sticky overflade og meget høj formbarhedsgrad.

Aquaplast-T Antimicrobial™ - har Non-sticky overflade og mindsker risikoen for dårlig lugt.

Aquatube™ - hæfter permanent mod andre Rolyanplaster.

Aquaplast Watercolors™ - har Non-sticky overflade og findes i mange farver.



Aquaplast™ Original

Aquaplast™ Original findes i mange tykkelser og perforeringer. Passer til et stort udvalg af ortoser. Materialet er ikke overfladebehandlet og hæfter umiddelbart og permanent til sig selv. Materialet former sig let og har selvslående kanter.

Har 100% hukommelse og bliver transparent ved opvarmning. Ved kontakt med materialoverfladen efterlades ingen fingeraftryk. Kan også varmes i ovn. Bemærk: Brug bundbeskytter i varmekarret. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en støttende ortose med en jævn og blød overflade.

Anvendelsesområde: Base til dynamiske og statiske ortoser; tommel-, finger-, håndledsortoser; 3,2 mm også til arm- og benortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50121	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50122	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50123	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50124	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50125	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ findes i mange tykkelser og perforeringer. Passer til et stort udvalg af ortoser. Former sig godt og har selvslående kanter. Har 100% hukommelse og bliver transparent ved opvarmning. Overfladebehandlet for at give en "Non-stick" overflade. Ved kontakt med overfladen efterlades ingen fingeraftryk. Kan også opvarmes i ovn. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en støttende ortose med en jævn og blød overflade. Egner sig til gentagne omformninger. Den hvide Aquaplast bliver transparent ved opvarmning hvilket gør at man lettere kan se prominenser og eventuelle områder, der kræver ekstra aflastning. Velcrobånd hæfter lettere, hvis man først skraber i overfladen på plasten.

Anvendelsesområde: Base til dynamiske og statiske ortoser for tommel-, finger-, håndledsortoser, 3,2 mm også til arm- og benortoser

Art. nr.	Farve	Type	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
50126	Hvid	Massiv	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50127	Hvid	Massiv	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50128	Hvid	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50129	Hvid	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
50133	Hvid	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50134	Hvid	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50135	Hvid	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50136	Hvid	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50137	Hvid	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50138	Hvid	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50331	Hvid	Ultraperf. 13%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark



Aquaplast™ Prodrapet™-T

Aquaplast™ Prodrapet™-T er den Aquaplast, der har bedst formbarhed og smidighed. Tilpasser sig vældig godt til konturer. Kanterne er selvslående. Har 100% hukommelse og bliver transparent ved opvarmning. Overfladebehandlet for at give en "Non-stick" overflade. Ved kontakt med overfladen efterlades ingen fingeraftryk. Kan også opvarmes i ovn. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en støttende ortose, der følger alle konturer nært. Ideel til patienter med ømme led. Egner sig til gentagne omformninger. Den hvide Aquaplast bliver transparent ved opvarmning, hvilket gør at man lettere kan se prominenser og eventuelle områder der kræver ekstra aflastning. Velcrobånd hæfter lettere, hvis man først skraber i overfladen på plasten.

Anvendelsesområde: Akut traume, smerte og ledirritationer; tommel-, finger-, håndledsortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50165	Hvid	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50166	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv





Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samme egenskaper som Aquaplast-T™. Den findes i mange tykkelser og perforeringer, der passer til et stort udvalg af ortoser. Dette giver patient og terapeut stor valgfrihed. Den former sig godt og har selvslående kanter. Har 100% hukommelse. De lyse farver bliver næsten helt transparente ved opvarming. Overfladebehandlet for at give en "Non-stick" overflade. Ved kontakt med materialoverfladen efterlades ingen fingeraftryk. Kan også opvarmes i ovn. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en støttende ortose med en jævn og smidig overflade. Egner sig til gentagne omformninger.

Anvendelsesområde: Børneortoser, base til dynamiske og statiske ortoser til tommel-, finger-, håndled, 3,2 mm også til arm- og benortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50144	Sort	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50145	Sort	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50146	Sort	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50147	Sort	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Perf. 19%
50334	Sort	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50140	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50143	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Perf. 19 %
50141	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50142	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50321	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Perf. 19%
50333	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50308	Marineblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50309	Lavendel	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50322	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Perf. 19%
50343	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50154	Lilla	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50155	Lilla	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Perf. 19%
50313	Lilla	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50336	Lilla	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50152	Lilla	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50153	Lilla	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50164	Limegrøn	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50307	Limegrøn	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50317	Limegrøn	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50340	Limegrøn	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50304	Lys rosa	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50300	Hot Pink	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50314	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50337	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50149	Rød	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%
50150	Rød	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50151	Rød	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Perf. 19%
50139	Rød	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50335	Rød	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50156	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50157	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 19%

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50158	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50159	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Perf. 19%
50160	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50161	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Perf. 19%
50341	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50323	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50344	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiparf. 19%
50359	Blå Metallic	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50348	Blå Metallic	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50325	Sølv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50346	Sølv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiparf. 19%
50349	Sølv	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50312	Sølv	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50329	Klarblå	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiparf. 19%



Polyform™ og Polyform™ light

Polyform™ har gode stretchegenskaber der bevirker at materialet passer til komplekse ortoser. Er let overfladebehandlet og har selvslående kanter. Har ikke hukommelse. Vær forsigtig ved bearbejdning da kontakt med materialeoverfladen let kan give varige fingeraftryk og mærker. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en rigid og støttende ortose.

Anvendelsesområde: Akut traume, smerte og ledirritationer, tommel-, finger-, håndledsortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50100	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50101	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50102	Hvid	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50103	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50107	Light, Hvid	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv



Polyflex II™

Polyflex II™ har gode stretchegenskaber, men ikke mere end at kontrollen opretholdes under ortoseproduktionen. Materialet har en vis hukommelse, hvilket letter mindre justeringer. Let overfladebehandlet. Kanterne bør trimmes. Vær forsigtig ved bearbejdning da kontakt med materialoverfladen let kan give varige fingeraftryk og mærker. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en rigid og støttende ortose der er fleksibel, hvilket forenkler på- og aftagning. Fleksibiliteten i den færdige ortose kan udnyttes ved anvendelse til f. eks. patienter med svag håndfunktion eller lettere forhøjet tonus.

Anvendelsesområde: Akut traume, smerte og ledirritationer, tommel-, finger-, hånd- og håndledsortoser, som base til dynamiske ortoser samt ortoser til patienter med neurologiske sygdomme.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50109	Hvid	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50113	Hvid	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50114	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Perf. 1%

Tailorsplint™

Tailorsplint™ er en alsidig plast der dækker et bredt behov og kan anvendes til mange forskellige ortoser. Medium stretchmodstand tillader, at platen kan bearbejdes lidt hårdere samtidigt med at god kontrol opretholdes. Overfladebehandlet. Kanterne rulles enkelt og er selvslående. Ved kontakt med materialoverfladen efterlades ikke fingeraftryk. Egenskaber for den færdige ortose: Overfladen er pudderagtig, hvilket giver en fin finish.

Anvendelsesområde: Tommel-, finger- og håndledsortoser; 3,2 mm også til arm- og benortoser; som base til dynamiske ortoser og ortoser til patienter med neurologiske sygdomme.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50116	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm	4 ark	Massiv
50117	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	4 ark	Massiv
50118	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv



Ezeform™ og Ezeform™ light

Ezeform™ er specielt udviklet for at give maksimal modstand mod stræk, samtidig med at platen former sig godt efter underlaget. Den tillader også en mere aggressiv håndtering. Holder formen og passer til større ortoser. En let klæbrig overflade virker som en ekstra hånd under produktionen. Selvslående kanter. Hæfter permanent til sig selv. Ved kontakt med materialeoverfladen efterlades ikke fingeraftryk. Egenskaber for den færdige ortose: Giver en meget rigid ortose med fin finish.

Anvendelsesområde: Ortoser til patienter med neurologiske sygdomme, hvile- og funktionelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter og som base til større dynamiske ortoser. Ezeform light til børneortoser.



Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50170	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50171	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50173	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50174	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50175	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50176	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50178	Hvid	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50179	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50180	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50181	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50182	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50183	Hvid	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv
50184	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv



Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobial har en antimikrobial behandling, der hæmmer bakterietilvækst og en dårlig lugt. Overfladebehandlingen kan ikke vaskes/slides af. Når en skinne eller ortose skal anvendes i længere tid eller i udsatte miljøer, er dette materiale velegnet. Øvrige egenskaber er som Ezeform™.

Anvendelsesområde: Ortoser til patienter med neurologiske sygdomme, hvile- og funktionelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter; base til større dynamiske ortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50187	Hvid	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv



San-Splint™ og San-Splint™ light

San-Splint™ giver maksimal modstand mod stræk. Dette bevirker, at det passer godt til større ortoser, når der kræves kontrol under produktionen. San-Splint er en Isoprene-gummibaseret plast, der tillader aggressiv håndtering og holder formen. Materialet hæfter permanent til sig selv, hvis kanterne trykkes sammen. Ved kontakt med materialoverfladen efterlades ikke fingeraftryk. Kan opvarmes i ovn. Egenskaber for den færdige ortose: Høj grad af rigiditet uden forstærkninger.

Anvendelsesområde: Frakturortoser, body jackets eller korsetter.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50200	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 ark	Massiv
50204	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 ark	Perf. 2,5%
50205	Beige	460 mm	610 mm	3 mm	4 ark	Perf. 2,5%



Plastazote™

Polyeteneskum til produktion af større og mindre ortoser. Passer til ortoser, hvor der stilles høje krav til komfort. Krymper ikke. Varmes i ovn 140°C. Mindre ændringer kan gøres ved hjælp af varmepistol.

Anvendelsesområde: Indlæg, halskraver, ortoser til reumatologiske - og diabetespatienter; produktion af specialgreb og polstring af ortoser.


Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke	Massiv/Perf.
50521	Beige	760 mm	1000 mm	12 mm	1 ark	Perf.

Aliplast

En copolymerfoam der hæfter til sig selv. Materialet har en "skin-like" overflade, der er let at holde ren. Egnede til applikationer der skal ligge direkte mod huden. Vakuumbarmbar. Temperatur: 70-120°C, opvarmes i ovn. Bliver klæbrig, hvis det ønskes ved høj temperatur og ved for lang tid i ovn. Fås i tre hårdhedsgrader.

Anvendelsesområde: Polstringsmateriale til ortoser og til produktion af f.eks. pelletter.


Art. nr.	Farve	Hårdhed	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
30400	Hvid	Blød 4E	750 mm	900 mm	3 mm	1 ark
30401	Hvid	Blød 4E	750 mm	900 mm	6 mm	1 ark
30405	Hvid	Blød 4E	750 mm	35 m	3 mm	1 rulle
30406	Hvid	Blød 4E	750 mm	24 m	6 mm	1 rulle
30410	Hvid	Medium 6A	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30411	Hvid	Medium 6A	750 mm	600 mm	6 mm	1 ark
30415	Hvid	Hård 10	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30416	Hvid	Hård 10	750 mm	12 m	3 mm	1 rulle

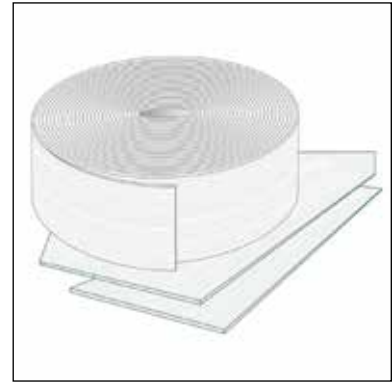

Thermofoam LD

Polstringsmateriale i Polyetene med medium densitet. Har lukkede celler. Kan udmærket skæres og klippes, men kan også stanses. Varmes i ovn 155°C. Let at efterjustere.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
30451	Hvid	750 mm	900 mm	12,5 mm	1 ark

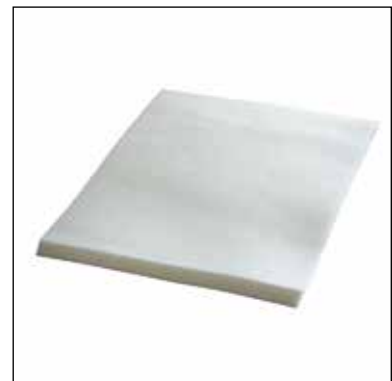

Durofoam HD

Polstringsmateriale i Polyetene med høj densitet der opretholder sin tykkelse i en lang periode. Har åbne celler. Kan udmærket, skæres og klippes, men kan også stanses. Varmes i ovn i 150-170°C. Let at efterjustere med varmluftpistol.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
30450	Hvid	610 mm	610 mm	12,5 mm	1 ark





Polypropene

Copolymerplast med god stabilitet der er rigid. Varmes i ovn ved 200-210°C eller vakuumformes. Materialet hæfter til sig selv. Lad plasten afkøle noget tid på gipsen. Mindre ændringer kan foretages ved hjælp af varmepistol.

Anvendelsesområde: Ortoseproduktion.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
38039	Hvid	600 mm	1200 mm	2 mm	1 ark
38040	Hvid	675 mm	1050 mm	3 mm	1 ark
38041	Hvid	675 mm	1050 mm	4 mm	1 ark
38042	Hvid	675 mm	1050 mm	5 mm	1 ark



Non Slip materiale

Et skridsikkert materiale, der ved friktion er perfekt til overflader hvor man ønsker at undgå skrid. Materialet er specielt udviklet til anvendelse på KiddieGAITs fodplade, for at forhindre at f.eks. en SureStep ortose glider mod den blanke fodplade. OBS! Dette materiale skal ikke anvendes direkte mod huden.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
28411	Sort	14 cm	1 m



Ortosestrømpe Komfort

Færdigsyet ortosestrømpe i ekstra tykt og blødt materiale. Alle kanter er dobbelte eller syet med overlocksøm for øget holdbarhed. Kan anvendes istedet for polstring.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Pakke
51107	Håndled	Natur	One Size	10 stk.
51108	Håndled/tommel lang	Natur	One Size	10 stk.



ComfortKIT™ materiale

ComfortKIT er et materiale med en indre kerne af et såkaldt "memory foam", der bevirker, at det naturligt tilpasser sig til kroppens kontur. Når materialet hviler, vender det tilbage til sin oprindelige form.


Anvendelsesområde: Materialet anvendes i polstringen comfortKIT™, der er beregnet til ToeOFF® og BlueROCKER®. Materialet kan med fordel anvendes som polstring til forskellige ortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
30422	Sort	300 mm	400 mm	10 mm	1 ark

T-Stick

Trykaflastende åndbart materiale i polyuretan. Materialet former sig efter kroppen og har hukommelse, der bevirker, at det går tilbage til sin oprindelige form. Anvendes til aflastning af trykpunkter og som polstring i ortoser og proteser. Arken 51100 og 51102 har selvklæbende bagside. Findes i to hårdhedsgrader.

Art. nr.	Farve	Hårdhedsgrad	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51100	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102	Rosa	Blød	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark

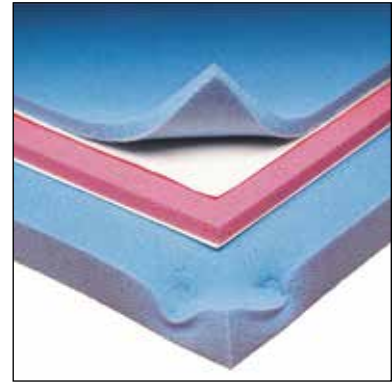

Polycushion polstring

Skumpolstring med let trykaflastende effekt. Anvendes som polstring til ortoser. Polstringen har lukkede celler, er let at rengøre og kan fæstnes på ortosen inden opvarmning i vandbad. Materialet er selvklæbende. Den lavere klæbeevne forenkler udskiftning af polstring. Let at klippe til ønsket form.

Art. nr.	Model	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51120	Vedhæftning = Høj	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51115	Vedhæftning = Lav	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark



Fleecy Web

Meget blødt og selvklæbende materiale i 100% bomuld, der også kendes som mollskin. Anvendes som polstring til ortoser. Meget føjelig og derfor let at applicere i en færdig ortose.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51110	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
51104	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulle





Fleecy Foam

Blødt selvklæbende materiale lamineret med en skumkerne. Giver let trykaflastende effekt. Anvendes som aflastning af trykpunkter eller som polstring i hele ortosen.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51105	Beige	230 mm	460 mm	4,8 mm	4 ark




Mollskin rulle

Blødt materiale med selvklæbende bagside. Anvendes til polstring af ortoser og som kantpolstring.

Øvrigt: Indeholder latex.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51125	Beige	300 mm	4,6 m	0,8 mm	1 rulle

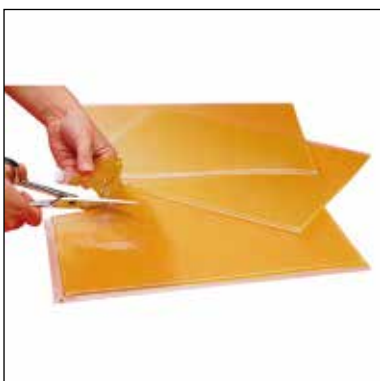

Gel-polstring

Aflastende gel, der ikke kan trykkes helt flad. Til ortoser, handsker og sko. Fordeler trykket og mindsker friktionen mod huden. Kan klippes til ønsket størrelse. Det anbefales, at kanterne låses med for eksempel kirurgisk tape efter tilklipning. Mindre variation i farven kan forekomme.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51140	Gul	250 mm	340 mm	3,2 mm	1 ark
51141	Gul	250 mm	340 mm	4,8 mm	1 ark
51142	Gul	250 mm	340 mm	6,4 mm	1 ark

Neoprene™

Latexfri neopren med en nylonside og en side med blød velour. Hård velcro hæfter let mod den bløde velour. Anvendes til produktion af bløde ortoser eller som ortosebånd. Er let elastisk, hvilket giver god pasform. Materialet bevarer varmen og bidrager til øget blodcirkulation. Velegnet til patienter med reumatologiske sygdomme.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
51179	Sort	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51180	Beige	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51181	Beige	150 mm	970 mm	3,2 mm	1 ark
51183	Beige	25 mm	3,2 m	3,2 mm	1 rulle
51184	Blå	460 mm	610 mm	3,0 mm	1 ark
51189	Grøn	460 mm	610 mm	1,0 mm	1 ark



Velcro blød standard

Den bløde del af standard velcro fremstillet af vævet bånd med syede kanter. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan anvendes ved temperaturer mellem -30° til +140°C.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Pakke
25020	Astrakan = Loop, Hvid	25 mm	25 m	1 rulle
25020	Astrakan = Loop, Hvid	50 mm	25 m	1 rulle
25021	Astrakan = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25021	Astrakan = Loop, Beige	50 mm	25 m	1 rulle
25027	Astrakan = Loop, Sort	25 mm	25 m	1 rulle
25027	Astrakan = Loop, Sort	50 mm	25 m	1 rulle



Velcro hård, standard

Hård velcro med hæfteoverflade på en side mod blød velcro. Fremstillet af vævet bånd med syede kanter. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan anvendes i temperaturer mellem -30° til +140°C.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Pakke
25020	Velcro = Hook, Hvid	25 mm	25 m	1 rulle
25020	Velcro = Hook, Hvid	50 mm	25 m	1 rulle
25021	Velcro = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25021	Velcro = Hook, Beige	50 mm	25 m	1 rulle
25027	Velcro = Hook, Sort	25 mm	25 m	1 rulle
25027	Velcro = Hook, Sort	50 mm	25 m	1 rulle





Velcro blød, elastisk

Elastisk velcro. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan anvendes ved temperaturer mellem -30° til +140°C.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Pakke
25022	Astrakan = Loop, Hvid	30 mm	10 m	1 rulle
25022	Astrakan = Loop, Hvid	50 mm	10 m	1 rulle
25023	Astrakan = Loop, Beige	30 mm	10 m	1 rulle
25023	Astrakan = Loop, Beige	50 mm	10 m	1 rulle



Velcro blød, selvklæbende

Blød, selvklæbende velcro der hæfter mod hård velcro. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan bearbejdes i temperaturer mellem -10° til +80°C. Klæbeevne ved højere og lavere temperaturer er afhængig af fugtighed og overflade.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Pakke
25024	Astrakan = Loop, Hvid	20 mm	25 m	1 rulle
25024	Astrakan = Loop, Hvid	25 mm	25 m	1 rulle
25024	Astrakan = Loop, Hvid	50 mm	25 m	1 rulle
25025	Astrakan = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Astrakan = Loop, Sort	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Astrakan = Loop, Sort	50 mm	25 m	1 rulle



Velcro hård, selvklæbende

Hård selvklæbende velcro der hæfter mod blød velcro. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan bearbejdes i temperaturer mellem -10° til +80°C. Klæbeevne ved højere og lavere temperaturer er afhængig af fugtighed og overflade.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Pakke
25024	Velcro = Hook, Hvid	20 mm	25 m	1 rulle
25024	Velcro = Hook, Hvid	25 mm	25 m	1 rulle
25024	Velcro = Hook, Hvid	50 mm	25 m	1 rulle
25025	Velcro = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Velcro = Hook, Sort	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Velcro = Hook, Sort	50 mm	25 m	1 rulle

Velcro komfort blød, elastisk

Den bløde del af elastisk velcro. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan anvendes ved temperaturer mellem -30° til +140°C.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25030	Hvid	19 mm	4,5 m	1 rulle
25030	Hvid	25 mm	4,5 m	1 rulle
25030	Hvid	50 mm	4,5 m	1 rulle



Mikrofix hård, selvklæbende

Selvklæbende hård velcro. Den hårde velcro er ekstra tynd på grund af korte hæfteskroge, der sidder meget tæt. Den selvklæbende bagside hæfter mod de fleste materialer.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25040	Transperant	50 mm	25 m	1 rulle
25041	Sort	50 mm	25 m	1 rulle



Mikrofix blød

Blød selvklæbende velcro der hæfter mod Mikrofix og andre typer hård velcro. Ekstra tyndt.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25042	Hvid	50 mm	25 m	1 rulle
25043	Sort	50 mm	25 m	1 rulle



Blød AFO bånd

Et dobbeltvævet blødt bånd med let elasticitet for øget smidighed. Velegnet til forskellige ortoseapplikationer. Hæfter mod hård velcro.

Kan klippes i ønsket bredde uden at det trævler.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25060	Sort	40 mm	10 m	1 rulle
25061	Sort	50 mm	10 m	1 rulle





D-ring plast

D-ringe i plast. Findes med eller uden fæste.

Art. nr.	Model	Farve	Bredde	Pakke
25070	Uden fæste	Hvid	25 mm	25 stk.
25070	Uden fæste	Hvid	50 mm	25 stk.
25071	Med fæste	Hvid	25 mm	25 stk.
25071	Med fæste	Hvid	50 mm	25 stk.



Ortosebånd

Blødt bånd med skumkerne i midten. Kan klippes til ønsket bredde og har selvklæbende kant. Hård velcro hæfter på begge sider af båndet. Pakket i dispenser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51160	Beige	25 mm	9 m	1 dispenser
51161	Beige	50 mm	9 m	1 dispenser



Ekstra tyndt bånd

Ekstra tyndt og blødt bånd til mindre ortoser. Hård velcro hæfter til en side af båndet. Pakket i dispenser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51155	Hvid	13 mm	9 m	1 dispenser

Ortosebånd robust

Ekstra slidstærkt og blødt bånd med en tynd skumkerne i midten. Kan lukkes og åbnes mere end 1000 gange. Uelastisk. Velcro hæfter på begge sider af båndet.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51165	Blå/hvid	25 mm	9 m	1 rulle
51165	Blå/hvid	38 mm	9 m	1 rulle
51166	Blå/hvid	50 mm	9 m	1 rulle
51167	Hvid	25 mm	9 m	1 rulle
51168	Hvid	50 mm	9 m	1 rulle
51169	Beige	25 mm	9 m	1 rulle
51170	Beige	50 mm	9 m	1 rulle



Foam-bånd

Ekstra blødt bånd med skumkerne i midten. Kan klippes til ønsket bredde og har selvklæbende kant. Hård velcro hæfter på begge sider af båndet.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51176	Blå	50 mm	4,6 m	1 rulle
51177	Hvid	50 mm	4,6 m	1 rulle



Velcrobånd med D-ring

Selvklæbende blød velcro med D-ring af nylon. Hård velcro er monteret som lukning på båndet.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51185	Hvid	25 mm	300 mm	10 stk.
51186	Hvid	25 mm	460 mm	10 stk.
51187	Hvid	50 mm	300 mm	10 stk.
51188	Hvid	50 mm	460 mm	10 stk.





NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elasticitet. Elastisk i alle retninger.

Former sig godt efter kroppens konturer. Fabrifoam kan anvendes inden for mange forskellige områder: Til produktion af bløde ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompressionsforbinding. Et alternativ til neopren. Fabrifoam findes i to forskellige grader af stretch. Materialet er hudvenligt, åndbart og transporterer fugtighed bort fra huden. Materialet, der er "low profile", har en non slip side, der ikke glider mod huden og en side, hvor hård velcro let hæfter. Indeholder ikke gummi.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke
50505	Blå	100 mm x 0,91 m	3 ruller
50506	Blå	100 mm x 1,22 m	3 ruller
50508	Blå	150 mm x 1,22 m	3 ruller



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med lav til medium elasticitet. Elastisk primært i én retning.

Fabrifoam kan anvendes inden for mange forskellige områder: Til produktion af bløde ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompressionsforbinding. Et alternativ til neopren. Fabrifoam findes i to forskellige grader af stretch. Materialet er hudvenligt, åndbart og transporterer fugtighed bort fra huden. Materialet, der er "low profile", har en non slip side, der ikke glider mod huden og en side, hvor hård velcro let hæfter. Indeholder ikke gummi.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 ruller
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulle



Fingerlække

Bløde fingerlækker i skind, der enkelt kan trimmes til ønsket bredde og form. Metaløjer gør det let at fæste tråd og elastik.

Anvendelsesområde: Til dynamiske ortoser.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
51232	Brun	22 mm	76 mm	10 stk.
51233	Brun	22 mm	102 mm	10 stk.

[illegible]

Oversigt lavtemperaturplast

	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial
Farveændring	Nej	Nej	Nej	Bliver transparent	Bliver transparent	Bliver transparent
Hæfter mod huden	I mindre grad anvend inderstrømpe	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Hæfter mod sig selv	Til en vis grad under bearbejdning Permanent ved sammentrykning	Til en vis grad ikke permanent *)	Til en vis grad ikke permanent *)	Permanent	Til en vis grad under bearbejdning Ikke permanent *)	Nej
Føjelighed	Modstands-kraftig	Meget føjelig	Noget begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset
Stretch-modstand	Maximum	Minimum	Medium	Medium	Medium	Medium
Smidighed	Mindre god	Særdeles god	Meget god	God	God	God
Hukommelse (Kan omformes)	En del (Til efterjustering)	En del (Til efterjustering)	En del (Til efterjustering)	Ja	Ja	Ja
Fingeraftryk	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Kanter	Fine Kan let trimmes	Fine Kan let trimmes	Fine Kan let trimmes	Fine	Fine	Fine
Perf/Uperf	Massiv Perf 2,5 %	Massiv Perf 1%	Massiv Perf 1%	Massiv Perf 13 % Perf 19 %	Massiv Perf 1 % Perf 13 % Perf 19 % Perf 42 %	Massiv Perf 19 %
Farver	Beige	Hvid Beige	Hvid	Hvid Beige	Hvid	Hvid
Temperatur og tid i vandbad	70-80°C 30 sek – 1 min	65-70°C 30 sek – 1 min	65-70°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min
Bearbejdningstid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm	1-3 min (2 mm) 4-5 min (3 mm)	1 min 3-5 min	2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	2-3 min 4-6 min
	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial

*) Kan hæfte permanent mod sig selv ved at slibe eller skrabe i overfladen med skarpt instrument.

Aquaplast T Prodræpe	Aquaplast Water- colors	Ezeform	Ezeform Antimikro- bial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	
Bliver transperant	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Farveændring
Nej	Nej	I mindre grad Trækker i hårene	Nej	Nej	Nej	Nej	Hæfter mod huden
Til en vis grad under bearbej- dning Permanent ved sammentryk- ning (*)	Ej permanent (*)	Til en vis grad un- der bearbejdning Permanent ved sam- mentrykning	Nej	Kan skilles ved opvarmning	Kan skilles ved opvarmning	Nej	Hæfter mod sig selv
Meget føjelig	Begrænset	Modstandskraftig	Modstandskraftig	Begrænset Kun i én retning	Begrænset Kun i én retning	Begrænset Kun i én retning	Føjelighed
Minimum	Medium	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Stretch- modstand
Særdeles god	God	Mindre god	Mindre god	God	God	Mindre god	Smidighed
Ja	Ja	En del (Til efterjustering)	En del (Til efterjustering)	Ja	Ja	Ja	Hukommelse (Kan om- formes)
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Fingeraftryk
Fine	Fine	Fine	Bør trimmes	Bør trimmes	Bør trimmes	Bør trimmes	Kanter
Massiv	Massiv Perf 13 % Perf 19 %	Massiv	Massiv Perf 1%	Netstruktur	Netstruktur	Tredimensionel netstruktur	Perf/Uperf
Hvid	Mange Se udvalget i kataloget	Hvid Beige Blå	Hvid	Hvid Lyseblå Lys grøn	Dispenser/ark: Beige Rulle:Hvid	Beige	Farver
70-75°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70°C Ark: 1 min Rulle: 2 min	70°C Ark: 1 min Rulle: 2 min	70°C 3 mm: 2 min 5 mm: 2 min 7 mm: 2 min	Temperatur Tid i vandbad
2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 4-6 min	4-6 min	Ark: 45 s - 1 min Rulle: 2 - 3 min	Ark: 30 - 45 s Rulle: 60 - 90 s	2-3 min	Bearsbejdning- stid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm
Aquaplast T Prodræpe	Aquaplast Water- colors	Ezeform	Ezeform Antimikro- bial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	

Mange af vores plasttyper fremstilles desuden i andre farver, tykkelser og perforeringer end de der er angivet i skemaet. Kontakt kundeservice for yderligere information, tel. 43 96 66 99.

Egne notater

[illegible]



Værktøj og tilbehør

www.camp.dk



Bandagesaks med plasthåndtag

Praktisk saks med stort plastgreb, beregnet til forskellige plastmaterialer. Saksen er fremstillet i rustfrit stål AISI 420 og kan autoklaveres. Et prisbevidst alternativ.

Art. nr.	Farve	Materiale	Længde
51211	Sort	AISI 420	18 cm
51212	Grøn	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersaks

En ekstrem skarp saks med stort håndtag. En ekstrem skarp saks med stort håndtag. Klipper godt i plastmaterialer, også når plasten begynder at blive hård. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Længde
51217	AISI 420	20 cm



Buet MAYO Saks

Buet saks med små håndtag. Velegnet til at trimme kanter på ortoser, når plasten er begyndt at blive hård. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres. Kan anvendes med både højre og venstre hånd.

Art. nr.	Materiale	Længde
51214	AISI 420	14 cm



Smith Saks

En meget skarp saks med stort håndtag. Er let at håndtere og klipper i bløde plastmaterialer. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Længde
51216	AISI 420	18 cm

Super Gipsesaks

En saks i høj kvalitet som klipper let i alle materialer. Nedre blad har fine savtakker og et skarpt vinklet øvre blad. Saksen er fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres.

Art. nr.	Model	Længde
51208	Rustfrit stål	14 cm
51207	Rustfrit stål	18cm



Gipsesaks vinklet Nibbler

Lille højkvalitets præcisionssaks, der kan klippe i både koldt og varmt skinnemateriale. Ideel til små justeringer rundt om hjørner og til at trimme kanter på en færdig skinne eller cirkulær gips. Fine savtakker i nederste skær. Saksen er fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres.

Art. nr.	Model	Længde
51209	Gipsesaks vinklet nibbler	12 cm





Strava Skinnekar

Strava Skinnekar er det første på markedet, som introducerer UV sterilisering og sanitetsfunktion med høj vandtemperatur. Dette dobbelte rengøringsystem garanterer, at vandet er 99,99% fri for skadelige bakterier og virus. Strava er fremstillet af et Termoset Kompositmateriale, som er kendt for holdbarhed, isolerende- og beskyttede egenskaber, samt et æstetisk udseende. Tømning af vand udføres enkelt og hurtigt grundet et pumpesystem, som tømmer karret på få minutter. Cirkulering af vandet sikrer en ensartet temperatur i hele karret, samtidig med at vandet hurtigt varmes op til den ønskede temperatur for at spare personalet tid.

Touch Screen i farver tillader personalet at vælge imellem forprogrammerede indstillinger til forskellige typer af termoplastiske materialer eller at skabe sine egne favorit programmer, for hurtig og præcis opvarmning. Mulighed for automatisk tænd/sluk samt mange andre nye funktioner.

Beskyt dit nye skinnekar med et non-stick genanvendeligt ark som forhindrer at materiale klæber til bunden. Kan klippes til ønsket størrelse.

Art. nr.	Model	Bredde	Længde	Højde
64507	Skinnekar 20L	Ydermål: 51,6 cm Kar: 31,6 cm	Ydermål: 59 cm Kar: 48,6 cm	Ydermål: 22,6 cm Kar: 14,7 cm
64508	Afløbsslange			
64509	Varmekar			
64510	EU kabel			
64511	DK adapter			
64512	UV pære			



X-LITE® plade med silikonebelægning

Anvendes som arbejdsbord ved gipsning med X- LITE. Silikonebelægningen forhindrer, at X-LITE hæfter mod underlaget. Den perforerede overflade på pladen bevirker, at overflødigt vand fra X- LITE rullerne kan løbe ned under pladen og opsuges af et underliggende håndklæde.

Art. nr.	Bredde	Længde
64811	325 mm	530 mm



Test, træning og behandling

www.camp.dk



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med lav til medium elasticitet. Elastisk primært i én retning. Fabrifoam kan anvendes inden for mange forskellige områder: Til produktion af bløde ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompressionsforbinding. Et alternativ til neopren. Fabrifoam findes i to forskellige grader af stretch. Materialet er hudvenligt, åndbart og transporterer fugtighed bort fra huden. Materialet, der er "low profile", har en non slip side, der ikke glider mod huden og en side, hvor hård velcro let hæfter. Indeholder ikke gummi.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 ruller
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulle



NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elasticitet. Elastisk i alle retninger. Former sig godt efter kroppens konturer. Fabrifoam kan anvendes inden for mange forskellige områder: Til produktion af bløde ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompressionsforbinding. Et alternativ til neopren. Fabrifoam findes i to forskellige grader af stretch. Materialet er hudvenligt, åndbart og transporterer fugtighed bort fra huden. Materialet, der er "low profile", har en non slip side, der ikke glider mod huden og en side, hvor hård velcro let hæfter. Indeholder ikke gummi.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke
50505	Blå	100 mm x 0,91 m	3 ruller
50506	Blå	100 mm x 1,22 m	3 ruller
50508	Blå	150 mm x 1,22 m	3 ruller



Cica Care siliconegel

Cica Care anvendes til at reducere ardannelse, og kan kun anvendes på helede sår. Øger bevægelighed og funktion i arområdet og mindsker opståen af hypotrofi og keloïder. Den høje klæbeevne bevirker, at tape og bandage ikke er nødvendig. Kan tages af uden smerte og enkelt reappliceres. Man kan anvende Cica Care der, hvor man ikke kan have tryk. Materialet kan vaskes og genbruges.

Art. nr.	Bredde	Længde	Pakke
54600	120 mm	150 mm	1 ark
54601	120 mm	150 mm	10 ark

R-lite foam blok

Træningsblok til håndtræning fremstillet af T-Foam. Materialet går langsomt tilbage til oprindelig form, hvilket hjælper patienten til ikke at overanstrenge sig. Findes i fire forskellige hårdhedsgrader. Vaskes i varmt vand med mild sæbe.

Art. nr.	Farve	Hårdhed	Mål	Pakke
54130	Gul	X-Blød	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Rosa	Blød	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Grøn	Hård	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54131	Sæt m. 3 stk. i hver farve		4,4x4,4x7,6 cm	12 stk.



Jamar® hånddynamometer

Et enkelt og sikkert værktøj til løbende at kontrollere gribestyrke indenfor forskellige vurderinger. Skala mellem 0 - 90 kg. Kalibrering anbefales én gang hvert år for at sikre holdbarhed og pålidelighed. Leveres i praktisk taske der også fungerer som opbevaring.

Øvrigt: 1 års garanti. Garantien dækker ikke kalibrering.

Art. nr.	Model
52100	Jamar Hånddynamometer
52101	Kalibrering



Jamar® Pinch Gauge

Fingermåler med meget høj præcision. Den røde indikationsnål stopper til måleren nulstilles. Fungerer med hydraulik, og det isometriske design sikrer korrekt måling. Skala mellem 0 - 20 kg (0 - 45 lbs). Leveres i praktisk taske, der også fungerer som opbevaring.

Øvrigt: 1 års garanti. Instruktionsmanual findes på engelsk.

Art. nr.	Model
52110	Jamar Pinch Gauge





Mål 1: Længde arm 1

Mål 2: Længde arm 2

Goniometer

Anvend det gennemsigtige plastgoniometer enkelt og effektivt for at kunne måle bevægelsesomfangets vinkler på store led. Mål bevægelsesomfang 180° med 2° interval.

Art. nr.	Model	Farve	Mål 1	Mål 2
52200	Større led	Transperant	15 cm	15 cm



Pegtest 9-huls

En enkel test i lethåndterlig størrelse. Alle dele kan desinficeres. Stopur er inkluderet.

Art. nr.	Model	Pakke
52315	Pegtest	1 komplet sæt
52316	Ekstra pegs til 52315	9 stk.



Purdue Pegboard test

Måler to forskellige aktiviteter: 1) Store bevægelser af fingre, hånd og arm, 2) Følelse i fingerspidserne. Pakken inkluderer instruktionsmanual, normalværdi og 25 protokolarark. OBS: Stopur er ikke inkluderet.

Art. nr.	Model
52320	Komplet testsæt
52321	Ekstra dele til 52320

Grooved Pegboard

En stimulerende test til fingerfærdighed og visuel evne, der kræver en mere komplet motorik og koordination end de fleste Pegboard. Indeholder 25 huller med tilfældigt placerede former; nogen kræver rotation ved isætning.

Art. nr.	Model	Pakke
52325	Grooved Pegboard	Komplet testsæt
52326	Ekstra pegs til 52325	30 stk.



Ødemhandske

Smidig og bekvem handske der giver let kompression for at mindske ødem. Fremstillet i lycra og spandex. Findes i to modeller; hel handske eller handske med åbne fingre, i forhold til at kontrollere funktion og hævelse.

Øvrigt: Kompressionsklasse I.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Pakke	Ve/Hø
53535	Hele fingre	X-Small	17,8 cm	I stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Small	20,3 cm	I stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Medium	22,9 cm	I stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Large	25,4 cm	I stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	X-Small	17,8 cm	I stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Small	20,3 cm	I stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Medium	22,9 cm	I stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Large	25,4 cm	I stk.	Ve/Hø



Mål: Omfangsmål på håndfladen (Palm).



Vakuumpude

Hvid vakuumpude fyldt med små granulatkugler, der former sig, når luften suges ud. Kan omformes ved at åbne ventilen. Puden har god vakuumstabilitet og lav vægt. Separate blå betræk kan bestilles.

Anvendelsesområde: Ved operationer og som støtte ved siddende position. Kan også anvendes af tandlæger.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
22393	Vakuumpude	Hvid	55x30 cm
22394	Vakuumpude	Hvid	55x65 cm
22395	Vakuumpude	Hvid	55x85 cm
22396	Vakuumpude	Hvid	40x50 cm
22275	Enhåndspumpe		
26334	Ventil til vakuumpude		




Urias splint

Urias splints giver et jævnt tryk på arm, ben, hånd og fod. Splintene er fremstillet i dobbelt lag PVC og lukkes med glidelås. Det transperante materiale giver kontrol over splintens position. OBS: Trykket må ikke overstige 40 mmHg.

Anvendelsesområde: Ved ødembehandling og proprioceptiv stimulering ved neurologisk rehabilitering.

Art. nr.	Model	Længde
53510	Lang arm, et kammer	80 cm
53511	Kort arm, et kammer	70 cm
53512	Halv arm, et kammer	53 cm
53513	Albue, et kammer	40 cm
53516	Fod, et kammer	32 cm
53517	Ben stor, to kamre	66 cm
53519	Hånd	20 cm
53518	Ben lille, to kamre	56 cm
53515	Mundstykke	100 stk.
53514	Filter til mundstykke	5 stk.

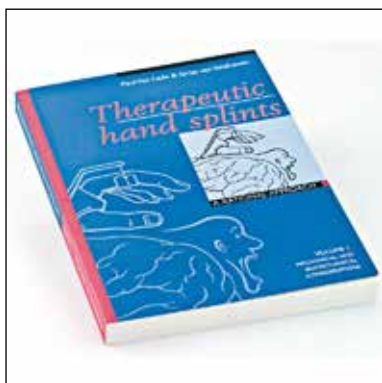

Bog: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes og Griet van Veldhovens to udgaver; Volume I indeholder alt du har behov for at vide om hånden, dens anatomi, biomekanik og patologi, der berører ortoser og skinner. Volume 2 giver gode eksempler på fremstilling af ortoser og deres anvendelse. Bøgerne er på engelsk.

Art. nr.	Beskrivelse	Volume
99200	Mechanical and biomechanical considerations	I
99201	Practical applications	II

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Egne notater

[illegible]

Generelle salgsbetingelser

LEVERING

Det er vores ambition, at vi skal have en god leveringsevne på de produkter, der findes i dette katalog. Visse yderstørrelser og tilbehør kan forekomme som bestillingsvarer med forlænget leveringstid. Det samme gælder målbestilte produkter. Ordre overstigende 1.000 DKK ex moms leveres gratis til modtageren. Ved øvrige ordrer pålægges fragt med DKK 105,- pr. ordre.

RETURER

Ved eventuelle returvarer skal vores samtykke indhentes. Kontakt kundesupport i forhold til returnummer. Ved retur i tilfælde af ombytning eller fejlbestilling skal produktet returneres i komplet original emballage og returneres senest 2 måneder efter modtagelse. Såfremt produktet skal byttes eller fejlbestillingen overstiger 2 måneder og op til 4 måneder, vil der blive trukket 50% på fakturabeløbet. Returvarer og fejlbestillinger som overstiger 4 måneder refunderes ikke. Specialbestilte varer og bestillingsvarer tages ikke retur.

BETALINGSBETINGELSER

30 dage netto. Morarente debiteres iht. diskonto +8%. Priser er gældende t.o.m 31-12-2022. I denne periode forbeholder vi os retten til prisændringer fremtvinget af pris- og/eller valutaforandringer. Priser er altid opgivet eksklusiv moms.

ARTIKELNUMMER

Camps artikelnumre består af ni cifre. De fem første cifre identificerer produktet. Resterende fire cifre angiver om produktet er højre eller venstre, størrelse eller andet.

Eks:ToeOFF 2.0 venstre medium 289201012	28920:ToeOFF 2.0	I0: Venstre	I2: Medium
---	------------------	-------------	------------

I0: Venstre	09: XX-Small
20: Højre	I0: X-Small
	I1: Small
	I2: Medium
	I3: Large
	I4: X-Large
	I5: XX-Large

VIGTIGT ANGÅENDE PRODUKTERNES MATERIALE OG DERES PLEJE

I tilfælde hvor der findes vigtig information, man skal være opmærksom på inden bestilling, angives dette i rubrikken "Øvrigt" i forbindelse med produktteksterne i kataloget. Camps tekstile sortiment skal håndvaskes og tørres liggende medmindre andet er angivet i brugerinstruktionen eller på mærkaten i produktet. Rigide ortoser aftørres med en fugtig klud.

FOR BEDRE MILJØ

Camp undgår produkter, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige materialer. For Camp Scandinavia er det af største betydning, at virksomheden drives på en sådan måde, at miljøet, påvirkes mindst muligt under hensyntagen til sunde erhvervsmæssige principper. Camp tager sit ansvar som producent i henhold til WEEE-direktivet, Batteridirektivet samt Emballagedirektivet og er medlem/rapporterer til de forskellige indsamlingssystemer i de respektive lande, hvor vi driver virksomhed.



Salgsorganisation & kundesupport



Pernille Mikkelsen

Key Account Manager

Tlf: 29 21 08 30

pernille.mikkelsen@camp.dk



Hana Khedher

Produktspecialist /Aut. Ergoterapeut

Tlf: +46 42 25 27 14

hana.khedher@camp.se

Ansvar: Ergoterapi



Peter Odfeldt

Kundesupport

Tlf: 43 96 66 99

peter.odfeldt@camp.dk



Anders Jemth

Salgschef

Tlf: +46 704 50 50 85

anders.jemth@camp.se

Telefonnummer til kundesupport: 43 96 66 99

E-mail: info@camp.dk