

VACO®ped Diabetic

OPED VACO®cast Diabetes imiterer "the Golden Standard" i forhold til aflastning med TCC (Total Contact Cast) til diabetiske fodsår. Det er en ortopædisk fraktursko med fast fleksion, formet og konstrueret til at støtte en hurtig genoptræning samtidig med at den yder optimal komfort. I modsætning til VACOCast Diabetic-støvlen Art nr. 47664 kan denne model justeres til 10° dorsalfleksion, som flytter vægten fremad og væk fra hælen for endnu bedre aflastning – ideel til svære hælssår.

I modsætning til Vacocast Diabetic-støvlen Art nr. 47664 kan denne model justeres til 10° dorsalfleksion, som flytter vægten fremad og væk fra hælen for endnu bedre aflastning – ideel til svære hælssår.

Indersålen er udstyret med OPEDs patenterede vakuumteknologi, som er den moderne erstatning for gips og en integreret del af VACO®-produkter. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler omkranser den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden ved hjælp af en pumpe, bliver den hård (som et gips) på få sekunder. Ved at åbne ventilen og lade luft strømme ind i puden, bliver den blød igen, hvilket muliggør justering til kropsdelen. VACO®cast Diabetes er udstyret med ekstra VACO®-puder for øget støtte og holdbarhed ved vægtbærende aktiviteter. Den har en friktionsfri velourforing, der mindsker friktion og er skånsom mod følsom hud, i en sort farve der skjuler sekreter og fugtpletter. Produktet er klinisk bevist at fremme vellykket sårheling takket være fremragende trykaflastning. Det muliggør nem inspektion af såret og forenkler behandlingen. En låsbar spænde muliggør bedre overholdelseskontrol, og den integrerede rullesål sikrer god trykfordeling samt en sikker og fysiologisk gang. VACO®cast Diabetes leveres med tåbeskytter for både hygiejne og ekstra beskyttelse samt en formbar skumindersål for yderligere aflastning. Fås i 3 størrelser.

Anvendelsesområde

Sår på foden, diabetiske fodsår, postoperativ pleje efter amputation af tæer eller forfod, diabetisk neuro-osteoartropati (DNOAP) eller Charcot-fod. Kan anvendes til patienter med arteriesygdomme, neuropati, inficerede eller stærkt væskende sår.



Art.nr.	Model	Størrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfodsbredde
476680011	VACO®ped Diabetic	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476680012	VACO®ped Diabetic	Medium	35-51 cm	35-51 cm	12 cm
476680013	VACO®ped Diabetic	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476640011	VACOped Diabetes-sæt - for længere brugstid	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476640012	VACOped Diabetes-sæt - for længere brugstid	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476640013	VACOped Diabetes-sæt - for længere brugstid	Large	40-58 cm	30-45 cm	12 cm
476510000	Fodforlængelse – læg	-	-	-	-
476520000	Fodforlængelse – ankel	-	-	-	-
476530011	Ekstra polstring, tådel	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476530012	Ekstra polstring, tådel	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476530013	Ekstra polstring, tådel	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476570011	Ekstra polstring	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476570012	Ekstra polstring	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476570013	Ekstra polstring	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm