

COMBO™

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF/BlueROCKER 2.0 eller 2½ model. Combo skal ikke anvendes sammen med FLOW, Short eller Pædiatriske modeller. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinnen og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde

Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Combo bør ikke bruges sammen med Ypsilon FLOW eller ToeOFF FLOW.

Kontraindikationer

Totalt bortfald af ligament i knæet. Totalt Quadricepsbortfald.Patientlængde over 2 meter. Patientvægt over 150 kg. Kraftigt reduceret kognitive evner.OBS: Når afprøvning er udført må der ikke være mere end 10° hyperekstension tilbage i ortosen.

Mål

- Knæmål 1: Mål M-L midt-patella
- Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella
- Knæmål 3: Mål M-L 20 cm over patella.



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2	Knæmål 3
287800000	Knæled m. skinner	One Size	-	-	-	-
287811011	Lårdel	Small	Venstre	-	30-40 cm	11-15 cm
287811012	Lårdel	Medium	Venstre	-	38-50 cm	13-17 cm
287811013	Lårdel	Large	Venstre	-	48-60 cm	15-19 cm
287811014	Lårdel	X-Large	Venstre	-	58-70 cm	17-21 cm
287812011	Lårdel	Small	Højre	-	30-40 cm	11-15 cm
287812012	Lårdel	Medium	Højre	-	38-50 cm	13-17 cm
287812013	Lårdel	Large	Højre	-	48-60 cm	15-19 cm
287812014	Lårdel	X-Large	Højre	-	58-70 cm	17-21 cm
287820011	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilateral	7-10,5 cm	-	-
287820012	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilateral	9,5-13 cm	-	-
287820013	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilateral	12,5-16 cm	-	-
287960000	Lægbånd	One Size	-	-	-	-
287830011	Softkit, 2 stk	Small	-	-	-	-
287830012	Softkit, 2 stk	Medium	-	-	-	-
287830013	Softkit, 2 stk	Large	-	-	-	-
287830014	Softkit, 2 stk	X-Large	-	-	-	-
287840011	Tibiakobling	Small	-	-	-	-
287840012	Tibiakobling	Medium	-	-	-	-
287840013	Tibiakobling	L-XL	-	-	-	-