

OACTIVE® 2

Unilateral knæ ortose til behandling af slidgigt i knæet. Smidig og enkel konstruktion med lav vægt. Fremstillet i aluminium. Ortosen har smarte innovative spænder for at gøre det lettere at tage ortosen af og på.

Det unikke Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition, med knæet bøjet i 90° , og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. OACTIVE®2 kan også indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop ved fleksion og ekstension. OACTIVE®2 findes i én størrelse, venstre eller højre.

Anvendelsesområde

Let til svær slidgigt i knæet. Medialt eller lateralt.

Kontraindikationer

Se brugerinstruktion.



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
550001000	OACTIVE 2	One Size	Venstre
550002000	OACTIVE 2	One Size	Højre
550122000	Ekstra bånd sæt (uden spænde)	One Size	Højre
550121000	Ekstra bånd sæt (uden spænde)	One Size	Venstre
550131000	Ekstra Polstring	One Size	Venstre
550132000	Ekstra Polstring	One Size	Højre
550140061	Suspension Wrap	61cm	-
550140081	Suspension Wrap	81 cm	-